

本製品を廃棄する前に、充電電池を取り外し、環境保護のため、必ずお住まいの市区町村の定めた方法に従って充電電池と本体を処分してください。

- 分解前には、必ず本体から AC アダプタを外してください。
- 本体の電源をいったん切り、再度電源を入れてディスプレイに何も表示されないことを確認してください。
- 部品にはとがった部分があります。指を切らないようにご注意ください。

以下の手順に従って、本体から充電電池を取り外してください。

1 本体を平らな場所に裏返して置く



2 ⊕ドライバーを使って、バンド付け根部分にあるねじ（下図赤枠内 4 か所）を外す



3 ディスプレイ部をしっかりと押さえ、下図のように筐体部を矢印方向にゆっくりと持ち上げて取り外す

筐体部はディスプレイ部とフレキ基板でつながっていますのでご注意ください。



4 筐体部の基板からフレキ基板のコネクタ（下図赤枠内）を取り外す



5 筐体部から下図のように充電電池を取り外す


充電電池は両面テープで固定されています。
①の部分を押さえ、②の部分を持ち上げます。



6 筐体の基板から充電電池（下図赤枠内）のコネクタを取り外す

ハサミなどで充電電池のリード線を切断しないでください。
ショートして発火する恐れがあります。

取り外した充電電池はコネクタ部をテープで覆い、絶縁処理をしてください。

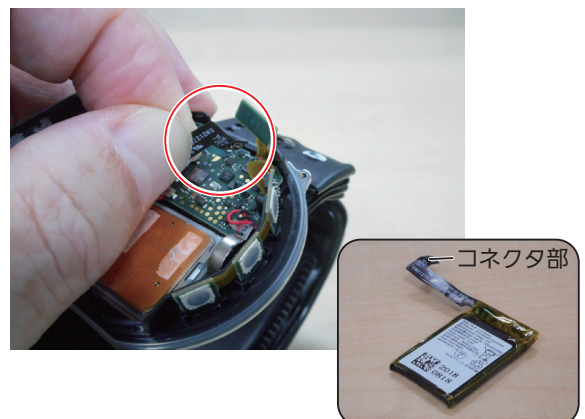

これで充電電池の取り外しは完了です。