



添付文書 取扱説明書

オムロン 低周波治療器

HV-F010 HV-F011 HV-F012

- このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
■本書はいつもお手元においてご使用ください。
■本書は品質保証書を兼ねていますので、紛失しないように保管してください。
■本製品は家庭用です。不特定多数の方々のご利用になる場所ではご使用にならないでください。

品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万が一不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償にて修理。または故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限り有効です。
※以下のいずれかを必ず行ってください。
・販売店で以下に記入し捺印していただく。
・販売店で発行されたお買い上げを証明するもの（レシートやシールでも可）を本品質保証書に貼付または保管いただく。

Form with fields for 販売名, お買い上げ店名, お買い上げ年月日, 製造販売元, オムロンヘルスケア株式会社

第10版 (2019年10月) 1615511-4J

保証規定


- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
(二) 品質保証書の提示がない場合。
(ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、または販売店で発行されたお買い上げを保証するものがない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ) 消耗部品。
(ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
(チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものではありません。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 修理対応期間は製造打ち切り後6年となります。

マッサージのめやす

- 時間：1カ所1回10～15分
■ 回数：1日1～2回
■ 強さ：心地よさをめやすにしてください
※低周波治療器を初めてご使用になる方は「強さ」を弱く、マッサージ時間を短くしてください。


製品内容を確認してください

- 本体
■導子コードAタイプ ※消耗部品です。

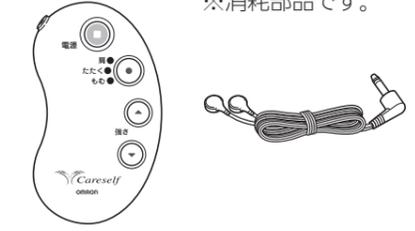


[イラストはHV-F010]

- ジャンボパッド1組 (2枚入り) ※消耗部品です。

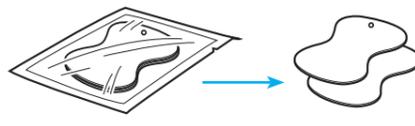

- お試用乾電池 (単4形乾電池2個)
■導子収納板

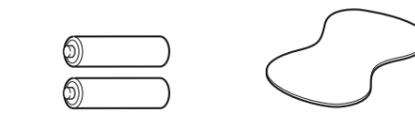

- 取扱説明書 (品質保証書付き)

各部のなまえとはたらき

肩いーきもち HV-F010 (ピンク)


腰いーきもち HV-F011 (オレンジ)

足いーきもち HV-F012 (ブルー)

導子コード差し込み口

電源ボタン

ボタンを押すと低周波マッサージが始まります。マッサージ中に押すと電源を切ることができます。

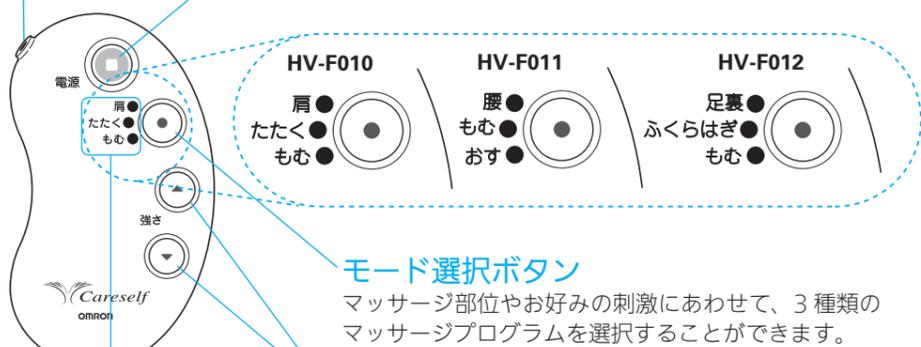

モード選択ボタン

マッサージ部位やお好みの刺激にあわせて、3種類のマッサージプログラムを選択することができます。

強さ設定ボタン

5段階にてお好みの強さに調節することができます。▲のボタンを押すと刺激が強くなります。▼のボタンを押すと刺激が弱くなります。

モードランプ

現在のマッサージプログラムを点滅表示します。強さの段階に合わせて点滅回数が増減します。

安全上のご注意

■ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するものです。表示と意味は次のようになっています。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示します。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

- 【図記号の例】
○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。
●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“一般的な強制”を示します。

危険 下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
(1) ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器
(2) 人工心肺等の生命維持用医用電気機器
(3) 心電計等の装着型医用電気機器
・これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因となります。

警告 身体の異常や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
・医師に相談して指示に従ってください。

次の人は、医師と相談してご使用ください。
(1) 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人 (2) 悪性腫瘍のある人 (3) 心臓・脳神経に異常のある人 (4) 妊娠している人、出産直後の人 (5) 体温38℃以上(有熱期)の人 (6) 感染症疾患の人 (7) 皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人 (8) 急性(疼痛性)疾患のある人 (9) 安静を必要とする人 (10) 薬を服用している人 (11) 血圧に異常のある人 (12) 四肢の不自由な人 (13) 自分で意思表示できない人 (14) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 (15) 低温状態の人 (16) 血行障害のある人 (17) しばらく使用しても、効果が表れない人 (18) パッドが肌にあわない人
・事故や体調不良を起こす恐れがあります。

警告

心臓の近く、首から上、頭部、口中や陰部、皮膚疾患部、左右の足裏の同時治療などには使用しないでください。また、内臓をはさむようにして使用しないでください。
・事故や体調不良を起こす恐れがあります。

他の治療器や本製品の2台以上の同時使用、塗布剤(スプレー缶含む)との併用はしないでください。
・気分が悪くなったり、体調不良を起こす恐れがあります。
・事故やトラブル、故障の原因となります。

マッサージ以外の目的には使用しないでください。
・事故やトラブル、故障につながる恐れがあります。

パッドの表面が欠けていたり、くずれている状態で使用しないでください。
・事故やトラブル、故障の原因となります。

導子コード差し込みプラグは本体導子コード差し込み口以外には差し込まないでください。
・感電や事故の原因となります。

ご自分で分解や修理、改造したりしないでください。
・発火したり、故障や事故の原因となります。

注意

身体の異常や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
・医師に相談して指示に従ってください。

動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源を切り、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。
・加熱、ショートなどによる事故、トラブル、故障につながる原因となります。

マッサージの途中で他の部位にパッドを貼り替える場合、必ず電源を切ってから貼り替えてください。
・強いショックを受ける恐れがあります。

電子機器を装着したままマッサージを行わないでください。
・腕時計などの時刻が狂う場合があります。

乾電池の入れ方

- ①本体裏面の電池カバーを外します。
③電池カバーを取り付けます。



- ②乾電池の⊕⊖を確認して入れてください。
※電池交換時は、2個同時に新しい乾電池(同じ種類のもの)と交換してください。
※古い電池は、お住まいの区市町村の廃棄方法に従って処理してください。



低周波治療について

低周波とは

生命をもつあらゆるものの身体には、いつも独特の電気が起こっています。もちろん、人間の場合も例外でなく、心臓・脳・筋肉・神経などいたるところから自分では感じるこのことできない、ごく弱い低周波電気を発しているのです。これを「生体電気」といい、身体が正常に機能していくうえで欠かせない役目を果たしています。ですから生体電気の異常はすなわち身体の異常となり、現れてくるのです。

筋肉のポンプ作用

低周波電流により筋肉が収縮弛緩し、筋肉のポンプ作用が働きます。弛緩したときには、血液がどっと送り込まれ、次に収縮すると老廃物を含む血液が送り出されます。この働きが繰り返されると、血液の流れが良くなり、血行が促進されます。



注意

お子様には使用させず、機器本体およびパッドの上で、遊ばせないでください。また、上に乗らせないでください。
・事故や体調不良を起こす恐れがあります。

浴室などの湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。
・強いショックを受けます。
就寝時には使用しないでください。

・本機が故障する恐れがあります。また、パッドが思わぬところに貼り付いて体調不良を起こす恐れがあります。
自動車を運転しながら使用しないでください。

・強い刺激を受けると事故やトラブルにつながる恐れがあります。
パッドを患部に貼り付けたまま放置しないでください。

・皮膚の炎症を起こす恐れがあります。
パッドにベルトやネックレスなどの金属が触れた状態で使用しないでください。

・強いショックを受けることがあります。
本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。

・本体が誤動作する恐れがあります。
1カ所に長時間(30分以上)使用しないでください。

・マッサージ部位の筋肉が疲労し、体調不良を起こす恐れがあります。

お願い

はじめてご使用いただくとき、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときには、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に作動することをご確認ください。
発汗をおさえるデオドラントシートやスプレーを使用した部位にパッドを貼り付けないでください。

・パッドの粘着力が低下することがあります。
本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。
・環境汚染の原因となります。

本製品を廃棄するときは、分解しないでください。
次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。

・直射日光が当たる場所・高温多湿の場所・水のかかる場所・ホコリの多い場所・火気の近く・振動衝撃の加わりやすい場所・強電磁界下

パッドを放置したり汚れが付着したものと一緒に保管しないでください。
・パッドが汚れて、粘着力が低下します。

