


オムロン メッシュ式ネブライザ クイックマニュアル


初めて使用する前に

初めて使用する前に: I) 取扱説明書をよくお読みください
II) 部品をはずし、洗浄・消毒してください。

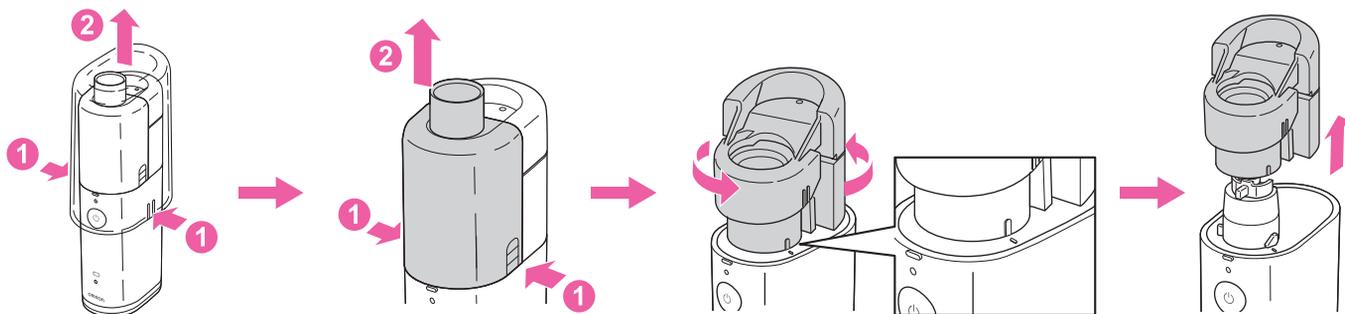


準備

1 薬液ボトルを取り付ける

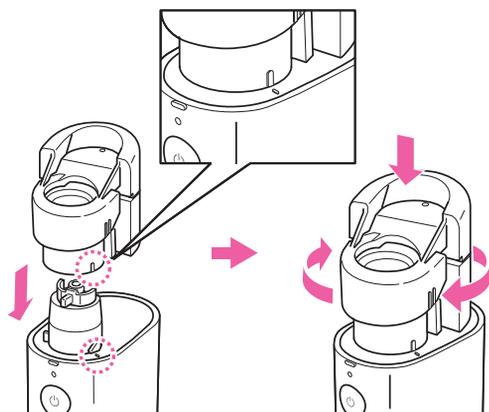


2 薬液ボトルを開ける

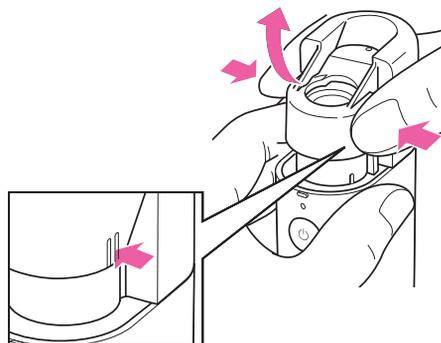

3 薬液を入れる

※最大容量は10mlです。

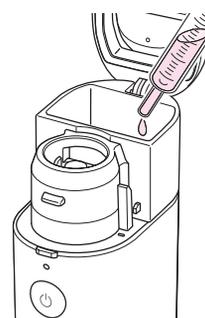


4 薬液ボトルに メッシュキャップを のせる




注意事項

※メッシュをさわらないでください。

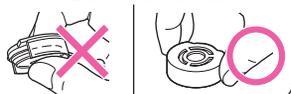


5 薬液ボトルを 閉める

※メッシュキャップはふたの役目をして
います。
しっかり押さえてください。

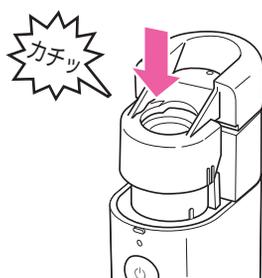


6 マスクアダプタを 取り付ける

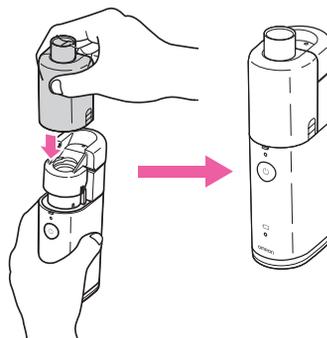

7 吸入マスクまたは マウスピースを 取り付ける

※奥まで差し込んでください。

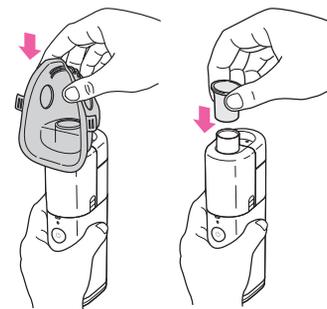

ご使用とご注意

吸入

本体を手に持ち、楽な姿勢で吸入する

振動子が薬液に浸っていますか？
振動子が薬液に浸っていないと、
噴霧しないことがあります。

電源ON/OFF (O) ボタンを
手前にして、軽く
傾けてください。



メッシュの上に薬液や
よだれがたまると、噴
霧が停止します。
ガーゼで液を吸い取っ
てください。

使用後のお手入れ

1 使用後は薬液を捨ててから、薬液ボトルに水を入れて1~2分水を噴霧してください

※吸入後、メッシュに薬液やよだれが残っていると、固まってメッシュの目づまりの原因になります。
※水の吸入はしないでください。

2 ためた水の中で
メッシュキャップを
振り洗いしてください




※本体は
洗浄できません

3 水分を拭き取って十分に乾燥させてください

1 メッシュは精密部品です






メッシュをさわらないでください。

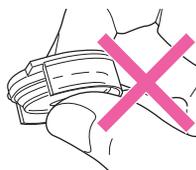

お手入れのとき、流水で洗わないでください。



※メッシュがこわれます。
水をためて軽く
ふりながらやさ
しく洗ってください。

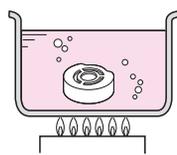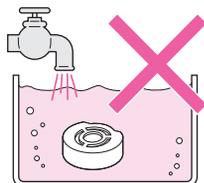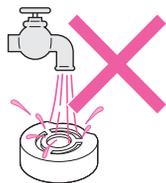

目づまりを防ぐために**毎回、吸入後に水噴霧**をしてください
また、少なくとも**週に一度は消毒**しましょう

2 メッシュはしっかりと取り付けてください

カチッと音が鳴るまで薬液ボトルのふたを閉めてください。

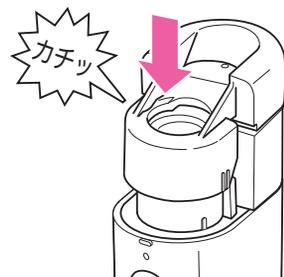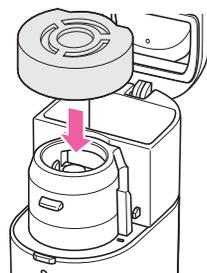

※メッシュキャップはふたの役目をして
います。
しっかり押さえてください。

しっかりと閉まっていないと霧化しなかったりこぼれたりします

4 保管

- 薬液ボトル内に薬液を入れた状態で保管しないでください。
- ご使用にならないときは確実に電源を切って、本体カバーをつけて保管してください。本体カバーは電源が入らないように保護の役目もしています。

5 空運転の注意事項

薬液ボトル内に液体が入っていない状態では電源を入れ
ないでください。機器の破損や電池寿命の短命につな
がる恐れがあります。


3 普段のお手入れと消毒に関して

メッシュをティッシュ
ペーパーなどで拭かない


電子レンジや
食器洗浄機などで
洗浄、乾燥をしない



ティッシュペーパー

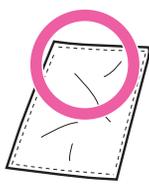

ガーゼ

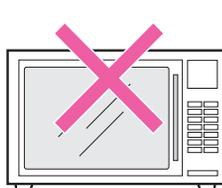

電子レンジ

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロンヘルスケア お客様サポート

<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター(ネプライザ窓口)

TEL 0120-84-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通信料無料)

受付時間9:00~19:00(土・日・祝日は、9:00~17:00年末年始を除く)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。