


オムロン メッシュ式ネブライザ クイックマニュアル


① 初めて使用する前に(洗浄・消毒)

取扱説明書をよく読み、各部品を必ず洗浄・消毒してください

消毒方法例

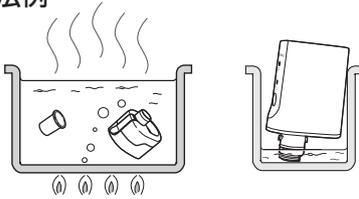


本製品は薬液ボトルが取り付けられた状態で梱包されています。洗浄・消毒するために薬液ボトルを取り外してください。

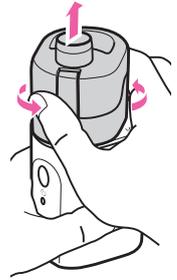


② 準備


1 電池を電池表示マークに従って \oplus \ominus を正しく入れる

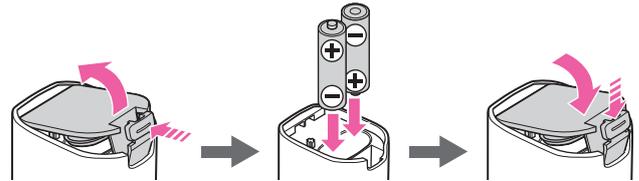


2 薬液ボトルを取り付ける

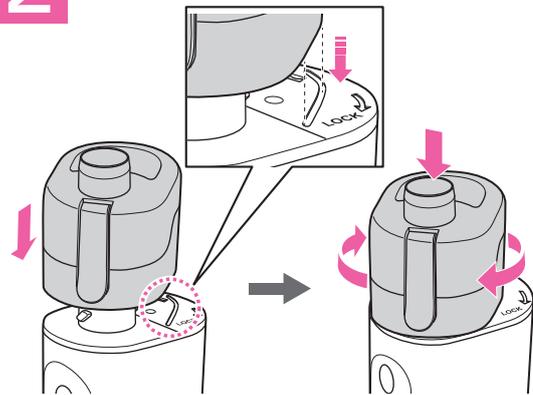


3 薬液ボトルを開ける

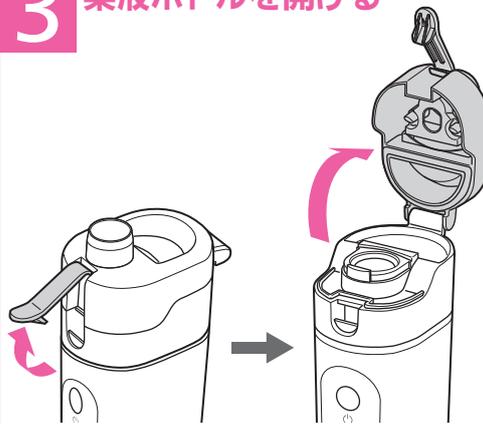

4 薬液を入れる

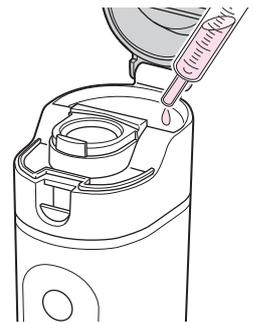


5 使い捨てメッシュの袋を開けて取り出す

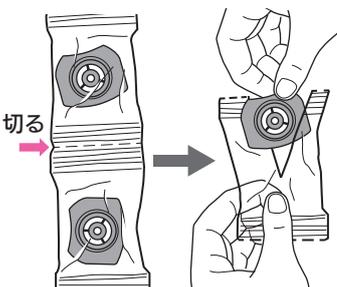


6 薬液ボトルに使い捨てメッシュを取り付ける



7 薬液ボトルを閉め、フックを閉める

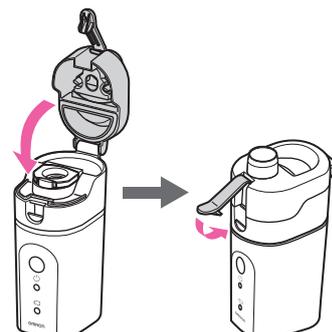

8 吸入マスクまたはマウスピースを取り付ける

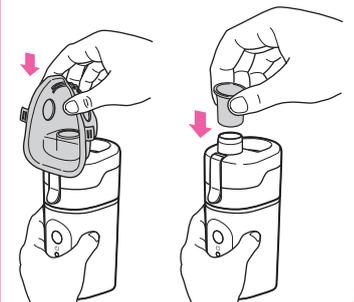

③ 吸入

本体を手に持ち、楽な姿勢で吸入する

図のように軽く傾けて、振動子を薬液に浸します。
ON/OFF (⏻) ボタンを押すと噴霧が始まります。

噴霧しないときは
振動子が薬液に浸っていますか？
振動子が薬液に浸っていないと、噴霧しないことがあります。




メッシュの上に薬液やよだれがたまると、噴霧が停止します。
ガーゼで液を吸い取ってください。

④ ご使用とご注意

1 メッシュは精密部品です



※使い捨てメッシュの黒い部分を持ってください。透明の部分は触らないでください。

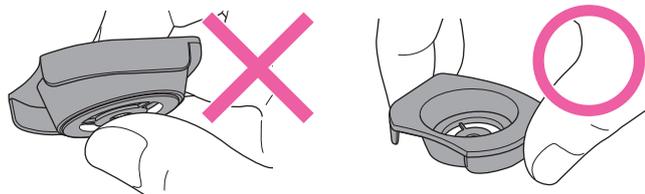

3 使い捨てメッシュについて

一度使用した使い捨てメッシュは廃棄し、必ず新しい使い捨てメッシュを使用してください。

●正常に噴霧せず、症状悪化の原因になります。

4 吸入後のお手入れ



・薬液ボトル、マウスピース、吸入マスク
水道水（または中性洗剤）
で洗ってください。



・振動子とその周辺
流水で洗ってください。
※必ず電池カバーを
つけてください。



・本体
軽く湿らせたガーゼで
拭いてください。

※薬液ボトル、マウスピース、吸入マスク、振動子は、吸入ごとに速やかに洗浄してください。また、電子レンジや食器洗浄機などで洗浄、乾燥をしないでください。

※消毒については取扱説明書をご参照ください。


5 保管

- 薬液ボトル内に薬液を入れた状態で保管しないでください。
- ご使用にならないときは確実に電源を切って保管してください。

6 空運転の注意事項

薬液ボトル内に液体が入っていない状態では電源を入れないでください。機器の破損や電池寿命の短命につながる恐れがあります。

2 メッシュはしっかりと取り付けてください

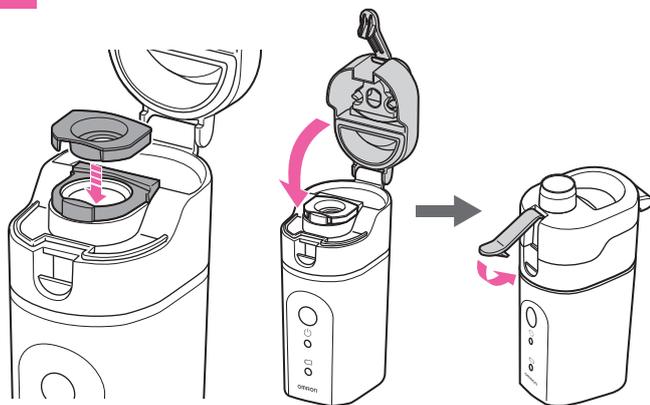

※使い捨てメッシュはふたの役目をしています。メッシュの向きに注意してしっかりと取り付けてください。

しっかりと閉まっていないと霧化しなかったりこぼれたりします

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルスケア お客様サポート

<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター（ネプライザ窓口）

TEL 0120-84-6606（通話料無料） FAX 0120-10-1625（通信料無料）

受付時間9:00～19:00（土・日・祝日は、9:00～17:00年末年始を除く）

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。

