

パソコンで登録・転送する


パソコンでの登録には別売の「オムロン USB 通信トレイ (HHX-IT3)」が必要です。「ウェルネスリンク」への初期登録・転送方法は、USB 通信トレイの取扱説明書を参照してください。



■ USB 通信トレイの使い方

体重体組成計の通信エリアマークと USB 通信トレイの通信マークを合わせてください。

- ・電池交換マーク点灯中は転送できません。

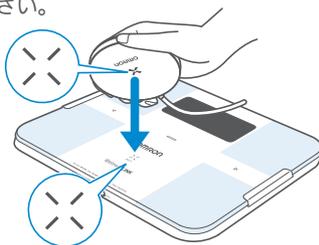

■ 「Err」表示の消し方

データ転送の際、体重体組成計が「Err」を表示したときは、電源を切ってください。(約 10 秒後、電源は自動的に切れます。)



携帯電話で転送する

FeliCa 対応携帯電話をお持ちの方は、FeliCa 通信で測定記録の転送ができます。(携帯電話でのご利用には、事前にパソコンまたはスマートフォンから初期登録が必要です。)

Step 1 次のサイトにアクセスし、ウェルネスリンクアプリをダウンロードする

次のウェブサイトでお使いの携帯電話が対応機種であるかどうかをご確認のうえ、ウェルネスリンクアプリをダウンロードしてください。

<http://wlm.jp/>

対応機種は随時更新しています。




Step 2 ウェルネスリンクアプリを起動する

Step 3 データ転送する

スマートフォン同様に、データ転送をおこなってください。

( 2 ページ Step.3 「機器登録する」)

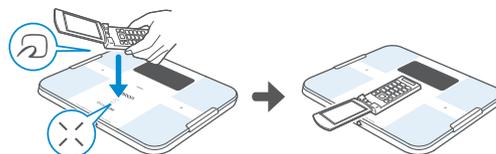

WellnessLINK®

スタートアップガイド

体重体組成計 — HBF-252F 編 —

はじめにお読みください

「ウェルネスリンク」に登録すると、
体重体組成計の設定や測定記録の管理がかんたんにおこなえ、
さまざまなサービスを利用することができます。



Android で使える
おサイフケータイ・NFC対応機種

アプリで手軽にデータ転送
カラダの変化がグラフでわかる！



Win & Mac で使える
※USB 通信トレイ (別売)

パソコンでもデータを管理でき
カラダの変化がグラフでわかる！

スタートアップガイド Web 版は、オムロンヘルスケアのホームページからダウンロードできます。
<http://www.healthcare.omron.co.jp/manual/>

はじめにお読みください

オムロンの体重体組成計をお買い上げいただきましてありがとうございます

- 「ウェルネスリンク」への登録は、スマートフォン、パソコンからおこなえます。携帯電話から登録はできません。
- パソコンで登録をされる方は、別売の「オムロン USB 通信トレイ (HHX-IT3)」が必要です。登録は USB 通信トレイの取扱説明書にしたがっておこなってください。
- お使いのスマートフォンやパソコン、携帯電話が「ウェルネスリンク」に対応していることをご確認ください。(※下記) 操作方法については、それぞれの取扱説明書をご参照ください。
- 「ウェルネスリンク」に転送されたデータは当社が管理するサーバーに保管されます。(お使いのスマートフォンやパソコンには保存されません。)
- 「ウェルネスリンク」のサービスをご利用いただくには、1 ユーザーにつき 1 つのメールアドレスが必要です。
- 「ウェルネスリンク」基本サービスでの測定記録の保管期間は 6 か月です。
- 体重体組成計の「ウェルネスリンク」への登録は 1 機種のみです。

この商品は、スマートフォン・パソコンに対応しています。
(携帯電話はデータ転送のみ)
「ウェルネスリンク」の推奨環境については、
次のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

<http://wlm.jp/>



- ・ウェブサイト・アプリの仕様および本ガイドに記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。
- ・FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- ・FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ (FeliCa プラットフォームマーク) は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・その他本ガイドに記載されているブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。

機器の準備

登録の前に、体重体組成計に電池を入れてください。(単 4 形アルカリ乾電池× 4 個)

スマートフォンで登録・転送する

「ウェルネスリンク」のサービスをご利用いただくために、次の手順で登録をおこなってください。

「ウェルネスリンク」に登録する

- Step 1 次のサイトにアクセスし、
HBF-252F 用のアプリをダウンロードする

<http://wlm.jp/>



はじめて「ウェルネスリンク」を利用される方

- Step 2 アプリを起動し、
「新規ユーザー登録」をする

画面の指示にしたがって、
登録してください。


- Step 3 機器登録する

スマートフォンの FeliCa マーク と体重体組成計の通信エリアマーク を合わせて、機器登録をおこなってください。

- ・電池交換マーク 点灯中は登録できません。
- ・ マークのない NFC 対応機種でもお使いいただける場合があります。対応機種をご確認ください。(※ 1 ページ)
- ・スマートフォンの マークが体重体組成計の通信エリアからはみ出したり傾いていたりすると、正しく認識できないことがあります。
- ・体重体組成計の電源が切れていても電池が入っていれば、自動的に電源が入り、機器登録がはじまります。
- ・測定中にスマートフォンを合わせると、測定を中断して転送を開始します。

すでに「ウェルネスリンク」にユーザー登録されている方

- Step 2 ① アプリを起動し、
ログインする
② 「設定」を選び
「機器登録」をする
画面の指示にしたがって、
登録してください。

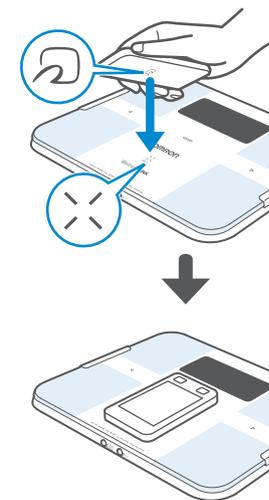

データ転送する

- Step 1 アプリを起動し、ログインする

- Step 2 「データ転送」を選ぶ

- Step 3 データ転送する

機器登録時同様に、データ転送をおこなってください。

