

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただください。

販売名 オムロン体重体組成計 HBF-911

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名

住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地



オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。
修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

おろんオムロン

☎ 電話 **0120-30-6606** 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通信料無料

受付時間

月～金 9:00～19:00（祝日除く）
都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。


ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通信料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。）

5310580-1A

取扱説明書

OMRON

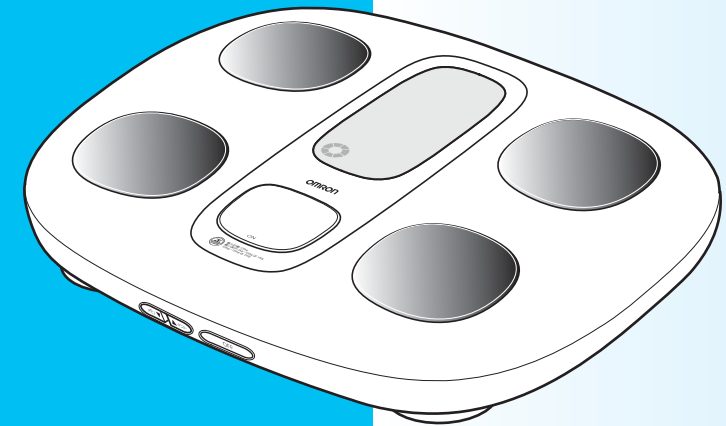

目次

HBF-911の使い方.....1

はじめに

安全上のご注意.....3

次のものが入っていますか？.....7

各部の名前.....8

はかる前に（各種設定）

電池を入れる.....9

お住まいの地域を設定する（重力補正）.....10

日付・時刻を合わせる.....11

個人データ（お知らせ・身長・性別・生年月日）
を登録する.....13

個人データを変更する.....17

個人データを削除する.....19

はかり方と測定値表示

体重体組成をはかる
（個人番号ではかる／ゲストではかる）.....21

測定わずか「お知らせ」機能.....27

過去の測定値を見る（ポイントメモリ）.....29

体重だけをはかる.....33

困ったときに・保証など

おかしいな？と思ったら.....34

仕様.....37

保証規定／品質保証書.....裏表紙

A Good Sense of Health

HBF-911の使い方


HBF-911は、このような流れで使います。

▼はかる前に（各種設定）

正しい測定のために、必ずご使用前に、以下の準備をしてください。

電池を入れる

(☞ 9ページ)

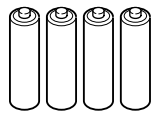

お住まいの地域を設定する

(重力補正)

(☞ 10ページ)

日付・時刻を合わせる

※現在の日付を元に、登録した生年月日からあなたの年齢を計算したり、記録された測定データを読み出したりします。必ず、日付と時刻を合わせてください。

(☞ 11ページ)

個人データを登録する


(お知らせ・身長・性別・生年月日)

(☞ 13ページ)

▼はかり方と測定値表示

1 電源を入れる

メインスイッチを押します。

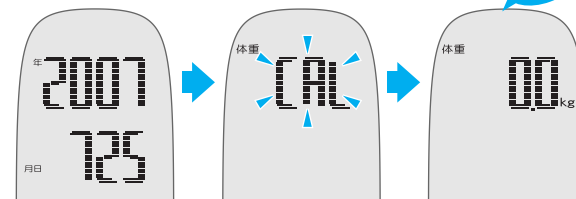

まだ本体に乗らないでください

(☞ 21ページ)

2 「個人番号」を選ぶ



※個人データを登録していない方は、「ゲスト」ではかります。

(☞ 22ページ)

3 体重体組成計に乗る

体重値確定後、体組成値の測定を開始します。




測定終了

測定結果が表示されたら、本体を降ります。約3分後に自動的に電源が切れます。

ビピー!

(☞ 23ページ)

4 体組成を確認する

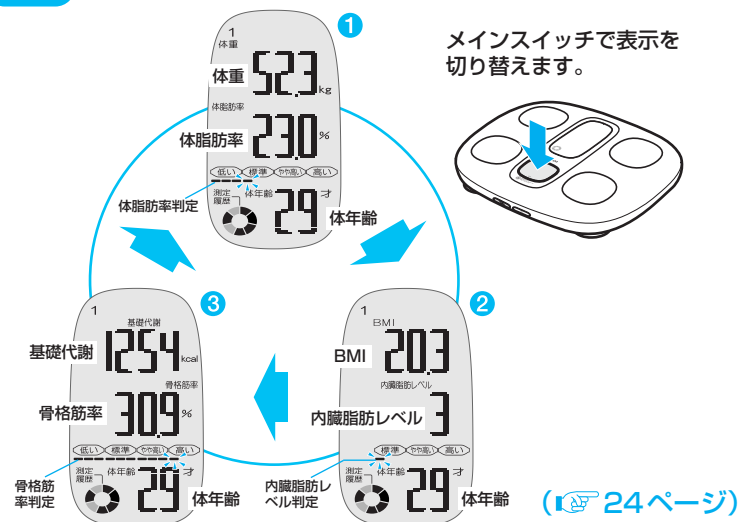

●今回と過去の測定値を比較する

(☞ 29ページ)

●過去の測定値だけを見る

(☞ 32ページ)

●体重だけをはかる

(☞ 33ページ)

毎日続けるための、こだわり機能

個人番号別 カラーランプ

個人番号を選ぶと個人番号別にカラーランプが点灯します。

測定わずか「お知らせ」機能

前回測定した時刻から約24時間たつと個人番号とカラーランプが点滅して測定を「お知らせ」します。

(☞ 27ページ)

測定履歴表示

測定結果表示のときに、本日を含む直近7日分の測定履歴をリングマークで表示します。

(☞ 24ページ)

体組成とは

体を構成する筋肉や脂肪、骨などの組織や水分などのことです。体組成を理解して健康管理に役立てましょう。

■ 体脂肪率

体重のうち、「体脂肪の重さ」が占める割合のことです。体脂肪率判定（低い／標準／やや高い／高い）でチェックできます。

■ 体年齢

測定データを総合して、あなたの体組成の状態を年齢で表示します。

■ BMI

肥満度を示す国際的な基準です。理想的なBMI値は「22」です。

■ 基礎代謝

体温維持や呼吸など、生命維持に必要なエネルギー消費のことです。基礎代謝量が増えると、太りにくい体質になります。

■ 骨格筋率

体重のうち、「骨格筋の重さ」が占める割合のことです。骨格筋率判定（低い／標準／やや高い／高い）でチェックできます。※オムロンの体重体組成計は、平滑筋（内臓筋）・心筋を含まず、体を動かすための「骨格筋」だけの割合を測定できることが特長です。

■ 内臓脂肪レベル

内臓のまわりについている脂肪がどれくらいのレベルかをお知らせします。内臓脂肪レベル判定（標準／やや高い／高い）でチェックできます。

別冊

「活用ハンドブック」で詳しく説明しています。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

■ ⚠危険、⚠警告、⚠注意の意味

⚠危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

■ 図記号の意味

● 強制	●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“一般的な強制”を示します。
⊘ 禁止	⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“一般的な禁止”を示します。


⚠危険

使用にあたって

下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- ①ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
- ②人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ③心電計などの装着型医用電気機器

- これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

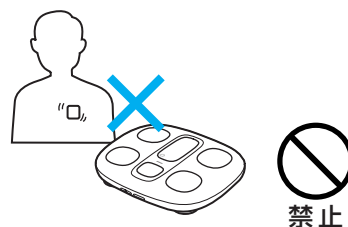

禁止

⚠警告

使用にあたって

減量や運動療法などをおこなう場合は、自分だけで判断せず、医師か専門家の指導を必ず受けてください。

- 自己判断による減量や運動療法は、健康を害する原因になります。




強制

設置と取り扱いについて

タイルの上や、濡れた床などのすべりやすいところでは使わないでください。

- すべってけがをする原因になります。

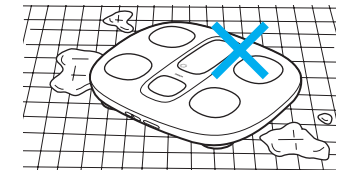

禁止

測定について


体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用ください。

- 転倒されないよう、測定の際には十分ご注意ください。

強制

測定するときは素足で乗ってください。


- すべってけがをする原因になります。
また、正しい体組成を測定することができません。

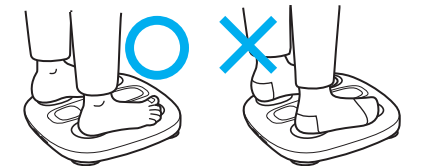

強制

風呂上がりなど、体や手足が濡れている状態で測定しないでください。

- すべってけがをする原因になります。
• 内部に水が入って故障の原因になります。
また、正しい体組成を測定することができません。

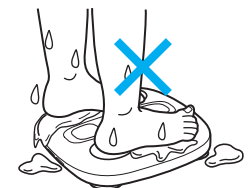

禁止

飛び乗ったり、跳ねたりしないでください。

- 転倒してけがをする原因になります。また、衝撃により使用範囲をこえ、破損する原因になります。

禁止

本体の端や表示部に乗らないでください。

- 転倒してけがをする原因になります。また、正確な測定ができない原因になります。

禁止

電池の取り扱いについて

万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。

- 失明など障害の原因になりますので医師の治療を受けてください。

強制

▼はじめに

▼はかる前に（各種設定）

▼はかり方と測定値表示


▼困ったときに・保証など

⚠️ 注意

使用にあたって

業務用（病院など）では使用しないでください。


- 家庭用計量器の基準に適合している機器ですので、業務用に要求されている機能は備えていません。

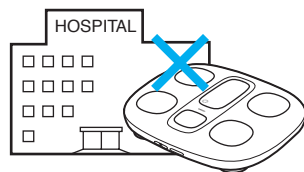

禁止

本体の近くで携帯電話を使わないでください。

- 誤動作する原因になります。

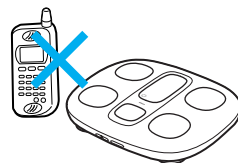

禁止

設置と取り扱いについて

本体を分解や修理・改造しないでください。

- けがや故障の原因になります。



禁止

電池の取り扱いについて

万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。

- 皮膚や衣類をいためる原因になります。



強制

電池の ⊕ ⊖ を間違えないようにしてください。

使い切った電池はすぐに取り外し、4本同時に新しいものと交換してください。

長期間（3ヵ月以上）使用しないときは、電池を取り出しておいてください。

- 漏液、発熱、破裂などを起こし、けがをする原因になります。



強制

新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。

- 漏液、発熱、破裂などを起こし、けがをする原因になります。



禁止

電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。

- 破裂してけがをする原因になります。




禁止

保管について

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

- けがをする原因になります。

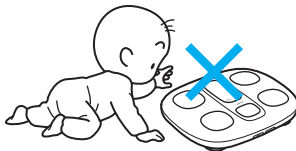

強制

お願い

■ 設置についてのお願い

湿気の多い場所、水のかかる場所、直射日光のあたる場所、空調機の風が直接あたる場所や火気のそばには置かないでください。

- 故障の原因になります。

畳やじゅうたんなどの柔らかい床面で使用しないでください。

- 正確な測定ができない場合があります。

■ 取り扱いについてのお願い

足に皮膚病などの感染症がある方と併用するときは、清潔にしてお使いください。

- 感染の原因になります。併用するときは本体を水または中性洗剤をしみこませた柔らかい布をよく絞ってからふき取ります。その後、からぶきしてください。

体重体組成をはかる目的以外には使わないでください。

本製品は精密機器です。落としたり、振動を与えたり、強いショックを与えないでください。

- 故障の原因になります。

本製品を廃棄するときは、分解しないで市区町村の指導に従って処分してください。

- 環境汚染の原因になります。

■ お手入れについてのお願い

いつも清潔にしてお使いください。

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた柔らかい布をよく絞ってからふき取ります。その後、からぶきしてください。

本体を水洗いしないでください。

- 故障の原因になります。

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

- 変色や故障の原因になります。



■ 保管についてのお願い

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかるところ
- 高温・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

正しく測定できない場合・測定の範囲

■ 次のような方は、正しく体組成が測定できない場合があります。

成長期の児童／高齢者／風邪などで発熱中の人／妊娠中の人／骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者／むくみのひどい人／人工透析患者／ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそれに近い人

- 体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるためです。


■ 本製品では9才以下および81才以上の方の体組成は測定できません。

■ 本製品では17才以下の方の内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません。


次のものが入っていますか？

箱の中には次のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）までご連絡ください。

1 本体

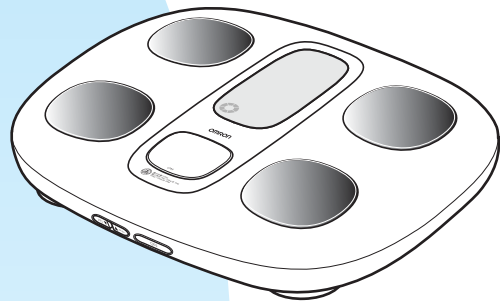

2 お試し用乾電池 (単3形マンガン乾電池4本)

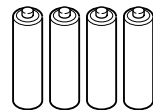


3 取扱説明書 (本書：品質保証書付き)



4 別冊「活用ハンドブック」




5 操作スイッチ 説明シール

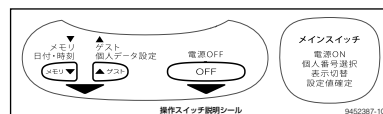


操作方法が分かりにくい方は、本体に貼ってお使いください。

操作スイッチ説明 シールの貼り方

- ①台紙からシールをはがし、
- ②図の位置に貼り付けてください。

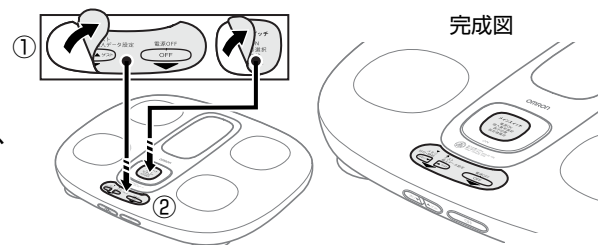

各部の名前

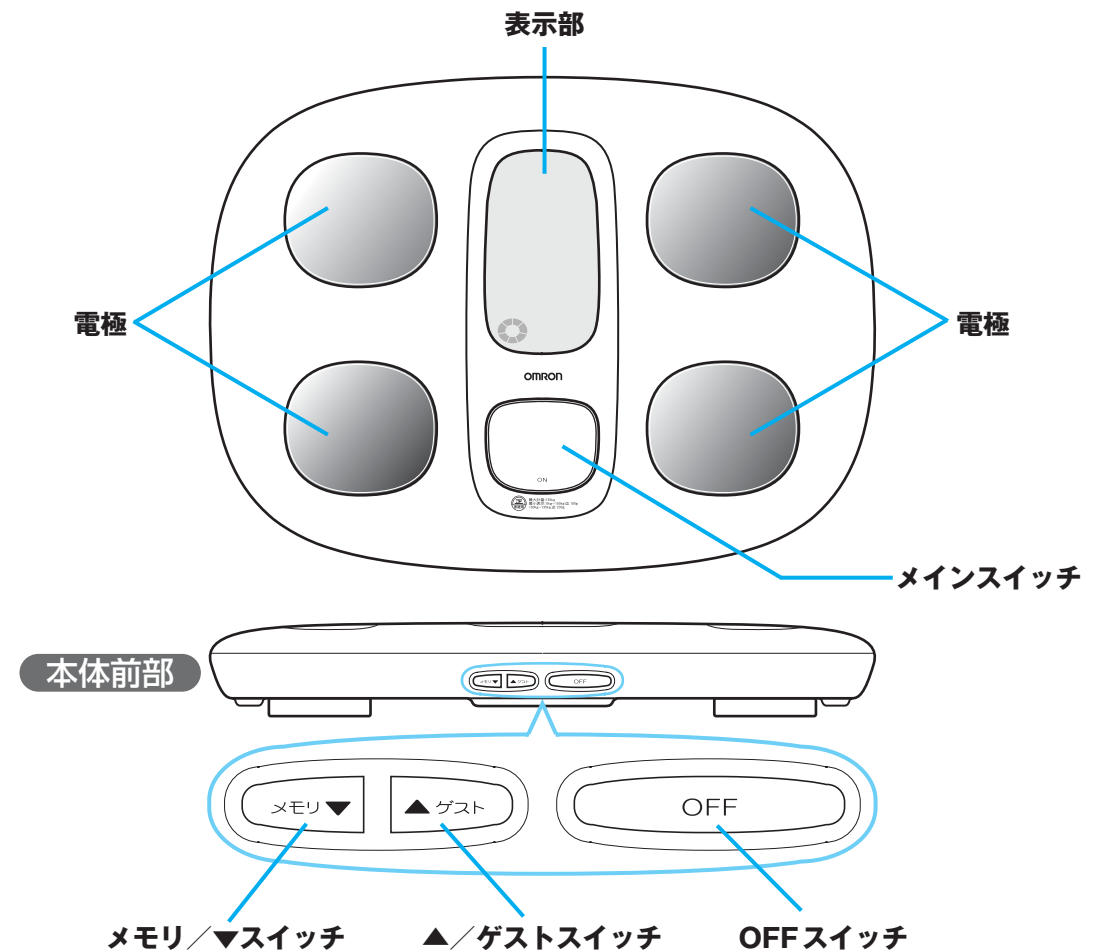

電源の自動オフについて

次の場合は自動的に電源が切れます。

- ・「0.0 kg」が表示されているときに、約1分間何も操作をしなかった場合
- ・個人データの登録などの設定をしているときに、約3分間何も操作をしなかった場合
- ・体重確定後または測定結果が表示されているときに、約3分間何も操作をしなかった場合（個人番号を選ばずに、体重だけをはかったときは、体重確定後、約30秒後に自動的に電源が切れます。）

ブザー音について

次の場合はブザー音が鳴ります。

- ・電源を入れたとき **ビ!**
- ・「0.0 kg」が表示され、測定の準備ができたとき **ビビ!**
- ・測定が終了したとき **ビビー!**
- ・「Err」（エラー）が表示されたとき **ビビビビビ** **ビビビビビ** **ビビビビビ**

▼はじめに

▼はかる前に（各種設定）

▼はかり方と測定値表示

▼困ったときに・保証など


電池を入れる

付属の単3形マンガン乾電池4本を入れます。
※電池をはじめて入れたときや交換したときは、お住まいの地域と日付・時刻を設定してください。
設定しないと測定できません。

1

本体を裏返し、電池カバーを外す


- 1 電池カバーのノブを矢印方向に押し、ロックを外す
- 2 電池カバーのノブを上方向に持ち上げる

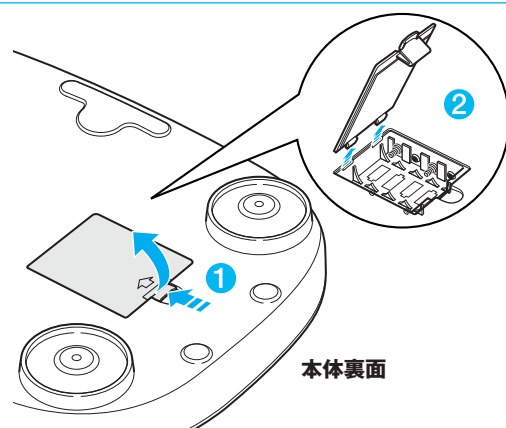

2

電池を図の表示に合わせて入れる


バネの出ている方が⊖です。

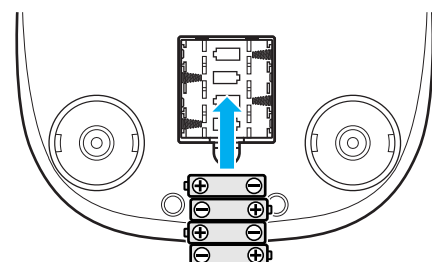

3

電池カバーを閉める

- 1 電池カバーを差し込む
- 2 電池カバーのノブをカチッと音がするまで押す

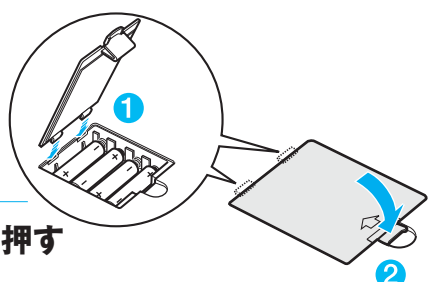

4


「お住まいの地域を設定する (重力補正)」に進む (10 ページ)

※電池を交換したときも、地域設定に進んでください。

電池の寿命と交換について

- 約1年測定できます。
(単3形マンガン乾電池〈黒〉(4本)使用、室温23℃、1日2回測定の場合)
※付属の電池はお試し用です。1年以内に寿命が切れることがあります。
- マークが点灯したときは、電池が消耗しています。
4本同時に新しい電池(同じ種類のもの)と交換してください。
- 本体の電源を切ってから、電池を交換してください。
※電池を交換しても、個人データと過去の測定値は保持されます。
※使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

電池交換
マーク

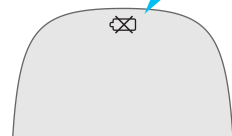


お住まいの地域を設定する (重力補正)

本製品では体重を正確に測定するために重力加速度の影響を補正します。
お住まいの地域を設定してください。お住まいの地域を正しく設定しないと、正確な測定ができません。

■ 下の表でお住まいの地域番号が「1」か「2」かを確認してください。


地域番号「1」	北海道	青森県	岩手県	秋田県	宮城県	山形県
	福島県	茨城県	栃木県	新潟県	富山県	石川県
地域番号「2」	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県
	長野県	福井県	静岡県	愛知県	岐阜県	三重県
	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県
	島根県	鳥取県	岡山県	広島県	山口県	香川県
	徳島県	高知県	愛媛県	福岡県	佐賀県	長崎県
	大分県	熊本県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	

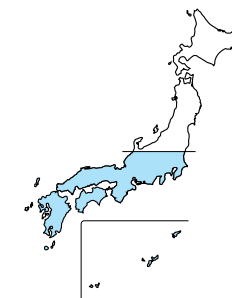

1

電池を入れたあと、メインスイッチを押す


電源が入り地域番号「2」が点滅します。

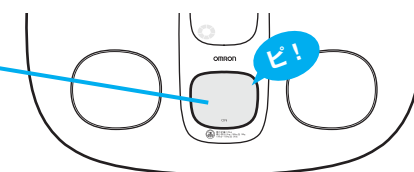

2

「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチで、地域番号を選ぶ

「メモリ/▼」「▲/ゲスト」スイッチを押すごとに、地域番号「2」と「1」が交互に表示します。

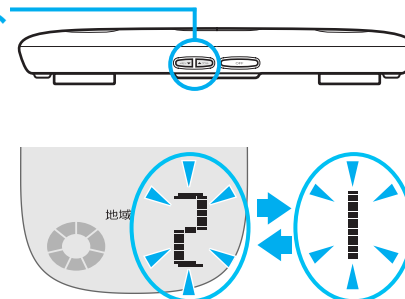

3

メインスイッチを押す

地域が確定して、日付・時刻を設定する画面が表示されます。

4

「日付・時刻を合わせる」に進む

(11 ページ)

■ 地域設定をやり直したいときは…

電池をいったん抜いて約20秒以上経過してから入れ直したあと、メインスイッチを押してください。
※地域設定をするときは、続けて日付・時刻設定もしてください。

▽はじめに

▽はかる前に (各種設定)

▽はかり方と測定値表示

▽困ったときに・保証など

日付・時刻を合わせる

日付・時刻は正しく設定してください。この体重体組成計は、現在の日時と登録された個人データの生年月日からあなたの年齢を計算します。正しく設定しないと、年齢や記憶された測定値の日付がずれ測定値が正しく表示されないことがあります。また過去の測定値が削除されることがあります。

使用するスイッチ

メインスイッチ

設定した数値を確定します。

メモリ／▼スイッチ

1 回押すごとに 1 つ戻ります。
押し続けると早送りします。

▲／ゲストスイッチ

1 回押すごとに 1 つ進みます。
押し続けると早送りします。

OFF スイッチ

1 秒以上押し続けると
電源が切れます。

■ 設定中に間違えたときは…

OFF スイッチを 1 秒以上押し続けて電源を切ってから、メインスイッチを押して電源を入れ直すと、日付・時刻の設定がはじまります。

■ 設定中に電源が切れたときは…

メインスイッチを押して電源を入れ直すと、日付・時刻の設定がはじまります。

■ 設定した日付・時刻を確認するには…

メインスイッチを押し、「0.0 kg」と表示されたらメモリ／▼スイッチを押してください。年月日と時刻が表示されます。

■ 設定した日付・時刻を修正するには…

メインスイッチを押し、「0.0 kg」と表示されたらメモリ／▼スイッチを **2 秒以上** 押してください。「西暦年」が点滅しますので、手順 1 から操作してください。

1

お住まいの地域の設定が終わったら、 「西暦年」を合わせる

地域設定が終わると、続けて西暦を示す「2007」が点滅します。

1


「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、現在の「西暦年」に数字を合わせる

※設定範囲は 2006 年～2030 年です。

2



メインスイッチを押して決定する

「西暦年」が確定して、「月」が点滅します。

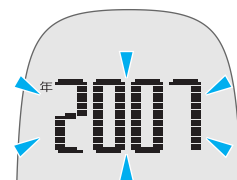

例

2007 年 7 月 25 日
15 時 30 分に設定する場合

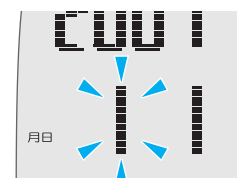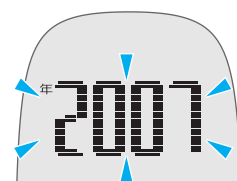

2

「月」と「日」を合わせる

1

「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、現在の「月」に数字を合わせる

2

メインスイッチを押して決定する

「月」が確定して、「日」が点滅します。




3

「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、現在の「日」に数字を合わせる

4

メインスイッチを押して決定する

「日」が確定して、「時」が点滅します。

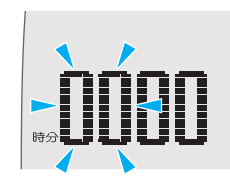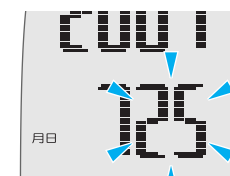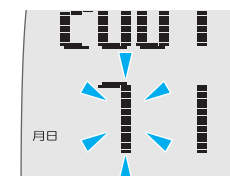

3

「時」と「分」を合わせる

1

「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、現在の「時」に数字を合わせる

時刻は 24 時間制の表示です。

2

メインスイッチを押して決定する

「時」が確定して、「分」が点滅します。

3



「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、現在の「分」に数字を合わせる

4

メインスイッチを押して決定する

「分」が確定し、設定した「年」「月日」「時分」が表示されて電源が切れます。

これで設定が終わりました。

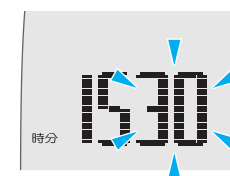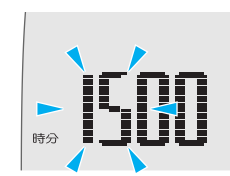

▽ はじめに

▽ はかる前に（各種設定）

▽ はかり方と測定値表示

▽ 困ったときに・保証など

個人データ（お知らせ・身長・性別・生年月日）を登録する

体重体組成をはかるためには、あらかじめ、お知らせ（on/off）・身長・性別・生年月日を登録しておく必要があります。個人データは4人分まで登録することができます。

※個人データを登録している方以外でも、「ゲスト」機能を使うと体重体組成をはかることができます。（P.22ページ）

使用するスイッチ

メインスイッチ

設定した数値を確定します。

メモリ／▼スイッチ

1回押すごとに1つ戻ります。
押し続けると早送りします。

▲／ゲストスイッチ

1回押すごとに1つ進みます。
押し続けると早送りします。


OFFスイッチ

1秒以上押し続けると電源が切れます。

1 メインスイッチを押して、電源を入れる

表示部に現在の年月日が点灯し、「CAL」が表示されたあと、「0.0 kg」が点灯します。

※「0.0 kg」が表示される前に本体に触れたり動かしたりしないでください。
「Err」（エラー）表示になる場合があります。

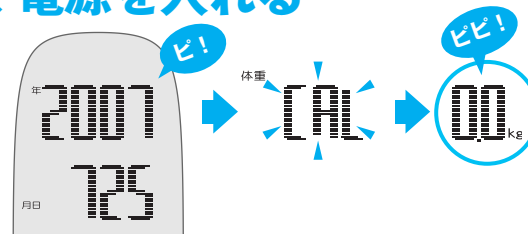

2 登録する個人番号を選ぶ

1 「0.0 kg」が表示されたら、▲／ゲストスイッチを押す

「ゲスト」が点灯します。

2 「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、個人番号を選ぶ


選んだ個人番号とカラーランプが点灯します。

※設定できるのは「1」「2」「3」「4」「ゲスト」（ゲストではかる場合）です。
（「ゲスト」はカラーランプは点灯しません。）

3 メインスイッチを押して決定する

個人番号が確定して、「お知らせ」（on/off）が点滅します。

例
個人番号「1」に、お知らせon・身長160.5 cm・女性・生年月日1969年3月10日を登録する場合

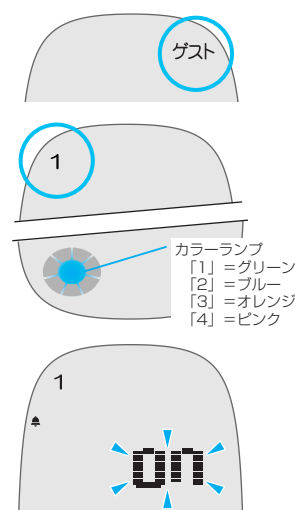

個人データ（お知らせ・身長・性別・生年月日）を登録する


3 「お知らせ」を設定する

前回測定した時刻から約24時間たつとカラーランプが点滅して測定忘れを「お知らせ」する機能です。（P.27ページ）
※ゲストの方は「お知らせ」の設定はできません。

1 「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、onかoffかを選ぶ

2 メインスイッチを押して決定する

「お知らせ」が確定して、「身長」が点滅します。

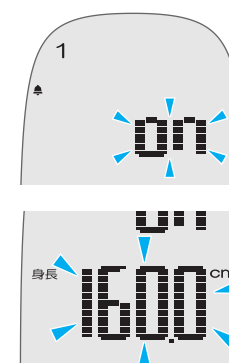


4 「身長」を設定する

1 「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「身長」を合わせる

※設定範囲は100.0 cm～199.5 cmです。
0.5 cm単位で設定できます。

2 メインスイッチを押して決定する

「身長」が確定して、「性別」が点滅します。

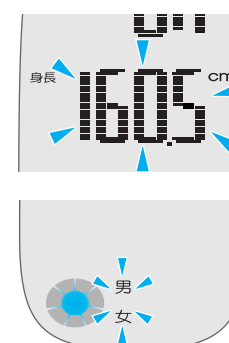


5 「性別」を設定する

1 「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「性別」を合わせる

2 メインスイッチを押して決定する

「性別」が確定して、「誕生日」が点滅します。

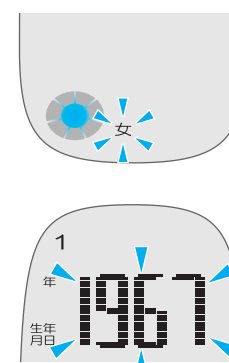

■ 22ページの「ゲストではかる方は」からお読みの方へ

ゲストではかる場合は「性別」確定後、「年齢」が点滅します。「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押して、ゲストの「年齢」（設定範囲10才～80才）に合わせ、メインスイッチを押して決定してください。
ゲストの場合は「年齢」を設定後、測定に移ります。
23ページへ進んでください。



▽はじめに

▽はかる前に（各種設定）


▽はかり方と測定値表示

▽困ったときに・保証など

6 「生年月日」を設定する

1 「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「誕生日」を合わせる

※設定範囲：1920～2030年（設定した生年月日から計算し、9才以下および81才以上に該当する方は体重とBMIのみの表示になります。）

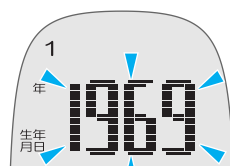

2 メインスイッチを押して決定する

「誕生年」が確定して、「誕生月」が点減します。




3 「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「誕生月」を合わせる



4 メインスイッチを押して決定する

「誕生日」が確定して、「誕生日」が点減します。

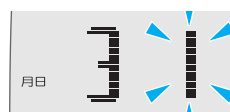

5 「メモリ／▼」「▲／ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「誕生日」を合わせる




6 メインスイッチを押して決定する

「誕生日」が確定します。

設定した「お知らせ・身長・性別・生年月日から計算された年齢」と「生年月日」が表示されたあと、「0.0 kg」と表示されます。

※「年齢」が9才以下または81才以上になった場合は、年齢が点減します。

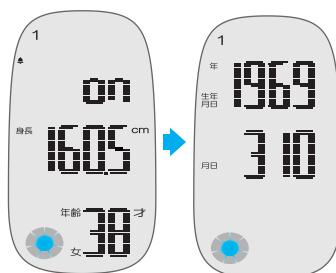

これで登録が終わりました。

※続けて体重体組成を測定することもできます。(👉 22 ページ)

7 電源を切る

表示部にOFFが表示されるまで本体のOFFスイッチを押します（約1秒）。

※OFFスイッチを押さなくても、約1分後に自動的に電源が切れます。

■ 次のようなときは登録できていません。個人データ登録をやり直してください。(13ページ)

- ・ 設定中に約3分以上操作をしないで電源が自動的に切れたとき
- ・ 設定中に電源を切ったとき

■ 年号表 (誕生年を設定するときの参考に)

年 号		西 曆	年 号		西 曆	年 号		西 曆
大正	9	1920	昭和	32	1957	平成	6	1994
	10	1921		33	1958		7	1995
	11	1922		34	1959		8	1996
	12	1923		35	1960		9	1997
	13	1924		36	1961		10	1998
	14	1925		37	1962		11	1999
	15	1926		38	1963		12	2000
昭和	元	1926		39	1964		13	2001
	2	1927		40	1965		14	2002
	3	1928		41	1966		15	2003
	4	1929		42	1967		16	2004
	5	1930		43	1968		17	2005
	6	1931		44	1969		18	2006
	7	1932		45	1970		19	2007
	8	1933		46	1971		20	2008
	9	1934		47	1972		21	2009
	10	1935		48	1973		22	2010
	11	1936		49	1974		23	2011
	12	1937		50	1975		24	2012
	13	1938		51	1976		25	2013
	14	1939		52	1977		26	2014
	15	1940		53	1978		27	2015
	16	1941		54	1979		28	2016
	17	1942		55	1980		29	2017
	18	1943		56	1981		30	2018
	19	1944		57	1982		31	2019
	20	1945		58	1983		32	2020
	21	1946		59	1984		33	2021
	22	1947		60	1985		34	2022
	23	1948		61	1986		35	2023
	24	1949		62	1987		36	2024
	25	1950		63	1988		37	2025
	26	1951		64	1989		38	2026
	27	1952	平成	元	1989		39	2027
	28	1953		2	1990		40	2028
	29	1954		3	1991		41	2029
	30	1955		4	1992		42	2030
	31	1956		5	1993			


使用するスイッチ (13 ページ)

1

メインスイッチを押して、電源を入れる

表示部に現在の年月日が点灯し、「CAL」が表示されたあと、「0.0 kg」が点灯します。

※「0.0 kg」が表示される前に本体に触れたり動かしたりしないでください。「Err」(エラー) 表示になる場合があります。

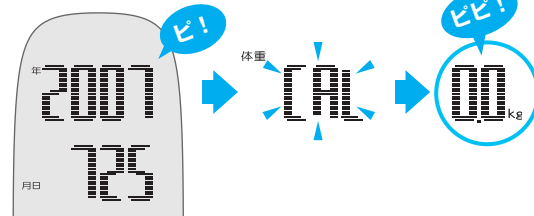

2

変更する個人番号を選ぶ

1

「0.0 kg」が表示されたら、▲/ゲストスイッチを押す

「ゲスト」が点灯します。

2

「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、個人番号を選ぶ
選んだ個人番号とカラーランプが点灯します。

3

メインスイッチを押して決定する

個人番号が確定して、「変更」「削除」が点滅します。

例
個人番号「1」の個人データ
を変更する場合



3

「変更」を選ぶ

1

「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「変更」を選ぶ
「変更」が点滅します。

2

メインスイッチを押して決定する

「変更」が確定して、「お知らせ」(on/off) が点滅します。

4

個人データを変更する

1

「お知らせ」(on/off) を変更する

①「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「お知らせ」(on/off) を設定する
※変更しない場合は②へ進む

②メインスイッチを押して決定する

2

「身長」を変更する

①「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「身長」を設定する
※変更しない場合は②へ進む

②メインスイッチを押して決定する

3

「性別」を変更する

①「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「性別」を設定する
※変更しない場合は②へ進む

②メインスイッチを押して決定する

4

「生年月日」を変更する

①「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「誕生日」を設定する
※変更しない場合は②へ進む

②メインスイッチを押して決定する

③「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「誕生日」を設定する
※変更しない場合は④へ進む

④メインスイッチを押して決定する

⑤「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「誕生日」を設定する
※変更しない場合は⑥へ進む

⑥メインスイッチを押して決定する

設定した「お知らせ・身長・性別・生年月日から計算された年齢」と「生年月日」が表示されたあと、「0.0 kg」と表示されます。

これで個人データの変更が終わりました。

※続けて体重体組成を測定することもできます。(22 ページ)

5

電源を切る

表示部に OFF が表示されるまで本体の OFF スイッチを押します (約 1 秒)。

※ OFF スイッチを押さなくても、約 1 分後に自動的に電源が切れます。

▽はじめに

▽はかる前に (各種設定)

▽はかり方と測定値表示

▽困ったときに・保証など

個人データを削除する


個人データを削除すると、登録したお知らせ (on/off) ・身長 ・性別 ・生年月日、記憶している過去の測定値 (測定履歴を含む) が削除されます。

使用するスイッチ (13 ページ)

1

メインスイッチを押して、電源を入れる

表示部に現在の年月日が点灯し、「CAL」が表示されたあと、「0.0 kg」が点灯します。
※「0.0 kg」が表示される前に本体に触れたり動かしたりしないでください。
「Err」(エラー) 表示になる場合があります。

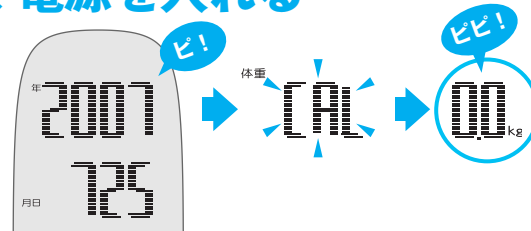

2

削除する個人番号を選ぶ

- 1 「0.0 kg」が表示されたら、▲/ゲストスイッチを押す
「ゲスト」が点灯します。
- 2 「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、個人番号を選ぶ
選んだ個人番号とカラーランプが点灯します。
- 3 メインスイッチを押して決定する
個人番号が確定して、「変更」「削除」が点滅します。

例
個人番号「1」の個人データを削除する場合





個人データを削除する

3

「削除」を選ぶ

- 1 「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「削除」を選ぶ
「削除」が点滅します。
- 2 メインスイッチを押す
「削除」と「お知らせ・身長・性別・年齢」が点滅します。
※削除を中止するときは、OFFスイッチを押してください。
変更するときは、「メモリ/▼」「▲/ゲスト」いずれかのスイッチを押し、「変更」を選びます。(17 ページ手順3)
- 3 メインスイッチを押して決定する
表示部に「Clr」 (= clear / クリア) が点灯します。
「Clr」が消灯すると、個人データの削除は終了です。

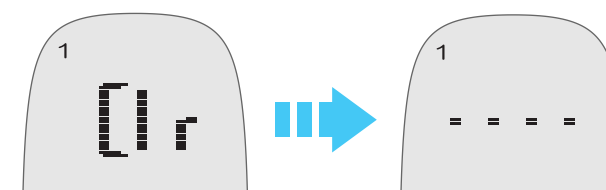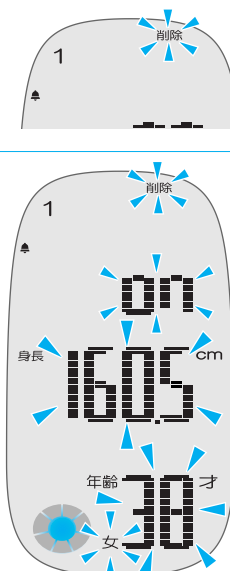

これで個人データが削除されました。

4

電源を切る

表示部に OFF が表示されるまで本体の OFF スイッチを押します (約 1 秒)。
※ OFF スイッチを押さなくても、約 3 分後に自動的に電源が切れます。

▽はじめに

▽はかる前に (各種設定)

▽はかり方と測定値表示


▽困ったときに・保証など

体重体組成をはかる（個人番号ではかる／ゲストではかる）

個人番号ではかる場合は、あらかじめ個人データを登録しておきます。（13ページ）
※個人データを登録していない方は、「ゲスト」機能を使ってはかります。

■ 硬く平らな床面で測定してください。

※畳やじゅうたんなどの柔らかい床面では正確な測定ができません。

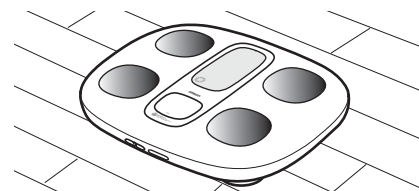

使用するスイッチ

メインスイッチ


個人番号を選びます。
体組成の表示を切り替えます。

▲／ゲストスイッチ

ゲストではかるときに押します。

OFF スイッチ

1 秒以上押し続けると
電源が切れます。

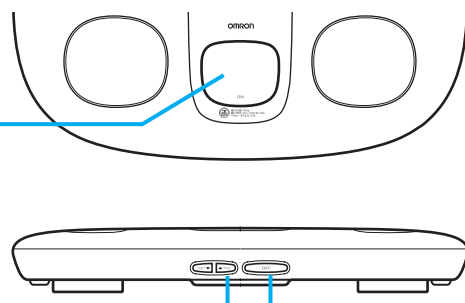

1


メインスイッチを押して、電源を入れる

表示部に現在の年月日が点灯し、「CAL」が表示されたあと、
「0.0 kg」が点灯します。

電源を入れてから表示が「0.0 kg」になるまでは、本体に体重をかけたり、動かしたり、上にものを置いたりしないでください。

「Err」（エラー）表示にならないときでも、体重体組成が正しく測定できない場合があります。

※「CAL」（= calibration／キャリブレーション）点滅中は、正しく測定するための準備をしているところです。

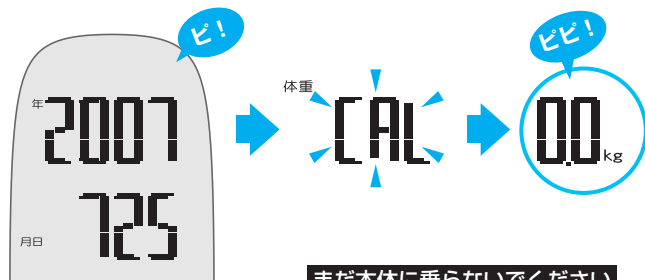

2

個人番号ではかる方は

メインスイッチを押して、自分の「個人番号」を選ぶ


メインスイッチを押すと、番号の早い順から個人番号が点灯します。メインスイッチを何回か押して、自分の個人番号にしてください。

※登録されていない個人番号は選択できません。


※個人データの登録・変更をして、そのままはかる方は、すでに個人番号が設定されています。

選んだ個人番号とカラーランプが点灯します。

※個人データの登録のときに「お知らせ」を on に設定した個人番号については、お知らせベルマーク（🔔）が点灯します。

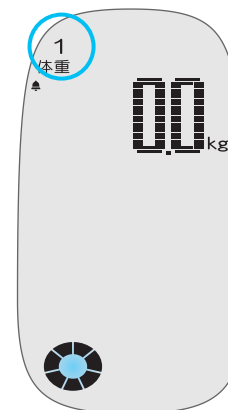

誕生日を迎えて年齢が81才以上になると、右のように年齢を点滅してお知らせします。この場合、測定結果は体重とBMIのみの表示になります。

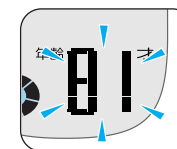

体重体組成をはかる（個人番号ではかる／ゲストではかる）

ゲストではかる方は

「ゲスト」機能とは…

あらかじめ個人データを登録している方以外でも、そのつど身長・性別・年齢を入力することで体重体組成をはかることができる機能です。

1

「0.0 kg」が表示されたら、▲／ゲストスイッチを押す

「ゲスト」が点灯します。



2

メインスイッチを押して決定する

「身長」が点滅します。



3

個人データ（身長・性別・年齢）を設定する

14ページの「個人データ（お知らせ・身長・性別・生年月日）を登録する」の手順4～5および「22ページの「ゲストではかる方は」からお読みの方へ」をご参照ください。

▽はじめに

▽はかる前に（各種設定）


▽はかり方と測定値表示

▽困ったときに・保証など

3 測定する

1 本体に乗る

素足で乗ります


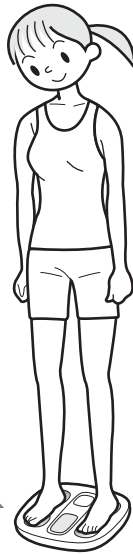


※測定するときは素足で乗ってください。靴下などをはいたまま乗ると、正確な測定ができない原因になります。

※メインスイッチの上に乗らないでください。個人番号が変わる可能性があります。

体重が確定しました。

※2回点滅して体重が確定したことをお知らせします。

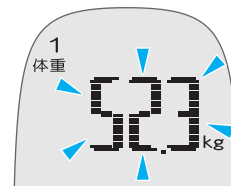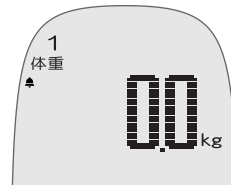

こんな姿勢はダメ







次に体組成の測定に移ります。体組成測定中は、リングマークの回転で測定していることをお知らせします。

2 測定結果が表示されたら、本体を降りる


測定が終了すると、体重、体脂肪率、体脂肪率判定、体年齢と測定履歴が表示されます。

測定履歴表示の見方

■ 本日を含む直近7日分の測定履歴がリングマークで表示されます。

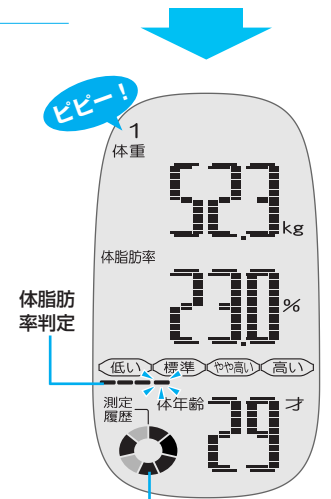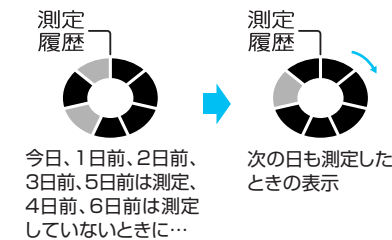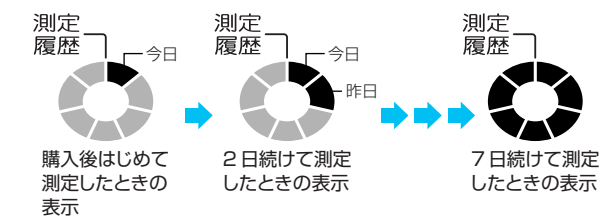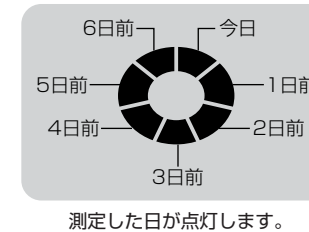

表示例

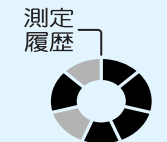

今日 = 測定した
1日前 = 測定した
2日前 = 測定した
3日前 = 測定した
4日前 = 測定しなかった
5日前 = 測定した
6日前 = 測定しなかった

▽はじめに

▽はかる前に（各種設定）

▼はかり方と測定値表示


▽困ったときに・保証など

4

メインスイッチを押し、体組成を確認する


メインスイッチを押すごとに以下のように表示が切り替わります。

体組成の説明については
別冊「活用ハンドブック」
をお読みください。

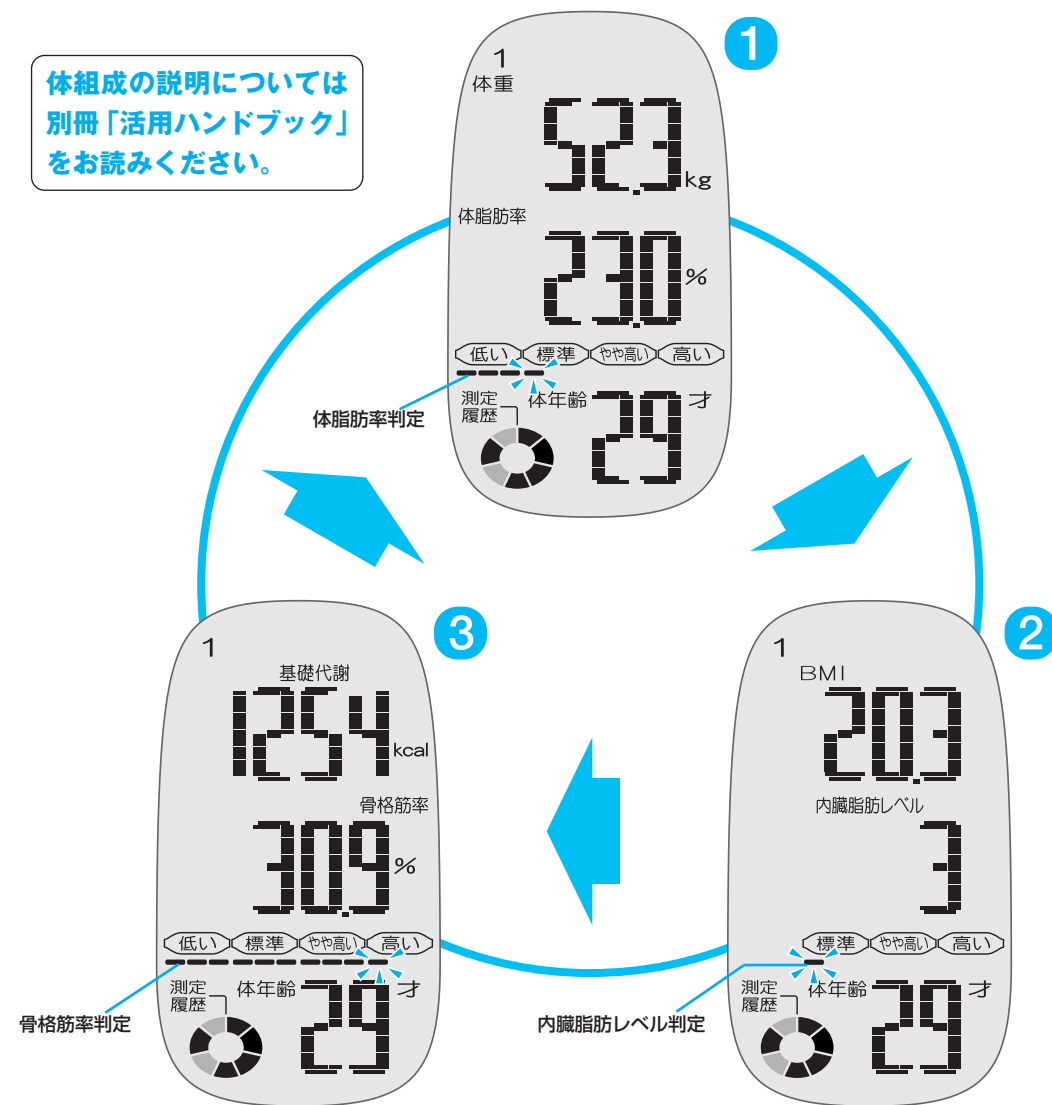

※9才以下および81才以上の方：体重とBMIだけの表示になります。
10才以上および17才以下の方：内臓脂肪レベルと体年齢以外の表示になります。
18才以上および80才以下の方：すべてを表示します。
※個人番号を使って測定したときは測定値が記憶されます。
「ゲスト」で測定したときは記憶されません。

体脂肪率判定・骨格筋率判定の見方

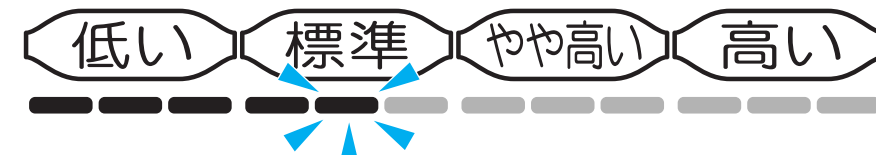

バーが点滅しているところが判定結果です。
上記例の判定：標準

内臓脂肪レベル判定の見方



バーが点滅しているところが判定結果です。
上記例の判定：やや高い

続けて今回と過去の測定値を比較することもできます。（ 29 ページ）

5

電源を切る

表示部に OFF が表示されるまで本体の OFF スイッチを押します（約 1 秒）。

※ OFF スイッチを押さなくても、約 3 分後に自動的に電源が切れます。

▽はじめに

▽はかる前に（各種設定）

▼はかり方と測定値表示

▽困ったときに・保証など


測定わすれ「お知らせ」機能

測定わすれ「お知らせ」機能

個人番号別カラーランプ・測定わすれ「お知らせ」機能について

- 個人番号を選ぶと、リングマーク内に個人番号別にカラーランプが点灯します。
- 個人データの登録のときに「お知らせ」を on に設定した個人番号については、前回測定した時刻が近づくと個人番号とカラーランプが点滅して測定わすれを「お知らせ」します。

※電源が入ってなくてもカラーランプは点滅します。
※測定すると当日のカラーランプの点滅が止まります。

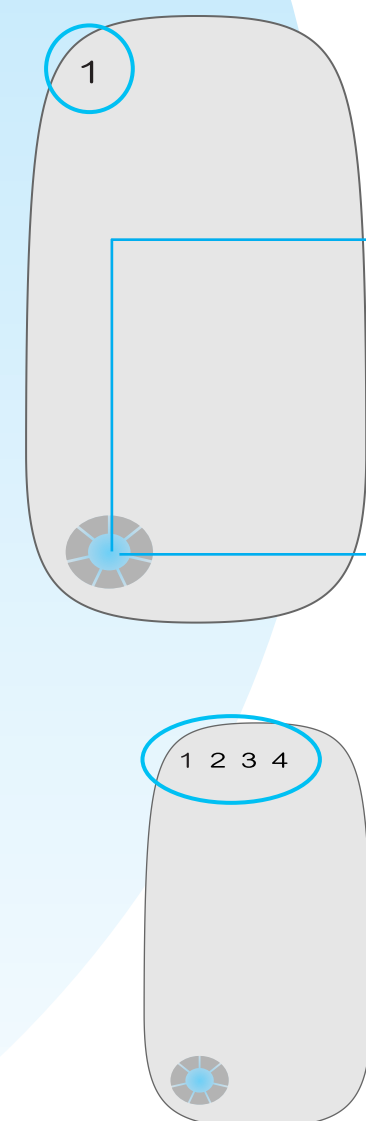

■ 個人番号別カラーランプ

「1」 = グリーン
「2」 = ブルー
「3」 = オレンジ
「4」 = ピンク

■ 測定わすれ「お知らせ」機能

個人番号ごとに前回の測定時から約24時間後に個人番号とカラーランプが点滅し、**毎日の測定時刻をお知らせします。**（最大7日間）


例）前回7:20に測定した場合、以下のように個人番号とカラーランプが1時間点滅します。

翌日 = 7:00～8:00
2日後 = 7:00～8:00
⋮
7日後 = 7:00～8:00

※複数の方が同じ時間帯に測定したときは、同時に個人番号が表示され、カラーランプは順番に点滅します。

※個人データの登録のときに「お知らせ」を on に設定した個人番号については、個人番号を選んだときに、お知らせベルマーク（）が点灯します。

※「お知らせ」を off にしたい場合は、17ページの「個人データを変更する」をご参照ください。

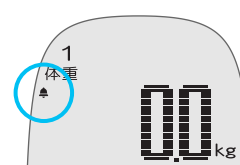

測定わすれ「お知らせ」機能で毎日の測定を習慣に！


ご自分の個人番号別カラーランプが点滅したら、測定してください。

「お知らせ」機能の見方を4人家族の例で見ましょう。


右のように個人番号を登録しました。自分のカラーランプの色を確認してください。

1 (グリーン)	2 (ブルー)	3 (オレンジ)	4 (ピンク)
			
父	弟	姉	母


● ある日、以下のような時間に測定しました。

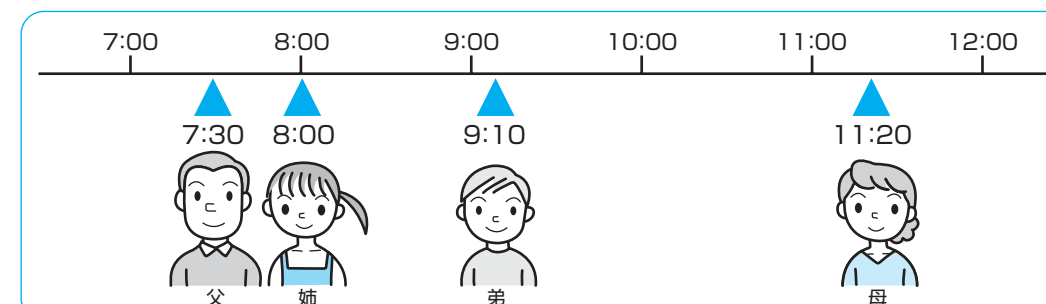

● 翌日、以下の時間帯にそれぞれのカラーランプが点滅します。

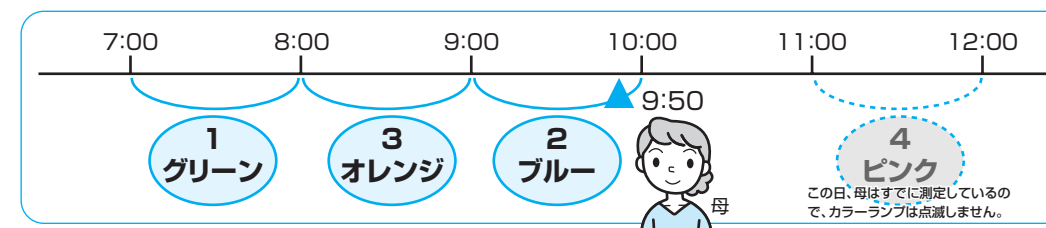

● 翌々日は、前日の9:50に母が測定したので、以下のようにカラーランプが点滅します。

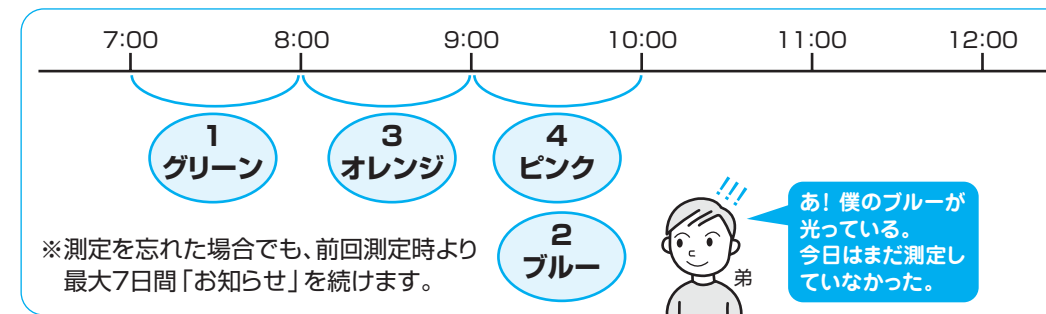

※測定を忘れた場合でも、前回測定時より最大7日間「お知らせ」を続けます。

▽はじめに

▽はかる前に（各種設定）

▽はかり方と測定値表示

▽困ったときに・保証など

過去の測定値を見る (ポイントメモリ)

個人番号で測定したときは、測定値が自動的に記憶されます。
1日前、7日前、30日前、60日前、90日前の測定値を見ることができます。

使用するスイッチ

メインスイッチ

体組成の表示を切り替えます。

メモリ／▼スイッチ

押すごとに「1日前→7日前→30日前→60日前→90日前」に表示が切り替わります。

▲／ゲストスイッチ

逆順に表示が切り替わります。

OFF スイッチ

1秒以上押し続けると電源が切れます。

操作例 1 測定後に今回と7日前の測定値を比較する

体重体組成をはかり、測定結果が表示されている状態から、以下の操作をします。

測定終了後、一度電源を切ってしまうと、今回と過去の測定値を比較することはできません。

※以下は測定結果に体重が表示されている状態からの操作・表示例です。

※電源が切れている状態から過去の測定値を見るときは… (P.32 ページ)

※「ゲスト」機能を使って測定したときは、過去の測定値を見ることができません。

1 メモリ／▼スイッチを1回押し、1日前の体重と比較する

※過去の測定値がないとき、ポイントメモリは「■■■■」と表示されます。



過去の測定値を見る (ポイントメモリ)

2 メモリ／▼スイッチを1回押し、7日前の体重と比較する

■メモリ／▼スイッチを押していくと…

1 日前の体重と比較
7 日前の体重と比較
30 日前の体重と比較
60 日前の体重と比較
90 日前の体重と比較

このように表示が切り替わります。
※▲／ゲストスイッチを押すと、逆順に切り替わります。



※リングマークは、常に今日を基準とした測定履歴が表示されています。

3 メインスイッチを押し、その他の7日前の測定値を見る

■メインスイッチを押していくと…

7 日前の体重と比較
7 日前の体脂肪率と比較
7 日前のBMI と比較
7 日前の内臓脂肪レベルと比較
7 日前の基礎代謝と比較
7 日前の骨格筋率と比較
7 日前の体年齢と比較

このように表示が切り替わります。

▽はじめに

▽はかる前に (各種設定)


▽はかり方と測定値表示

▽困ったときに・保証など

測定後に過去の測定値と比較したときの、**体脂肪率判定・内臓脂肪レベル判定・骨格筋率判定の見方**

今回の値と判定、過去の値と判定が2回ずつ点滅します。

(体脂肪率判定の例)

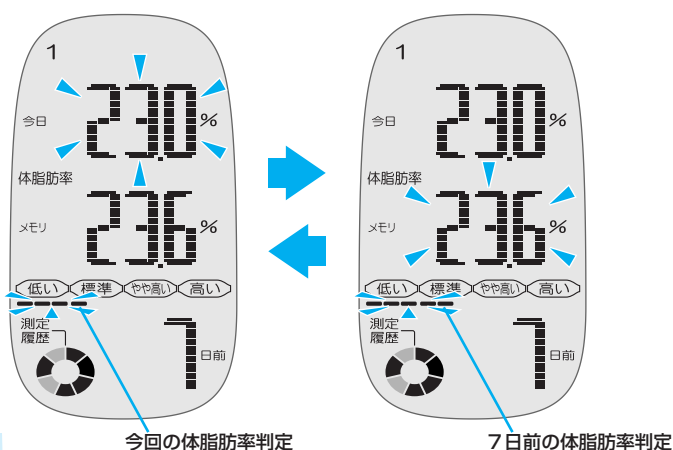

4 電源を切る

表示部にOFFが表示されるまで本体のOFFスイッチを押します（約1秒）。

※OFFスイッチを押さなくても、約3分後に自動的に電源が切れます。

■1日に2回以上測定したときの記憶について

記憶する測定値は、1日にひとつだけです。同じ個人番号を使って、1日に2回以上測定したときは、その日の最後に測定した値を記憶します。

■測定値の記憶について

個人番号それぞれに最大97日分を記憶します。98日以前の分は、メモリから削除します。

■1日前、7日前、30日前、60日前、90日前がちょうど測定し忘れた日だったときは…

その前の日の測定値を表示します。たとえば、1日前の測定値がないときは2日前の測定値を表示します。1日前も2日前も測定値がないときは3日前、3日前もないときは4日前…というように、最大で6日前までさかのぼって表示します。

同様に、7日前の測定値がないときは最大14日前、30日前の測定値がないときは最大37日前、60日前の測定値がないときは最大67日前、90日前の測定値がないときは最大97日前までさかのぼって表示します。

※過去の測定値がないときは「- - - -」と表示されます。

操作例2 測定しないで、過去の測定値だけを見る

1 メインスイッチを押して、電源を入れる

2 メインスイッチを押して、自分の「個人番号」を選ぶ


選んだ個人番号とカラーランプが点灯します。

※「ゲスト」機能を使って測定したときは、過去の測定値を見ることはできません。

3 過去の測定結果を確認する

1 メモリ／▼スイッチを1回押す

1日前の体重と体脂肪率が表示されます。

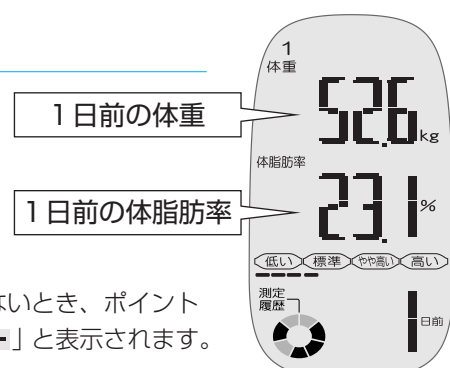

※過去の測定値がないとき、ポイントメモリは「- - - -」と表示されます。

※リングマークは、常に今日を基準とした測定履歴が表示されています。

2 メモリ／▼スイッチ（▲／ゲストスイッチ）とメインスイッチを使って、過去の測定値を確認する

「操作例1：測定後に今回と7日前の測定値を比較する」の手順2～3と同様に操作してください。（P.30ページ）

※ただし、メインスイッチを押すごとに表示される組み合わせは、「体重・体脂肪率・体脂肪率判定」「BMI・内臓脂肪レベル・内臓脂肪レベル判定」「基礎代謝・骨格筋率・骨格筋率判定」「体年齢」となります。

4 電源を切る

表示部にOFFが表示されるまで本体のOFFスイッチを押します（約1秒）。

※OFFスイッチを押さなくても、約3分後に自動的に電源が切れます。

▽はじめに

▽はかる前に（各種設定）

▽はかり方と測定値表示


▽困ったときに・保証など

体重だけをはかる

※体重だけをはかる方は、個人データを登録する必要はありません。
※体重だけをはかったときは、測定値は記憶されません。

■ 硬く平らな床面で測定してください。


※畳やじゅうたんなどの柔らかい床面では正確な測定ができません。

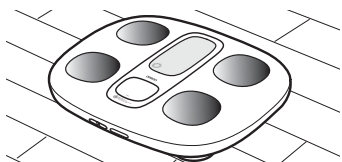

使用するスイッチ

メインスイッチ

電源を入れます。

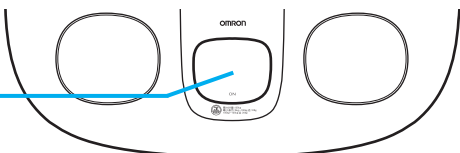


1

メインスイッチを押して、電源を入れる

表示部に現在の年月日が点灯し、「CAL」が表示されたあと、「0.0 kg」が点灯します。


電源を入れてから表示が「0.0 kg」になるまでは、本体に体重をかけたり、動かしたり、上にものを置いたりしないでください。「Err」（エラー）表示にならないときでも、体重が正しく測定できない場合があります。

※「CAL」（= calibration / キャリブレーション）点滅中は、正しく測定するための準備をしているところです。

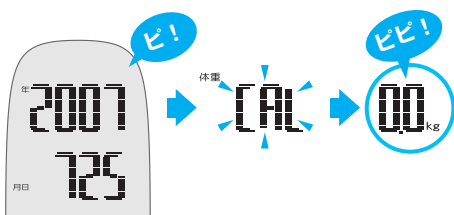

2


本体に乗る

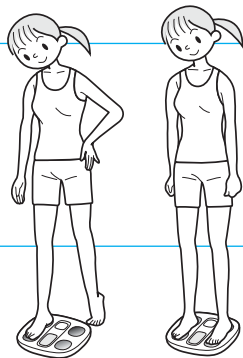

3

測定結果を確認する

2回点滅して体重値が確定したことをお知らせします。

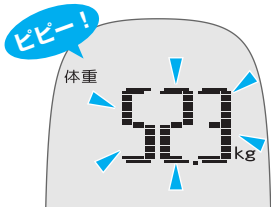

4

測定結果を確認したら 本体を降ろる

約30秒後に自動的に電源が切れます。

※電源をすぐに切りたい場合は、本体のOFFスイッチを1秒以上押します。

おかしいな？と思ったら

■ エラー表示が出た ※同時に「ピピピピピ」 というブザー音が3回鳴ります。

エラー表示	原因	対処のしかた
Err 1	足裏が電極に密着していなかった	足裏を電極に密着させて測定してください (P.23 ページ)
Err 2	測定姿勢が悪かったり、足裏が電極に密着していなかった	足を動かさないようにして測定してください (P.23 ページ)
Err 3	足裏が乾燥していた	濡らしたタオルなどで足裏を少し湿らせてから測定してください
Err 4	体組成の値が測定可能範囲外だった	設定した身長・性別・生年月日（年齢）が間違っていないか確認してください (P.17 ページ) 身長・性別・生年月日（年齢）を正しく設定していても、測定可能範囲外の場合は測定できません
Err 5	動作異常が起きた	本体の故障です。オムロンお客様サービスセンターまで修理をご依頼ください (P.裏表紙)
Err	「0.0 kg」と表示される前に、本体に乗った	「0.0 kg」と表示されてから、本体に乗ってください
	「0.0 kg」と表示される前に、本体を動かした	「0.0 kg」と表示されるまでは、本体を動かさないでください
	測定中に体を動かした	測定中は体を動かさないでください
	体重測定中に測定範囲をこえた	体重が135 kgをこえる方は、ご使用になれません

▽はじめに

▽はかる前に（各種設定）

▼はかり方と測定値表示

▼困ったときに・保証など

■ 測定値がおかしい、動作がおかしい

こんなとき	原因	対処のしかた
本体に乗っても「0.0 kg」と表示される、または体重値がほとんど増えない	表示が「0.0 kg」になる前に本体に乗った	表示が「0.0 kg」になってから本体に乗ってください
体重値が異常に多く（または少なく）表示される		
測定値が異常に高い、または低い 測定のたびに極端に値が違う	じゅうたんなどの柔らかい床面や、凹凸のある床面の上で測定している	硬く平らな床面で測定してください
	足裏、また体自体が冷えてしまって、血行が悪くなっている	体を温めるなどして、血行が通常の状態に戻ってから測定してください
	電極部が非常に冷たくなっている	暖かい部屋などにしばらく置いて、電極に触っても冷たく感じない程度になったら測定してください
	足裏が乾燥している	濡らしたタオルなどで足裏を少し湿らせてから測定してください
	別冊「活用ハンドブック」の「正しく測定していただくためには」(P.9)も併せてお読みください	
一部の結果が「- - - -」と表示される	本製品では17才以下の方の内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません また、年齢が9才以下および81才以上になると、体重とBMIのみの表示になります	設定した生年月日（年齢）や日付・時刻が間違っていないか確認してください (P.17)
電源を入れても何も表示しない	電池が入っていない	電池を入れてください (P.9)
	電池の方向を間違えて入れている	正しい方向にきちんと入れてください (P.9)
	電池が消耗している	電池を交換してください (P.9)

こんなとき	原因	対処のしかた
体組成をはかりたいのに、体重値確定後、体組成の測定が開始されない	個人番号またはゲストの設定をしていない（表示部に個人番号「1」「2」「3」「4」や「ゲスト」が表示されていない）	個人番号またはゲストの設定をしてから測定してください (P.22)
測定わずか「お知らせ」機能の個人番号別カラーランプが、前回の測定時刻と異なる時間帯に点滅する	時刻の設定が間違っている	設定した時刻が間違っていないか確認してください (P.11)

電源の自動オフについて

次の場合は自動的に電源が切れます。

- 「0.0 kg」が表示されているときに、約1分間何も操作をしなかった場合
- 個人データの登録などの設定をしているときに、約3分間何も操作をしなかった場合
- 体重確定後または測定結果が表示されているときに、約3分間何も操作をしなかった場合（個人番号を選ばずに、体重だけをはかったときは、体重確定後、約30秒後に自動的に電源が切れます。）

※前記の「対処のしかた」を実施しても、正常に測定ができない場合は故障が考えられます。製品の故障および修理のご依頼につきましては、オムロンお客様サービスセンターまでご連絡ください。(P.裏表紙)

※ごくまれにその方の体質上誤差を生じて測定できない方がおられます。このような場合にもオムロンお客様サービスセンターまでご相談ください。(P.裏表紙)

※本製品の故障、修理のときは、個人データと過去の測定値はすべて削除されますのでご了承ください。万一に備え測定結果を紙などに記録しておくことをおすすめします。

▼はじめに

▼はかる前に（各種設定）

▼はかり方と測定値表示

▼困ったときに・保証など

仕 様

販 売 名	オムロン体重体組成計 HBF-911		
表 示※	体重	0～100 kgまで	: 100 g単位
		100～135 kgまで	: 200 g単位
	体脂肪率	5.0～50.0%	: 0.1 %単位
	骨格筋率	5.0～60.0%	: 0.1 %単位
	内臓脂肪レベル	1～30	: 1レベル単位
	BMI	2.5～90.0	: 0.1 単位
	基礎代謝	385～3999kcal	: 1 kcal単位
	体年齢	18～80才	: 1才単位
	体脂肪率判定	低い／標準／やや高い／高い	
	骨格筋率判定	低い／標準／やや高い／高い	
設 定 項 目	内臓脂肪レベル判定	標準／やや高い／高い	
	メモリ	ポイントメモリ 1日前／7日前／30日前／60日前／90日前	
	重力補正	地域番号「1」または「2」	
	日付・時刻	西暦年、月日、時分	
	個人データ登録 [下記の設定項目を4人分登録できます。]		
	お知らせ	on／off	
	身長	100.0～199.5 cm	: 0.5 cm単位
	性別	男／女	
	生年月日	西暦年、月日	
	年齢 (ゲストではかる場合)	10～80才	: 1才単位
※ゲストではかる場合は個人データはそのつど設定します。			
体 重 計 精 度	0 kgをこえ67.5 kgまで	: ±200 g	
	67.5 kgをこえ100 kgまで	: ±300 g	
	100 kgをこえ135 kgまで	: ±600 g	
電 源	単3形マンガン乾電池4本 (R6) [単3形アルカリ乾電池 (LR6) もご使用になれます]		
電 池 寿 命	約1年 (単3形マンガン乾電池〈黒〉使用、室温23℃、1日2回測定時)		
使用環境温湿度	+5～+35℃	30～85%RH	
保管環境温湿度	-20～+60℃	10～95%RH	
質 量	約2.1 kg (乾電池含む)		
外 形 寸 法	幅約350 mm×高さ約50 mm×奥行き約260 mm		
付 属 品	お試し用乾電池 (単3形マンガン乾電池4本)、取扱説明書 (本書: 品質保証書付き)、別冊「活用ハンドブック」、操作スイッチ説明シール		

お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

※9才以下および81才以上の方: 体重とBMIだけの表示になります。

10才以上および17才以下の方: 内臓脂肪レベルと体年齢以外の表示になります。

18才以上および80才以下の方: すべてを表示します。

体重計の精度について

- この体重計は計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。この商品のメーカー保証精度は、上記の体重計精度欄に記載の通りです。
- この体重計は体重をはかるために製造されたはかりで、物の売買取引や、そのものの目方が正しいかどうかなどを証明することには、計量法により使用できませんのでご注意ください。



memo

▽はじめに

▽はかる前に (各種設定)

▽はかり方と測定値表示

▼困ったときに・保証など