

▲ OPEN

「ウェルネスリンク」に登録すると体重体組成計の設定や測定記録の管理がかんたんにおこなえ、
さまざまなサービスを利用することができます。

はじめにこのスタートアップガイドをお読みください。

スタートアップガイド

WellnessLINK®

OMRON

はじめに 「ウェルネスリンク」に登録する

「ウェルネスリンク」のサービスをご利用いただくために、次の手順で初期登録をおこなってください。

- ※登録はパソコンでのみおこなえます（携帯ではおこなえません）。
- ※USB通信ソフトのインストールが完了するまで体重体組成計とパソコンを接続しないでください（接続している場合は外してください）。
- ※すでにユーザー登録をされている方は、パソコンサイト「ウェルネスリンク」にログイン後、「機器の設定」画面から「機器の追加」を選び、機器登録をおこなってください。



以上で「ウェルネスリンク」への初期登録は完了です。
毎日体重や体組成を測定し、測定記録を「ウェルネスリンク」に転送しましょう。

測定したら 測定記録を転送・確認する

登録が完了したあとは、専用USBケーブルで接続するだけ。かんたんに測定記録の転送がおこなえます。



測定記録を転送したら、「ウェルネスリンク」のウェブサイトを確認しましょう。


「ウェルネスリンク」は携帯電話でもご覧いただけます。携帯サイト「ウェルネスリンク」 <http://wellnesslink.jp/mobile/>



おサイフケータイでも測定記録の転送がおこなえます

NTTドコモ903i/703iシリーズ以降のおサイフケータイ (iモードFeliCa対応携帯電話) 対応機種*をお持ちの方は、FeliCa通信で測定記録の転送ができます。次のウェブサイトに対応携帯電話を確認し、ウェルネスリンクアプリをダウンロードしてください。*一部機種を除く

パソコンで <http://wellnesslink.jp/minfo/>
携帯電話で <http://wlm.jp/>

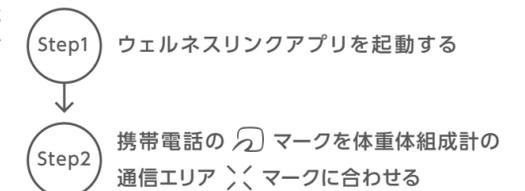

※携帯電話でのご利用には、事前にパソコンサイトでの初期登録が必要です。※NTTドコモ、おサイフケータイ、iモードは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。* (FeliCaプラットフォームマーク)はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。