

取扱説明書

オムロンデジタル自動血圧計 HEM-1010



- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

ご使用前に

安全上のご注意.....	1
次のものが入っていますか?.....	6
各部の名前.....	7
この血圧計の使い方.....	9
電源を準備する.....	11
時計を合わせる.....	14

測定のしかた

腕帯に腕を通す.....	17
正しい姿勢を確認する.....	19
血圧を測定する.....	21
手動加圧のしかた.....	27
測定記録を呼び出す.....	28
週平均を呼び出す.....	30
測定記録の消去のしかた.....	34

困ったときに・保証など

測定 Q&A.....	35
(測定値が高い／低いときなど)	
血圧豆知識.....	38
エラー表示が出たときは.....	43
おかしいな?と思ったら.....	45
お手入れと保管.....	48
仕様.....	49
別売品について.....	50
保証規定／品質保証書.....	裏表紙

安全上の ご注意

お使いになる前に必ず お読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告サインの内容について

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

 ●記号は、**強制**を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。
左図は“一般的な強制”を示します。

 ⊘記号は、**禁止**を示します。
具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。
左図は“一般的な禁止”を示します。


 △記号は、**警告や危険を含む注意**を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。
左図は“感電注意”を示します。

警告

ACアダプタの取り扱いについて

ACアダプタは、専用品以外は使用しないでください。

- 火災、感電の原因になります。

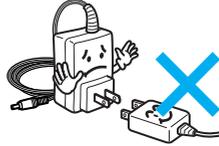

専用 AC アダプタは必ず AC100V で使用してください。
またコンセントは単独で使用してください。

- 火災、感電の原因になります。



専用 AC アダプタのプラグやコードが破損した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 火災、感電の原因になります。



専用 AC アダプタはぬれた手で、コンセントから抜き差ししないでください。

- 感電やけがをすることがあります。



注意

一般的なことについて

測定結果の自己判断、治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

- 自己判断は、病気の悪化につながる可能性があります。



測定中に加圧が止まらないなどの異常があったときは、すみやかに緊急排気スイッチを押してください。

- 腕に一時的な内出血、および末梢神経障害が発生する原因になります。



△注意

一般的なことについて

重度の血行障害または血液疾患のある方は、医師の指導のもとで使用ください。

- 圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。



強制

手動加圧をする場合は、本取扱説明書をご参照の上で使用ください。


- 必要以上に加圧すると、圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。



強制

乳幼児や自分で意思表示ができない人には使用しないでください。

- 事故やトラブルの原因になります。

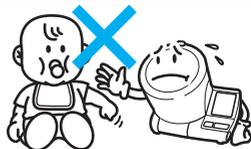

禁止

腕帯の加圧を 300mmHg 以上にしないでください。

- 腕がうっ血したり、しびれたりします。



禁止

血圧測定以外の目的で使用しないでください。

- 事故やトラブルの原因になります。



禁止

腕帯の布カバーが破れているときは測定をしないでください。

- けがをすることがあります。



禁止

血圧計の近くで、携帯電話を使用しないでください。

- 誤動作の原因になります。



禁止

⚠ 注意

一般的なことについて

本体や腕帯は、分解や改造をしないでください。

- 正しい測定ができなくなります。



分解禁止

電池の取り扱いについて

電池は、単3形アルカリ乾電池（4本）以外は使用しないでください。

- 誤動作する原因になります。



強制

万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。

- 失明など障害の原因になりますので医師の治療を受けてください。



強制

万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。

- けがなどの原因になります。




強制

電池の⊕⊖を間違えないようにしてください。使い切った電池はすぐに取り外し、4本同時に新しいものと交換してください。

長期間（3カ月以上）使用しないときは、電池を取り出しておいてください。

- 漏液、発熱、破裂などを起こし、本体が破損する原因になります。

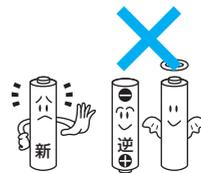

強制

使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

- 可燃物として処分すると、電池が爆発して火災が起これり、やけどやけがをする原因になります。




強制

⚠注意

電池の取り扱いについて

新しい電池と古い電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。

- 漏液、発熱、破裂などを起こし、本体が破損する原因になります。

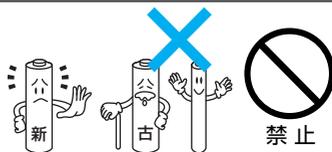

お願い

本体に強いショックを与えたり、落としたりしないでください。

血圧計をお使いにならないときや移動するときなどに、腕帯の中のもの（例：筆記用具やノート、専用 AC アダプタなど）を入れないでください。

- 腕帯の布カバーが破れたり本体が破損し、測定できなくなる原因になります。

腕帯に腕を通さない状態で測定をしないでください。

腕を腕帯の逆側から通した状態で測定をしないでください。

腕帯が固定されていない状態で本体を持ち運ばないでください。




次のものが 入っていますか？

箱の中には次のものが入っています。
万一、不足のものがありましたら、
オムロンお客様サービスセンター
(☎電話 0120-30-6606) まで
ご連絡ください。

1. 本体 (対象腕周 17 ~ 32 cm)




2. お試し用電池 (単 3 形アルカリ乾電池 4 本)

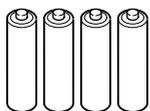

付属の電池はお試し用です。
早めに寿命が切れることが
あります。

3. 専用 AC アダプタ

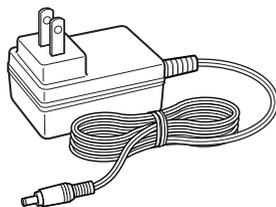


4. 取扱説明書 (品質保証書付き) : 本書


5. 医療機器添付文書

各部の名前

本体

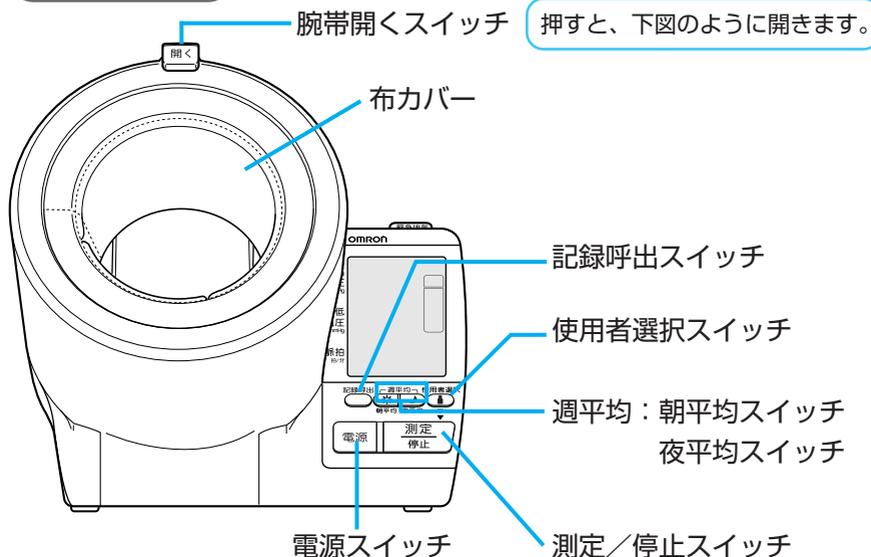

(腕帯を開いたとき)

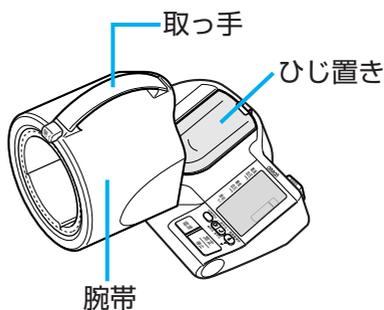


(本体背面)


専用 AC アダプタ用コネクタ

緊急排気スイッチ

測定を緊急に停止したいときに押します。
※間違っても緊急排気スイッチを押すと、電源が入っていても、時計が止まってしまうのでご注意ください。

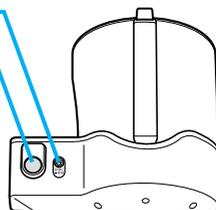

表示部

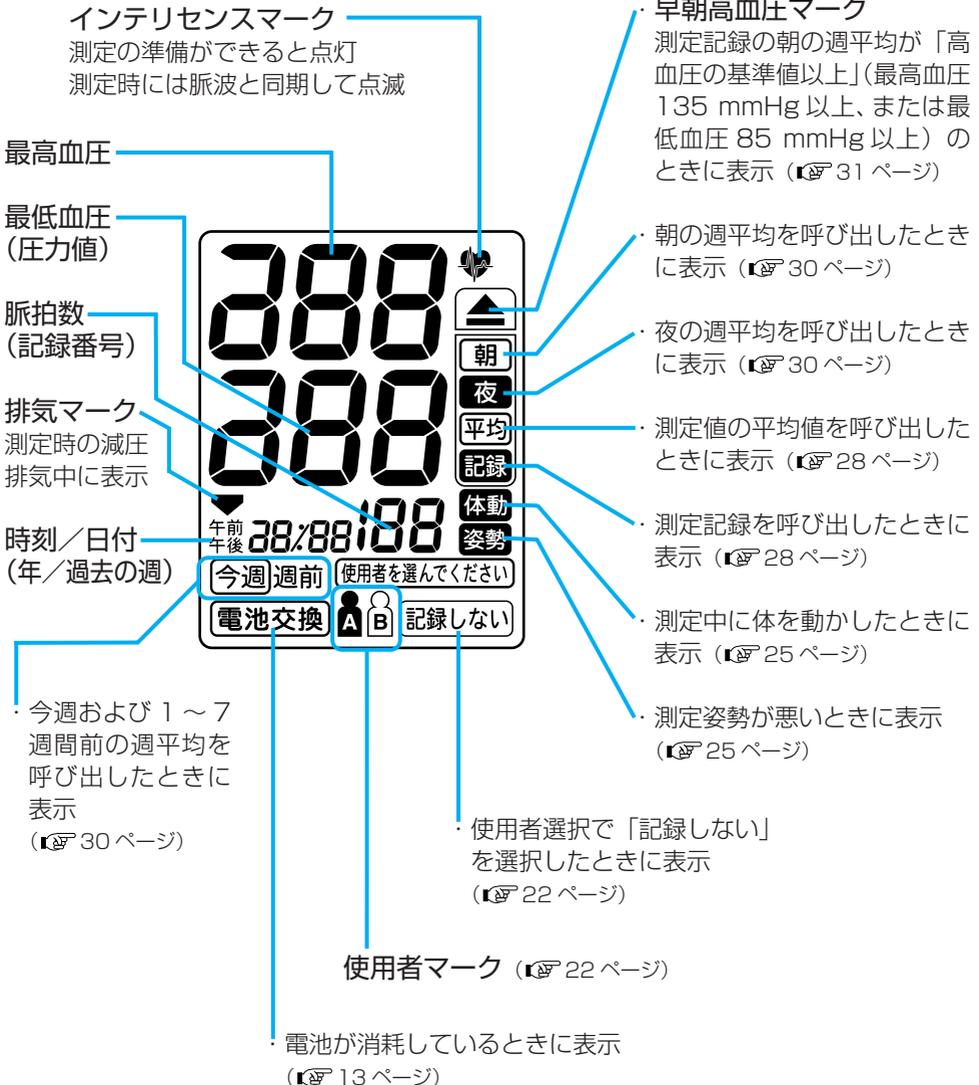



この血圧計の使い方

HEM-1010 は、
このような流れ
で使います。


ご使用の前に

1

電源の
準備

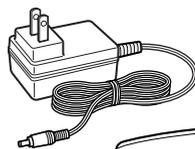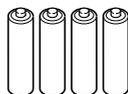

電源を用意します。

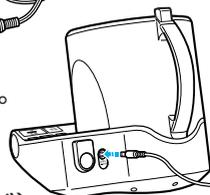

(☞ 11 ページ)

2

時計
合わせ



測定した日時を記録するためには、
必ず日付と時刻を合わせてください。




時計を合わせないと、測定ができません。

(☞ 14 ページ)

早朝高血圧確認機能

朝の週平均の値が「高血圧の基準値以上」
(最高血圧 135 mmHg 以上、または最低
血圧 85 mmHg 以上) のとき、早朝高血
圧マークが点灯します。

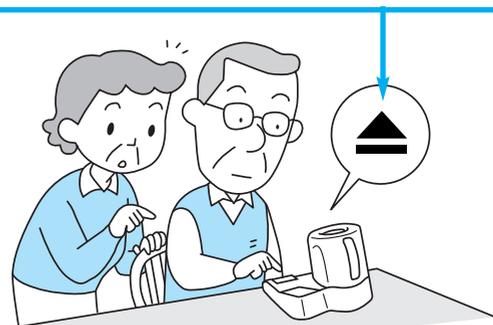

測定する

3
測定



- 1 腕帯に腕を通す
(☞ 17 ページ)
- 2 正しい姿勢の確認
(☞ 19 ページ)
- 3 血圧の測定
(☞ 21 ページ)

4
記録を
見る



- 測定記録の呼び出し
(☞ 28 ページ)
- 週平均の呼び出し
(☞ 30 ページ)

使用者を A、B と選択することで、1 台の血圧計を 2 人で使い分けることができます。ご夫婦でお使いになる場合などに便利な機能です。



測定結果は自動的に記録

- ・測定記録：84 回分 × 2 人分
 - ・朝の週平均記録：8 週間分 * × 2 人分
 - ・夜の週平均記録：8 週間分 * × 2 人分
- (* 8 週間分 = 今週と過去 7 週間分)

電源を準備する


日付・時刻の設定を保持するために、まず本体に電池を入れてから、専用 AC アダプタを接続します。

- ・専用 AC アダプタを使う場合でも、本体に電池を入れてください。電池を入れることで時計の設定が保持できます。
電池を入れずに使用していて、専用 AC アダプタをコンセントから抜くと、時計が止まってしまいます。(それまでに記録された測定値は消去されません)。
- ・専用 AC アダプタを使用すると、表示部にバックライトが点灯し、画面がより見やすくなります。電池のみで使用する場合は、バックライトは点灯しません。
- ・専用 AC アダプタと電池を併用すると、電池の消耗が遅くなります。

1 腕帯が本体に固定されていることを確認し、本体を裏返す


2 電池カバーを外す

電池カバーを押してから矢印方向にずらします。

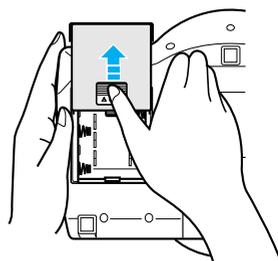

3 電池を図の表示に合わせて入れる

ばねの出ているほうが⊖です。

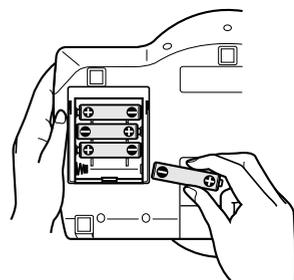


4 電池カバーを閉める

外したときと逆の手順でカチッと音がするまで閉めます。

5 専用 AC アダプタの本体用プラグを、
血圧計の背面にある専用 AC アダプタ用
コネクタに差し込む

※専用の AC アダプタ以外はご使用にならないでください。

6 専用 AC アダプタの電源プラグを
コンセントに差し込む

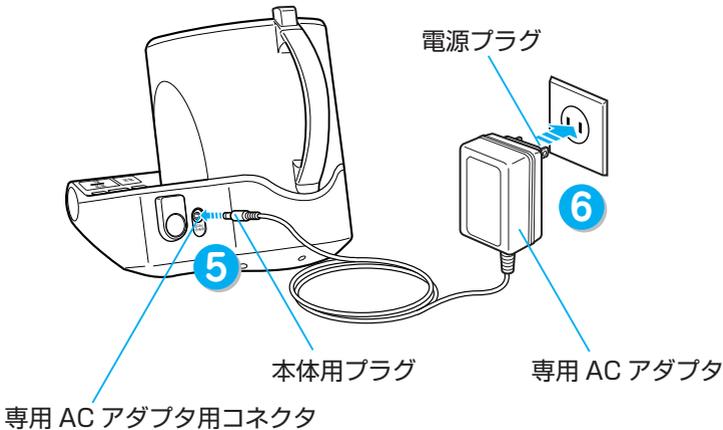

電源を準備する

電池の寿命と交換について

- ・電池のみで使用する場合、ご使用条件によって電池寿命は変わります。参考事例として電池寿命は以下の通りです。

(単3形アルカリ乾電池4本使用)

室温 23℃、170 mmHg 加圧、腕周 25 cm の場合：約 250 回

室温 15℃、210 mmHg 加圧、腕周 17 cm の場合：約 55 回

※測定回数は電池のメーカーや保存期間、使用温度、加圧値・腕周により大きく異なります。

※特に冬場は付属している専用 AC アダプタのご使用をおすすめします。

※付属の電池はお試し用です。測定回数以内に寿命が切れることがあります。

■「電池交換」マークが出たら…

「電池交換」点滅：まもなく電池がなくなります。

「電池交換」点灯：電池が消耗しています。

4本同時に新しい電池（同じ種類のもの）と交換してください。



電池交換

電池交換

※電池交換の際は必ず電源を切ってください。電源が入ったまま電池を外すと、時計が止まってしまいます（それまでに記録された測定値は消去されません）。

※日付と時刻が設定済みの場合は **30秒以内に** 電池を交換してください。30秒以上電池を外していると、時計が止まってしまいます。その際はもう一度、日付・時刻の設定をしてください。

※上記の方法で電池交換をしなかった場合、週平均値の週の更新がされないことがあります。

※使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

時計を合わせる

時計を合わせないと、測定ができません。

電源を準備したら、必ず**日付と時刻**を合わせてください。

この血圧計は測定結果を日時とともに自動的に記録します。測定記録や朝の週平均・夜の週平均を呼び出したり、早朝高血圧を確認するには最初に時計合わせが必要です。

※継続的な血圧管理のためにも、日付・時刻を正しく合わせてご使用ください。

※電池を長時間外したり、緊急排気スイッチを押したときなどは、時計が止まってしまいます。その際はもう一度日付・時刻を合わせてください。

日付・時刻を合わせる

西暦年、月、日、時、分の順に合わせていきます。

(設定された日付と時刻を変更する場合は…  16 ページ)

本機は時計設定用スイッチと週平均スイッチを共用しています。

時計設定は以下のスイッチを読み替えて操作してください。



 夜平均スイッチ：日付／時計設定時、数値を進めるときに使います。

 朝平均スイッチ：日付／時計設定時、数値を戻すときに使います。


1 電源スイッチを押して、電源を入れる

表示部が全点灯した後、「西暦年」が点滅します。

※右図は使い始めや、時計が止まった後に電源を入れたときの表示です。

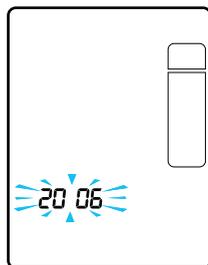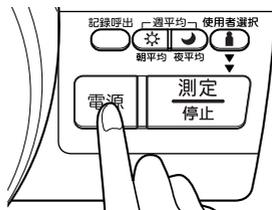

2 夜平均スイッチを押して「西暦年」を合わせる

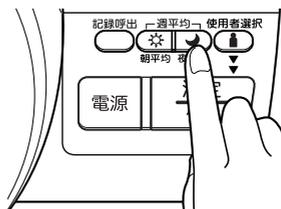

◎  夜平均スイッチを 1 回押すと  →  1 年進みます。

 朝平均スイッチを 1 回押すと  →  1 年戻ります。

◎スイッチを押し続けると自動的に 1 年ずつ進み (戻り) ます。


※設定範囲は「2006」～「2030」年です。
2030 年まで進むと、2006 年に戻ります。

時計を合わせる

ご使用の前に

3 記録呼出スイッチを押して「西暦年」を決定する

「西暦年」が設定され、「月」が点滅します。

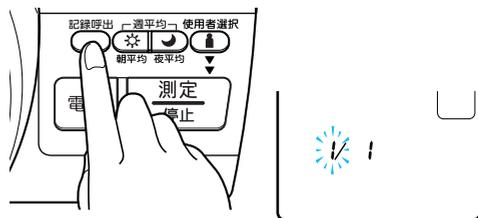

4 夜平均スイッチを押して「月」を合わせる

- ◎夜平均スイッチを1回押すと、1月進みます。
朝平均スイッチを1回押すと、1月戻ります。
- ◎スイッチを押し続けると自動的に1月ずつ進み（戻り）ます。

5 記録呼出スイッチを押して「月」を決定する

「月」が設定され、「日」が点滅します。



10月に設定した例

6 夜平均スイッチを押して「日」を合わせる

- ◎夜平均スイッチを1回押すと、1日進みます。
朝平均スイッチを1回押すと、1日戻ります。
- ◎スイッチを押し続けると自動的に1日ずつ進み（戻り）ます。

7 記録呼出スイッチを押して「日」を決定する

「日」が設定され、「時」が点滅します。



8 同じように「時」「分」を設定する

夜平均スイッチ（朝平均スイッチ）を使って「時」「分」を合わせ、記録呼出スイッチを使って決定してください。

設定が終了すると右の画面になります。



9 電源スイッチを押して、電源を切る

※電源を切らずに、このまま測定することもできます。


時計を合わせ直すには

ご使用開始後に、設定した時刻を変更する場合は、血圧計に表示されている時刻が、**午前 10:00 ~ 午後 6:59 の間**におこなってください。

※上記以外の時間帯に時刻を変更すると、測定記録が正しく表示されないことがあります。


日付を変更した場合も、測定記録が正しく表示されないことがあります。

- ① 電源を入れて、測定待ち画面（右図）のときに、記録呼出スイッチを3秒以上押し続けます。

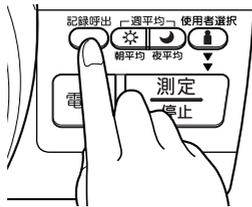

測定待ち画面の例
(腕帯を閉じた状態)

- ② 画面が切り替わり「西暦年」が点滅します。

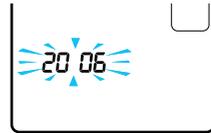

以下、14 ~ 16 ページの手順 2 ~ 9 に従って設定し直してください。

※長期間使用しないでいて、時刻が合っていないときは、日付と時刻を正しく設定し直してください。再度使用されるときは、記録をすべて消去してご使用ください。(測定記録の消去のしかた  34 ページ)


腕帯に 腕を通す

素肌または薄手の肌着などで測定してください。
※厚い衣服を着ている場合は、腕まくりをせずに脱いでから測定してください。


トイレは先に済ませましょう
寒すぎたり暑すぎたりしない部屋で測りましょう

1 腕帯開くスイッチを押し、 腕帯を開く

腕帯開くスイッチ

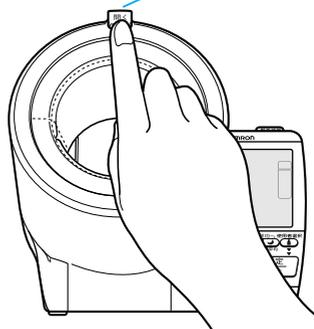


腕帯が動く範囲は、右図の
ようになっています。

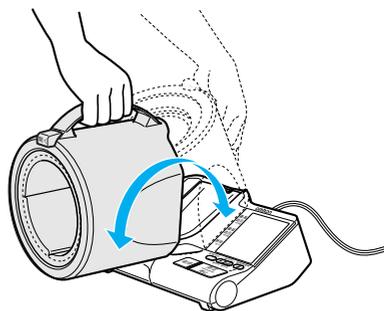


2 腕帯に左腕を通す

腕帯の布カバーは
取り外さないでください。
万一、外れてしまった場合は
オムロンお客様サービスセンター
までお問い合わせください。
(☎ 裏表紙)

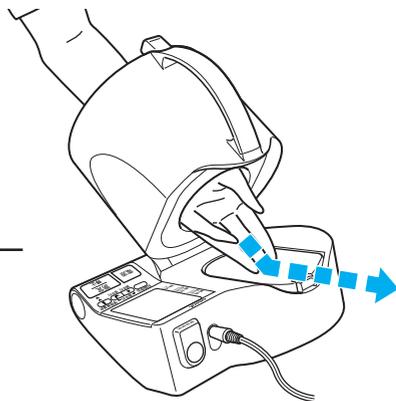

3 ひじを、ひじ置きのかぼみにのせる

くぼみに、ひじをのせます

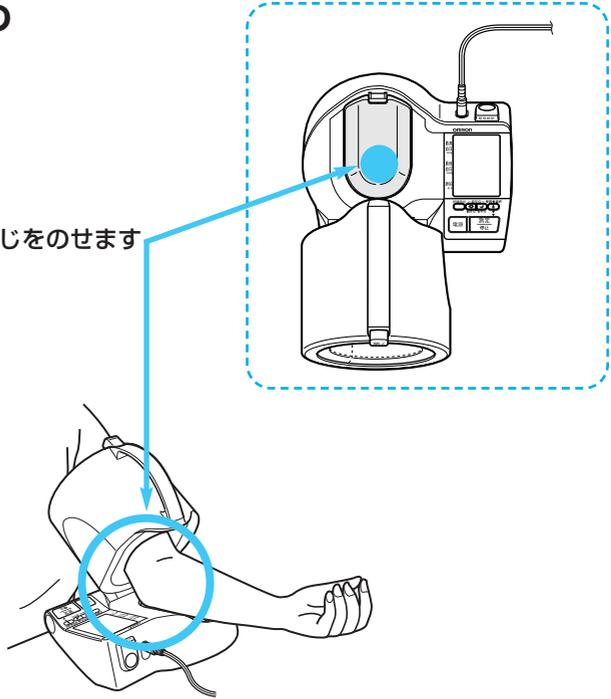

測定のしかた

右腕で測定する場合

17～18ページの手順2～3を参考に、右図のように右腕を通してください。



4 正しい姿勢になっているか確認する

次ページの図を参照してください。

正しい姿勢を確認する

測定のしかた

背筋を
のばす


素肌または
薄手の肌着
などで測定
する

腕帯の
中心は
心臓(乳頭)
と同じ
高さ

テーブルとイスの
高さの差は、
25~30cmが理想

ご家庭のテーブルとイスの高さの差は
一般的に20~35cm(座卓の場合は、
座面との高さの差)です。

血圧計はテーブルの手前に寄せてください

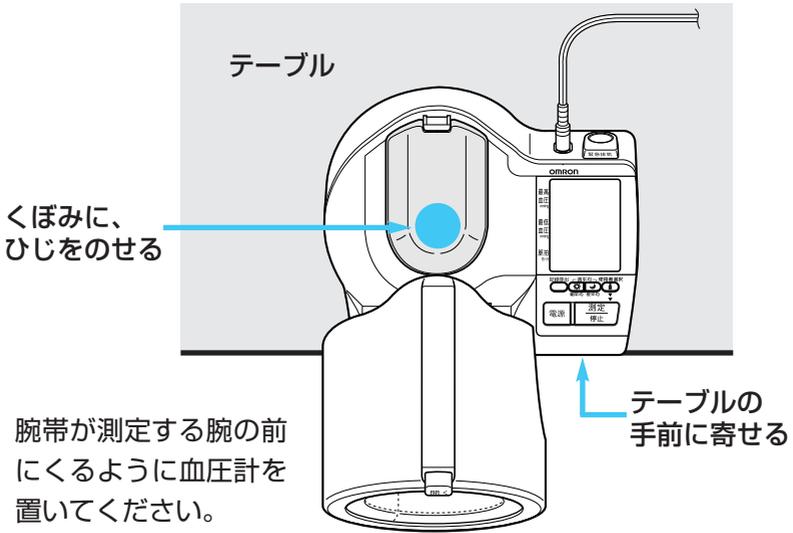

前かがみで測定すると、おなかを圧迫し、測定値に誤差が生じることがあります。次のような場合は正しく測定できません。

血圧計をからだから遠くに置いている場合



ソファや低いテーブルなど心臓の高さよりも低い位置に血圧計を置いている場合



血圧を測定する

毎日同じ時間帯に測定して、血圧管理に役立ててください。



※最高血圧が 170 mmHg を超えると予測される方は 27 ページ (手動加圧のしかた) をご覧ください。

1 からだの力を抜いて、リラックスしましょう


緊張感があるときは、深呼吸してみてください。

2 電源スイッチを押して、電源を入れる


電源スイッチを押すと電源が入り、
下図のように表示されます。

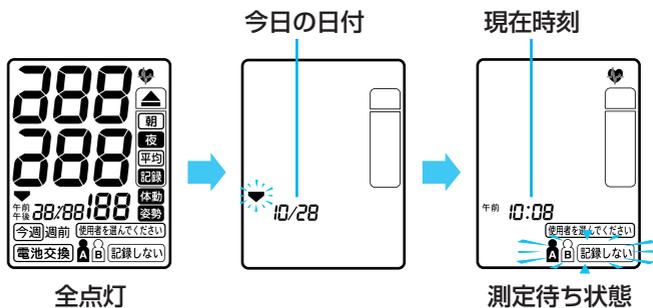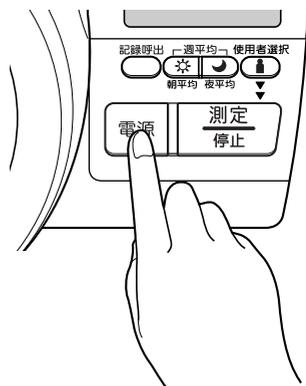

電源を入れたときに、右図のように「西暦年」が点滅表示する場合は、日付と時刻を合わせてください。(時計の合わせ方 14 ページ)

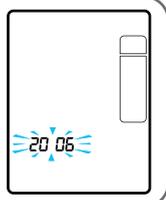


3 使用者選択スイッチを押して、
使用者を選択する

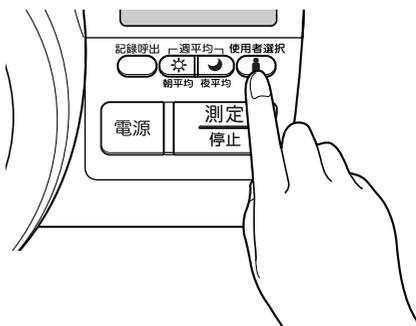

測定のしかた

使用者選択スイッチを押すごとに、以下のように使用者が切り替わります。

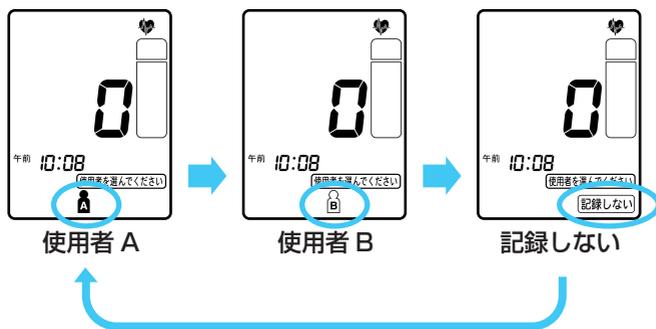

※「記録しない」を選択すると、その測定結果は記録されません。

※使用者を選択せずに測定／停止スイッチを押すと、「記録しない」と表示されて測定を開始し、測定結果は記録されません。


つづく

血圧を測定する

4 姿勢を確認する

正しい測定姿勢でない場合、表示部に **姿勢** マークが点灯します。
正しい姿勢になっているか確認してから測定を始めてください。

※腕帯に腕を通していない場合も、腕帯の角度によって **姿勢** が点灯します。

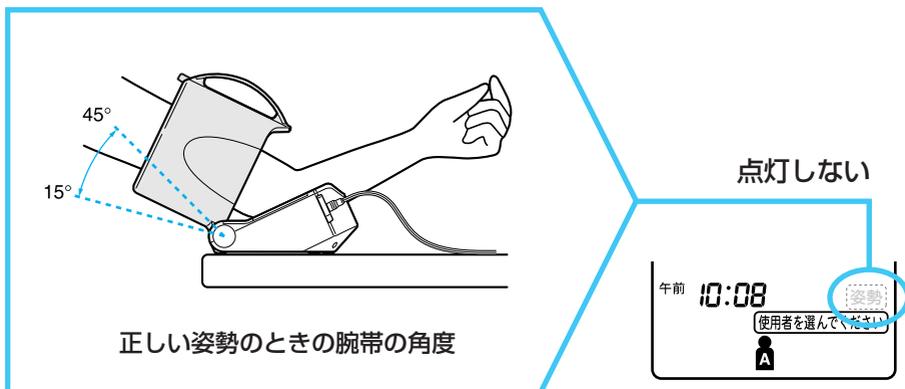



測定
のしかた

5 測定／停止スイッチを 1 回押して、測定を始める

測定中はからだを動かさず、
静かにしてください。

※測定中でも、正しい姿勢でないときは、
姿勢 が点灯しますが、測定は継続します。
(正しい姿勢になると、**姿勢** は消えます。)

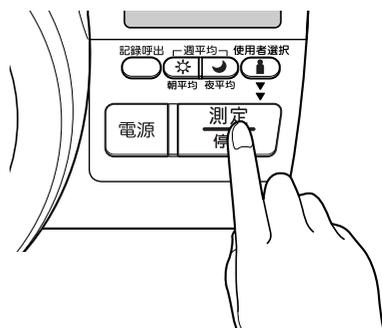

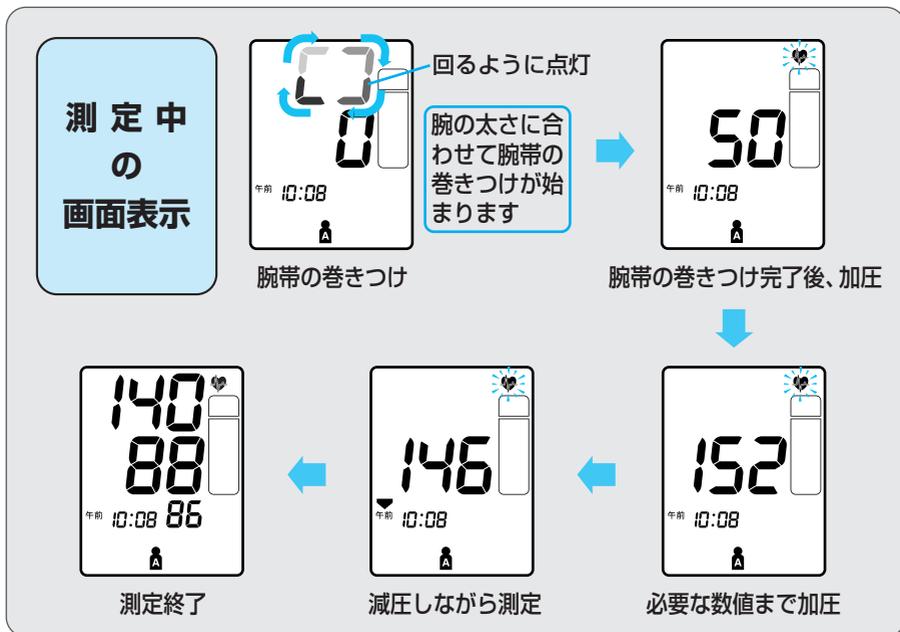

測定のしかた

これで測定は終了です。

※加圧が足りない場合は、自動的に再加圧されることがあります。(自動再加圧は1回のみ)

■測定を途中で中止したいときは…

電源スイッチまたは測定/停止スイッチを押すと、測定が止まり腕帯の空気が抜けます。
 ※安全のため、上記以外のいずれのスイッチを押しても測定を中止することができます。

■電源スイッチまたは測定/停止スイッチを押しても加圧が止まらないときは…

本体背面の緊急排気スイッチを押してください。

※緊急排気スイッチを押すと、時計が止まってしまうので、もう一度日付・時刻の設定をしてください。




血圧を測定する

6 測定値を確認する

測定結果は血圧計が自動的に記録します。
(測定記録を呼び出す  28 ページ)

※使用者選択で「記録しない」を選択したときは、その測定結果は記録されません。

※測定結果の自己判断、治療は危険です。必ず医師の指導に従ってください。

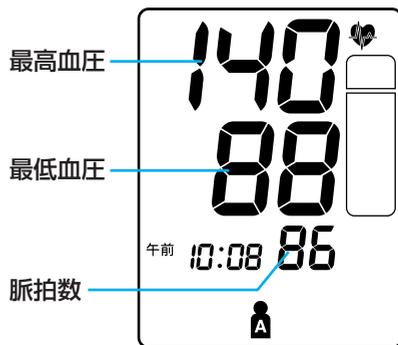

■「姿勢」や「体動」のマークが点灯したときは…

正しい姿勢で測定ができていない場合があります。

■ **姿勢** が点灯したときは…


測定中の姿勢が不適正でした。
姿勢に注意して、もう一度測定してください。
( 23 ページ)



※ **姿勢** はしばらくすると消えて、その後は現在の腕帯の角度の状態を表示します。

■ **体動** が点灯したときは…

測定中にからだが動いたことなどにより、正しく測定できていない場合があります。もう一度測定することをおすすめいたします。

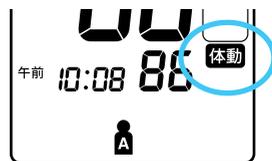

■ エラー表示「E」や「EE」が出たときは…

測定が正常におこなわれていません。

( 43 ページ)




■ 続けて測定するときは間隔を空けてください

連続して測定すると、腕がうっ血状態になり正しい測定ができない場合があります。腕のうっ血がとれたあとにもう一度測定してください。( 36 ページ)

7 腕帯を元に戻す

腕帯から腕を抜き、腕帯を元の位置に戻します。
カチッと音がして本体に固定されます。

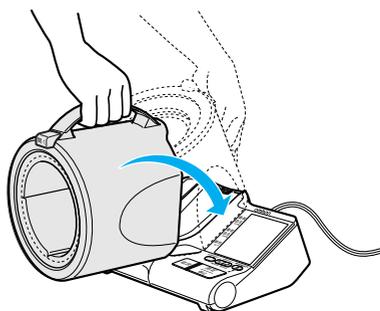

8 電源スイッチを押して、電源を切る

※電源を切り忘れても、約5分後に自動的に電源が切れます。

(お手入れと保管のしかた  48 ページ)


手動加圧 のしかた

最高血圧値が 170 mmHg を超えると予想される方は手動加圧で測定してください。

自動測定がうまくいかない方（何度も EE の出る方）も手動で測定してください。

- 1 腕帯に腕を通して電源を入れ、
使用者を選択した後、
測定／停止スイッチを押し続ける

加圧が始まります。

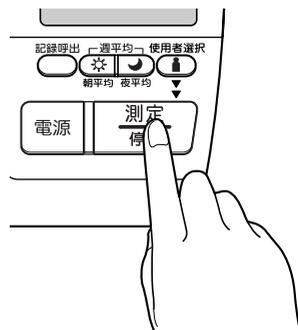

目的の値になるまで押し続ける

予想される最高血圧値より約 30 ~ 40 mmHg
高い値まで押し続けてください
(右図では 250 mmHg)。



※手動加圧では、299 mmHg まで加圧することができますが、必要以上に加圧をしないでください。腕に一時的な内出血が発生することがあります。

※300 mmHg 以上加圧するとエラーになります。

- 2 目的の値まで上がったとき、
測定／停止スイッチを離す

減圧が始まり、測定を開始します。

- 3 以降の操作は 25 ~ 26 ページの手順 6 ~ 8 を参照ください

測定記録を呼び出す


この血圧計は、A、B 2 人分の血圧と脈拍を日時とともに自動的に記録し、呼び出すことができます。1 人につき、最新 3 回の測定平均値と 84 回分の測定記録、8 週間分*の朝と夜の週平均をそれぞれ呼び出すことができます。

◎記録された測定値が 84 回、または朝と夜の週平均が 8 週間分*を超えると、古い測定結果は消去され、新しい測定結果が記録されます。


(* 8 週間分 = 今週と過去 7 週間分)

記録を呼び出す

1 電源スイッチを押して、電源を入れる

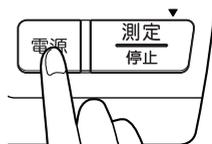



2 使用者選択スイッチで、使用者を選ぶ

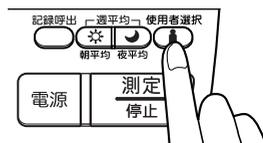

3 記録呼出スイッチを 1 回押して「平均値」を表示する

「平均値」が表示されます。

平均値：最新の測定記録から 10 分以内に測定された測定値（最大 3 回）の平均値です。短時間に続けて測定したときの参考にしてください。

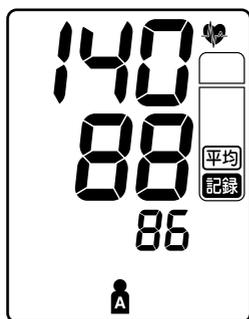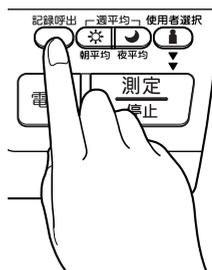



使用者 A の
平均値表示例



測定記録を呼び出す

- 4** 平均値表示中に
記録呼出スイッチを1回押して、
最も新しい測定結果を表示する

記録されている最も新しい測定結果が表示されます。

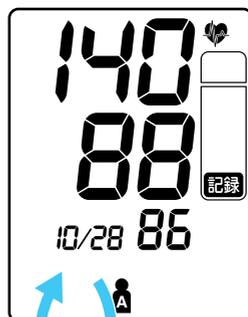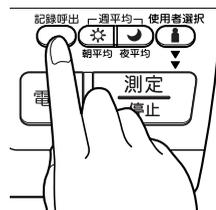


日付と時刻が交互に
表示されます



- 5** 記録呼出スイッチで過去の測定結果を見る

◎記録呼出スイッチを押す
たびに1つ古い測定結果
が表示されます。

◎スイッチを押し続けると
最も古い測定結果まで早送りできます。

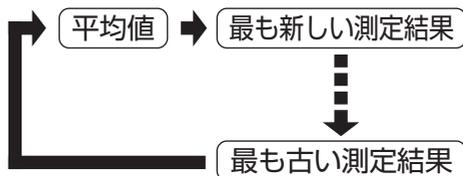

※測定時に **姿勢** や **体動** が点灯したときは、その記録を呼び出したときにも
点灯します。(姿勢 はしばらくすると消えて、その後は現在の腕帯の角度の状態を表示します。)

- 6** 電源スイッチを押して、電源を切る

※電源を切り忘れても、約5分後に自動的に電源が切れます。

週平均を呼び出す

この血圧計は、朝と夜の血圧値をそれぞれ週単位で平均して記録します。

朝・夜それぞれ今週と過去7週間分の週平均を呼び出すことができます。

朝平均・夜平均を呼び出す

1 電源スイッチを押して、電源を入れる



2 使用者選択スイッチで、使用者を選ぶ



3 朝平均スイッチ、または夜平均スイッチを押して、それぞれの週平均を呼び出す

朝の週平均表示例
(使用者 A / 今週 / 早朝
高血圧確認の場合)




.....早朝高血圧マーク
(☞ 31・32 ページ)

☀ 朝平均スイッチを押す→朝の週平均

🌙 夜平均スイッチを押す→夜の週平均

※週平均の詳細は (☞ 33 ページ)

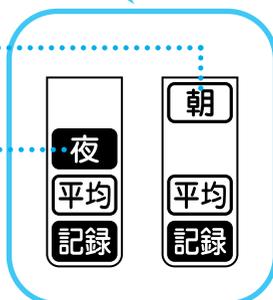


週平均を呼び出す

◎朝平均または夜平均スイッチを押すごとに、下のように表示されます。



※記録がないときは右図のような表示になります。
(右の表示例は朝平均の1週間前の記録がない場合)

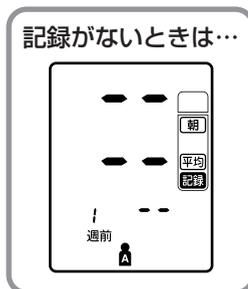

早朝高血圧マークについて



週平均を呼び出したとき、表示された週の**朝平均の値が「高血圧の基準値以上」**(最高血圧 135 mmHg 以上、または最低血圧 85 mmHg 以上*) のとき、早朝高血圧マークが点灯します。

*日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2004 年度版 (2004 年 12 月) による

4 週平均の表示を終わる

電源スイッチを押して、電源を切ります。

※電源を切り忘れても、約 5 分後に自動的に電源が切れます。

早朝高血圧確認機能の見方

- ・朝平均が高血圧の基準値以上の場合、早朝高血圧マークが点灯します。
- ・朝(夜)平均が高血圧の基準値以上の場合、「朝平均マーク」(「夜平均マーク」)が点滅します。
- ・早朝高血圧マークは朝平均・夜平均どちらの呼び出し時でも確認できます。
- ・「高血圧の基準値以上」とは週平均の値が最高血圧 135 mmHg 以上、または最低血圧 85 mmHg 以上のときを意味します。


	朝平均の値が 高血圧の基準値 以上 の場合		朝平均の値が 高血圧の基準値 未満 の場合	
朝平均を呼び出したときに	 <p>早朝高血圧マーク : 点 灯</p> <p>朝平均マーク : 点 滅</p>		 <p>早朝高血圧マーク : 消 灯</p> <p>朝平均マーク : 点滅しない</p>	
	夜平均を呼び出したときに	 <p>早朝高血圧マーク : 点灯</p> <p>夜平均マーク : 点滅</p> <p>夜平均の値が 高血圧の 基準値 以上</p>	 <p>早朝高血圧マーク : 点灯</p> <p>夜平均マーク : 点滅しない</p> <p>夜平均の値が 高血圧の 基準値 未満</p>	 <p>早朝高血圧マーク : 消灯</p> <p>夜平均マーク : 点滅</p> <p>夜平均の値が 高血圧の 基準値 以上</p>

測定のみかた

週平均を呼び出す

週平均値がどのように計算されているかを説明します


朝の週平均値とは

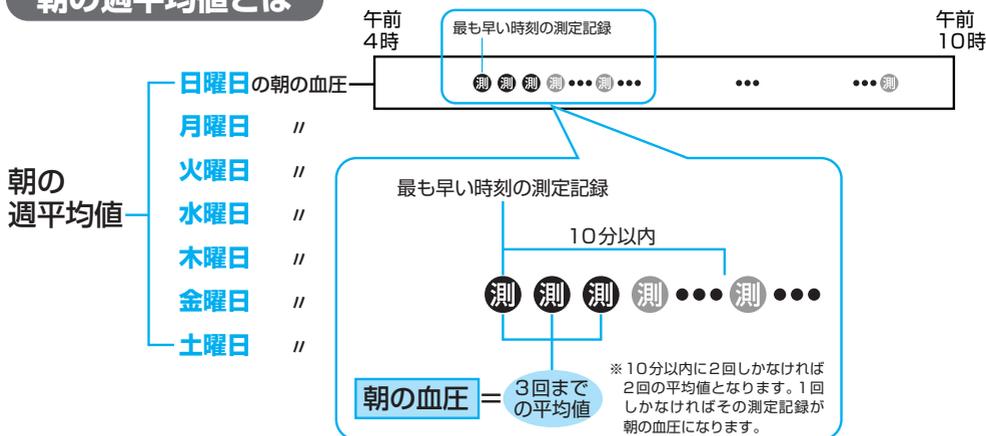

朝の週平均値：日曜日～土曜日の「朝の血圧」の平均値です。

朝の血圧：午前4時から午前10時の間で、最も早い時刻の測定から10分以内で、最初から3回までの測定記録の「平均値」です。

夜の週平均値とは

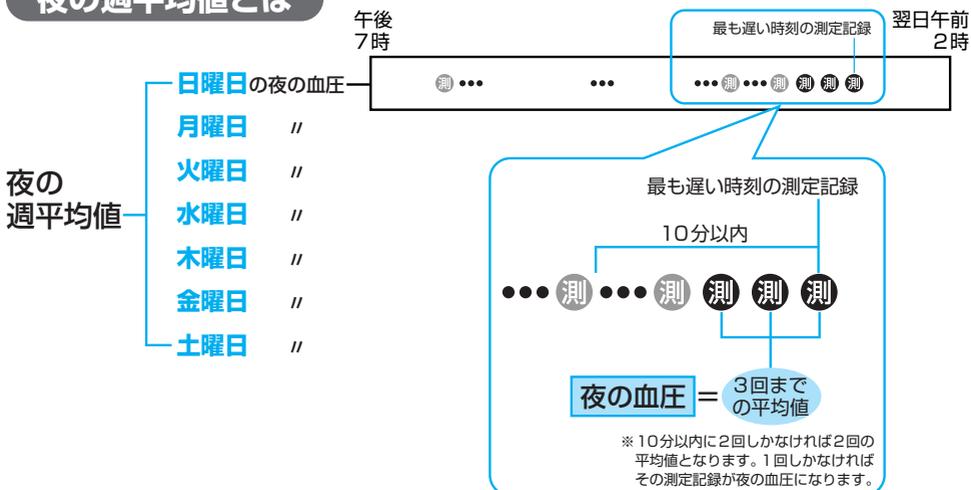

夜の週平均値：日曜日～土曜日の「夜の血圧」の平均値です。

夜の血圧：午後7時から翌日午前2時の間で、最も遅い時刻の測定記録より前10分以内で、最後から3回までの測定記録の「平均値」です。

測定記録の 消去のしかた


測定記録と週平均記録を使用者ごとにすべて消します。

※1つずつ消すことはできません。

1 電源スイッチを押して、電源を入れる




2 使用者選択スイッチで、使用者を選ぶ

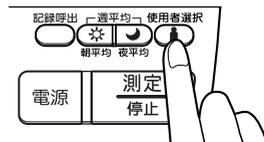


3 記録呼出スイッチを押しながら、
測定/停止スイッチを約3秒間押し続ける

※測定/停止スイッチを先に押さないでください。
先に押すと測定が始まります。

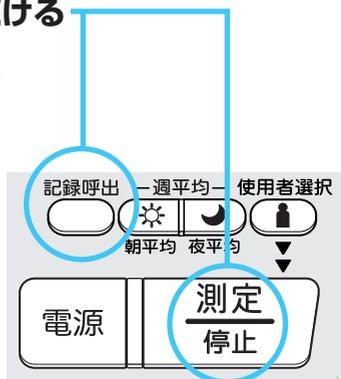

右のような画面が表示
されて消去完了です。

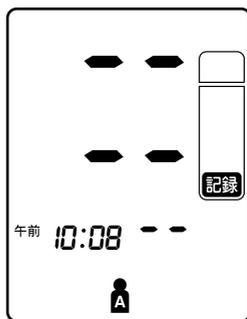

4 操作を終わる

電源スイッチを押して、電源を切ります。

測定 Q&A

(測定値が高い／低いときなど)

Q 病院での値に比べて低いのですが…

A 病院で測ったときに、緊張していませんか？

自宅では、気持ちが落ち着いているため、病院で測るよりも 20～30mmHg 低くなる場合があります。

自宅での安定した測定値を知っておくことが大切です。

A 測定時に、腕帯の位置が心臓より高かったのでは…

血圧計をのせるテーブルや台が高かったりして、腕帯の位置が心臓より高くなってしまうと、血圧は低くなる場合があります。

Q 病院での値に比べて高いのですが…

A 降圧剤を飲んでいませんか？

時間の経過によって、薬の効果が切れると高くなる場合があります。医師にご相談ください。

A ひじを、ひじ置きのかぼみに、のせていますか？

腕帯の位置がずれていると、動脈からの信号をとらえにくくなり、血圧は高めに測定されてしまいます。

ひじの位置を確認しましょう。(☞ 18 ページ)


A 猫背やあぐらをかくなどして、測定していませんか？

猫背、あぐらをかき、ソファや低いテーブルで前のめりになり測るなどの姿勢は、腹圧がかかったり、腕帯の位置が心臓よりも低くなるため血圧値は高くなる場合があります。

Q 測るたびに測定値が違うのですが…

A 同じ時間帯で測定していますか？

1日の中でもこんなに変動しています。(10秒おきに測定)

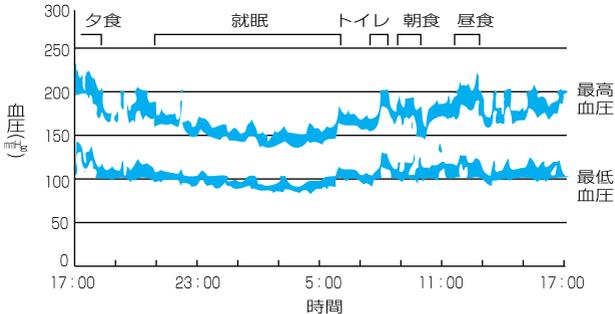

上腕血圧のデータ (横浜市立大学医学部 朽久保 修 先生ご提供)

正しい血圧管理のために、毎日同じ時間帯で測定しましょう。

A 血圧はいろいろな要因で変動します

自宅で測定したときでも、次のようなときは測定値が変わることがあります。

- ・食事の後 1 時間以内
- ・お酒、コーヒー、紅茶を飲んだ後
- ・喫煙の後
- ・入浴の後
- ・運動の後
- ・排尿、排便の後
- ・測定中の会話
- ・緊張や不安で心が落ち着いていない
- ・室温が急に变化した
- ・測定場所や環境がいつもと違う

A 続けて測定して、うっ血していませんか？

腕が圧迫されると、手先に血液が溜まる、うっ血状態になることがあります。うっ血をとるには、腕帯から腕を抜いて、手を高く上げ、手のひらを握ったり開いたり運動を 15 回くらい繰り返してください。

Q 腕帯の締め付けで、痛みやしびれを感じるのですが…

A 一時的なもので、心配ありません

血圧測定時は、動脈の血液の流れを一時的に止まるまで締める必要があります。痛みやしびれを感じることがありますが、腕帯から腕を抜いてしばらくすると治まります。

Q 測定する時刻はいつがよいですか？

A 朝なら起床後 1 時間以内、夜なら就寝前

朝に測定する場合は起床後 1 時間以内、排尿後、座位 1～2 分安静後、朝食前、降圧剤を飲んでいる場合は服用前に血圧を測定しましょう。

夜に測定する場合は就寝前、座位 1～2 分安静後に血圧を測定することをおすすめします。

そのほかの時間では、からだも心も安定しているときが適しています。

また、同じ時間帯で測定することをおすすめします。

Q 家庭での血圧管理のコツは？



A 血圧値だけでなく、薬の服用や生活の状態も記録しましょう

毎日血圧を記録すると、ご自分の血圧の変動傾向を知ることができ、健康管理に役立ちます。また、医師の診断をうけるときにも大変役に立ちます。正確に判断するには、血圧値だけでなく測定条件（降圧剤等の服用・生活の状態など）を併せて記録しておくことをおすすめします。

血圧豆知識


血圧とは

血液は、心臓というポンプの拍動（収縮したり拡張したりすること）によって動脈へ送り出されています。血液を動脈に送り出すときの圧力を「最高血圧」といい、全身を巡った血液が戻ってきて心臓が拡張したときの圧力を「最低血圧」といいます。

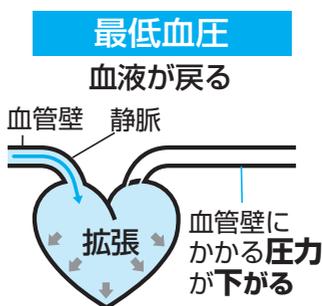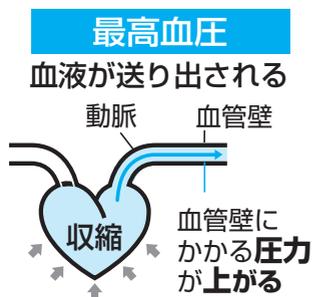

健康と血圧

血圧は日常生活や年齢の影響を受け変化しています。高血圧は動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞などの危険な病気を引き起こしやすくなっている兆候です。血圧の状態を知ること、健康と生活習慣を見直すきっかけにしてください。

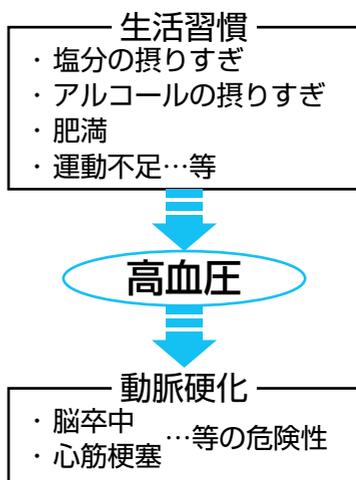

困ったときに・保証など

高血圧の程度を知るめやす

近年、世界の主な学会では家庭における高血圧のめやすは以下の通りとされています。



出典：日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2004年度版（2004年12月）


血圧の状態を知るめやすとして利用してください。

※心配な場合は必ず医師の指導を受けてください。

世界保健機関の血圧分類

病院での血圧測定をもとにして世界保健機関（WHO）、国際高血圧学会（ISH）では、下図の血圧の分類を制定しています。これは年齢に関係なく病院でイスに座り、上腕で測定した値に基づいています。

※低血圧に定義はありません。一般に最高血圧が100 mmHg未滿の人が低血圧とみなされています。

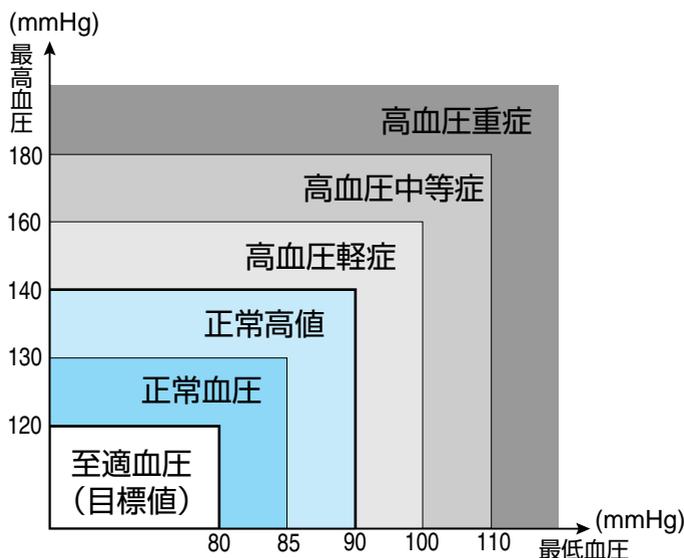

※WHO/ISH* 血圧分類による(1999年改訂)

*International Society of Hypertension


早朝高血圧について

■早朝高血圧とは

血圧は一日のうちでも、かなり変動します。変動のしかたは個人差がありますが、正常の血圧の人では、起床後、徐々に上昇して昼ごろにピークになり、やや下がって夕方ごろにもう一度ピークとなり、また徐々に低下して深夜に最も低くなります。

しかし、この血圧の変動パターンが変化して、朝方の血圧が急上昇するケースがあり「早朝高血圧」と呼ばれ注目されています。

降圧剤を服用している方の場合、朝食後に薬を飲んで血圧が下がり、昼間に病医院で血圧を測ったときには正常の値である可能性もありますので注意が必要です。

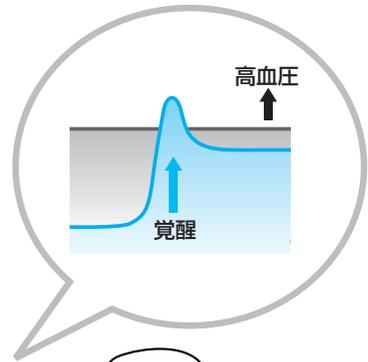


困ったときに・保証など

■心筋梗塞や脳卒中との関係

早朝から正午にかけて自律神経が活性化されるため、血圧は高く、血液は固まりやすくなっています。心筋梗塞や脳卒中などの危険な病気が早朝から正午にかけて多く生じている原因の1つと考えられています。

医療施設で測る血圧ばかりでなく、家庭血圧を重視するのは早朝の高い血圧が家庭血圧でしか捉えられないというのも大きな理由の1つです。

早朝に増える心筋梗塞と血圧の上昇時間

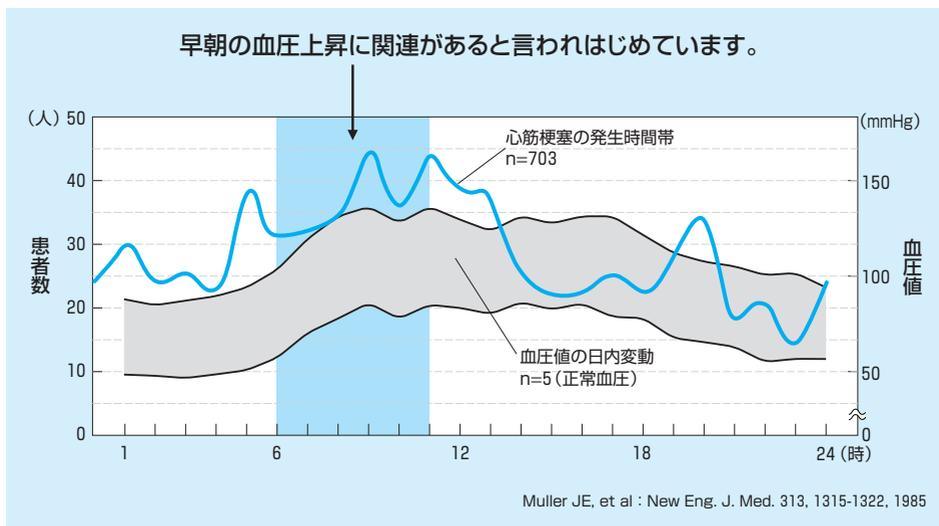


■朝の血圧測定

早朝高血圧を知るために、起床後1時間以内、排尿後、朝食前、降圧剤を飲んでいる場合は服用前に血圧を測定してください。

※血圧は常に変動しています。朝だけでなく、日中、就寝前などと時間を決めて一定の期間測りましょう。測定した血圧値は記録しておいて医師の指導を受けてください。

(何度か測定した場合は必ずすべての値をメモしておきましょう。)

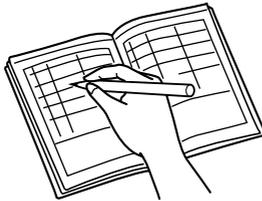


エラー表示が出たときは

測定が正常におこなわれないときは、次のようなエラー表示が出ます。

エラー表示	原因	対処のしかた
 <p>最高血圧表示部に「E」が横に2つ並んで出たとき</p>	測定中に腕やからだを動かして、適切に加圧されなかった	<p>♥マークが点灯したことを確認後、腕やからだを動かさないようにして、もう一度測定してください</p> <p>再度「EE」が表示されるときは手動加圧で測定してください (☞ 27 ページ)</p>
 <p>最高血圧表示部に「E」が1つだけ出たとき</p>	腕帯に正しく腕を通していない	腕帯に正しく腕を通してください (☞ 17 ページ)
	まくりあげた上着（または下着）で腕を圧迫している	上着（または下着）を脱いで腕帯に腕を通してください (☞ 17 ページ)
	腕帯が空気漏れしている	オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください (☞ 裏表紙)
 <p>「E」が縦に2つ出たとき</p>	測定中に腕やからだを動かした	♥マークが点灯したことを確認後、腕やからだを動かさないようにして、もう一度測定してください
	手動加圧で 300mmHg 以上加圧した	手動加圧で 300mmHg 以上加圧しないでください

※測定中、不適正な姿勢をとったり、からだを動かしたりすると、上記エラー表示のときに **姿勢** マークや **体動** マークが表示されることがあります。

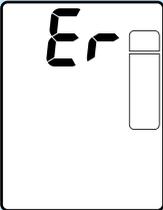エラー表示	原因	対処のしかた
 <p>「電池交換」が出たとき</p>	<p>電池が消耗している</p>	<p>4本同時に新しい電池と交換してください (☞ 11 ページ)</p>
 <p>「Er」が出たとき</p>	<p>機能の異常による故障です</p>	<p>オムロンお客様サービスセンターまで修理依頼をお願いします (☞ 裏表紙)</p>

おかしいな？と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
血圧値が異常に 高く(低く) 測定される	腕帯に正しく腕を通して いない	腕帯に正しく腕を通して ください (☞ 17 ページ)
	測定中に会話をしたり腕 を動かしたりした	静かに測定して ください 測定 Q&A を参照して ください (☞ 25、35 ページ)
	まくりあげた上着(または 下着)で腕を圧迫している	上着(または下着)を脱いで腕帯に腕を 通してください (☞ 17 ページ)
	腕帯の布カバーが破れて いる	測定を中止し、オムロンお客様サ ービスセンターまでお問い合わせせ ください (☞ 裏表紙)
圧力が上がらない	腕帯が空気漏れしている	オムロンお客様サービスセンターま で修理を依頼してください (☞ 裏表紙)
血圧計が正常に動き、正しく測定しても… ・病院で測定してもらった値より高い(低い) ・測るたびに血圧値が違う		測定 Q&A を参照して ください (☞ 35 ページ)
加圧中に電源が切 れる 時計がリセットさ れる	長期間使用しなかったか 温度変化により電池が消 耗している	新しい電池と交換して ください (☞ 11 ページ)
バックライトが点 灯しない	専用 AC アダプタを接続 していない	電池のみ使用時では、バックライト は動作しません 専用 AC アダプタを正しく接続して ください (☞ 12 ページ)

こんなとき	原因	対処のしかた
時計設定済みでも、電源を入れると時計／日付表示部が点滅する	緊急排気スイッチを押した	もう一度時計を合わせてください (☞ 14 ページ) 電源が入っていなくても、緊急排気スイッチを押すと時計が止まってしまう。保管や持ち運びの際には、緊急排気スイッチに触れないようにしてください
	電池を外している時間が長かった	もう一度時計を合わせてください (☞ 14 ページ) 電池を30秒以上外すと時計が止まってしまう。電池交換は30秒以内でおこなってください
電源スイッチを押しても何も表示しない	電池が完全に消耗している	新しい電池と交換してください (☞ 11 ページ)
	電池の⊕⊖の向きが間違っている	電池を正しく入れてください (☞ 11 ページ)
	電池を入れずに使用している場合に、専用 AC アダプタが血圧計から外れている	専用 AC アダプタを正しく接続してください (☞ 12 ページ)
	電池を入れずに使用している場合に、専用 AC アダプタがコンセントから外れている	専用 AC アダプタを血圧計とコンセントに正しく接続してください (☞ 12 ページ)
測定が記録されていない	使用者選択で(記録しない)を選んだ、または使用者を選ばないで測定した	使用者 A または B を正しく選択してください (☞ 22 ページ)

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
電池を入れ替えたのに、すぐに使えなくなる	アルカリ乾電池以外を使用している	アルカリ乾電池をご使用ください
	アルカリ乾電池をご使用の場合、メーカーや保存期間、使用温度、加圧値・腕周により測定回数は大きく異なります (☞ 13 ページ) もし、新品のアルカリ乾電池を入れ、血圧計の電源を入れずに1週間ほどで電池がなくなるようでしたら製品の不良と思われます その場合はオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください (☞ 裏表紙)	
その他の現象		電源スイッチを押し直して、最初からやり直してください 電池を交換してみてください それでも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください (☞ 裏表紙)

困ったときに・保証など

※上記の方法でも、正常に測定ができない場合は故障が考えられます。製品の故障および修理の依頼につきましては、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(☞ 裏表紙)

※ごくまれにその方の体質上誤差を生じて測定できない方がおられます。このような場合にもオムロンお客様サービスセンターまでご相談ください。(☞ 裏表紙)

お手入れ と保管

ここに記載している注意事項、その他の正しい使用方法を必ずお守りください。


お守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

お手入れについて

血圧計はいつも清潔にしてお使いください。

本体の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

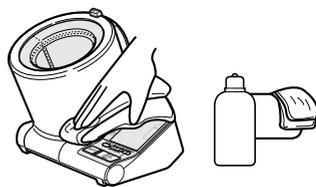

■お手入れ時のお願い

本体内部に水などが入らないようにしてください。

腕帯の布カバーは取り外さないでください。

腕帯をめらさないようにしてください。

汚れを落とすとき、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。



保管について

次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかるところ。
- ・高温・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。


■保管時のお願い

腕帯は閉じて保管してください。

血圧計をお使いにならないときや移動するときなどに、腕帯の中にももの（例：筆記用具やノート、専用 AC アダプタなど）を入れないでください。

腕帯の布カバーが破れたり本体が破損し、測定できなくなる原因になります。

長期間（3 カ月以上）ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

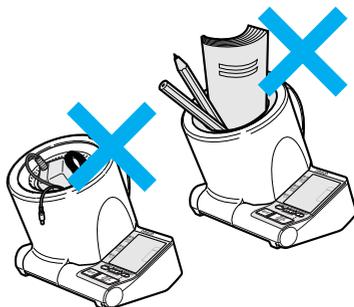

仕様

医療機器認証番号	218AGBZX00030000
類別	機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
一般的名称	自動電子血圧計
医療機器分類	管理医療機器

販売名	オムロンデジタル自動血圧計 HEM-1010
表示方式	デジタル表示方式
測定方式	オシロメトリック法
測定範囲	圧力 / 0 ~ 299 mmHg 脈拍数 / 40 ~ 180 拍毎分
測定精度	圧力 / ± 3 mmHg 以内 脈拍数 / 読み取り数値の ± 5 % 以内
加圧	自動加圧方式 (ファジィコントロール)
減圧	アクティブ電子制御方式
排気	自動急速排気方式
圧力検出	静電容量式圧力センサー
電源	単 3 形アルカリ乾電池 (4 本) 専用 AC アダプタ (AC100V)
電池寿命	単 3 形アルカリ乾電池使用時 約 250 回 (室温 23℃、1日 6 回 170 mmHg 加圧、腕周 25cm の場合) 約 55 回 (室温 15℃、1日 6 回 210 mmHg 加圧、腕周 17cm の場合)
装置寿命	5 年あるいは 30000 回のいずれか早く到達した方 (消耗部品を除く)
使用環境温湿度	+10 ~ +40℃、30 ~ 85% RH
保管環境温湿度	-20 ~ +60℃、10 ~ 95% RH
本体質量	約 1600 g (電池含まず)
外形寸法	幅 230 × 高さ 217 × 奥行き 228 mm
適用腕周範囲	腕周 17 cm ~ 32 cm (上腕中央部)
電撃保護	内部電源機器 B 形装着部
付属品	お試し用電池 (単 3 形アルカリ乾電池 4 本)、専用 AC アダプタ、 取扱説明書 (品質保証書付き)、医療機器添付文書
製造販売元	オムロンヘルスケア株式会社 住所: 〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地 電話: 0120-30-6606 (オムロンお客様サービスセンター)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

EMC 適合 本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2:2001 に適合しています。
本製品は JIS 規格 JIST1115:2005 に適合しています。


別売品について

別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター
(☎電話 0120-30-6606) までお問い合わせください。

次の別売品をご用意しています。

- 専用 AC アダプタ
型式 HEM-AC-N (60100H1000SW)

この専用 AC アダプタは本製品に付属しているものと同じです。

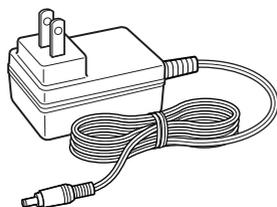

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございます。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

販売名 オムロンデジタル自動血圧計 HEM-1010

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名

印

住 所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗品のお求めも、この電話で承ります。修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

おむろんオムロン

電話

0120-30-6606

通話料無料

FAX

0120-10-1625

通信料無料

受付時間

9:00~19:00 月~金（祝日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通信料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。）