

WellnessLINK スタートアップガイド


「ウェルネスリンク」をご利用になる前に必ずお読みください

血圧計 — HEM-6310 シリーズ —

- マイグラフ**
血圧の変化がひとめでわかる
- 定期レポート**
毎月カラダを詳しく分析
- 朝晩血圧手帳**
家庭での測定記録を医師の診察に

「ウェルネスリンク」に登録すると、血圧計の設定や測定記録の管理がかんたんにおこなえ、さまざまなサービスを利用することができます。

5334675-2B

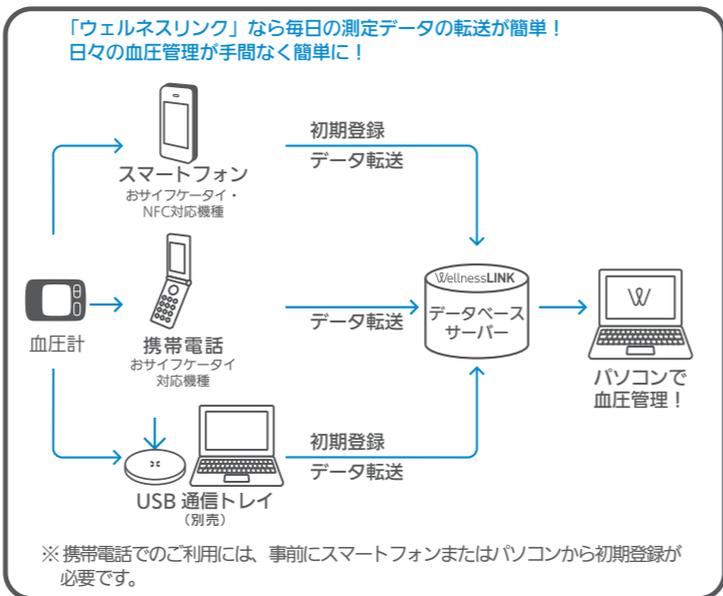

はじめにお読みください

オムロンの血圧計をお買い上げいただきましてありがとうございます

- 「ウェルネスリンク」への登録は、スマートフォン、パソコンからおこなえます。携帯電話から登録はできません。
- パソコンで登録をされる方は、別売の「オムロンUSB通信トレイ（HHX-IT3）」が必要です。登録はUSB通信トレイの取扱説明書にしたがってください。
- お使いのスマートフォンやパソコン、携帯電話が「ウェルネスリンク」推奨環境に対応していることをご確認ください。（※下記）
- 操作方法については、それぞれの取扱説明書をご参照ください。「ウェルネスリンク」に転送されたデータは当社が管理するサーバーに保管されます。（お使いのスマートフォンやパソコンには保存されません。）
- 「ウェルネスリンク」のサービスをご利用いただくには、1ユーザーにつき1つのメールアドレスが必要です。
- 「ウェルネスリンク」基本サービスでの測定記録の保管期間は6カ月です。
- 「ウェルネスリンク」に登録できる血圧計は1機種のみです。

この商品は、スマートフォン・パソコンに対応しています。
(携帯電話はデータ転送のみ)
「ウェルネスリンク」の推奨環境については、次のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

<http://wlm.jp/>



「ウェルネスリンク」の基本サービス

- ・マイグラフ
測るだけではわからないあなたの血圧の特徴がひと目でわかります。
- ・定期レポート
月に一度、あなたの測定記録や成果をレポートにしてお届けします。
- ・朝晩血圧手帳
家庭で測った朝晩の血圧測定記録を簡単に印刷。体重や歩数、服薬の状況など関連する指標も一緒に印刷できます。

サービスの詳細は次のサイトをご覧ください。

<http://wellnesslink.jp/>

または「ウェルネスリンク」で検索

※ウェブサイト・アプリの仕様および本ガイドに記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。


- ・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ (FeliCa プラットフォームマーク)は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・その他本ガイドに記載されているブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。

登録の前に

血圧計の準備をする

Step 1 電池カバーを外す

図のように電池カバーのツメを押し、手前に引いて外します。

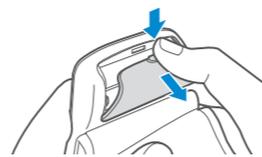


Step 2 電池を図の表示に合わせて入れる

ばねの出ているほうが⊖です。



Step 3 電池カバーを閉める

- ① 電池カバーを本体に取り付けます。
- ② ツメを押して閉めます。

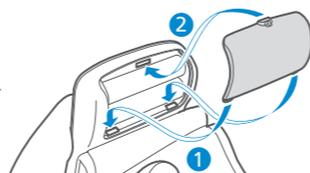

スマートフォンで登録・転送する

「ウェルネスリンク」のサービスをご利用いただくために、次の手順で初期登録をおこなってください。

「ウェルネスリンク」に登録する

はじめて「ウェルネスリンク」を利用される方

すでにユーザー登録をされている方は、『すでに「ウェルネスリンク」にユーザー登録されている方』（※5ページ）を参照し、機器登録をおこなってください。

Step 1 次のサイトにアクセスし、血圧計用のアプリをダウンロードする

<http://wlm.jp/>




Step 2 アプリを起動し、「新規ユーザー登録」をする

画面の指示にしたがって、登録してください。

Step 3 血圧計の「機器登録」をする

スマートフォンの FeliCa マークを血圧計の通信エリアマークに触れさせて機器登録をおこなってください。

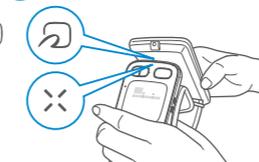

スマートフォンが血圧計を認識すると血圧計の表示が図のように変わり、自動的に転送が始まります。




- ・マークのないNFC対応機種でもお使いいただける場合があります。対応種をご確認ください。（※2ページ）
- ・スマートフォンのマークが血圧計の通信エリアからはみ出したり傾いたりしていると、正しく認識できないことがあります。
- ・正しく認識しない場合は、スマートフォンを前後左右にずらしてください。

※血圧計の電源が切れていても、電池が入っていれば、自動的に電源が入り、データの転送を開始します。

登録が完了すると、図のように通信OKマークが表示されます

スマートフォンを血圧計から離してください。

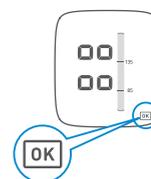

登録ができなかった場合、図のように表示されます

スマートフォンを血圧計から離し、血圧計の測定/停止スイッチを押して電源を切ってください。スマートフォンの指示にしたがってやり直してください。



以上で「ウェルネスリンク」への登録は完了です

すでに「ウェルネスリンク」にユーザー登録されている方

Step 1 次のサイトにアクセスし、血圧計用のアプリをダウンロードする

<http://wlm.jp/>



Step 2 アプリを起動し、ログインする

Step 3 スマートフォンの「メニュー」ボタンを押し、「設定」を選ぶ

Step 4

設定画面から「機器登録」を選ぶ

画面の指示にしたがって、機器登録をおこなってください。

スマートフォンの FeliCa マークを血圧計の通信エリアマークに
触れさせて機器登録をおこなってください。




スマートフォンが血圧計を認識すると血圧計の表示が図のように変わり、自動的に転送が始まります。



- ・マークのないNFC対応機種でもお使いいただける場合があります。対応機種をご確認ください。(P.2ページ)
- ・スマートフォンのマークが血圧計の通信エリアからはみ出したり傾いたりしていると、正しく認識できないことがあります。
- ・正しく認識しない場合は、スマートフォンを前後左右にずらしてください。
- ・測定中にスマートフォンに触れさせると、測定を中断して転送を開始します。

登録が完了すると、図のように通信OKマークが表示されます

スマートフォンを血圧計から離してください。

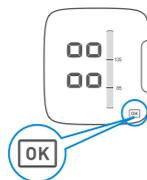

登録ができなかった場合、図のように表示されます

スマートフォンを血圧計から離し、血圧計の測定/停止スイッチを押して電源を切ってください。スマートフォンの指示にしたがってやり直してください。



以上で「ウェルネスリンク」への登録は完了です

データ転送する


登録が完了したあとは、かんたんに測定記録の転送がおこなえます。

「ウェルネスリンク」マークについて

Wが点滅/点灯したときは、すみやかに測定記録を転送してください

点滅：72 回分以上の未転送の測定記録があります。すみやかに測定記録を転送してください。

点灯：90 回すべての測定記録が未転送です。古い測定記録から順に削除されます。すぐに測定記録を転送してください。

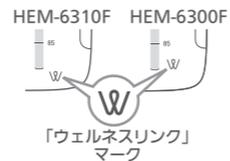

- ・「ウェルネスリンク」にデータ転送をおこなったとき、正確な時間に合わせるために、時刻が補正されることがあります。詳しくは、サイト「ウェルネスリンク」のヘルプをご参照ください。

Step 1

アプリを起動し、ログインする

Step 2

「データ転送」を選ぶ

Step 3

スマートフォンの FeliCa マークを血圧計の通信エリアマークに触れさせる

- ・マークのないNFC対応機種でもお使いいただける場合があります。対応機種をご確認ください。(P.2ページ)
- ・スマートフォンのマークが血圧計の通信エリアからはみ出したり傾いたりしていると、正しく認識できないことがあります。
- ・正しく認識しない場合は、スマートフォンを前後左右にずらしてください。
- ・測定中にスマートフォンに触れさせると、測定を中断して転送を開始します。

※血圧計の電源が切れていても、電池が入っていれば、自動的に電源が入り、データの転送を開始します。



Step 4


測定記録を転送する

スマートフォンが血圧計を認識すると血圧計の表示が図のように変わり、自動的に転送が始まります。



データ転送が完了すると、図のように通信OKマークが表示されます

スマートフォンを血圧計から離してください。

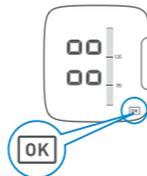

データ転送ができなかった場合、図のように表示されます

スマートフォンを血圧計から離し、血圧計の測定/停止スイッチを押して電源を切ってください。スマートフォンの指示にしたがってやり直してください。



パソコンで登録・転送する


パソコンでの登録には別売の「オムロンUSB通信トレイ (HX-IT3)」が必要です。「ウェルネスリンク」への初期登録・転送方法は、USB通信トレイの取扱説明書を参照してください。



■ USB 通信トレイへののせ方

血圧計の通信エリアマークをUSB通信トレイの通信エリアマークに触れさせてください。

- ・電池交換マーク点灯中は転送できません。

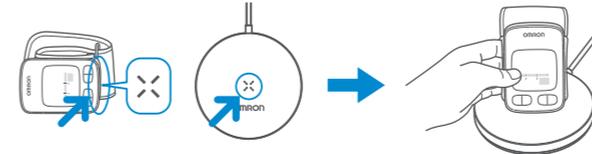

■ 「Err」表示の消し方

血圧計が「Err」を表示したときは、血圧計の測定/停止スイッチを押して電源を切ってください。



携帯電話で転送する

FeliCa 対応携帯電話をお持ちの方は、FeliCa 通信で測定記録の転送ができます。(携帯電話でのご利用には、事前にパソコンまたはスマートフォンから初期登録が必要です。)

Step 1

次のサイトにアクセスし、ウェルネスリンクアプリをダウンロードする

次のサイトでお使いの携帯電話が対応機種であるかどうかをご確認のうえ、ウェルネスリンクアプリをダウンロードしてください。

<http://wlm.jp/>

対応機種は随時更新しています。



Step 2


ウェルネスリンクアプリを起動する

Step 3

携帯電話の FeliCa マークを血圧計の通信エリアマークに触れさせる

- ・マークのないNFC対応機種でもお使いいただける場合があります。対応機種をご確認ください。(P.2ページ)
- ・携帯電話のマークが血圧計の通信エリアからはみ出したり傾いたりしていると、正しく認識できないことがあります。
- ・正しく認識しない場合は、携帯電話を前後左右にずらしてください。
- ・測定中に携帯電話に触れさせると、測定を中断して転送を開始します。


※血圧計の電源が切れていても、電池が入っていれば、自動的に電源が入り、データの転送を開始します。

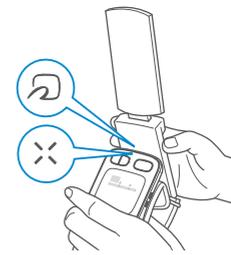

Step 4


測定記録を転送する

携帯電話が血圧計を認識すると血圧計の表示が図のように変わり、自動的に転送が始まります。

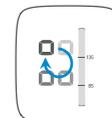

データ転送が完了すると、図のように通信OKマークが表示されます

携帯電話を血圧計から離してください。

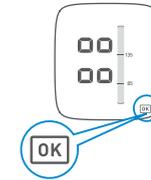

データ転送ができなかった場合、図のように表示されます

携帯電話を血圧計から離し、血圧計の測定/停止スイッチを押して電源を切ってください。携帯電話の指示にしたがってやり直してください。

