

「OMRON connect」アプリのよくあるご質問

<http://www.healthcare.omron.co.jp/faq/>

QRコード



## お知らせ

- ・1台のスマートフォンで、1ユーザーのデータを管理します。
- ・本サービスに転送されたデータは、お使いのスマートフォンに保存されます。

## 商標について

- ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、オムロンヘルスケア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。
- ・iPhone、App Store は Apple Inc.の商標です。
- ・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・Android、Google Play はGoogle Inc.の商標です。
- ・その他本書に記載されているブランド名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## OMRON connect セットアップガイド

このたびはオムロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。  
この機器で測定したデータは、スマートフォンアプリ「OMRON connect」に送ることができます。

### OMRON connect とは

機器からBluetooth®で転送された測定データを、グラフや数値で確認できるスマートフォンアプリです。




OMRON connectの詳細内容はこちら：

<http://www.omronconnect.com/>

推奨環境はこちら：

<http://www.omronconnect.com/devices/>

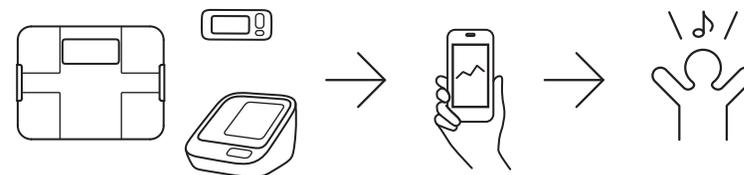

はじめてお使いの方 ..... STEP 1から  
2台目以降の機器を登録したい方 ..... STEP 3から 始めてください

## STEP 1 スマートフォンの「設定」からBluetoothを「オン」にする

- ① スマートフォンの「設定」を開く
- ② Bluetoothを「オン」にする

※Bluetoothの設定の中から機器を選ばないでください

## STEP 2 「OMRON connect」アプリをインストールする

- ① 以下のいずれかの方法で、アプリをインストールする準備をする


A. ウェブサイトにアクセスする

<http://www.omronconnect.com/setup/>

QRコード



B. もしくは App Store、Google Play にて「オムロンコネクト」で検索する

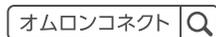

- ② 「OMRON connect」アプリをインストールする

## STEP 3 「OMRON connect」アプリに機器を登録する

はじめてお使いの方

- ① 「OMRON connect」アプリを起動し、画面に従って機器を登録する

2台目以降の機器を登録したい方

- ① 画面左上の「メニュー」から「機器」を選び、「機器追加」で本製品を登録する



## STEP 4 機器で測定したデータを「OMRON connect」アプリで確認する

- ① 機器を通信できる状態にする

血圧計、体重体組成計をお持ちの方

測定する または (←) ボタンを押す

活動量計をお持ちの方

(●) ボタンを長押しする

- ② 「OMRON connect」アプリのホーム画面を、指で下方向にスライドさせる



- ③ 「OMRON connect」アプリで、グラフや数値を確認する