



このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■本書はいつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。(ニ) 品質保証書の提示がない場合。(ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。(ヘ) 消耗部品。(ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。(チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございます。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

販売名 オムロン プリンター HHX-PRINT

ご芳名 _____

ご住所 _____

TEL () _____

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただくこと。

お買い上げ店名 _____

住 所 _____

TEL () _____

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元
オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

1628343-0C

1 安全上のご注意

ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意について	
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例	
	○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。(左図は“禁止”)

2 商品の構成

箱の中には次のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター(☎0120-30-6606)までご連絡ください。

- 本体
- プリンター用ロール紙 (1巻)
(感熱紙)
- 乾電池 (4本)
単3形高性能マンガン乾電池 (黒色)
- 取扱説明書
(本書:品質保証書付き)

4 乾電池を入れる


- プリンターを裏返す
- 電池カバーをはずす
電池カバー中央のギザ加工部を押し下げてから矢印方向にずらします。
- 単3形乾電池を図の表示に合わせて入れる
ばねの出ているほうが↑です。
- 電池カバーを閉める
図のようにすべさせながら“カチッ”と音がするまで閉めます。

お使いになる前によくお読みください

注意	
プリンター用ロール紙切り取り口の歯に指を当てないでください。 • けがをする恐れがあります。	
分解や改造をしないでください。 • 正しい印字ができなくなります。	

お願い	
強いショックを与えたり、落としたりしないでください。	

3 各部の名前

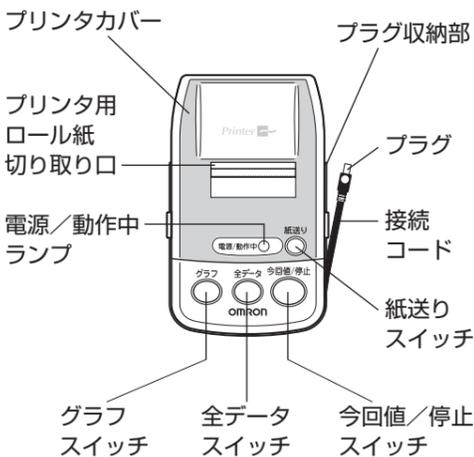

5 お手入れと保管

- お手入れ方法**
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布で拭き取ってください。
※本体内部に水などが入らないようにしてください。
- お手入れと保管の注意**
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 次のようなところに保管しないでください。
- 水のかかる場所。
 - 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。

- 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。
- 長期間(3カ月以上)ご使用にならない場合は、乾電池を取り出して保管してください。
- プラグは、プラグ収納部に収納してください。

プリンター用ロール紙の保管時のお願い

高温・湿気・日光は避けてください。
• 変色することがあります。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

6 おかしいな?と思ったら

こんなとき	考えられる原因	直しかた
印字しない	プラグが血圧計に接続されていない	正しく接続してください(☞10)
	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください(☞4)
	接続コードが断線している	修理を依頼してください(☞8)
	測定値が記憶されていない	血圧測定後、再度印字してください
	プリンター用ロール紙の表裏が逆になっている	逆になっていると、プリンターの寿命にも影響します。正しくセットしてください(☞9)

こんなとき	考えられる原因	直しかた
電源/動作中ランプが点滅している 印字の途中で停止した	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください(☞4)
プリンター用ロール紙が出てこない	プリンター用ロール紙がセットされていない	正しくセットしてください(☞9)
	プリンター用ロール紙がつかまっている	つまった用紙を取り除き、もう一度正しくセットしてください(☞9)
	プリンター用ロール紙を使い切っている	オムロンお客様サービスセンターにてお求めください(☞8)

※上記の方法でも、正常に印字ができない場合は故障が考えられます。商品の故障および修理の依頼につきましては、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(☞8)


7 仕様

販売名	オムロンプリンター HHX-PRINT
電源	単3形乾電池4本
電池寿命	今回値印字で約300回(高性能マンガン乾電池(黒色)使用時) ※アルカリ乾電池でも使えます。
印字回数	今回値印字で約200回(プリンター用ロール紙1巻)
本体質量	約170g(電池含まず)
外形寸法	幅72×高さ50×奥行123mm
付属品	プリンター用ロール紙(1巻) 単3形乾電池4本(お試し用) 取扱説明書(品質保証書付き)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品のご案内

プリンター用ロール紙 (5巻セット)
型式HEM-PAPER-759P

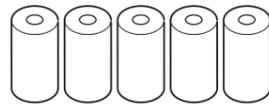

別売品のお求めはお買い上げの販売店、または全国どこからでも電話一本でご注文いただけるオムロンお客様サービスセンターをご利用ください。(☞8)

8 お問い合わせ先

修理を依頼する前に「6 おかしいな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らないときは、下記のオムロンお客様サービスセンターにお問い合わせください。

オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

オムロンお客様サービスセンター **ダイヤルは正確に**

☎ **0120-30-6606** (通話料無料)

FAX **0120-10-1625** (通話料無料)

受付時間 9:00~19:00 月~金(祝日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>
※通話料はお客様ご負担となります。
(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

使い方は、裏面をご覧ください。➡

9 プリンタ用ロール紙をセットする

1. プリンタカバーを開ける


本体を支えながら、プリンタカバーを持ち上げます。



2. プリンタ用ロール紙を取り出す

先端のシールをはがして、図のように約10cmをハサミでまっすぐに切り落とします。


※切り落とさないと、プリンタ用ロール紙がつまる場合があります。

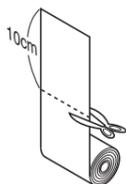

3. プリンタ用ロール紙を入れる

プリンタ用ロール紙挿入口へ、プリンタ用ロール紙がたるまないようにして、奥に止まるまで(約3cm)入れます。



※用紙には表裏があるので、必ず図のように入れてください。

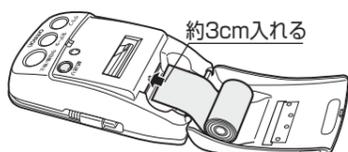

4. プリンタ用ロール紙排出口からプリンタ用ロール紙が出てくるまで紙送りスイッチを押し続ける

プリンタ用ロール紙を指先でプリンタ用ロール紙挿入口へ送り込むようにすると楽にプリンタ用ロール紙が出てきます。

※プリンタ用ロール紙は約10cm出してください。

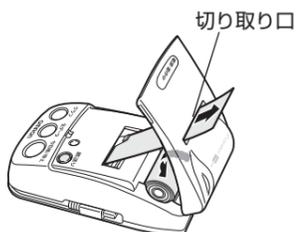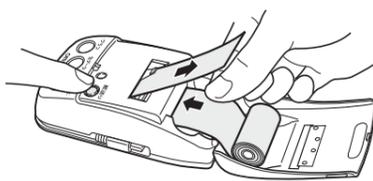

5. プリンタカバーを戻しながら用紙を切り取り口に通す

6. プリンタカバーを閉める

閉まるとカチッと音がします。



7. 余分なプリンタ用ロール紙を切り取る

これでプリンタ用ロール紙の取り付けが終わりました。

※今回値のみ印字する場合で、プリンタ用ロール紙1巻につき約200回の印字ができます。



※プリンタ用ロール紙がなくなったときは、別売のプリンタ用ロール紙をオムロンお客様サービスセンター(☎8)か、お買い求めの販売店でお求めください。また市販の感熱紙でも、幅38mm、直径26mm以内の用紙であれば使用可能ですが、印字品質に多少差が出る場合があります。

10 血圧計に接続する

1. プラグをプラグ収納部から取り出す



2. プラグを血圧計のケーブル接続部に差し込む



11 印字する

3つのタイプで印字できます

スイッチを押すだけで簡単に印字できます。
※血圧計の電源が入ってなくても印字できます。


血圧測定の終了後、その数値を 今回値の印字
印字するときは

サイコウ	111mmHg
サイテイ	67mmHg
ミヤクハク	77/min

血圧計のメモリに記憶されている数値をすべて印字するときは 全データの印字

A 7- 8月 mmHg /min	
日 時 サイコウ サイテイ 拍	
26	8 99 50 78
27	8 95 43 71

血圧計のメモリに記憶されている血圧値を グラフの印字
グラフにして印字するときは

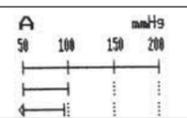

※印字する数字やグラフは、測定順に並んでいます。
※プリンタに電源スイッチはありません。印字が終わったら、自動的に電源が切れます。
※プリンタ用ロール紙がない状態で印字しないでください。印字ヘッドの寿命低下の原因となります。


印字のテスト	今回値/停止スイッチ、全データスイッチ、グラフスイッチを同時に押す →テスト印字をおこないます。
印字の停止	今回値/停止スイッチを押す →紙送りの後、印字が停止します。

今回値の印字

1. 今回値/停止スイッチを押す


一番新しい測定値が印字されます。

※印字を停止したいときは今回値/停止スイッチを押します。紙送り後、印字が停止します。

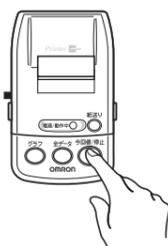

2. 印字された用紙を切り取る


右の印字例の見かた
サイコウ : 最高血圧111mmHg
サイテイ : 最低血圧67mmHg
ミヤクハク : 脈拍77拍 毎分

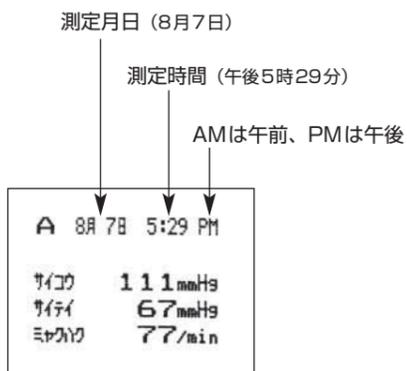

全データの印字


1. 全データスイッチを押す

※印字を停止したいときは今回値/停止スイッチを押します。紙送り後、印字が停止します。

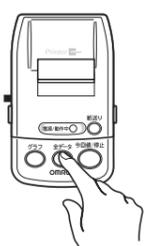

2. 印字された用紙を切り取る


右の印字例の見かた
8月3日 午前8時
最高血圧 113 (mmHg)
最低血圧 65 (mmHg)
脈拍 76 (拍 毎分)

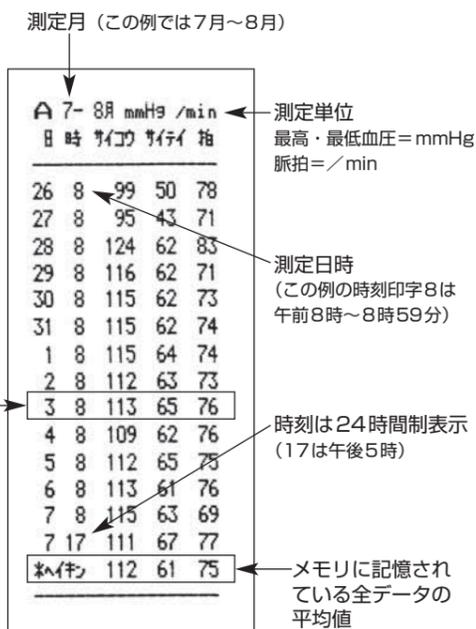

グラフの印字

1. グラフスイッチを押す

※印字を停止したいときは今回値/停止スイッチを押します。紙送り後、印字が停止します。

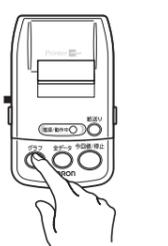

2. 印字された用紙を切り取る

※測定値がグラフ目盛の50~200mmHgをはみ出す場合は<、>マークで表示します

