


OMRON

オムロン 活動量計 HJA-700T アクティブシフト エッジ

Active Shift **EDGE**

クイックガイド

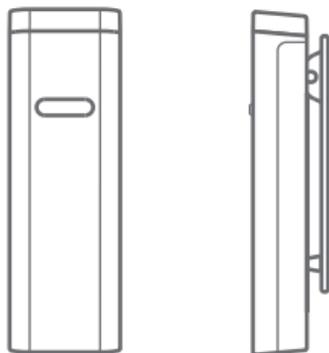

All for Healthcare

1

健康サポートサービス
WellnessLINK®

同梱物について



・本体



・USB 充電クレードル

・クイックガイド
(本書)

・安全上のご注意
(品質保証書付き)

iPhone で機器の設定をする

はじめにiPhone の「設定」から **Bluetooth®** を「ON」にしてください。
iPhone で次のサイトへアクセスし「Active Shift」アプリをダウンロード後、
アプリを起動し、機器の設定をしてください。

<http://wlm.jp/>

*設定中に電池残量がなくなったときは充電をしてください。
(→ 3 ページ)

*充電中は iPhone との通信ができません。



詳細な取扱方法について

取扱説明書はこちらからダウンロードしてください。

<http://www.healthcare.omron.co.jp/manual/>


*アプリのヘルプからもダウンロードできます。



充電について

1. 本体を USB 充電クレードルにセットする

- ① クリップ部をつまんで、本体を USB 充電クレードルにしっかりと差し込みます。
- ② パソコンの電源が ON の状態で USB 充電クレードルの USB 端子をパソコンの USB ポートに差し込みます。本体画面に電池マークが表示され、お知らせランプが点滅します。

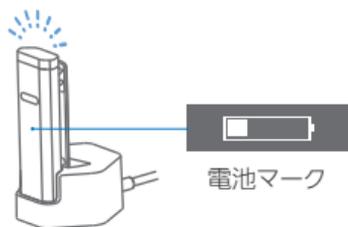


- ③ 満充電になると、ランプの点滅が終了します。

2. 本体を取り外す

- ① 本体を上から押しながら、クリップ部をつまみます。
- ② 本体を取り外すと、お知らせランプが 1 回点灯し、「Charger Removed」画面が表示されます。

つまむ

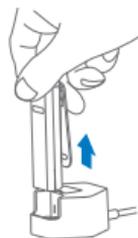


電池残量がなくなった場合のお願い

充電をただけでは測定を開始しません。充電した後、一度、アプリと通信してください。

「Charger Removed」画面表示後、本体の電源が OFF になるので、ボタンを押して本体を起動してください。

本体画面に「←」が表示されたら、アプリを起動してください。アプリ起動後、「設定」から「機器との通信確認」を選択し、「開始する」をタップしてください。


本体画面に「✓ OK」が表示されたら完了です。

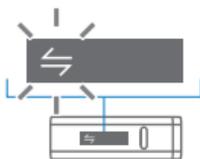

装着位置について

本体を装着したら、あなたの活動が記録されます。

本体の状態や活動状況について、光とメッセージでお知らせします。ランプ点灯後、ボタンを押して本体画面を確認してください。

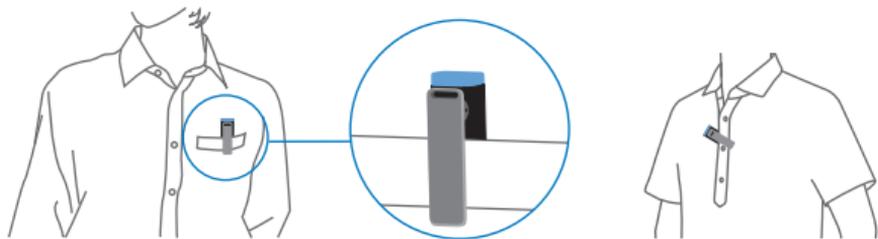

*精度よく測定していただくためには、上半身への装着をおすすめします。