

# 取扱説明書



オムロン 健康管理ソフト **BI-LINK**  
血圧計 パーソナルエディション  
**HMS-HEM-IT01J** Ver. 1.3

- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージです。

## 次のものが入っていますか？

箱の中には次のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター（☎0120-30-6606）までご連絡ください。

### 1 オムロン健康管理ソフトセットアップ用CD-ROM




※このディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオプレーヤー、DVDプレーヤー、家庭用ゲーム機などでは絶対に再生しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

### 2 専用USBケーブル

・型式 HHX-CABLE-USB1



・型式 HHX-CABLE-USB2

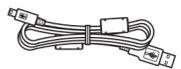

※HEM-637 IT、HEM-705 IT、HEM-1040には型式 HHX-CABLE-USB1の方を、HEM-7301-ITおよびHEM-7080 ITには型式 HHX-CABLE-USB2の方をご使用ください。

### 3 取扱説明書

(本紙：品質保証書付き)

※HEM-7301-ITについては、オムロン健康管理ソフトセットアップ用CD-ROMおよび専用USBケーブルが、血圧計本体に同梱されております。

## 必要な動作環境

本ソフトウェアを動作させるには、次のような環境が必要です。

- ・パーソナルコンピュータ：800 MHz以上のプロセッサを搭載したPC/AT互換機
- ・OS：Windows 2000 Professional日本語版 (SP4)  
Windows XP (Home Edition/Professional) 日本語版 (SP2)  
Windows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) 日本語版
- ・搭載メモリ：512 MB以上
- ・ハードディスク：32 MB以上の空き容量が必要（データ保存容量は除く）
- ・ディスプレイ：800×600ドット以上
- ・ディスク装置：CD-ROMドライブ
- ・インターフェース：USBポート（1.1以上）
- ・ヘルプ参照用ソフト：Adobe Acrobat Reader（5.0以上）

※本紙では日本語版Windows XP Professionalをベースに解説しています。お使いのOSによって、一部の画面、操作、結果が異なることがあります。

Windows®は米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
Adobe, Acrobat, ReaderはAdobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。

## インストールの前に

※OSやパーソナルコンピュータの操作法は、ご使用のOSや機種に添付されている取扱説明書をご参照ください。

※ソフトウェアの詳しい操作法は、オムロン健康管理ソフトをインストール後に、ヘルプをご参照ください。

※本商品のインストールは、Administrator（管理者）権限のユーザーでおこなってください。

※インストールを始める前に、実行中のすべてのアプリケーションを終了してください。

※スクリーンセーバーは使用を停止しておいてください。

※ウイルスチェックプログラムを使用中の場合は、必ずいったん終了させてからインストールを実行してください。ウイルスチェックプログラムが起動していると本商品のセットアッププログラムを実行できない場合があります。ウイルスチェックプログラムは、本商品のインストール終了後に再び実行してください。

## オムロン健康管理ソフトをインストールする

パソコンにソフトウェアをインストールします。

### 1 パソコンの電源を入れる

### 2 セットアップ用CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入する

セットアッププログラムが起動します。

■ セットアッププログラムが起動しない場合は…

- ① [マイ コンピュータ] (Windows 2000) または、スタートメニューより [マイ コンピュータ] (XP) / [コンピュータ] (Vista) をクリックする
- ② CD-ROMドライブをダブルクリックする
- ③ [setup.exe] アイコンをダブルクリックする

■本ソフトはMicrosoft Data Access Components (MDAC) とMicrosoft .NET Framework 2.0を利用して動作します。これらソフトのインストール画面が表示されたら、必ずインストールしてください。インストール画面が表示されない場合は、すでにインストールされています。Microsoft Data Access Components (MDAC)：マイクロソフト社が提供するデータベース用プログラム部品  
Microsoft .NET Framework 2.0：マイクロソフト社が提供するウィンドウズソフト用プログラム部品

### 3 Microsoft Data Access Components (MDAC) のインストール画面が表示されたら、[Install] ボタンをクリックする

※この画面が表示されない場合は手順6へ



### 4 Microsoft Data Access Components (MDAC) のEnd User License Agreementが表示されたら、内容に同意する場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックする


※End User License Agreementはよくお読みください。内容に同意いただけない場合はインストールできません。



### 5 [完了] ボタンをクリックする

※右のような画面が表示された場合、パソコンを再起動する必要があります。[Let setup restart the system now] を選択し、[完了] ボタンをクリックします。パソコンが再起動され、セットアップが継続されます。

※パソコンの再起動が不要な場合、「Setup is Complete」のメッセージが表示されます。[Close] ボタンをクリックしてください。

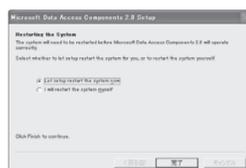

※[キャンセル] ボタンをクリックするとセットアップは中断されます。  
※[戻る] ボタンをクリックすると、一つ前の画面に戻ります。

### 6 Microsoft .NET Framework 2.0のインストール画面が表示されたら、[はい] ボタンをクリックする

※この画面が表示されない場合は手順13へ



### 7 Microsoft .NET Framework 2.0のセットアップ画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックする



### 8 Microsoft .NET Framework 2.0の使用許諾契約が表示されたら、内容に同意する場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを入れ、[インストール] ボタンをクリックする

※使用許諾契約はよくお読みください。「使用許諾契約」に同意いただけない場合はインストールできません。



### 9 Microsoft .NET Framework 2.0のインストールが正常終了したメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックする



### 10 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Packのセットアップ画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックする

※この画面が表示されない場合は手順13へ



### 11 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Packの使用許諾契約が表示されたら、内容に同意する場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを入れ、[インストール] ボタンをクリックする


※使用許諾契約はよくお読みください。「使用許諾契約」に同意いただけない場合はインストールできません。



### 12 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Packのインストールが正常終了したメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックする




### 13 オムロン健康管理ソフトのインストール画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックする

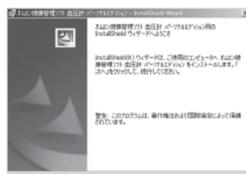

### 14 オムロン健康管理ソフトの使用許諾契約が表示されたら、内容に同意する場合は、「同意します」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする

※使用許諾契約はよくお読みください。「使用許諾契約」に同意いただけない場合はインストールできません。

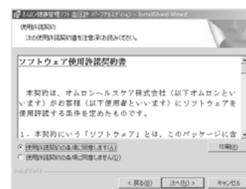

### 15 インストール先のフォルダが表示されているフォルダでよければ、「次へ」ボタンをクリックする

※インストール先のフォルダを変更する場合は、「変更」ボタンをクリックし、インストールするフォルダを選択してください。フォルダを選択したあと、「OK」ボタンをクリックしてください。



### 16 インストールの確認画面が表示されたら、「インストール」ボタンをクリックしてインストールを続行する



### 17 ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、「許可」をクリックする


※この画面が表示されない場合は手順18へ



### 18 インストール完了の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックする



※右のような画面が表示された場合、パソコンを再起動する必要があります。「はい」ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。

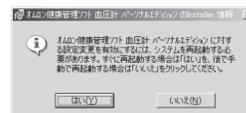

「オムロン健康管理ソフト 血圧計」と「オムロン健康管理ソフト 血圧計のヘルプ」のショートカットがパソコンのデスクトップ上に作成されます。



### 19 CD-ROMをパソコンから取り出す

# 裏面も ご覧ください

## オムロン健康管理ソフトを起動する

オムロン健康管理ソフトの使い方を知りたいときは、デスクトップのショートカットアイコン「オムロン健康管理ソフト 血圧計のヘルプ」をダブルクリックするか、オムロン健康管理ソフト起動後に「ヘルプ」をクリックしてください。



### 1 デスクトップのショートカットアイコン「オムロン健康管理ソフト 血圧計」をダブルクリックする

※デスクトップにショートカットアイコンがないときは、  
[スタート] → [すべてのプログラム] または [プログラム] → [オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディション] → [オムロン健康管理ソフト] をクリックしてください。

### 2 オムロン健康管理ソフトを初めて使用する場合は、ユーザー管理画面で【新規ユーザー】ボタンをクリックする



### 3 新規ユーザー画面でユーザー名(例：OMRON)を入力し、[OK] ボタンをクリックする



※オムロン健康管理ソフトは複数のユーザーのデータを管理できます。  
※ユーザーは1000人まで登録できますが、登録できるユーザー数は、ご使用のパソコンの性能やハードディスク容量によって異なります。  
※ユーザー名入力の際のご注意  
・ユーザー名の入力は省略できません。  
・ユーザー名は、全角・半角にかかわらず、28文字まで入力できます。  
・ユーザー名は、アルファベットの大文字と小文字を区別しません。たとえば「OMRON」と「omron」は同じユーザー名として扱われますので、同時に登録することはできません。  
・ユーザー名に次の記号 ¥ / : \* ? " < > | , ; は使えません。  
・メモ1、メモ2に次の記号 ; は使えません。

## パソコンからオムロン健康管理ソフトをアンインストールするには…

アンインストールを実行すると、オムロン健康管理ソフトで保存してあるデータがすべて削除されます。ただし、ファイル形式出力で保存したファイルは削除されません。

※本商品のアンインストールは、Administrator（管理者）権限のユーザーでおこなってください。

※Windows VistaでProgram Filesにインストールしていた場合（C:\Program Files\Omron Healthcare\オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディションにインストールした場合）、アンインストールしても以下ディレクトリにデータが残ります。データを削除したいときは、ディレクトリごと削除してください。  
C:\Users\User\_name\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Omron Healthcare\オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディション  
（下線部にはWindowsのログイン名が入ります。）

### 1 [スタート] ボタンをクリックする

### 2 [プログラム] (Windows 2000) または、[すべてのプログラム] (XP/Vista) にマウスカーソルをあわせる

### 3 [オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディション] にマウスカーソルをあわせる

### 4 [オムロン健康管理ソフトのアンインストール] をクリックする 確認メッセージが表示されます。

### 5 [はい] ボタンをクリックする オムロン健康管理ソフトが削除されます。

## インストールで困ったときには

| こんなとき   | 原因                                       | 対処のしかた   |
|---|--|--|
| 「このコンピュータの管理者特権がないと、一部のプログラムは正しくインストールできません。」と表示される           | Administrator（管理者）の権限でログインされていません        | Administrator（管理者）の権限でログインしてください                     |
| 「お使いのOSではインストールできません。」と表示される                                  | オムロン健康管理ソフトはWindows 2000、XP、Vista上で動作します | お使いのパソコンにはオムロン健康管理ソフトをインストールできません<br>必要な動作環境をご確認ください |
| 「ディスク空き領域の不足インストールには、現在使用可能なディスク領域よりも多くのディスク空き領域が必要です。」と表示される | ハードディスクの空き容量が不足しています                     | ハードディスクの空き容量を増やすか、別のハードディスクにインストールしてください             |

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。  
(ニ) 本書の提示がない場合。  
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。  
(ヘ) 消耗部品。  
(ト) 記録媒体、付属する印刷物等。  
(チ) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。  
(リ) その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

| 品質保証書   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。 |                                       |
| ※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。<br>This warranty is valid only in Japan.  | ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただく必要があります。 |
| 販売名 オムロン健康管理ソフト BI-LINK<br>血圧計 パーソナルエディション HMS-HEM-1T01J  | お買い上げ店名                               |
| ご芳名   | 住所                                    |
| ご住所   | TEL ( )                               |
| TEL ( )   | お買い上げ年月日 年 月 日                        |
| 発売元<br>オムロンヘルスケア株式会社<br>〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地  |                                       |

## オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。  
修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に 受付時間 9:00~19:00 月~金（祝日を除く）  
都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。  
電話 0120-30-6606 通話料無料  
FAX 0120-10-1625 通話料無料  
ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>  
※通話料はお客様ご負担となります。  
(別売品・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。)