

# 取扱説明書



## 電子体温計けんおんくん

- MC-105
- MC-106B
- MC-107BW
- MC-108L

A Good Sense of Health

- このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
  - 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
  - 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
  - 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
  - 本書に記載しているイラストはイメージ図です。
- 医療用具許可番号24BY0001

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理いたします。
- 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償修理期間外でも次の場合には有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 本書の提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - (ヘ) 消耗部品。
  - (ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
  - (チ) その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

### 品質保証書

このたびは、オムロン製品を、お買い求めいただきありがとうございました。製品は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。  
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

品名	電子体温計けんおんくん
型式	MC-105/MC-106B/ MC-107BW/MC-108L
ご芳名	
ご住所	
TEL	( )

お買い上げ店名	
住所	
TEL	( )
お買い上げ年月日	年 月 日

発売元  
オムロンヘルスケア株式会社  
〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地



### △注意

万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。  
・失明など障害の恐れがありますので医師の治療を受けてください。

万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。  
・けがなどの恐れがあります。

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。  
・乳幼児が電池を飲み込む恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。

電池の⊕⊖を間違えないようにしてください。  
使い切った電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。  
長期間（3ヵ月以上）使用しないときは、電池を取り出しておいてください。  
・漏液、発熱、破裂などを起こし、本体を破損させる恐れがあります。



必ず守ること

### お願い

- ・人間の検温以外には使用しないでください。
- ・本体に強いショックを与えたり、落としたり、踏んだり、振動を与えたりしないでください。
- ・本体が水にぬれているときは、電池カバーを取り外さないでください。また、内部の部品を取り出さないでください。

### 次のものが入っていますか？

箱の中には次のものが入っています。  
万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター（☎0120-30-6606）までご連絡ください。

- 1 本体
  - 2 お試し用電池  
(アルカリマンガン電池LR41×1個)  
約3年(10分/1日1回)使用できます。  
付属の電池はお試用です。上記の年数以内に寿命が切れることがあります。
  - 3 収納ケース
  - 4 取扱説明書  
(本書：品質保証書付き)  
基礎体温記録用グラフ用紙  
(MC-108Lのみ)
- ※お買い求めのときは本体に内蔵されています。

機種別表記の説明：この取扱説明書は4機種兼用となっているため、機種による機能の違いを次の色で区別しています。  
MC-107BW の機能説明のとき、MC-108L の機能説明のとき

### 安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

### 警告サインの内容について

#### △警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

#### △注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

### 図記号の例



●記号は強制（必ず守ること）を示します。  
具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。  
上図の場合は“一般的な強制”を示します。



○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。  
上図の場合は“分解禁止”を示します。



△記号は注意（警告・危険を含む）を示します。  
具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。  
上図の場合は“破裂注意”を示します。

### △警告

小さなお子様は電池カバーをなめたり、いじったりして電池を飲み込まないようにしてください。

- ・電池を飲み込んだりした場合、息がつまったり、体調悪化の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

小さなお子様はプローブの先端で目を突かないようにしてください。

- ・失明する恐れがあります。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。またお子様だけのご使用は避けてください。

- ・自分で無理に測ろうとしてけがをする恐れがあります。



必ず守ること

### △注意

プローブは噛み切らないようにしてください。

- ・体調悪化の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。



してはいけないこと

分解や修理、改造をしないでください。

- ・検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。



分解禁止

電池を火の中に投げ込まないでください。

- ・電池が破裂する恐れがあります。



破裂注意

### 正確に測るために

- 体温とは体深部の温度のことです。舌下や腋下が体深部と同じ温度に上昇するのに5～10分の時間を要します。正確に体温を測るためには、体の仕組みの関係で時間がかかるのです。
- 運動、入浴、食事のあとは、体温が高くなっていますので、30分間ほどは検温をさけてください。
- いつも同一の部位、一定時間で検温してください。

#### <舌下の場合>

検温前に5分間ほど口を閉じたのち、感温部を舌の裏側のつけ根に入れ舌で密着させ口を閉じて体温計が動かないようにしてください。

#### <腋下の場合>

検温前は腋の下の汗をよくふき、腋を5分間ほど閉じたのち、くぼみ中央部に感温部を押し当て、図のようにしっかりと密着させ体温計が動かないようにしてください。


#### <検温時間>

平衡温\*を測るには舌下で5分、腋下で10分以上かけてください。

\*平衡温とは安定した体温をいいます。

#### ■検温場所で差があります。

同じ舌下や腋下でも、感温部の当たる検温ポイントで温度差があり、検温値は微妙に異なります。正確な検温のためには、いつも温度の最も高いところで測ってください。  
また、舌下と腋下では体温に0.2～0.5℃の差があります。

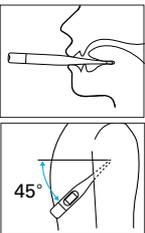

### MC-108L基礎体温について

#### ■基礎体温は、毎朝床の中で

基礎体温を正しく比較するためには、できるだけ毎日同じ状態のときに検温することが望ましいです。そのため、朝目がさめてまだ体を動かす前の床の中にいる状態での検温が最適です。


#### ■舌下で正しく

検温前に5分間ほど口を閉じたのち、感温部を舌の裏側のつけ根に入れ、舌で密着させ、口を閉じてください。会話や飲み物を飲んだ直後の検温はさけてください。


#### ■検温後の記録

基礎体温記録用グラフ用紙が付属しています。検温後の記録にお役立てください（MC-108Lは、基礎体温を測るだけでなく、一般の体温計としてもお使いいただけます）。

## 各部の名前

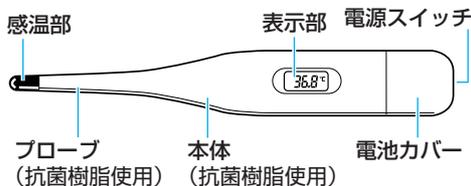

## 表示マークの説明

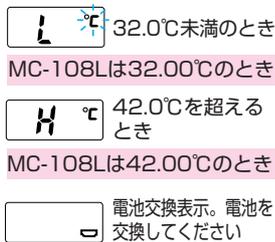

## おかしいな?と思ったら

こんなとき	点検するところ
電源スイッチを押しても表示部が点灯しない	電池が消耗していませんか 電池が正しく入っていますか
体温が正常に表示されない	舌下または腋下に感温部が密着していますか

※上記の方法でも、正常に検温ができない場合は故障が考えられます。製品の故障および修理の依頼につきましてはオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

## 検温のしかた

### 1 電源スイッチを押して、電源を入れる

表示部が右図のように変化します。

MC-108Lは4桁表示

※全点灯表示は表示部に故障がないことを示しています。

表示値が $37.0 \pm 0.1^\circ\text{C}$ であれば本製品は正しく動いています。

MC-108Lは $37.00 \pm 0.05^\circ\text{C}$

検温準備完了表示 (°Cマークが点滅)

※周囲温度が $32^\circ\text{C}$ 以上の場合、右図Lのかわりに周囲温度が表示されます。

### 2 検温する

感温部を測定部位に密着させ、10分間検温してください。(舌下の場合は5分間)

※L°C表示から温度表示に変わり、次第に上昇してきます。

検温中は、°Cマークが点滅します。

### 3 検温値を確認する

体温計の温度上昇が少なくなると( $0.02^\circ\text{C}/8$ 秒以下)お知らせブザー\*が鳴ります(約3秒間)。

\*MC-105はブザーが鳴りません。

このとき、数字は表示されたままで、消えることはありません。

より正確な体温(体深部の温度)を知るにはさらに最低2分間は測定を続けることをおすすめします。

※感温部がずれたり、上昇中に取り出した場合もブザーが鳴ってしまうことがあります。

### 4 電源スイッチを押して、電源を切る

※電源を切り忘れたときでも、約30分後に自動的に切れます。

※続けて検温する場合は、一度電源を切ってから始めてください。




## 電池の交換

電池は電気店が時計店などで、LR41をお買い求めください。


### MC-105/106B/108Lの場合

- 本体を裏返し電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、取り外します。
- 電池カバーを矢印方向に取り外します。
- 古い電池を図のようにつま楊枝などで取り出します。  
※金属製のピンセット、ドライバーなどは使用しないでください。  
新しい電池の+側を上にして図のようにセットします。
- 電池カバーを矢印方向に取り付けます。
- 電池カバーのネジをプラスドライバーで締めます。  
※無理に締めすぎないでください。

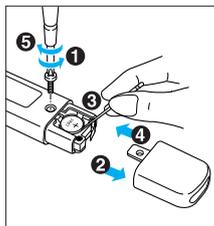

### MC-107BWの場合

- 電池カバーを矢印方向に取り外します。
- 電池おさえのネジをプラスドライバーでゆるめ取り外します。
- 古い電池を図のようにつま楊枝などで取り出します。  
※金属製のピンセット、ドライバーなどは使用しないでください。  
新しい電池の+側を上にして図のようにセットします。
- 電池おさえのネジを取り付け、プラスドライバーで締めます。  
※無理に締めすぎないでください。
- 電池カバーを矢印方向に取り付けます。  
※使用済みの電池の廃棄方法は、お住まいの市区町村の方法に従ってください。

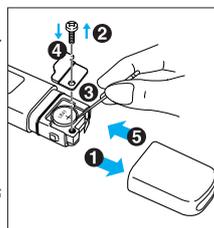

## お手入れと保管

### お手入れについて

体温計はいつも清潔なお使いください。

本体の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

※本体は防水性ではありませんので、本体内部に水などが入らないようにしてください。

### 防浸形MC-107BWのお手入れ

- 本体は防浸形です。汚れた場合は軽く水洗いしてください。
- 水洗い後は、ティッシュなどで水をふきとってからご使用ください。
- 激しく水をかけたり、長時間水につけたままにしないでください。

### 保管について

お手入れが終わったら、本体を付属の収納ケースに入れて保管してください。

### お手入れと保管の注意

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、ガソリンなどを使用しないでください。

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかる場所。
- 高温・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受ける場所。
- 傾斜、振動、衝撃のある場所。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

## 仕様

名称	電子体温計けんおんくん
型式	MC-105/ MC-106B/ MC-107BW/ MC-108L
電源電圧	DC1.5V (アルカリマンガン電池LR41×1個)
消費電力	0.05mW
電池寿命	連続使用で300時間以上 (1日10分間使用で約3年)
感温部	サーミスタ
体温表示	3桁+°C表示0.1°C毎 4桁+°C表示0.01°C毎 (MC-108L)
測定精度	±0.1°C (標準室温22°Cにて) ±0.05°C (35.00~39.00°C)、(標準室温22°Cにて) (MC-108L)
測定範囲	32.0~42.0°C 32.00~42.00°C (MC-108L)
ブザー	電子ブザー(約3秒間) ※MC-105は機能なし
質量	約11g (電池含む)
外形寸法	長さ130×幅17×厚さ10mm
使用環境湿度	+10~+40°C、30~85%RH
保管環境湿度	-20~+60°C、30~95%RH
防水性	JIST1140に定められた防浸形に準ずる (MC-107BWのみ)
付属品	収納ケース、取扱説明書 (品質保証書付き)、 基礎体温記録用グラフ用紙 (MC-108Lのみ)、 アルカリマンガン電池LR41×1個 (本体に内蔵)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品/舌下用プローブ・カバーEタイプ (100枚入)

## オムロン健康製品のお問い合わせ

修理のご用命、別売品・消耗部品の求めも、この電話で承ります。  
修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

電話 **0120-30-6606** 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通話料無料

受付時間  
9:00~19:00 月~金(祝日を除く)  
都合によりお休みをいただいたり、  
受付時間帯を変更させていただく  
ことがありますのでご了承ください。