

- このたびは、オムロンイヤメイトをお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

品質保証書

このたびは、オムロン健康機器をお買い求めいただきありがとうございました。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。
※本機の修理内容は修理伝票に記載します。

品名	オムロン イヤメイトオートポケット	お買い上げ店名	
形式	AK-21	住所	
ご芳名		Tel.	()
ご住所		お買い上げ年月日	年 月 日

発売元 オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー
〒1105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL03(3436)7092

保証規定

- 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理いたします。
- 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてオムロンお客様サービスセンターに依頼または送付してください。
- 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 本書の提示がない場合。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(ヘ) 消耗部品（耳せん、乾電池）。
(ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

■本器は普通の会話や小さな話し声が聴きとりにくいなど、耳の少し遠い方のための聴力を補う機器です。（高度難聴の方には向きません）

■次のような方は、ご使用になれない場合があります。

- ・耳だれのある方。
- ・耳の病気にかったことのある方。（中耳炎、メニエル氏病など）
- ・耳の手術を受けたことのある方。

商品の特長

- 軽度～中等度難聴までカバーします。
 - 面倒な調整がいらぬ自動騒音抑制装置を内蔵。周囲の騒音を自動的に抑え、会話を聴きやすくします。
 - 出力制限装置を内蔵した安全設計。最大出力音圧を125dB*以下に抑え、突然の大きな音が発生しても安全です。
 - 大・中・小の3段音量切替え。
 - 約400時間の電池寿命。（アルカリ乾電池使用時）
- *dB（デシベル）…音の大きさを表す単位です。

各部のなまえ



付属品


耳せん (M) (1個) (装着済みの耳せん (MS) より大きいサイズの耳せんです。)
お試用乾電池 (1個)
取扱説明書 (品質保証書付) (1部)
お客様サービスセンターシール (1部)

別売品

※オムロンお客様サービスセンター (裏面参照) でご購入になれます。
耳せん (M)、(MS)
イヤホン (耳せん別)
イヤホンコード (85cm)

乾電池の入れ方

- ① 電源を「切」の状態にします。
- ② 電池カバーを開けます。
- ③ 乾電池の ⊕ ⊖ を本体表示に合わせて入れます。
- ④ 電池カバーを閉じます。

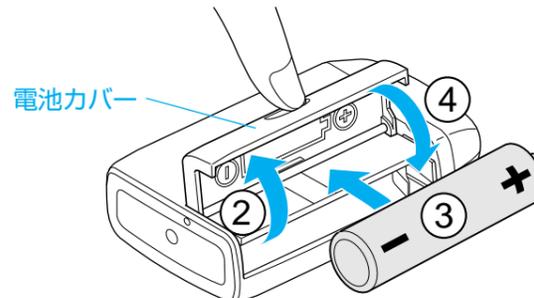

使用電池と電池寿命 (連続使用時間)

- ・単3形高性能マンガン乾電池(黒)：約220時間
- ・単3形アルカリ乾電池：約400時間

※付属の電池はお試用ですので上記の電池寿命よりも早く切れる場合があります。
※電池寿命は、使用する電池の種類や使用条件によって変わります。
※電池が消耗すると聴こえにくくなりますので、新しいものと交換してください。

お願い

- 乾電池の液もれが起こり本体を傷めることがあります。以下の点に気をつけてください。
- ・長期間 (3ヵ月以上) 使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
 - ・使いきった乾電池はすぐに新しいものと交換してください。
 - ・乾電池の ⊕ ⊖ を間違えないようにしてください。

使用済みの電池は、市町村のゴミの分別方法に従って廃棄してください。

きもちよくお使いいただくためのお願い

本器はあなたの聴力を元に戻すものではありませんが、よりよく聴こえるように聴力を補う機器です。大きな音で聴いたり、耳に合わない使い方をすると耳を痛める原因になります。

使い始めは音量を「小」にして、慣れるに従って音量を加減してお使いください。


ご使用前には綿棒などで耳あか掃除の習慣をつけましょう。耳せんが耳あかでふさがると、音が聴こえにくくなります。

お手入れ

■ご使用後は、柔らかい布などで汚れをふき取ってください。



■耳せんは、耳あかやゴミが詰まりやすいものです。詰まると音が小さくなったり聴こえなくなるばかりかイヤホンの故障の原因にもなります。ときどき外してぬるま湯などで洗い、乾いた布できれいにふいてください。

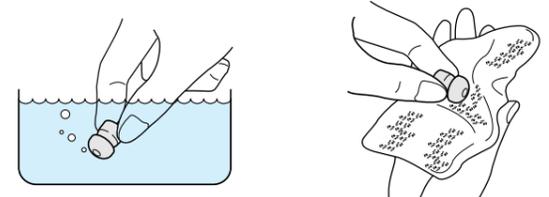

■耳せんは消耗部品です。お手入れをしても耳せんについた耳あかやゴミが取れなくなったり、変色したり、固くなったときは新しいものと交換してください。

■シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。

安全上の注意

お使いになる前によくお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 - 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。
- *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

- 【図記号の例】
- 記号は禁止 (してはいけないこと) を示します。具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
 - 記号は強制 (必ず守ること) を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「一般的な強制」を示します。

警告

- 下記のような方は、医師の指導を受けてからお使いください。
- ・お子様が使うとき。
 - ・耳の治療を受けている方が使うとき。
 - 事故や体調不良をおこす恐れがあります。
- 下記のような症状があらわれたときは、本器の使用を中止し、すぐに医師にご相談ください。
- ・本器と接する皮膚が、かぶれたり湿疹ができたとき。(本器の皮膚に接する部分には、炎症をおこしにくい材料を使用していますが、体質によっては、まれにかぶれや湿疹が生じることがあります。)
 - ・使用中に耳だれが生じたり、何らかの事情で耳の治療が必要になったとき。
 - ・以前に比べ、急に聴力がおとろえたとき。
 - 症状の悪化の恐れがあります。




使い方

プラグの取り付け、取り外しを行うときは必ず電源を切ってください。

① イヤホンコードを取り付けます。

※ピンの太さと穴の大きさを合わせて入れてください。
※プラグの先端は鋭利ですので、けがをしないように気をつけてください。

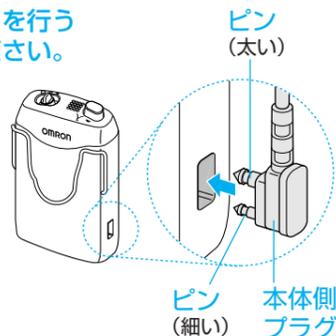


② イヤホンを耳に入れます。




③ 電源スイッチを押して電源を入れます。

・初めてお使いになるときは音量を「小」に合わせてください。

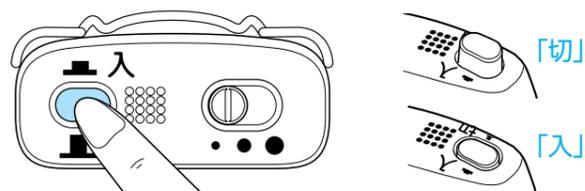

④ 聴きやすい大きさの音に合わせます。

・使い始めは音量を「小」にして、慣れるに従って音量を加減してお使いください。

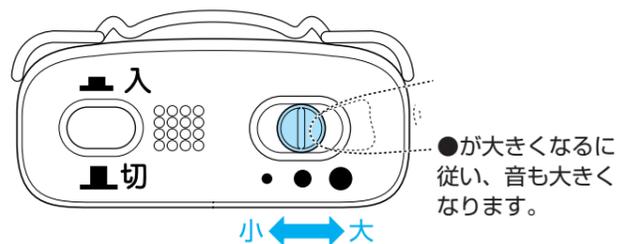


⑤ 使用を終了するときは、もう一度電源スイッチを押して電源を切ります。

ピーピー音 (ハウリング) がするとき

イヤホンをもう一度すき間ができないように耳に入れ直してください。

※耳たぶを後方にひっぱり、外耳道をまっすぐにして入れると、しっかり入ります。

耳せん (MS) が小さく耳に合わない場合は、付属の耳せん (M) に取り替えてください。

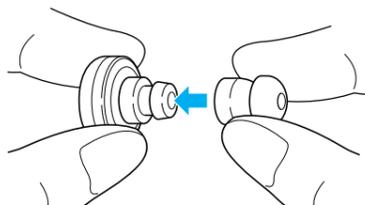

耳からイヤホンを外すときは

必ず電源スイッチを「切」にしてください。「入」のまま外すと、ピーピー音 (ハウリング) をおこすことがあります。

使わないときは

必ず電源スイッチを「切」にしてください。

※使用しないときは、イヤホンコードを本体から取り外して直射日光や高温多湿を避け、幼児の手の届かないところに保管してください。

※イヤホンコードを抜くときは必ずプラグを持ってコードを抜いてください。

保管のしかた


次の条件を満たしている環境下で保管してください。

温度：-10~+50℃

湿度：10~95%RH (結露無きこと)

高温・多湿、直射日光のあたるところ、また、ホコリ、腐食性ガスの多いところに保管しないでください。

別売品のイヤホンを交換するとき

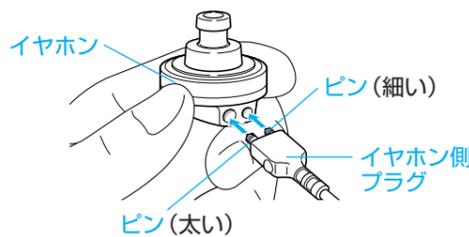

※ピン(太い)の太さと穴の大きさを合わせて入れてください。

※プラグの先端は鋭利ですので、けがをしないように気をつけてください。

アドバイス

慣れるための練習法

■まず静かなところで慣れましょう。

本などを声を出してゆっくり読み、自分の声を聴いてみる。テレビの音を聴く。

■身近な人と話しましょう。

静かなところで2人で話す。

■人数を増やして話しましょう。

4~5人の会話を聴き、誰が話しているのかに注意して聴く。自分もだんだん話の中に入っていく。

■一日中使ってみましょう。


買い物に出かけるなど、日常会話に使う。

(入浴、就寝時などは除く)

※外出のときには、落とさないように気をつけましょう。

強い衝撃を与えると故障の原因になります。

クリップを利用して衣服などに止めてください。

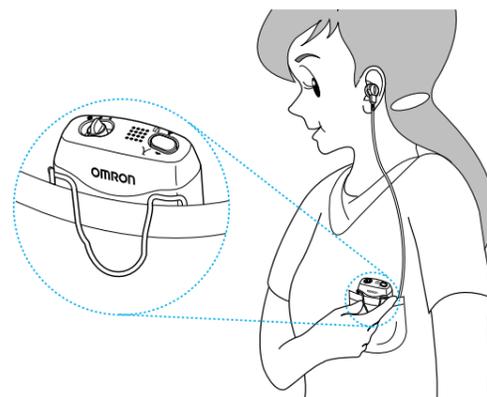

商品に関するお問い合わせ

オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

フリーダイヤル **0120-30-6606**

フリーファックス **0120-10-1625**

受付時間 9:00~19:00 (祝日を除く月~金)
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

おかしいな?と思ったら

ピーピー音 (ハウリング) がする

- ・マイクとイヤホンが近すぎませんか?
➡マイクとイヤホンを離してください。
- ・イヤホンが耳穴にしっかり入っていますか?
➡しっかり入れ直してください。
- ・音が大きすぎませんか?
➡音量を1段小さくしてください。

音がよく聴こえない

- ・乾電池が消耗していませんか?
➡新しい電池に取り替えてください。
- ・耳せんに耳あかが詰まっていますか?
➡耳せんのお手入れをしてください。


音がまったく聴こえない

- ・乾電池の ⊕ ⊖ の向きが間違っていますか?
➡正しく入れ直してください。
- ・電源が「入」になっていますか?
➡電源スイッチを押して「入」にしてください。
- ・イヤホンコードのプラグが外れていませんか?
➡プラグを取り付けてください。
- ・イヤホンコードが断線していませんか?
➡新しいイヤホンコードと交換してください。

※上記の方法でも良くならない場合は、内部機構にさわらずオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

仕様と性能

医療用具許可番号	13BZ2721
類別	器具器械 (73) 補聴器 (空気伝導式のものに限る)
一般的名称	ポケット型補聴器
使用目的/効能効果	電気的に増幅した音を聴覚器官に伝え、難聴者の聴力を補う。
商品名称	形式: オムロン イヤメイトオートポケット AK-21
規準周波数	1600Hz
90dB最大出力音圧レベル	ピーク: 125dB以下 1600Hz: 116±5dB
最大音響利得	43±5dB
等価入力雑音レベル	33dB以下
全高調波ひずみ (500/800/1600Hz)	10%以下
出力制限装置	内蔵
音量 (利得) 調整器可変幅	16±4dB
	「大」「中」「小」3段切替え、段間約8dB
自動騒音抑制装置	内蔵
使用可能電池	単3形乾電池 (1本)
電池寿命	約220時間 (高性能マンガン乾電池 (黒)) 約400時間 (アルカリ乾電池)
対象難聴	軽度~中等度難聴
大きさ	約44 (幅) × 69 (高さ) × 19 (奥行) mm
重さ	約31g (電池含まず)
使用温湿度	+10~+40℃、30~80%RH
製造元	武蔵リオン株式会社 東京都八王子市中野上町2-10-7
お問い合わせ先	オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー 住所: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 電話: 0120-30-6606 (オムロンお客様サービスセンター)

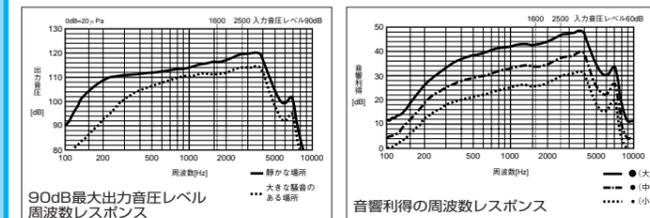

※上記の数値はJIS-C5512の密閉形擬似耳により測定、表示してあります。
※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品のお求めは オムロンお客様サービスセンターへ

〈通話料無料〉 **0120-35-5066**

受付時間 (祝日を除く月~金) 9:00~19:00

別売品のお求めはお買い上げの販売店、または全国どこからでも電話一本でご注文いただけますフリーダイヤルをご利用ください。

24時間 別売品/消耗品のご注文をお受けします。
オムロンインターネットパーツセンター
<http://shop.healthcare.omron.co.jp>

安全上の注意

MRI (磁気共鳴画像診断装置) 診断を受けるときは必ず本器を外してください。

- 故障の恐れがあります。

分解や改造は行わないでください。内部は特に精巧にできています。また、マイクや電池カバーを開け内部を針、マッチ棒などでつつかないでください。

- 故障の恐れがあります。



必要以上に大きな音で聴かないでください。

- 耳を痛める恐れがあります。
- 他人に本器を貸したり、他人から借りたりするのはやめてください。
- 耳にあわず、耳を痛めたり、耳の病気が感染する恐れがあります。

本器を取扱説明書記載以外の方法では使わないでください。

- 事故や故障の恐れがあります。
- 乳幼児や自分で意思表示できない人には使用しないでください。
- 事故やトラブルの原因となります。

注意

就寝時には、使わないでください。

- 事故や体調不良の恐れがあります。
- 激しい運動をするときは、本器を使わないでください。
- 故障の恐れ、または、落として破損する恐れがあります。

携帯電話及びPHS (簡易携帯電話) と一緒に本器を使わないでください。

- 発生する電波により、ノイズが入ったり音が小さくなるなどの影響を受ける場合があります。

本器を水で濡らさないでください。濡らした場合は、点検を依頼してください。

・本器を装着したまま入浴や洗髪などはしないでください。

・洗顔のときや、ヘアスプレーを使うときや、雨の降っているときなどは、本器を濡らさないようにしてください。

- 故障の恐れがあります。



お願い

本器に強いショックを与えたり落としたりしないでください。

3ヵ月以上ご使用にならないときは、乾電池を取り出しておいてください。

イヤホンコードを持って、引っ張ったりしないでください。