

オムロン 心電図印刷ソフト

HCG-SOFT-2
バージョン1.1.2

対応心電計

HCG-801

目次

はじめに	1
安全上のご注意	1
インストール前の注意事項	1
1 パッケージ内容	1
2 必要な動作環境	2
インストール	3
1 準備	3
2 インストール手順	3
トラブルシューティング	7
お願い	7

はじめに

オムロン心電図印刷ソフトは、オムロン携帯型心電計HCG-801で測定した心電図データを閲覧／印刷するソフトウェアです。

※本ソフトウェアは、オムロン携帯型心電計HCG-801の専用ソフトです。

安全上のご注意



警告

このディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオプレーヤー、DVD プレーヤー、家庭用ゲーム機などでは絶対に再生しないでください。

- 大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する原因になります。

インストール前の注意事項

1 パッケージ内容

このパッケージには次のものが含まれています。

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> インストール用CD-ROM | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> インストールマニュアル(本書) | 1冊 |

※取扱説明書は本パッケージには含まれておりません。本ソフトウェアのインストール後に下記の手順でご覧ください。

【Windows XP の場合】

- スタートメニューから[すべてのプログラム(P)]→[OMRON]→[オムロン心電図印刷ソフト]→[オムロン心電図印刷ソフト取扱説明書]をクリックしてください。

【Windows Vista / Windows 7 の場合】

- スタートメニューから[すべてのプログラム]→[OMRON]→[オムロン心電図印刷ソフト]→[オムロン心電図印刷ソフト取扱説明書]をクリックしてください。

【Windows 8/Windows 8.1の場合】

- Windowsの[アプリビュー]から[オムロン心電図印刷ソフト取扱説明書]をクリックしてください。

【Windows10の場合】

- スタートボタンから[すべてのアプリ]→[OMRON]→[オムロン心電図印刷ソフト取扱説明書]をクリックしてください。

2 必要な動作環境

このソフトウェアを実行するためには、次のような動作環境が必要です。

- 対応OS: 日本語版Windows 10(32Bit/64Bit版)
日本語版Windows 8.1(32Bit/64Bit版)
日本語版Windows 8(32Bit/64Bit版)
日本語版Windows 7(32Bit/64Bit版)
日本語版Windows Vista Service Pack 2(32Bit版)
日本語版Windows XP Service Pack 3(32Bit版)
※OSをアップグレードしてご使用になる場合は、上記のOSに該当しても動作保証外となりますのでご了承ください。
- パーソナルコンピュータ: 600 MHzまたはそれ以上のPentium互換CPU搭載のPC/AT互換機
- 搭載メモリ: 128 MB以上
- ハードディスク空き容量: 32 MB以上(.NET Framework 2.0がインストールされていない場合、加えて300 MBが必要)
- ディスプレイ: Super VGA(解像度800×600ピクセル)以上の高解像度ビデオアダプタおよびモニター
- その他: SDメモ리카ードスロット内蔵のパソコン、もしくはSDメモ리카ードリーダー等を接続し、SDメモ리카ードが読める環境
CD-ROMまたはDVDドライブ
A4サイズが印刷できるプリンタ(解像度1440×720ドット以上)
Microsoft® Internet Explorer 5.0以上
Adobe Reader 6.0.1 以上
Windows Installer 3.0 以上

※Macintoshシリーズのパソコンでは、ご利用いただけません。

商標・登録商標

- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、AcrobatおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国および他の国における商標または登録商標です。

インストール

1 準備

- オムロン心電図印刷ソフトのインストールは、Administrator権限、または管理者権限のあるユーザーで実施してください。
- インストールを始める前に、実行中のすべてのアプリケーションを終了しておいてください。
- ウィルスチェックプログラムをご使用中の場合
 - ①必ずいったん終了させてからインストールを実行してください。ウィルスチェックプログラムが起動していると本製品のセットアッププログラムが実行できない場合があります。
 - ②インストール終了後にウィルスチェックプログラムを再び実行してください。

2 インストール手順

- ①インストール用のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入してください。セットアッププログラムが起動します。

※[はい(Y)]をクリックし、表示される手順にそってバージョンアップしてください。



セットアッププログラムが起動しない場合

【Windows XP の場合】

1. スタートメニューから[マイコンピュータ]をクリックします。
2. [マイコンピュータ] 画面からインストール用のCD-ROMを挿入したCDドライブをダブルクリックしてください。

【Windows Vista / Windows 7 の場合】


1. スタートメニューから[コンピュータ]をクリックします。
2. [コンピュータ] 画面からインストール用のCD-ROMを挿入したCDドライブをダブルクリックしてください。
3. CD-ROM内が表示されますので、[setup.exe]アイコンをダブルクリックしてください。

【Windows 8/Windows 8.1/Windows10 の場合】

1. デスクトップのタスクバーから[エクスプローラー]をクリックします。
2. [エクスプローラー]で[PC]を選択します。
3. [デバイスとドライブ] からインストール用のCD-ROMを挿入したCDドライブをダブルクリックしてください。
4. CD-ROM内が表示されますので、[setup.exe]アイコンをダブルクリックしてください。

- ②要件のインストール画面が表示されます。[インストール]をクリックします。

※心電図印刷ソフトをインストールするためには、パソコン上に Microsoft .NET Framework 2.0 をインストールする必要があります。すでにインストールされている場合は、下の画面は表示されず、⑨へ進みます。

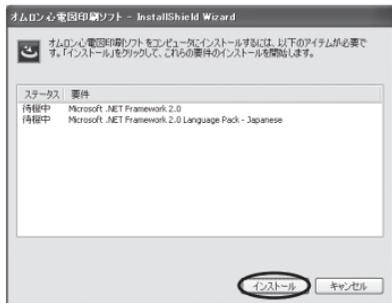


- ③Microsoft .NET Framework 2.0 のインストール画面が表示されます。[次へ(N)]をクリックします。




- ④Microsoft .NET Framework 2.0 の使用許諾契約書が表示されます。内容をよく読み契約に同意される場合は [同意する(A)] にチェックを入れて [インストール(I)] をクリックします。

※使用許諾契約に同意いただけない場合は、インストールを継続することができません。

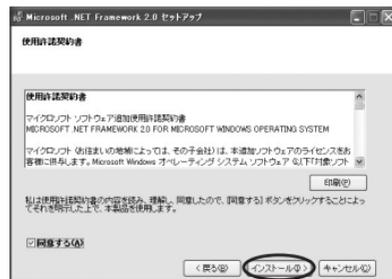

- ⑤Microsoft .NET Framework 2.0 のインストール完了の画面が表示されたら [完了(F)] をクリックします。

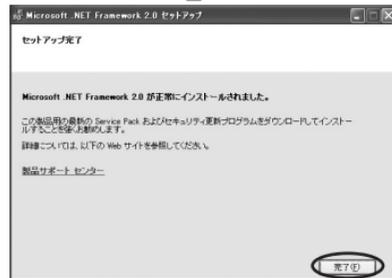

- ⑥Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack のセットアップの画面が表示されたら[次へ(N)]をクリックします。



- ⑦Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack のソフトウェア使用許諾書の画面が表示されます。内容をよく読み契約に同意される場合は[同意する(A)]にチェックを入れて[インストール(I)]をクリックします。
※使用許諾契約に同意いただけない場合は、インストールを続けることができません。



- ⑧Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack セットアップの完了画面が表示されたら[完了(F)]をクリックします。



- ⑨心電図印刷ソフトのインストールを開始する画面が表示されたら[次へ(N)]>をクリックします。



⑩使用許諾契約が表示されます。

内容をよく読み契約に同意される場合は、[使用許諾契約の全条項に同意します(A)]を選択し、[次へ(N)>]をクリックします。

※使用許諾契約に同意いただけない場合は、インストールを続けることができません。



⑪インストール先のフォルダを確認し、[次へ(N)>]をクリックします。

インストール先のフォルダを変更する場合は、[参照(R)…]をクリックしてフォルダを選択します。



⑫インストール完了の画面が表示されたら [完了] をクリックします。

※インストール完了後すぐに心電図印刷ソフトを起動しない場合は、チェックボックスのチェックを外します。



⑬デスクトップ上に心電図印刷ソフトのショートカットが作成されます。ダブルクリックすると心電図印刷ソフトが起動します。



⑭インストール用のCD-ROMをパソコンのCDドライブから取り出します。

トラブルシューティング

表示内容	原因	対処のしかた
このコンピュータの管理者特権がないと、一部のプログラムは正しくインストールできません。	ログインしているユーザーにAdministrator権限、または管理者権限がありません。	Administrator権限、または管理者権限のあるユーザーで、ログインしてインストールをしてください。
オムロン心電図印刷ソフトは、OSがWindows XP、Windows Vista、Windows 7 またはWindows 8、Windows 8.1、Windows10以外のパソコンにインストールできません。 setup.exeは有効なwin32アプリケーションではありません。	インストールしているパソコンのOSが、Windows XP、Vista、7、8、8.1、10ではありません。	使用できません。2ページの「 2 必要な動作環境」の対応OSをインストールしているパソコンに、心電図印刷ソフトをインストールしてください。
オムロン心電図印刷ソフトは、ハードディスク空き容量が32MB未満のパソコンにインストールできません。	オムロン心電図印刷ソフトをインストールするためのハードディスクの空き容量が不足しています。	ハードディスクの空き容量を確保するか、別のハードディスクにインストールしてください。

お願い

本商品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

お問い合わせは

オムロンお客様サービスセンター(心電計専用窓口)

通話料無料



0120-84-6606

通話料無料



0120-10-1625

※受付時間(月～金 9:00～19:00、土・日・祝日は9:00～17:00、年末年始除く)

※都合によりお休みさせていただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

※ダイヤルは正確におかけください。