


取扱説明書



オムロン USB通信トレイ HHX-IT2

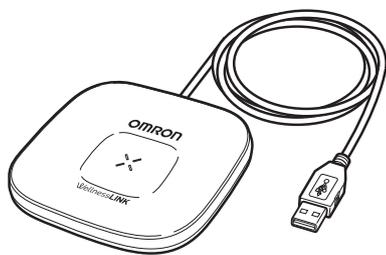

オムロン商品をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。


本書は、いつもお手元においてご使用ください。

本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

All for Healthcare

各部の名前

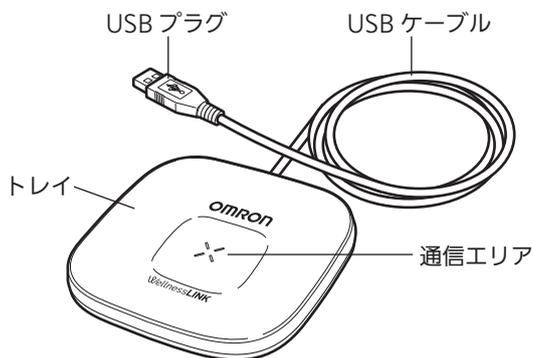

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

■警告、注意について

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

■図記号の例



●記号は強制（必ず守る）を示します。
(左図は“必ず守る”)



⊘記号は禁止（してはいけない）を示します。
(左図は“禁止”)

警告

本商品は電波を使用した RFID 機器のリーダー・ライターです。植込型医用電気機器を装着されている方は、装着部位を USB 通信トレイの通信エリアより 22 cm 以内に近づけないでください。



- 使用する用途・場所によっては、医用電気機器に影響を与える恐れがあります。

警告

傷んだ USB ケーブルや USB プラグは使用しないでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。



注意

パソコンの取扱説明書をよく読んでから使用してください。



強い磁力や電波の発生するものの近くや静電気の影響の強い場所では使用しないでください。

- 故障の原因やデータの転送ができない恐れがあります。



オムロン USB 通信トレイ対応機器以外のものを乗せないでください。また、同時に 2 台以上乗せないでください。



本体の分解や改造をしないでください。

- 故障の原因になります。



通信中に USB プラグを抜き差ししないでください。

- 故障の原因になります。



USB プラグには異物を入れないでください。

- 故障の原因になります。



専用の通信ソフトがインストールされているパソコン以外には接続しないでください。

- 故障やデータ破損の原因になります。



お願い

■取り扱いについてのお願い

本体に強いショックを与えたり、落としたりしないでください。

ぬれた手で USB プラグに触れたり抜き差ししたりしないでください。

- 故障の原因になります。

USB ケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルが機器の下敷きになったりしないようにしてください。

USB ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。

USB 通信トレイを外すときは、必ず USB プラグ部分を持って抜き、ケーブルを引っ張らないでください。

収納時など、トレイ部分に USB ケーブルを巻きつけないでください。

- ケーブルが破損する原因になります。



USB ハブをご使用になる場合、必ず AC アダプターを接続し、コンセントから電源を供給してください。

- 正常に動作しない場合があります。

■お手入れについてのお願い

いつも清潔にしてお使いください。

- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませてよく絞ったやわらかい布で、拭き取ります。その後、から拭きしてください。



本体を水洗いしないでください。

- 故障の原因になります。

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

- 変色や故障の原因になります。



■保管についてのお願い

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかる場所。
- 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。
- 静電気の影響の強いところ。

使い方

重要 USB 通信トレイ対応機器の設定や測定記録を転送するための USB 通信ソフトのインストールが必要です。インストールが終了するまで、USB 通信トレイをパソコンに接続しないでください。

詳しい使い方については、USB 通信トレイ対応機器の取扱説明書をお読みください。

動作環境

本商品を使用できるパソコンおよび環境は次の通りです。お使いの機種や環境をご確認ください。

■「ウェルネスリンク」をご利用いただけるパソコンの推奨環境

対応 OS	日本語版 Microsoft Windows XP (SP3 以上) / Vista / 7	日本語版 Mac OS X (10.5 / 10.6 / 10.7)
対応ブラウザ	Internet Explorer 7 / 8、Firefox 6、Safari 5	Firefox 6、Safari 5
インターフェイス	USB ポート (USB Revision 2.0/1.1 準拠)	
その他	Adobe Flash Player 10 以上、Adobe Acrobat Reader 8.0 以上	

- インターネット接続環境がないパソコンではご利用になれません。
- 推奨環境であってもお客様の環境によっては正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本商品は USB2.0 のポートでの動作を確認しています。お使いの際は USB2.0 のポートへの接続をお願いいたします。
- Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、Mac OS、Safari は、Apple Inc. の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- その他の本書に記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

※ 推奨環境については、次のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

<http://wlm.jp/>



通信機能について

本商品は電波法に基づく形式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。使用周波数は、13.56 MHz 帯です。本商品を改造、分解、本体裏面の型式番号を消すと、法律により罰せられることがあります。周囲に複数の非接触 IC カードリーダー・ライターをご使用の場合には 1m 以上間をあけてご使用ください。また、他の同一周波数帯を使用の無線機が近くにないことを確認後ご使用ください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

※通信できないときは、USB 通信トレイ対応機器取扱説明書の「おかしいな?と思ったら」をご確認ください。

仕様

販売名	オムロン USB 通信トレイ HHX-IT2
通信方式	ISO/IEC 15693 準拠
電源電圧	DC5V (USB より供給)
使用環境温湿度	+5~+35°C・30~85%RH
質量	約 100 g (USB ケーブル含む)
外形寸法	幅約 95.0×高さ約 13.5×奥行き約 95.0 mm
付属品	取扱説明書 (本書:品質保証書付き)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

※本商品を置く机などの材質が鉄などの材質の場合、通信に失敗するなど、正常に動作しないことがあります。正常に動作しない場合は、机などの金属から数センチ離してお使いください。

※複数の USB 通信トレイ対応機器と同時に通信させることはできません。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、ウェルネスリンクサポートデスクにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。This warranty is valid only in Japan.

販売名	オムロン USB 通信トレイ HHX-IT2
ご芳名	_____
ご住所	_____
TEL	(_____) _____

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

お買い上げ店名	_____ (印)
住所	_____
TEL	(_____) _____
お買い上げ年月日	_____ 年 _____ 月 _____ 日

発売元 **オムロンヘルスケア株式会社**
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



「ウェルネスリンク」製品・サービスのお問合せ
ウェルネスリンクサポートデスク

<http://wellnesslink.jp/support/>

土・日・祝日・年末年始、および弊社休職中にお寄せいただいたお問い合わせの回答は、翌営業日以降の対応となります。お問い合わせの内容によりましては、回答までに時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通信料はお客様ご負担となります。

5332887-8B