

オムロン赤外線治療器

HIR-100


温熱効果

取扱説明書

- このたびはオムロン赤外線治療器をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 保証書を兼ねていますのでお読みになったあとも大切に保管してください。

目次

赤外線治療器HIR-100の特長	1
各部のなまえとはたらき	2
正しい使い方	3
使用例	4～5
正しくご使用いただくために	6～8
お手入れの仕方	9
仕様	10
品質保証書	
保証規定	
オムロンフィールドエンジニアリング株のネットワーク	

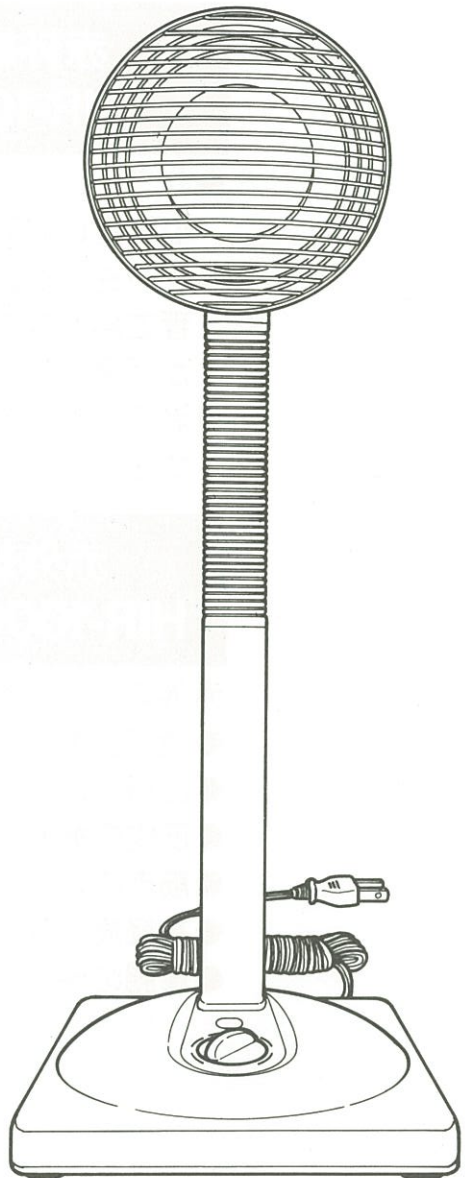

赤外線治療器 HIR-100の特長


- セラミックヒーターの温熱で、心地良い温熱治療を行えます。
- セラミックヒーターは、数分程で熱くなり始め、すぐに治療が行えます。
- 治療時間を設定できるタイマーつき。



赤外線治療器 HIR-100の効能・効果

赤外線による温熱効果

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 胃腸の働きを活発にする

各部のなまえとはたらき

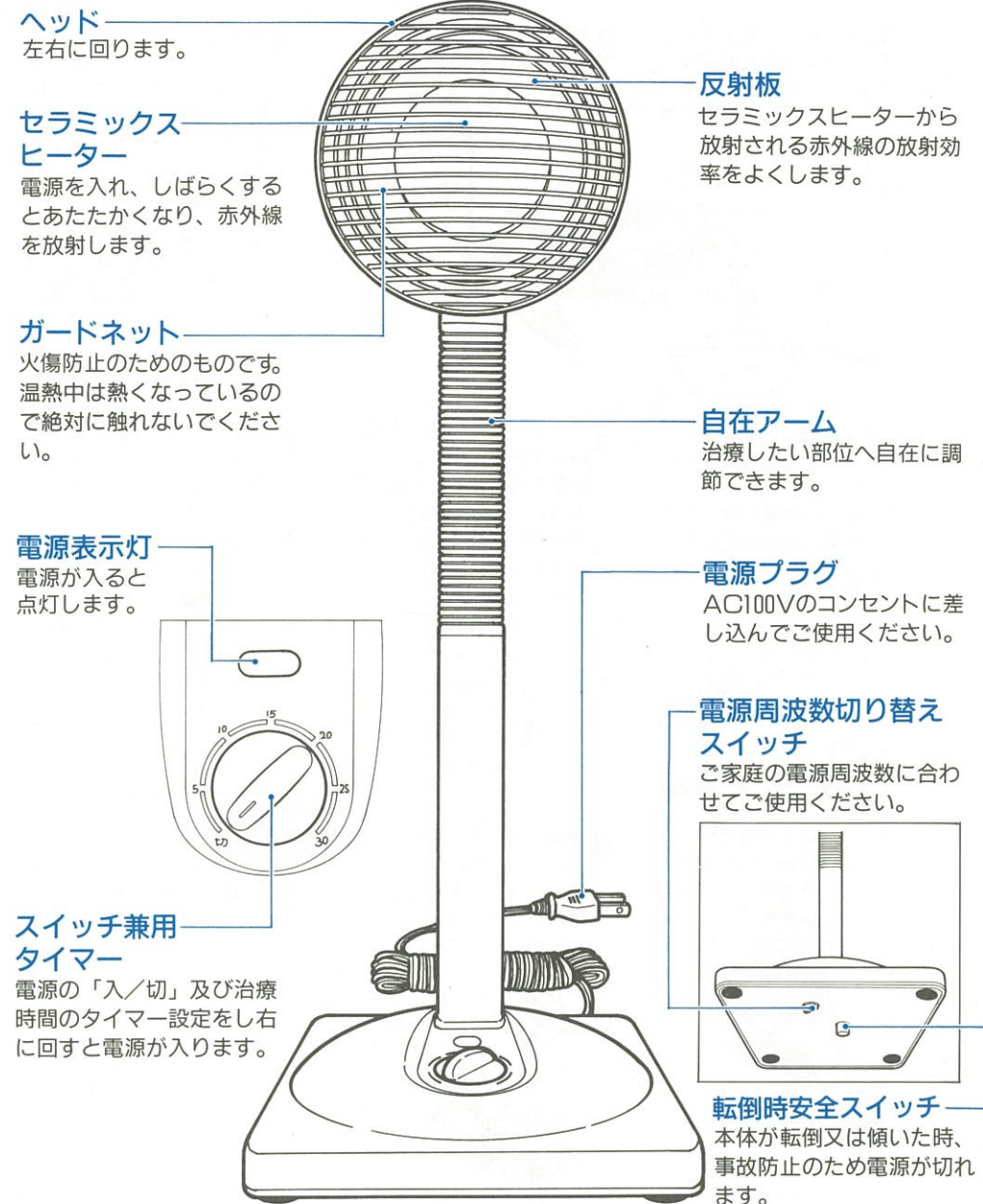


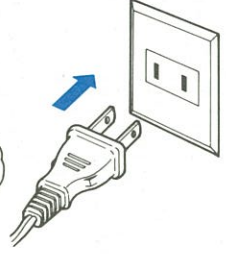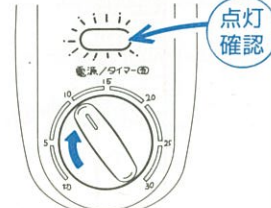1 電源周波数切り替えスイッチをご家庭の電源周波数に合わせてください。 (スイッチは本体底部にあります。) ※出荷時は60Hzに調整されています。 50Hzの地域でご使用の方は、スイッチを50Hzに合わせてください。 	2 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 	3 治療したいところの肌を露出してください。衣服を着たまま照射すると衣服（特に化学繊維）に赤外線が吸収されて、効果が半減します。 
4 治療したい部位にセラミックヒーターがくるように自在アームを曲げ、ヘッドを回し、心地良い暖かさになる位置に調節してください。 	5 タイマーを右に回して照射時間をセットしてください。時間を短縮するときは、左へ回してください。この時電源表示灯が点灯しているか確認してください。 	6 電源表示灯がつくと赤外線は放射されます。数分で丁度良い暖かさを感じ始めます。 
7 終わになると電源表示灯が消え、電源が切れます。この時、赤外線放射体は熱くなっていますので、ガードネットをはずしたり、収納したりしないでください。 	8 電源プラグをコンセントからぬいてください。この時、コードを引っ張らないで、電源プラグを持ってコンセントからぬいてください。 	9 ご使用後は、セラミックヒーターの熱が下がったことを確認し湿気の少ない所に、保管してください。


※症状により、人により異なりますが、照射時間は15分～30分が適当です。

こりや痛みの部位に合わせて、使いやすいように自在アームとヘッドを動かして照射してください。


ヒーターとの距離は 熱すぎず、ぬるすぎない心地よい暖かさになる位置に合わせてください。

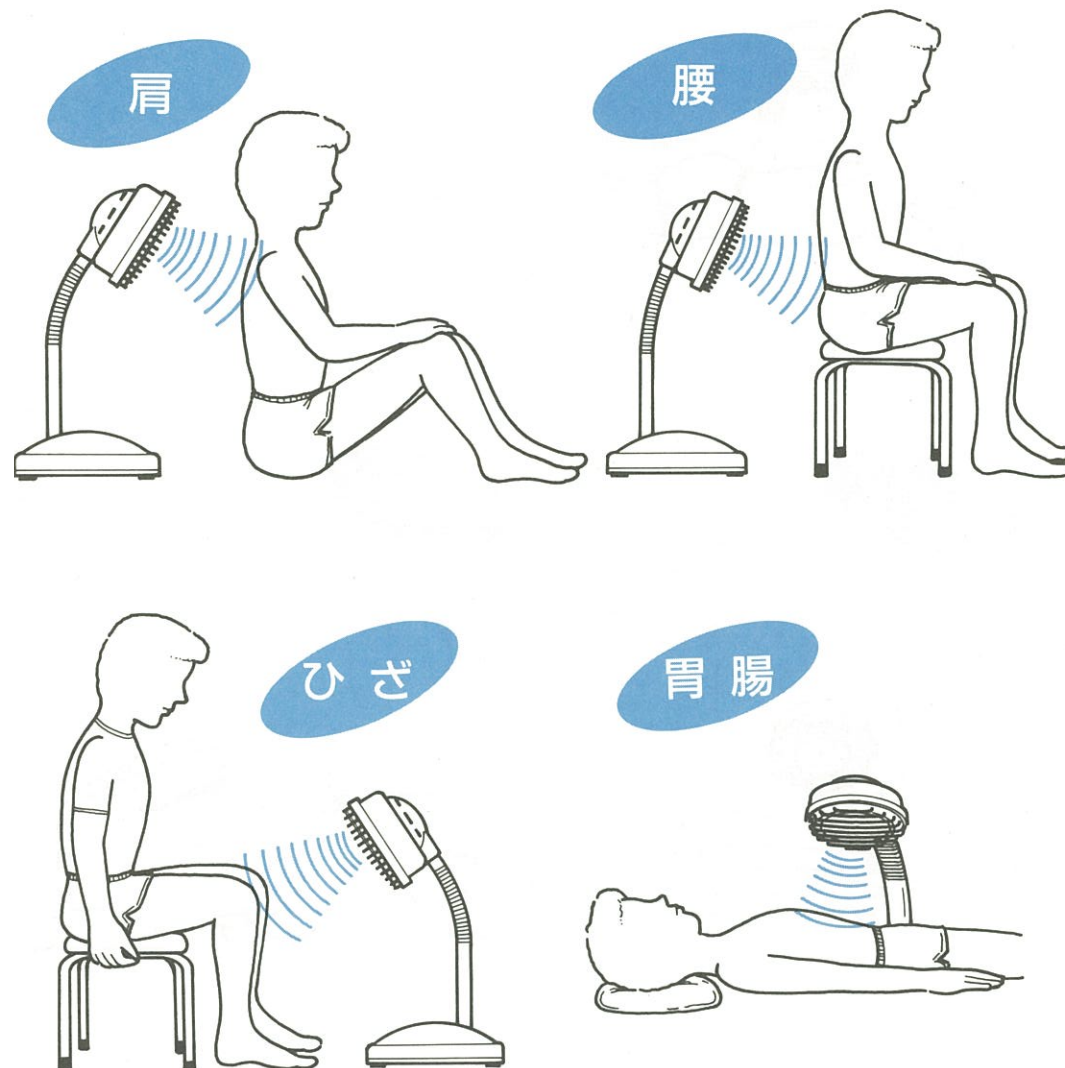


背中

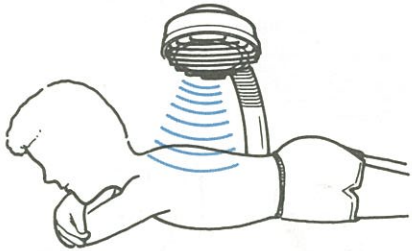

ひじ

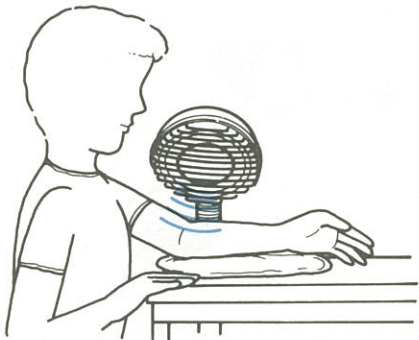

足先

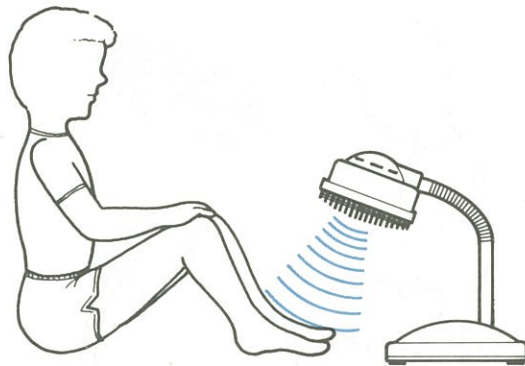

次の人は使用しないでください


- 新生児
- 今までに日光及びその他の光線により発赤、かゆみ等をおこしたことがある人

次の人は使用前に医師に相談してください

- 医師の治療を受けている人
- 熱の高い人
- 心臓、脳神経等に障害のある人
- 悪性腫瘍のある人
- 急性（疼痛性）疾患のある人
- 知覚障害のある人
- 安静を必要とする人
- 光線過敏症の人
- 医薬品を服用している人
- 化粧品、消毒剤等でかぶれたことのある人

使用前には次のことを注意してください

- 電源プラグは確実にコンセントへ接続してください。

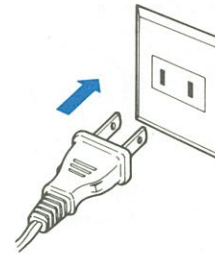

- カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。



- 堅くて平らな物の上で使用してください。

（ふとんなどの柔らかいものの上に本体をおくと、本体の安定が悪くなるばかりでなく、転倒時安全スイッチが作動することがあります）



- スイッチ兼用タイマーが正常に動くか確認した後ご使用ください。



- しばらく使用しなかった場合は、取扱説明書の各項をお読みの上、本機が正常にかつ安全に作動するか確認した後ご使用ください。



正しくご使用いただくために

ご使用上の注意

- 症状により、人により異なりますが照射時間は15分～30分が適当です。



- 顔に照射しないでください。
※赤外線を長時間顔に照射すると、目に支障をきたす場合があります。



- 通電中は、ヘッド部やガードネットが熱くなっているので、触れないでください。



- 30分以上連続して使用したり、セラミックスヒーターを近づけすぎて使用するなど皮膚を過剰に刺激するとヒリヒリしたり、赤くなることがあります。皮膚に炎症をおこすなど身体に異常がみられる場合は使用を直ちに中止してください。



- 使用により腫脹等があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談してください。



- 本機に故障を発見した場合は、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。



- 停電の時は、直ちにタイマー兼用スイッチを切ってください。タイマー兼用スイッチを切らないで放置しておくと、停電がなおった時本機に電源が入ります。



正しくご使用いただくために

故障を防ぐために

- ヘッドを軽く回して、回転が止まった時はむりに回さないでください。



- アームを折り曲げて、ボール部やベース部が熱くなるような使い方は故障の原因になります。このような使い方をしないでください。



- 本体を分解、改造したり、高いところから落としたり振動を与えたり、又、本体を倒したりしないでください。



- 使用後は必ずタイマー兼用スイッチの電源を切ってください。



- ヘッドを後ろ側に曲げないでください。



- アームを無理な力で曲げないでください。



- 洗濯物の乾燥など治療目的以外に使用しないでください。火災や発火の原因になります。




- 流し台の近くや風呂場など水がかかったり湿度の高い場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。



- ガードネットのすき間の中に指や物などは絶対に入れないでください。感電や、けが、火傷、故障の原因になります。



- ヘッドの後の穴に指や物を絶対に入れないでください。

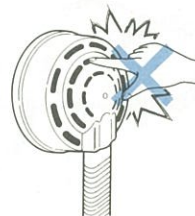

- 揮発性のスプレー（殺虫剤、整髪剤など）をセラミックスヒーターに噴霧しないでください。火災や発火の原因になります。



- 長時間の連続使用はおやめください。
- タイマーを必要以上回さないでください。
- 持ち運ぶ時は、アームの根元を持ってください。

お手入れの仕方

お手入れをする前に

●ヘッド部が熱くなっていることを確認した後にお手入れをしてください。

●お手入れの前には、必ず、電源プラグをコンセントからぬいてください。

●シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、化学ぞうきんなどで拭かないでください。清掃用のスプレーはご使用にならないでください。




●赤外線放射体（セラミックスヒーター）には触れないでください。



本体のお手入れ

●電源プラグをコンセントからぬいてください。

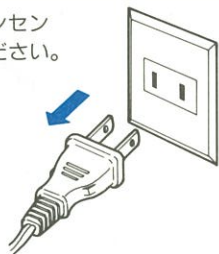


●ぬるま湯か中性洗剤を含んだ布で汚れをぬぐい取った後、柔らかい布でよく拭き取ってください。




反射板のお手入れ


1 電源プラグをコンセントからぬいてください。

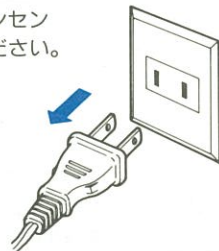


2 ヘッドの下部にあるガードネット固定用のネジをはずし、ガードネットを手前にひいてはすしてください。

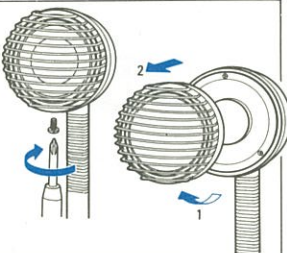

3 布で、汚れを拭き取ってください。

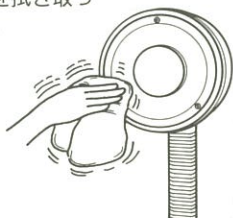


4 ガードネット上部のひっかかり部をヘッドのツメに合わせてはめこみ、固定用のネジをまわして固定してください。

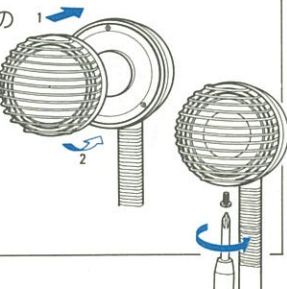

仕様／修理サービスネットワーク

- 商 品 名：オムロン赤外線治療器 温熱効果
- 型 式：HIR-100
- 電 源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：150W
- 定格時間：30分
- 型式認可番号：▽94-6153
- 医療用具承認番号：04B第1155号
- 外形寸法：250(W)×250(D)×730(H)mm
- 重 量：約3.1kg

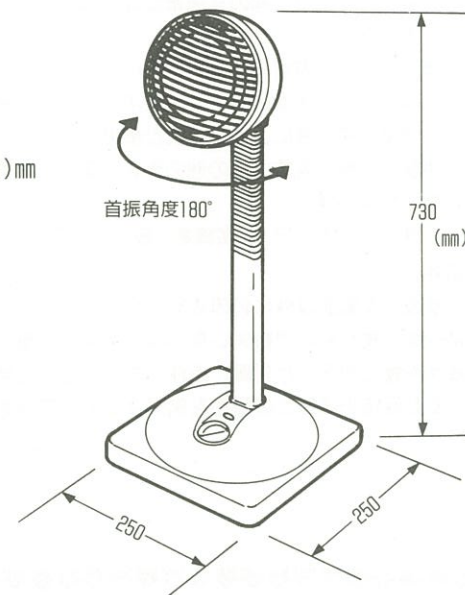

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社のネットワーク

'92.08

オムロンフィールドエンジニアリング

北海道株式会社 〒060 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6階

TEL 011(281)5121

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

仙台支店	〒980 仙台市青葉区二日町18-26 二日町OAビル2階	TEL 022(261)7054
大宮支店	〒336 埼玉県浦和市仲町1-14-8 三井生命浦和ビル2階	TEL 048(833)7911
東京事業所	〒150 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2階	TEL 03(3448)8104
東京第二テクノセンタ	〒103 東京都中央区日本橋本町1-4-12 日本橋センタビルディング3階	TEL 03(3270)6281
横浜テクノセンタ	〒221 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル2階	TEL 045(312)1923
静岡テクノセンタ	〒420 静岡市紺屋町11-19 静鉄紺屋町ビル5階	TEL 054(254)3718
名古屋支店	〒460 名古屋市中区丸の内3丁目22番21号 安田火災名古屋ビル7階	TEL 052(962)3281
金沢テクノセンタ	〒920 金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル1F	TEL 0762(61)5467
京都支店	〒604 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町344 日昇ビル1階	TEL 075(255)4171
大阪事業所	〒530 大阪市北区堂島浜2丁目1番9号 古河大阪ビル西館	TEL 06(348)1814
神戸テクノセンタ	〒650 神戸市中央区中山手通3-4-8 大東ビル5階	TEL 078(332)5531
広島支店	〒730 広島市中区鞆町13-14 新広島ビル5階	TEL 082(227)1573

オムロンフィールドエンジニアリング

九州株式会社	〒812 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル3階	TEL 092(451)6748
鹿児島支店	〒890 鹿児島市鴨池新町5-6 鹿児島県プロバングス会館4階	TEL 0992(52)7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。