


# 取扱説明書

オムロン ネックマッサージャ

HM-141

HM-142

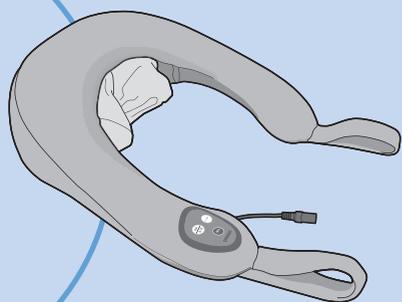

このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
ました。

- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

## 目次

### ご使用前に

入っていますか？	1
安全上のご注意	2
各部の名前	7
ご使用になる前に	8

### 使い方

このマッサージャの使い方	9
お手入れと保管	13


### 困ったときに・保証など

おかしいな？と思ったら	14
仕様	15
別売品	16
保証規定／品質保証書	裏表紙


 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

# 入っていますか？

## 1 本体

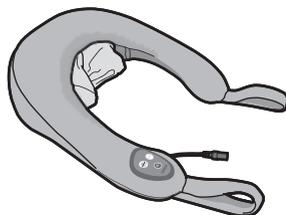

## 2 専用 AC アダプタ

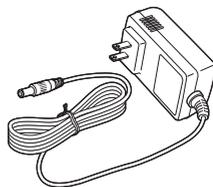

## 3 取扱説明書 (本書：品質保証書付き)



# 安全上のご注意ください

お使いになる前に必ずお読みください。

ここに示した内容は、商品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

## 警告、注意について

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負うことが想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害\*の発生が想定される内容を示します。

\* 物的損害とは、家屋や家財、および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

## 図記号の例

●記号は強制（必ず守ること）を示します。



⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。



## 警告

### 一般的なことについて

使用前に布破れがないか確認し、どんな小さな破れでも見つけた場合は使用を中止し、オムロンお客様サービスセンターへ修理を依頼してください。

- 髪の毛や衣類、アクセサリーなどが巻き込まれ、事故やけがの原因になります。



次のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- (1) ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- (2) 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- (3) 心電計などの装着型医用電気機器

- これら医用電気機器の誤作動をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。



医師からマッサージを禁じられている人は、使用しないでください。

例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）、けいつい（頸椎）症など

- 事故や体調不良の原因になります。

# 安全上の「大」注意



## 一般的なことについて

次の人は医師と相談してご使用ください。

- 脚部に重度の血行障害のある人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温 38℃以上（有熱期）の人

例）急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき

- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人
- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- 体力の衰えた人
- 腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの人
- ・ 事故や体調不良の原因になります。



必ず守る

しばらく使用しても効果が表れない場合は、医師または専門家に相談してください。

本商品は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用してください。また、長時間触れないでください。

- ・ 低温やけどの原因になります。

治療部位の周辺にアクセサリーなどを着けたまま使用しないでください。

- ・ 事故やけがの原因になります。

子供に使用させないでください。また、本体の上に乗せたり遊ばせたりしないでください。

- ・ 事故やけが、体調不良の原因になります。

自分で意思表示できない人や身体の不自由な人には、1人で使用させないでください。

- ・ 事故やけが、体調不良の原因になります。

使用中、故意に強くあてるなど無理な力をかけないでください。

- ・ けがや体調不良の原因になります。

車の運転や機械の操作など、危険をともなう作業中に使用しないでください。

- ・ 事故やけがの原因になります。

手首、足首など、身体の細い部位には使用しないでください。

- ・ もみ玉がはさまり、事故やけがの原因になります。

のどや、頭部・腹部・胸部・ひじ・ひざなど骨部には使用しないでください。

- ・ 事故や体調不良の原因になります。

首の周辺をマッサージするときは、もみ玉が強く当たらないように注意してください。

- ・ 事故や体調不良の原因になります。

本体に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

- ・ 火災や感電、けがの原因になります。



禁止



水場禁止

## 警告

### 一般的なことについて

<p>マッサージ以外の目的に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• けがや体調不良の原因になります。</li><li>• 事故や故障の原因になります。</li></ul>	 禁止
<p>ストーブなど熱い物の近くや、電気毛布、こたつ、ふとんの中などで使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• やけどや火災の原因になります。</li></ul>	
<p>マッサージ部を強く押ししたり、もみ玉の間に物を挟んだりして、もみ玉の動きを止めないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 火災や故障の原因になります。</li></ul>	 分解禁止
<p>分解や修理、改造をしないでください。また、布カバーも外すことはできません。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 発火したり、故障や事故の原因になります。</li></ul>	

ご使用前に

### AC アダプタの取り扱いについて

<p>専用 AC アダプタのコードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、本商品を使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 感電やショート、発火の原因になります。</li></ul>	 禁止
<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外では使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。</li></ul>	
<p>専用 AC アダプタのコードの取扱いは以下の項目に注意してください。</p> <p>■ 傷つけない ■ 破損させない ■ 加工しない ■ 無理に曲げない ■ 引っ張らない ■ ねじらない ■ 使用時は束ねない ■ 重い物を載せない ■ 挟み込ませない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 感電、火災、故障の原因になります。</li></ul>	 ぬれ手禁止
<p>専用品以外の AC アダプタは使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 火災や故障の原因になります。</li></ul>	
<p>ぬれた手で専用 AC アダプタを抜き差ししないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 感電やけがの原因になります。</li></ul>	

# 安全上の「大」注意

## ⚠ 注意

### 一般的なことについて

<p>食後すぐの使用は控えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 体調不良の原因になります。</li></ul>	 必ず守る								
<p>本商品が動かなくなったり異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、オムロンお客様サービスセンターへ修理を依頼してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 加熱やショートなどによる事故、トラブル、故障の原因になります。</li></ul>									
<p>身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 医師に相談して指示に従ってください。</li></ul>	 禁止								
<p>他の治療器と同時に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 気分が悪くなったり、けがや体調不良の原因になります。</li></ul>									
<p>マッサージは1日15分以上しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。</li></ul>									
<p>使用中に眠らないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 事故やけがの原因になります。</li></ul>									
<p>酒に酔った状態で使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 事故やけがの原因になります。</li></ul>									
<p>もみ玉に必要な以上の強い力をかけないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• けがや、故障の原因になります。</li></ul>									
<p>本体の上にとったり、乗ったり、座ったりしないでください。また、もみ玉の上 に物を落下させないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• けがや、本商品が破損する原因になります。</li></ul>									
<p>本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 感電や火災、故障の原因になります。</li></ul>									
<p>次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。</p> <table border="0"><tbody><tr><td>■ 直射日光が当たる場所</td><td>■ 高温多湿の場所</td><td>■ 水のかかる場所</td></tr><tr><td>■ ほこりの多い場所</td><td>■ 火気の近く</td><td>■ 振動衝撃の加わりやすい場所</td></tr><tr><td>■ 強電磁界下</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	■ 直射日光が当たる場所	■ 高温多湿の場所	■ 水のかかる場所	■ ほこりの多い場所	■ 火気の近く	■ 振動衝撃の加わりやすい場所	■ 強電磁界下		
■ 直射日光が当たる場所	■ 高温多湿の場所	■ 水のかかる場所							
■ ほこりの多い場所	■ 火気の近く	■ 振動衝撃の加わりやすい場所							
■ 強電磁界下									

## ⚠注意

### ACアダプタの取り扱いについて

<p>専用 AC アダプタはしっかり根元まで差し込んでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>感電、ショート、発火の原因になります。</li></ul>	 必ず守る
<p>専用 AC アダプタを抜くときは、コードを引っ張らず、専用 AC アダプタ本体を持って傾けずにまっすぐ抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>専用 AC アダプタのコード断線やショートにより、火災や感電の原因になります。</li></ul>	
<p>電源プラグのほごりはふき取ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ほごりに湿気が加わると、感電、ショート、発火の原因になります。</li></ul>	
<p>停電したときは、ただちに専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>事故やトラブルの原因になります。</li></ul>	 電源プラグを抜く
<p>使用後は電源を切り、専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>事故やトラブルの原因になります。</li></ul>	
<p>使用時以外は専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ほごりや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。</li></ul>	
<p>お手入れの前には、専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>感電やけがの原因になります。</li></ul>	
<p>収納時に専用 AC アダプタのコードを本体や専用 AC アダプタに巻きつけないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>専用 AC アダプタのコード断線やショートにより、火災や感電の原因になります。</li></ul>	
	 禁止

## お願い

初めてご使用いただくときや、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおり操作をおこない、正常に動作することをご確認ください。

テレビの近くで使用しないでください。

- 画面が変色したり、電波状態により若干テレビ画面がちらつくことがあります。

本商品の近くで携帯電話を使用しないでください。

- 誤作動の原因になります。

本商品を廃棄するときは、お住まいの各都道府県や市区町村の指導に従ってください。

- 環境汚染の原因になります。


本商品を廃棄するときは、分解しないでください。

# 各部の名前

## 本体

もみ玉(ヒーター内蔵)

マッサージ部

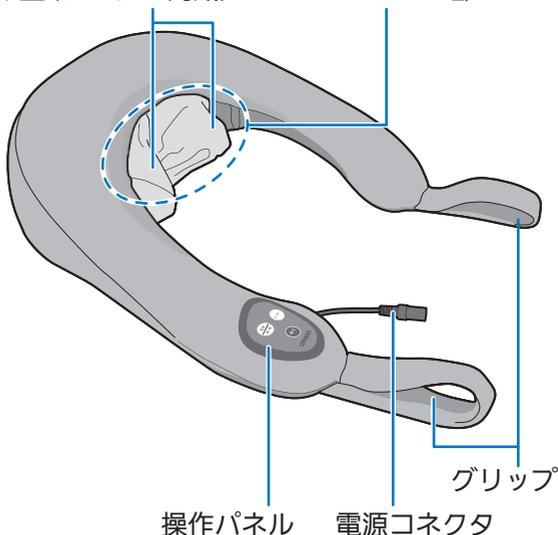

## 操作パネル

### 電源ボタン

ボタンを押すと、電源の ON および、回転速度の「遅/速」が切り替わります。本体動作時に点灯します。



### 停止ボタン

ボタンを押すと、電源が OFF になり、もみ玉の動作が止まります。ヒーターが ON の場合、ヒーターも OFF になります。

### ヒーターボタン


ボタンを押すと、ヒーターの ON/OFF が切り替わります。ヒーターが ON のとき、ボタンが点灯します。  
※ヒーターによる温熱治療効果はありません。

## 専用 AC アダプタ

### 専用 AC アダプタ本体


電源プラグ

プラグ

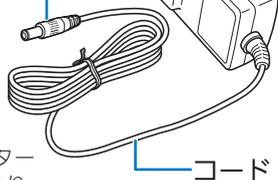

コード

# ご使用になる前に

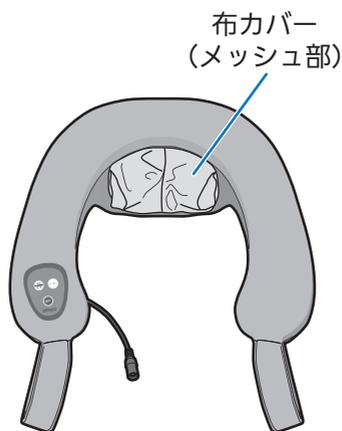

- メッシュが破れていないか確認してください。どんな小さな破れでも見つかった場合は、絶対に使用しないでください。
- 操作部のボタンやオートパワーオフ機能が正常に動作するか確認してください。正しく動作しない状態で使用すると、事故やけがの原因になります。  
「オートパワーオフ機能」(P.12)

※異常が発見されたときは、そのまま使用せずにオムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼してください。(裏表紙)

# このマッサージャの使い方

1

本体の電源コネクタに専用 AC アダプタのプラグを差し込む

※プラグは奥までしっかり差し込んでください。

2

専用 AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む



※専用 AC アダプタ本体を持って、奥までしっかり差し込んでください。

3




を押して、電源を入れる


電源が入るとボタンが点灯し、もみ玉の回転が始まります。

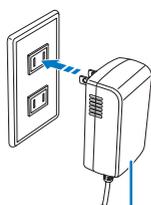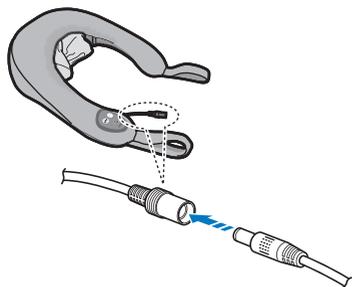

専用 AC  
アダプタ本体

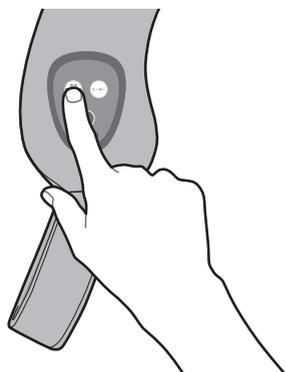

### もみ速度の変更

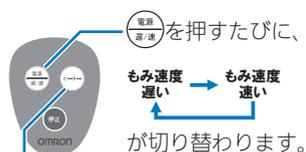

### ヒーター機能

ヒーターを押すたびに、ヒーターの ON/OFF が切り替わります。  
ヒーターが入ると、もみ玉とヒーターボタンが点灯し、徐々にもみ玉が温かくなります。

※ヒーターのみの使用はできません。  
※ヒーターによる温熱治療効果はありません。

# このマッサージャの使い方

4

本体を使用部位に当て、  
マッサージする

※首への使用時は、グリップを持つと便利です。  
※もみ玉の刺激が強すぎる場合は、摩擦で皮膚を傷めるおそれがあるため、タオルなどの布をあてがってご使用ください。  
※ご使用の際にあやまって本体を落としてけがをしないよう注意してご使用ください。

5

使用後、を押して電源  
を切る

6

専用 AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜く

※コードを引っ張らず、専用 AC アダプタ本体を持ってコンセントから抜いてください。

7

本体の電源コネクタから、  
専用 AC アダプタのプラグを  
抜く



※コードを引っ張らず、電源コネクタとプラグを持って抜いてください。

## 使用例


首



太もも

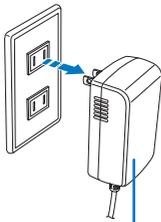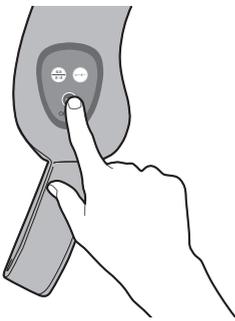

専用 AC  
アダプタ本体

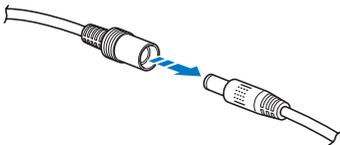

## オートパワーオフ機能

必要以上の刺激や電源の切り忘れを防ぐため、動作開始から約 15 分後に自動停止します。

# お手入れと保管

## お手入れ時のお願い

- 操作パネル・電源コネクタ  
乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 本体  
やわらかい布にぬるま湯で薄めた中性洗剤をしみ込ませ、よくしぼってから表面の汚れをふき取ってください。

※本体表面の布カバーは取り外さないでください。  
※変色などを防ぐため、汚れを落とすときにシンナー  
やベンジンなどを使用しないでください。



## 保管時のお願い

- 乳幼児やこどもの手の届く場所には保管しないでください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、湿度の低いところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないようにカバーなどをかけて保管してください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

# おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
動かない	専用 AC アダプタが抜けている。	正しく接続してください。
突然止まった	大きな負荷がかかっている。	安全装置が作動して止まっています。負荷を除いて電源ボタンを押すと、再び動作が開始します。
	本体内部が高温になって、安全装置が作動した。	本体内部が過剰な温度になるのを防ぐため、繰り返し使用した場合や高温環境下で使用した場合、安全装置により動作が止まることがあります。時間を置いてから再度お試しください。
	必要以上の刺激や電源の切り忘れを防ぐため、動作開始から約15分後に自動停止します。 (故障ではありません)	
もみ玉のヒーターが温かにならない	お使いになる環境や使用時間によっては、ヒーターが最高温度に達しないことがあります。	
動作音が大きい	本商品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。	

※上記の方法でも直らない場合は、故障が考えられます。商品の故障および修理の依頼につきましては、オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）までお問い合わせください。（裏表紙）

# 仕様

販売名	オムロン ネックマッサージャ HM-141
商品型式名	HM-141-BW (ブラウン) / HM-141-PK (ピンク) HM-142-DB (ディープブラウン) / HM-142-WR (ワインレッド)
医療機器認証番号	226AABZX00086000
類別	機械器具 77 バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器分類	管理医療機器
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。 ● 疲労回復 ● 血行を良くする ● 筋肉の疲れを取る ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 (かんかい)
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格入力	30W (ヒーター部 6W 含む)
回転数	遅: 約 30 回 / 分 速: 約 40 回 / 分
オートパワーオフ	約 15 分
耐用期間*	3 年 自己認証 (当社データ) による
使用環境条件	+ 10 ~ + 40℃ 30 ~ 85% RH
保管環境条件	- 20 ~ + 60℃ 10 ~ 95% RH
外形寸法	幅 約 360 × 高さ 約 338 × 奥行き 約 178 mm
本体質量	約 1180g (専用 AC アダプタ含まず)
原材料	本体: ポリウレタンフォーム、ポリエステル もみ玉: ポリアセタール樹脂
ヒーターの最高温度	50℃以下
付属品	専用 AC アダプタ (HM-141-AC2)、 取扱説明書 (品質保証書付き)
製造販売元	オムロン ヘルスケア株式会社 住所: 〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地 電話: 0120-30-6606 (オムロンお客様サービスセンター)
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION 中華人民共和国

\* 標準的な使用期間の目安 (1 日 1 回 15 分使用時)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。


# 別売品

別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター  
(☎電話 0120-30-6606) までご連絡ください。

- 専用 AC アダプタ

型式 HM-141-AC2

この専用 AC アダプタは本商品に付属しているものと同じです。

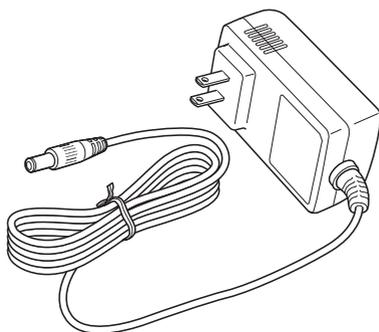





## 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
  - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - (ヘ) 消耗部品。
  - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
  - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

### 品質保証書

このたびは、オムロン商品を、お買い求めいただきありがとうございます。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

商品型式名 HM-141-BW/HM-141-PK/HM-142-DB/HM-142-WR

ご芳名

ご住所

TEL ( )

お買い上げ店名

Ⓔ

住 所

TEL ( )

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元

**オムロンヘルスケア株式会社**

〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



## 製品のお問い合わせ、別売品や消耗部品のお求め、修理のご依頼

オムロン お客様サービスセンター

TEL 通話料無料 **0120-30-6606**

FAX 通話料無料 **0120-10-1625**

受付時間  
(祝日を除く月～金)  
9:00～19:00

都合により、お休みをいただいたり、受付時間を変更させていただいたりすることがあります。あらかじめご了承ください。

〒 515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

通話料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)