



お手入れと保管

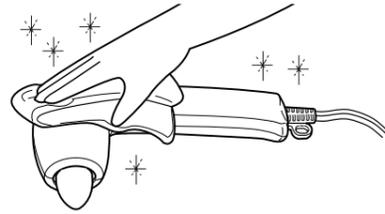

本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

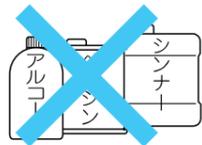

次の条件を満たしている環境下で保管してください。

温度：-20~+60℃

湿度：10~95%RH（結露無きこと）

ベンジン、シンナー、アルコールなど揮発性の液体や、濡れた布などは使用しないでください。

汚れやホコリを取ったあと下記の場所を避けて収納してください。

- 直射日光のあたる場所
- 高温多湿の場所
- 水のかかる場所
- ホコリの多い場所
- 火気の近く
- 振動衝撃の加わりやすい場所

おかしいな?と思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、まず次の点をお調べください。

動かない

点検するところ 電源プラグが抜けていませんか。

直しかた 正しく接続してください。

点検するところ 長時間使用や、無理な力をかけることにより、本体が熱くなっていますか。

直しかた 安全装置が働いて、止まっています。電源スイッチを「切」にしてください。約30分程度放置し、本体内部の温度を下げた後、正しい使い方1~3の順でご使用ください。


破損してしまった

直しかた 修理を依頼してください。

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

仕様

医療用具許可番号	24BY0001
類別	器具器械77パイプレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
使用目的/効能効果	あんま、マッサージの代用 ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の緩解
商品名称 型式	オムロンマッサージャ HM-155
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	約10W
定格時間	15分
タタキ回数	タタキ：50/60Hz (約200回/分) パイプ：50Hz (約1,000回/分) 60Hz (約1,200回/分)
タタキ強さ	約40N

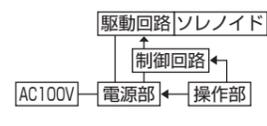外形寸法	幅約60×高さ約110×奥行約200mm
質量	約400g
動作原理	操作部の動作モード指示情報にもとづき、制御回路が駆動回路を動作させ、ソレノイドを駆動することにより指定されたマッサージ動作をさせる。 
付属品	取扱説明書(品質保証書付き)
輸入元	オムロン松阪株式会社 〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370
製造元	OMRON DALIAN CO., LTD. 中国 大連市
お問い合わせ先	オムロンヘルスケア株式会社 住所：〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 電話：0120-30-6606 オムロンお客様サービスセンター

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



取扱説明書 オムロンマッサージャ HM-155

- このたびは、オムロンマッサージャをお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないように保管してください。



余韻が残る、心地よいリズム。

「タタキ」
「パイプ」
2段階切替

ため打ち[※]は
プロの
マッサージ感

軽量で
持ちやすく
操作簡単

※振動させながらたたくことで、余韻の残る打ちかたのことで。

..... 使い方に関しては、裏面をご覧ください

お問い合わせ窓口

修理・商品に関するお問い合わせ
別売品・消耗品のお求めは

オムロンお客様サービスセンター

電話 0120-30-6606 通話料無料
FAX 0120-10-1625 通信料無料

受付時間 9:00~19:00 月~金(祝日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

別売品・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。

オムロンインターネットパーツセンター
<http://shop.healthcare.omron.co.jp>
24時間受け付けています。
(通信料、送料はお客様ご負担となります。)

オムロン健康機器ホームページ
<http://www.healthcare.omron.co.jp/>
※通信料はお客様ご負担となります。

保証規定/保証書

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理いたします。
2. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
(ニ) 本書の提示がない場合。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(ヘ) 消耗部品。
(ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
(チ) その他取扱説明書(本書)に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。
6. 補修部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。


品質保証書

このたびは、オムロン健康機器をお買い求めいただきありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。
※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限り、※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただきます。This warranty is valid only in Japan.

品名	オムロンマッサージャ	お買い上げ店名	
形式	HM-155	住所	
ご芳名		Tel. ()	
ご住所		お買い上げ年月日	年 月 日

発売元
オムロンヘルスケア株式会社
〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地

各部のなまえとはたらき

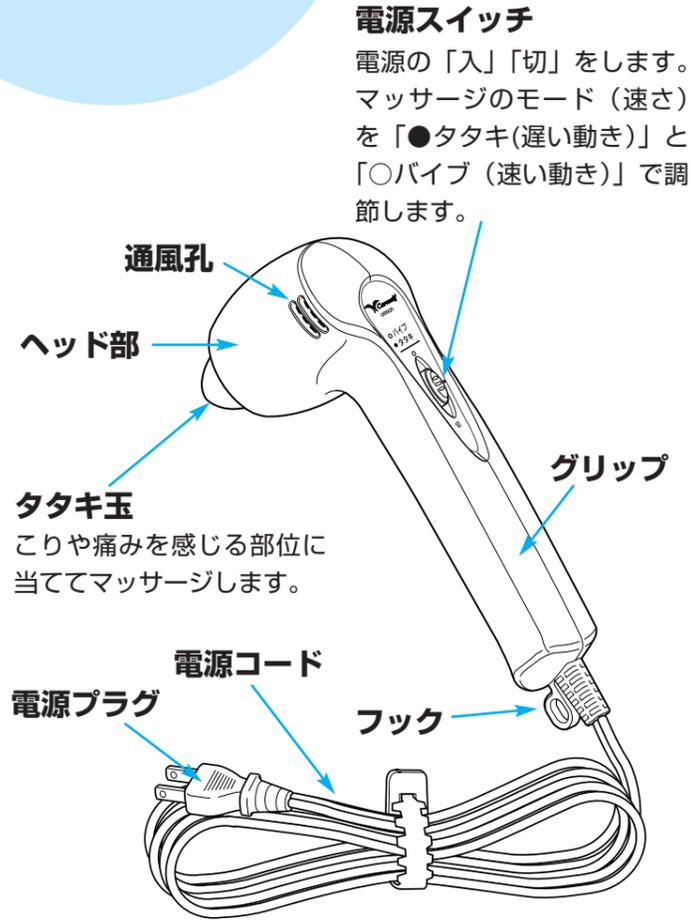


電源スイッチ
電源の「入」「切」をします。マッサージのモード（速さ）を「●タタキ（遅い動き）」と「○パイブ（速い動き）」で調節します。

タタキ玉
こりや痛みを感じる部位に当ててマッサージします。

正しい使い方

1 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグを確実にコンセントへ差し込みます。

いろいろな部位の疲れに

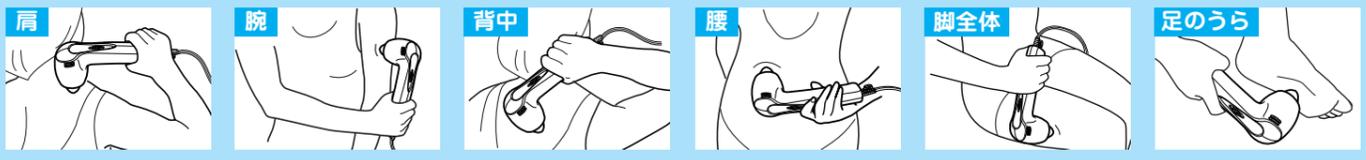

使用例 こりや痛みの部分に応じて、お好みのモード（速さ）で、使いやすいようにご使用ください。

2 マッサージのモード（速さ）を、お好みで選択します。マッサージが始まります。

電源スイッチを「●タタキ（遅い動き）」または「○パイブ（速い動き）」の、どちらか心地よいモード（速さ）を選んでください。

※タタキ玉の押し当て具合により、マッサージの刺激が変化します。

お好みの刺激でマッサージしてください。また、押さえ過ぎに気を付けてください。

※タタキおよびパイブのタタキ方は、プログラムで制御しています。特にパイブの時にタタキ方が変化します。

3 マッサージが終わったら電源スイッチを「切」にして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

安全装置について

使用していると本体の温度が上がりますが、異常ではありません。しかし、次のような使い方によって本体内部の温度が上がりすぎると安全装置が作動しタタキ玉が停止します。（故障ではありません）

- 無理な力をかけたとき
- 長時間連続使用したとき

安全装置が作動したときのお願い

まず、電源スイッチを「切」にしてください。約30分程度放置し、本体内部の温度を下げた後、正しい使い方1～3の順でご使用ください。

※電源が「入」のまま内部温度が下がると、自動的に動き始めます。電源スイッチは必ず「切」にしてください。

安全上のご注意

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内容
	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例	
	△記号は注意（警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「感電注意」を示します。
	○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「電源プラグを抜くこと」を示します。

警告	
次の人は、必ず医師と相談してご使用ください。 ■医師の治療を受けているときや、とくに身体に異常を感じているとき ■悪性腫瘍のある人 ■心臓に障害のある人 ■妊娠している人 ■安静を必要とする人 ■背骨に異常のある人や曲がっている人 ■かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人 ■熱の高い人 ■体力の衰えた人 ■急性疾患の人 ■骨粗しょう症の人 ■知覚障害のある人 ●事故や体調不良をおこす恐れがあります。	
分解や修理、改造をおこなわないでください。 ●発火したり、故障や事故の原因となります。	
濡れた手で、電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。 ●感電やけがをする恐れがあります。	

注意	
使用中、身体に異常があらわれたり、感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。 ●事故やトラブルの原因となります。	
本機が動かない場合や異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお客様サービスセンターへご相談ください。 ●感電、ショート、発火の原因となります。	
本体を無理に回したり、押し曲げたり、体重などの大きな力を加えることや、落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えることは絶対に避けてください。 ●故障する恐れがあります。	

注意	
マッサージ以外の目的ではご使用にならないでください。また腰部や頭部・首・ひじ・ひざなど骨部へのご使用は避けてください。 ●事故や体調不良をおこす恐れがあります。	
マッサージは、一日15分以内に、また同一箇所への3分以上の連続使用はしないでください。 ●筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。	
乳幼児や自分で意思表示のできない人には使用しないでください。また幼児の手の届くところで使用しないでください。 ●事故やトラブルの原因となります。	
ふとんやコタツの中などでは絶対に使わないでください。 ●事故や故障につながる恐れがあります。	
電源プラグはホコリを拭きとり、しっかり根元まで差し込んでください。 ●感電、ショート、発火の原因となります。	
ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●絶縁劣化により感電や漏電火災の原因となります。	
お手入れをするときは、必ず電源を切り電源プラグを抜いてください。 ●感電やけがをする恐れがあります。	
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電、ショート、発火の原因となります。	

注意	
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●絶縁劣化により感電や漏電火災の原因となります。	
本体に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。 ●火災や感電の原因となります。	
電源は必ず交流100Vで使用してください。 ●火災や感電の原因となります。	
コンセントから電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らず、必ず電源プラグを手で持って抜いてください。 ●電源コードが断線やショートして火災や感電の原因となります。	
タコ足配線は、しないでください。 ●火災や漏電の原因となります。	

- お願い**
- ご使用前にタタキ玉、電源スイッチ、電源コードなどの製品の点検をおこない、安全に動作することを確認してからご使用ください。万一、異常が発見されたときは、ただちに使用を中止し、電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - テレビの近くで使用した場合、画面変色したり、電波状態により若干テレビ画面がちらつくことがあります。
 - ご使用中、本体の通風孔をふさがないようにしてください。
 - 本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。本機が誤動作する恐れがあります。