

商 品 名	オムロン ローラーマッサージャ	外 形 寸 法	幅368×高さ115×奥行き200 (mm)
型 式	HM-201	重 量	約3kg
電 源	AC100V 50/60Hz	電源コードの長さ	約200cm
消 費 電 力	15W(タイマー「切」後、約4W)	布カバー材質	ナイロン100%
タイマー	約20分	交換カバー材質	ナイロン100%
ローラー本数	8本	医療用具承認番号	7B輪第603号
ローラー速さ調節	約60～100回転/分	型式認可番号	▽91-53715

※改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

保証規定

- 1.取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 2.無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店、オムロン(株)の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)のネットワークに依頼または送付してください。
なお、送付の場合はオムロン(株)の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)までの送料の負担をお願いします。
- 3.無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損害。
(ニ) 本書の提示がない場合。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ) 消耗部品。
(ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 5.この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない、品質を確保しております。しかし通常の使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

品 名 オムロンローラーマッサージャ
形 式 HM-201
ご芳名
ご住所
Tel. ()

お買い上げ店名

住所

Tel. ()

お買い上げ年月日

年 月 日


発売元 オムロン株式会社 健康統轄事業部
〒105 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL:03(3496)7092



オムロンローラーマッサージャ取扱説明書

TOKOTON ROLLER WIDE HM-201

- このたびはオムロンローラーマッサージャHM-201をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくためにお使いになる前にこの取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後はいつも手元に置いてご使用ください。
- 保証書を兼ねていますので、紛失しないようにしてください。

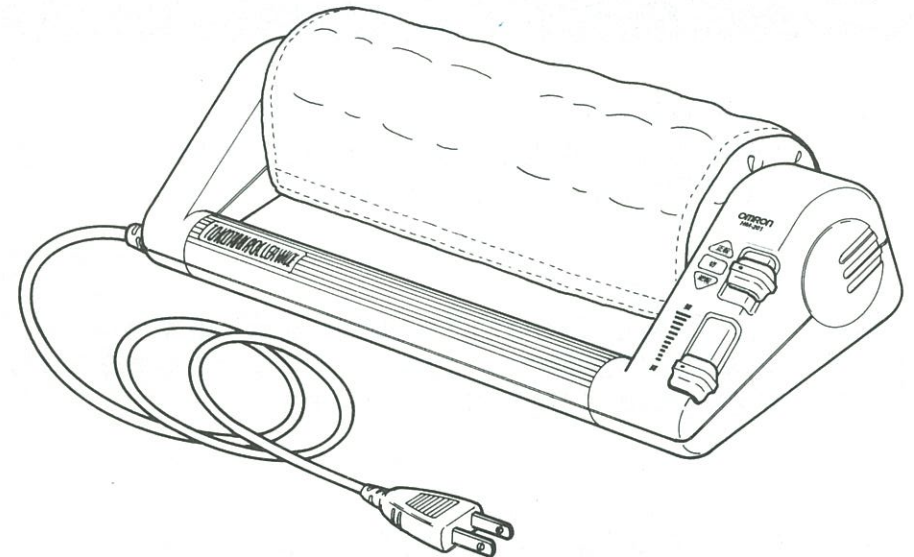

もくじ

安全上のご注意	1～4	お手入れのしかた	9
各部のなまえ	5	商品に関するお問い合わせは	
特 長	6	修理のお問い合わせは	10
正しい使い方	7	仕様・品質保証書	うら表紙
代表的なご使用例	8		

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



△記号は注意(警告を含む)を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は“感電注意”を示します。



⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な注意内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は“分解禁止”を示します。



●記号は強制(必ず守ること)を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は“差込みプラグを抜くこと”を示します。

警告

医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえで使用ください。


- 体力の衰えた方 ■急性疾患の方
- 悪性腫瘍の方 ■妊娠されている方
- 高血圧の方 ■心臓病など、からだに異常のある方
- 安静を必要とする方 ■骨粗しょう症の方
- 背骨に異常のある方や曲がっている方
- かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する方
- 知覚障害の方



- 事故や体調不良をおこす恐れがあります。


修理や改造は行わないでください。

- 事故や異常動作によるけがの恐れがあります。

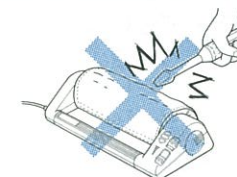

布カバーが破れたり、外れた状態では使用しないでください。

- 事故やけがをする恐れがあります。

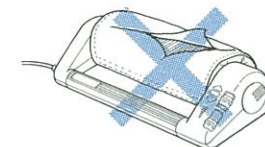


腹部や頭部・ひじ・ひざなど骨部への使用は避けてください。

- 事故や体調不良をおこす恐れがあります。



プラグをコンセントから抜くときは、ぬれた手で抜き差ししないでください。


- 感電やけがをする恐れがあります。

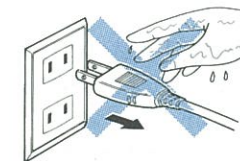

⚠ 注意

ご使用中、故意に強くあてると無理な力をかけてローラーの動きを止め続けたりしないでください。

●故障する恐れがあります。

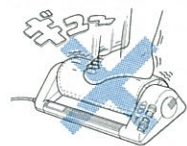

使用中に、異音やガタツキを感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源スイッチを「切」にした上、電源プラグをコンセントより抜いてください。

●そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。
故障の可能性がありますので必ず点検修理を受けてください。



同一箇所へ連続5分以上使用しないでください。

●筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり逆効果をまねくことがあります。



幼児やご自分の意思表示ができない方には使用しないでください。

●事故や体調不良を起こす恐れがあります。



幼児の手の届くところでは、使用しないでください。

●事故につながる恐れがあります。



使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合はすぐに使用をやめてください。

●事故や体調不良を起こす恐れがあります。



浴室など湿気の高いところでは使用しないでください。また、水や湯をかけないでください。

●事故や故障につながる恐れがあります。




お願い

電源コードを持って本体を引っばらないでください。また電源コードを傷つけたり無理に曲げたり、重い物をのせたり挟み込んだりしないでください。

●断線など故障の原因になります。

●電源コードが破損し、火災や感電をする恐れがあります。

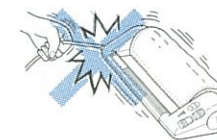

テレビの近くで使用した場合、電波状態により若干テレビ画面のチラツキが発生することがあります。



マッサージ以外の目的ではご使用にならないでください。


●事故や故障につながる恐れがあります。



本体の上に座ったり横倒したり、裏返したりなど手荒に扱わないでください。



ストーブなど熱いものの近くや、電気毛布こたつの中などで使用しないでください。

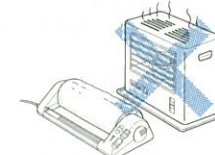


汚れやほこりを取ったあと、湿気や直射日光をさけて収納してください。



布カバーを無理に押ししたり、引っばったりしないでください。また、ご自分では絶対に取りはずさないでください。



各部のなまえ

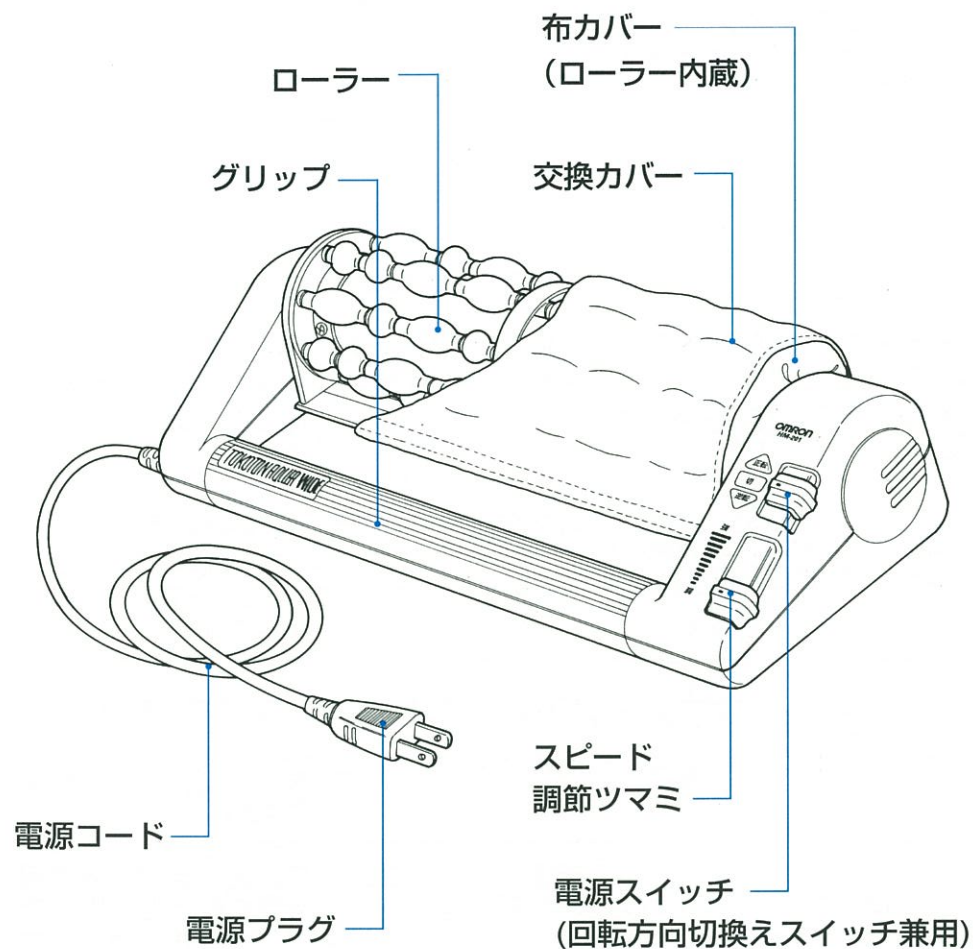


オムロンローラーマッサージャ HM-201の特長

- 1 ローラーが個々に回転して、足裏・腰・ふくらはぎなどを刺激し、疲労回復・血行促進にお役立ていただけます。
- 2 ローラーの回転スピードは無段階調節
約60～100回転/分のローラーへ回転を無段階で調節できますので、ご使用部位に合わせて、お好みの強さが楽しめます。
- 3 回転方向を自由にコントロール
効果を高めるために、ご使用部位に合わせて、お好みの回転方向をお選びいただけます。
- 4 使いやすい、ワイド設計
足の大きさに関係なく使い心地のよいワイドな両足対応の本格派です。
- 5 使いやすい、前面スイッチ
電源スイッチ・スピード調節つまみを前面につけ、操作しやすくしました。
- 6 約20分で自動停止する、タイマー内蔵。
- 7 汚れ防止用、とり換え可能な交換カバーがついて、いつも清潔マッサージ。

正しい使い方

1. 電源スイッチを「切」にしてください。

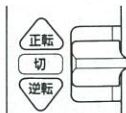


2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

⚠ 注意


- ・必ず交流100Vで使用してください。
- 火災・漏電の恐れがあります。



3. 電源スイッチを「正転」または「逆転」にしてください。ローラーが「正転」または「逆転」の方向に回ります。回転方向を切り換える時は、スピード調節ツマミを「弱」にしてから切り換えてください。

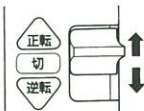

4. スピード調節ツマミでお好みのスピードをお選びください。

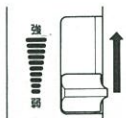

5. ローラーに患部を押しつけて、マッサージをおこなってください。



6. ご使用後は、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

- ・電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 火災・漏電の恐れがあります。



◎タイマーについて

内蔵タイマーによって、約20分で自動的に停止します。再度ご使用になる場合は、一度電源を「切」にした後電源を入れてください。

◎安全装置について

過大な負荷や長時間の連続使用により内部温度が上昇した場合は、安全装置が作動し、ローラーが停止します。この場合は電源スイッチを「切」にして1時間程度放置し、内部機構温度を下げた後、ご使用ください。

※電源スイッチが「切」になっていない場合は、安全装置解除後、ローラーが回転し始めますので、必ず電源スイッチを「切」にしてください。

代表的なご使用例

足の裏



足首




腰・背中



ふくらはぎ



太もも

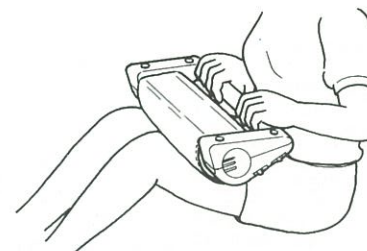

お手入れのしかた

⚠ 注意


- ・お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
- 感電やけがをする恐れがあります。




本体の汚れは、乾いたやわらかい布で空ぶきしてください。ベンジン、シンナー、アルコールなど揮発性の液体や、濡れた布などは使用しないでください。



●交換カバーの取扱いについて

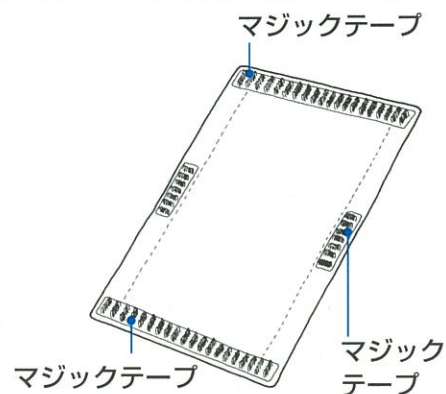

1. 交換カバーの端をマジックテープで布カバーの上にとりつけてください。

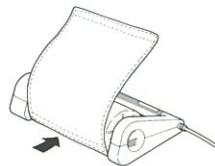

2. 交換カバーの逆側を持ってローラーに巻くようにとりつけてください。



●交換カバーを洗濯する場合

弱水流にて、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。



塩素系漂白剤につけると、脱色しますので、ご注意ください。



カバーを洗濯機にて、洗濯する場合は、マジックテープ部が、他の衣類を痛めることがありますので、洗濯ネットなどに入れて、洗濯してください。



アイロンはかけないでください。



商品に関するお問い合わせは

お買い上げの販売店またはオムロン健康相談室にお問い合わせください。

商品の使い方に関するお問い合わせは、

オムロン健康相談室がお答えします。



全国どこからでも

むろん オムロン

0120-30-6606

ダイヤルは正確に

受付時間/10:00~12:00/13:00~16:00(月~金)

※商品の故障および修理の依頼につきましては下記に記載のオムロンフィールドエンジニアリング(株)にお問い合わせください。



修理のお問い合わせは

お買い上げの販売店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)までお問い合わせください。品質保証書の記載内容により修理をさせていただきます。

北海道地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株) 〒060 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6階	TEL011(281)5121
東北地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株)仙台支店 〒980 仙台市青葉区二丁目18-26 二丁目OAビル3階	TEL022(261)7054
関東地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株)東京支店 〒150 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ヌノサワ東急ビル2階 オムロンフィールドエンジニアリング(株)東京第2支店 〒101 千代田区神田紺屋町8番地 アセンド神田紺屋町ビル7階 オムロンフィールドエンジニアリング(株)大宮支店 〒336 埼玉県浦和市仲町1-14-8 三井生命浦和ビル2階 オムロンフィールドエンジニアリング(株)横浜テクノセンタ 〒221 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル2階	TEL03(3448)8104 TEL03(5296)1760 TEL048(833)7911 TEL045(312)1923
東海地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株)名古屋支店 〒460 名古屋市中区丸の内3-22-21 安田火災名古屋ビル7階 オムロンフィールドエンジニアリング(株)静岡テクノセンタ 〒420 静岡市紺屋町11-19 静鉄紺屋町ビル5階	TEL052(962)3281 TEL054(254)3718
北陸地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株)金沢支店 〒920 金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル1階	TEL0762(61)5467
関西地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株)大阪第1支店 〒530 大阪市北区堂島浜2-1-9 古河大阪ビル西館1階 オムロンフィールドエンジニアリング(株)京都支店 〒604 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町344 日昇ビル1階 オムロンフィールドエンジニアリング(株)神戸テクノセンタ 〒651 神戸市中央区小野柄通3-2-22 富士火災神戸ビル9階	TEL06(348)1814 TEL075(255)4171 TEL078(242)8268
中四国地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株)広島支店 〒730 広島市中区鞆町13-14 新広島ビル5階	TEL082(227)1573
九州地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング九州(株) 〒812 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多信成ビル3階 オムロンフィールドエンジニアリング九州(株)鹿児島支店 〒890 鹿児島市鶴池新町5-6 鹿児島県プロパンス会館4階	TEL092(451)6748 TEL0992(52)7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。