


オムロン フットマッサージャ HM-231

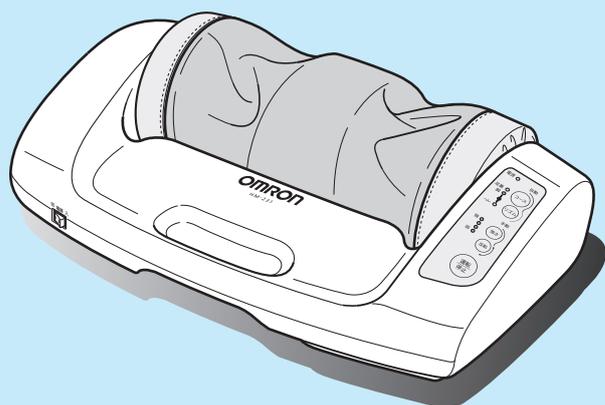

TOKOTON FOOT 指圧 & もみ

- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本商品は家庭用です。不特定多数の方々にご利用になる場所ではご使用にならないでください。

■ 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

ご使用前の前に

安全上のご注意	1
各部の名前	5
ご使用前の確認	6
このフットマッサージャの使い方	7

マッサージする

足裏を自動マッサージする	9
脚（足首・ふくらはぎ）を 自動マッサージする	11
お好みの部位を手動マッサージする	13

困ったときに・保証など

おかしいな?と思ったら	15
お手入れと保管	16
仕様	18
別売品について	18
保証規定／品質保証書	裏表紙

安全上の ご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

- 記号は強制（必ず守ること）を示します。（上図は“必ず守る”）



禁止

- 記号は禁止（してはいけないこと）を示します。（上図は“禁止”）

警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上（有熱期）の人
- 例）急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人
- 背骨に異常のある人や曲がっている人
- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- 体力の衰えた人

- 事故や体調不良の原因になります。

使用後は安全のために、電源スイッチを「切」にしてください。

- 事故やトラブルの原因になります。

布カバーや交換カバーの取り扱いは、次のことを必ず守ってください。

布カバーについて

- 外れたり破れたりしたときは、すぐに使用を中止し、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください

交換カバーについて

- 外れたときは、必ず取り付けて使用してください
- 破れたりしたときは、必ず新しいものと交換してください

- 事故やけがの原因になります。



必ず守る

警告

布カバーや交換カバーが外れたり破れたりした状態では絶対に使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。

医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例) 血栓(寒栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- 事故や体調不良の原因になります。

下記のような医用電気機器との併用は、絶対にしないでください。

- (1) ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
- (2) 人工心肺などの生命維持用電気機器
- (3) 心電計などの装着型医用電気機器

- これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

子供に使用させないでください。また本体の上で遊ばせたり、上に乗らせないでください。

- 事故やけが、体調不良の原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

- 気分が悪くなったり、体調不良の原因になります。
- けがの原因になります。

付属の交換カバー以外は使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。

胸部や頭部・首・ひじ・ひざなど骨部には使用しないでください。

- 事故や体調不良の原因になります。
- 衣服や髪が巻き込まれて、事故やトラブルの原因になります。

マッサージ部とケースのすき間に手や足を入れないでください。

- 事故やけがの原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しないでください。

- タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

- 感電やけがの原因になります。

本体に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。また、交換カバーを十分乾燥しない状態で取り付けしないでください。

- 火災や感電、けがの原因になります。



禁止



ぬれ手禁止



水場禁止

⚠ 注意

本商品が動かなくなったり異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。

- 加熱やショートなどによる事故、トラブル、故障につながる原因になります。

身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

- 医師に相談して指示に従ってください。

電源プラグのほこりはふき取ってください。

- ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

- 電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

電源コードの取り扱いは以下の項目に注意してください。

- 傷つけない ■ 破損させない ■ 加工しない
- 無理に曲げたり、引っ張らない ■ ねじらない ■ 使用時は束ねない
- 重い物を載せない ■ 挟み込ませない

- 感電や火災、故障の原因になります。

使用中に停電したときは、ただちに電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

- 事故やトラブルの原因になります。

使用後は電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

- やけどや、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

お手入れの前には、電源プラグを抜いてください。

- 感電やけがの原因になります。

マッサージは1日15分以上しないでください。また同一箇所への連続5分以上の使用はしないでください。

- 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。

乳幼児や自分で意思表示できない人には使用しないでください。また幼児の手の届くところで使用しないでください。

- 事故やけが、体調不良の原因になります。

視覚障害のある人は1人で使用しないでください。

- けがや体調不良の原因になります。

使用中、故意に強くあてるなど無理な力をかけてマッサージ部の動きを止め続けたりしないでください。

- けがをしたり、足を痛める原因になります。



必ず守る



電源プラグを抜く



禁止

⚠ 注意

マッサージ以外の目的に使用しないでください。

- 事故や故障の原因になります。
- けがや体調不良の原因になります。

本体に強いショックを与えたり、落としたり、踏んだり、上に立ったりしないでください。

- けがや、本商品が破損する原因になります。

本体を立てるなど、不安定な状態で置かないでください。

- 本体が倒れてけがをする原因になります。

ストーブなど熱い物の近くや、電気毛布、コタツ、ふとんの中などで使用しないでください。

- やけどや火災の原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。

- 発火したり、故障や事故の原因になります。



禁止



分解禁止

お願い

初めてご使用いただくときや、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおり操作をおこない、正常に作動することをご確認ください。

くつ下などを着用してご使用ください。

本商品の近くで携帯電話を使用しないでください。

- 誤作動の原因になります。

しばらく使用しても効果が表れない場合は、医師または専門家にご相談ください。

持ち運ぶときは、グリップを持ってください。

次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。

- 直射日光が当たる場所 ■ 高温多湿の場所 ■ 水のかかる場所 ■ ほこりの多い場所
- 火気の近く ■ 振動衝撃の加わりやすい場所 ■ 強電磁界下

本商品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。


- 環境汚染の原因になります。

本商品を廃棄するときは、分解しないでください。

各部の名前

ご使用前に

本体

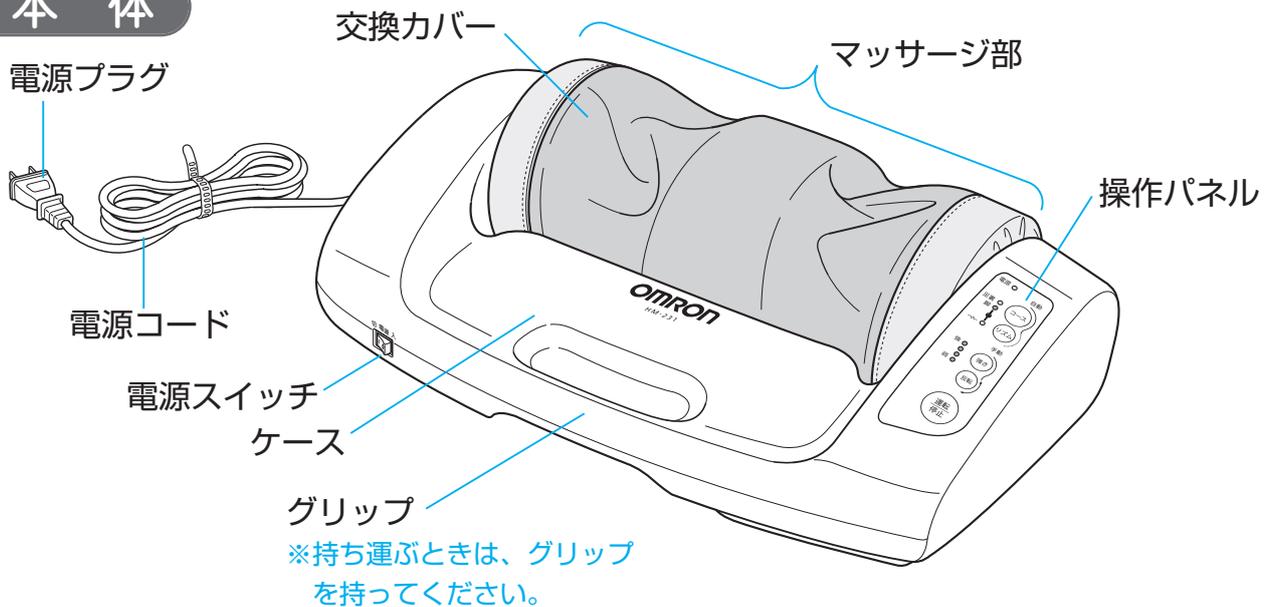

カバーについて

布カバー

※絶対取り外さないでください。




交換カバー

※交換カバーは消耗部品です。破れたりしたときは別売品をお求めください。(P.18ページ)

マッサージ部について


指圧&もみ

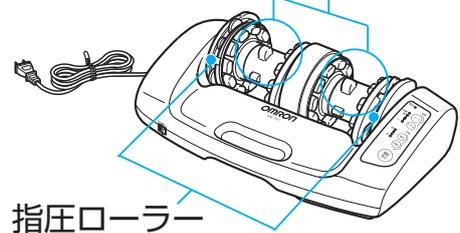

布カバーや交換カバーが外れたり破れたりした状態では絶対に使用しないでください。

イラストは説明するためのイメージ図です。

操作パネル拡大図

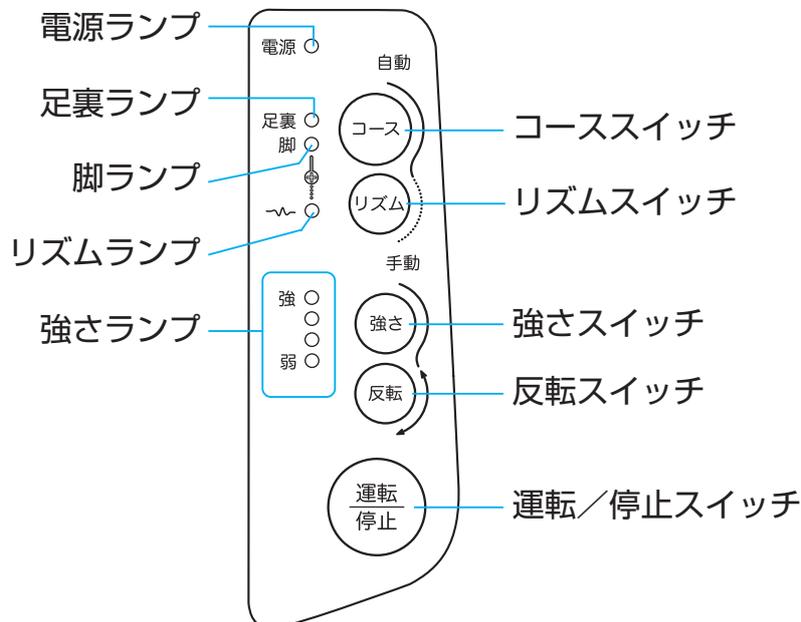

ご使用前の確認

本商品を安全にお使いいただくために、必ず使用前に点検してください。

チェック1

交換カバーの布地が破れていないか確認する

警告

布カバーや交換カバーが外れたり破れたりした状態では絶対に使用しないでください。



- 事故やけがの原因になります。



チェック2


電源コードを確認する

- コードの被覆に破損や破れがないか確認する

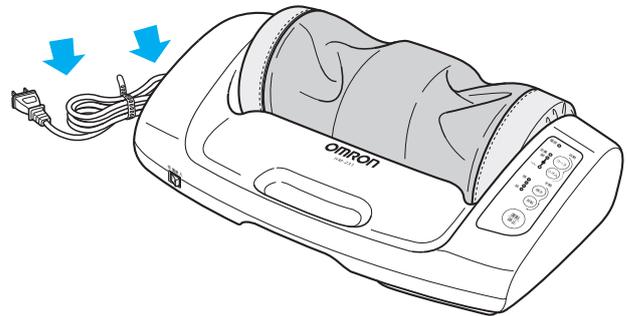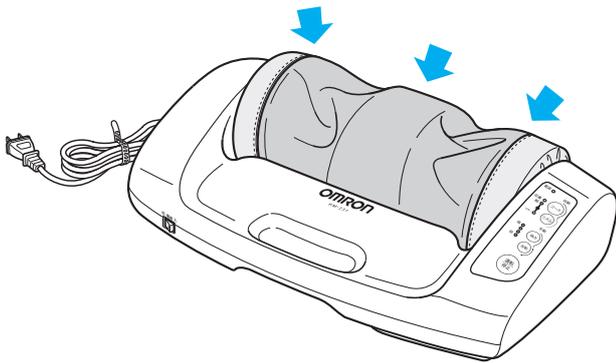

チェック3

本体にひび、破損がないか確認する

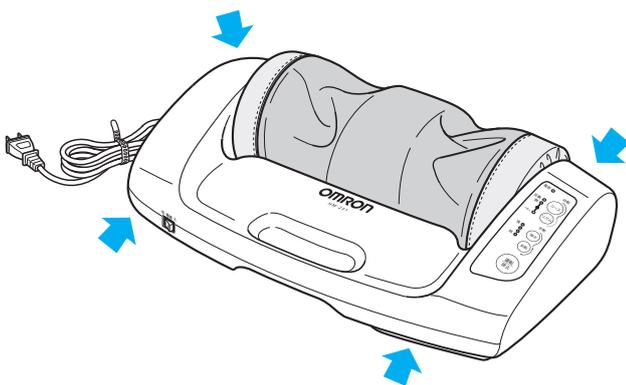

ご使用前の確認の結果、異常が発見されたときは…

- そのまま使用せずに、オムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼してください。(裏表紙)


このフットマッサージャの使い方

HM-231は、このような流れで使います。

1

電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを「入」にする

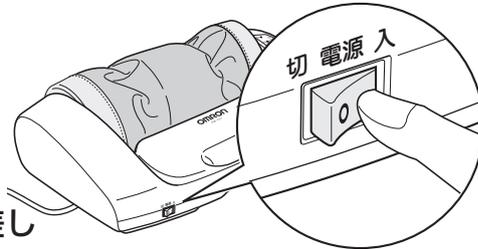

2

運転／停止スイッチを押す

足裏の自動マッサージがスタートする




3

お好みに応じて 自動※または手動※を選ぶ



4


運転／停止スイッチを押し、 マッサージを終了する

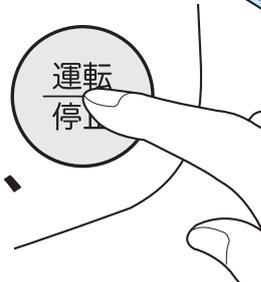

5

電源を切る

スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

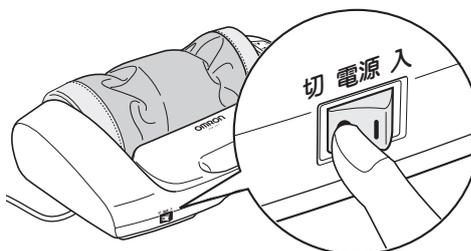

※自動

自動プログラムには「足裏」「脚」があり、リズムも選べます。

※手動

お好みの強さや回転方向が選べます。

設置するときのお願い

- 安定した場所に置く
- テレビ、ラジオなどのAV機器から1m以上離して置く
- 椅子を使うときは、キャスター付き椅子は使用しない

● 足裏をマッサージする

足裏指圧&もみ



足を指圧&もみの上に乗せます。


足裏指圧



足を指圧ローラーの上に乗せます。


● 脚（足首・ふくらはぎ）をマッサージする

足首指圧&もみ

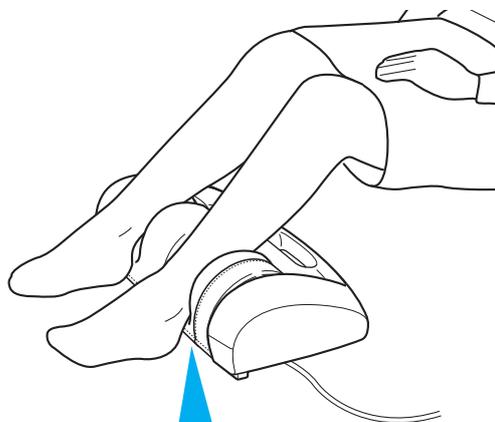

足首を指圧&もみの上に乗せます。

ふくらはぎ指圧&もみ

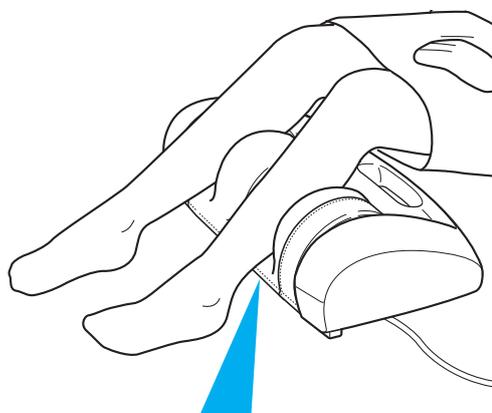

ふくらはぎを指圧&もみの上に乗せます。

マッサージが突然止まったときは次のことを確認してください。

■ 約15分の自動停止タイマーが作動した…

必要以上の刺激を防ぐため、マッサージ開始後、約15分経過すると自動的にマッサージが終了し、ブザーが鳴ります。

■ 安全装置が作動した…

本体に無理な力がかかったり、長時間の使用で本体内部の温度が上昇すると、安全装置が作動しマッサージを停止します。(📖 15ページ)

足裏を 自動マッサージする


「足裏」プログラムにより、小気味良い刺激で足の裏の血行を促進し、効果的にマッサージします。
自動マッサージ中にリズムスイッチを押すと、間隔の短い単発の刺激が加わります。

1 電源を入れる

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 電源スイッチを「入」にする


電源が入り、操作パネルのランプが全点灯した後、電源ランプのみが点灯します。

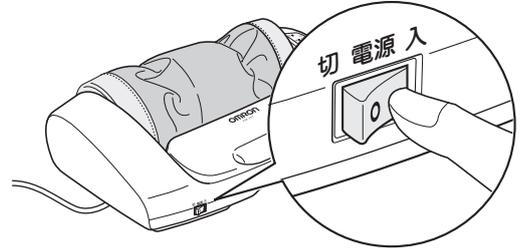

2 運転／停止スイッチを押す

「足裏」プログラムが始まり、足裏ランプが点灯します。


※もう一度、運転／停止スイッチを押すとマッサージが停止します。

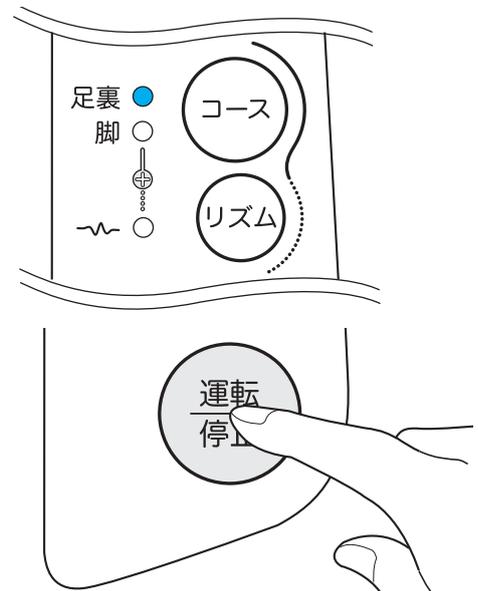

コーススイッチを押すごとに、「足裏」プログラムと「脚」プログラムを切り換えることができます。


■足裏・自動マッサージ

小気味良い刺激で足の裏の血行を促進します。

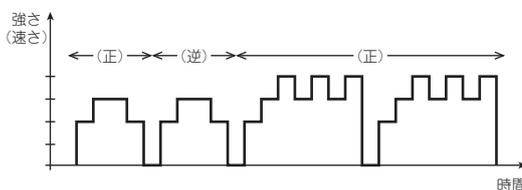

■足裏・自動マッサージ+リズム

最も強い（速い）回転で非常に間隔の短い単発の刺激を組み合わせます。

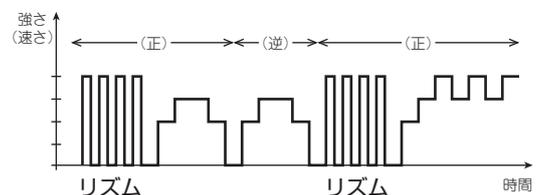


3 足裏を、指圧&もみまたは指圧ローラーの上に乗せ、マッサージする (☞ 8ページ)

4 お好みに合わせて、リズムスイッチを押す

リズムスイッチを押すと、「足裏」プログラムに間隔の短い単発の刺激が加わります。

リズムスイッチをもう一度押すと、「足裏」プログラムのみに戻ります。

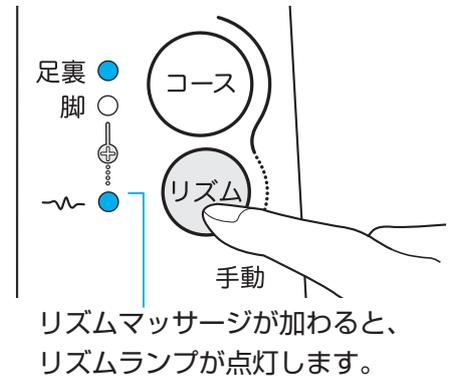


マッサージする

5 マッサージを終了する

運転/停止スイッチを押して、マッサージを終了します。

※タイマーにより、約15分で自動停止します。

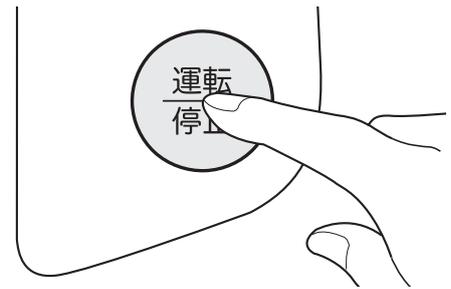


6 使い終わったら、必ず電源を切る

1 電源スイッチを「切」にする

2 電源プラグをコンセントから抜く

※電源コードは束ねて保管してください。

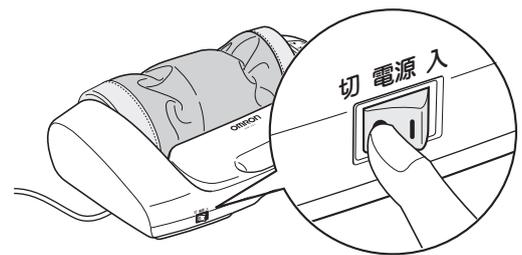

■自動マッサージから手動マッサージに切り換えるには…

自動マッサージ中に、強さスイッチまたは反転スイッチを押してください。

- ・強さスイッチを押したときは、最も弱い強さで手動マッサージを開始します。
- ・反転スイッチを押したときは、現在の回転を反転し、最も弱い強さで手動マッサージします。

(☞ 13~14ページ)

脚（足首・ふくらはぎ）を自動マッサージする


「脚」プログラムにより、ゆったりとした刺激でふくらはぎなどの血行を促進し、疲労回復に効果的です。
自動マッサージ中にリズムスイッチを押すと、間隔の短い単発の刺激が加わります。

1 電源を入れる

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 電源スイッチを「入」にする


電源が入り、操作パネルのランプが全点灯した後、電源ランプのみが点灯します。

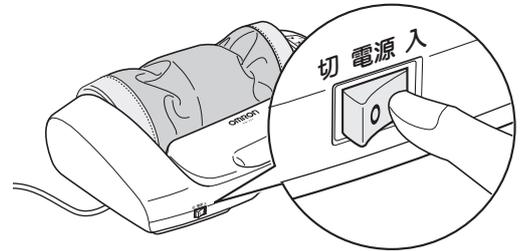

2 運転／停止スイッチを押す


「足裏」プログラムが始まり、足裏ランプが点灯します。

※もう一度、運転／停止スイッチを押すとマッサージが停止します。

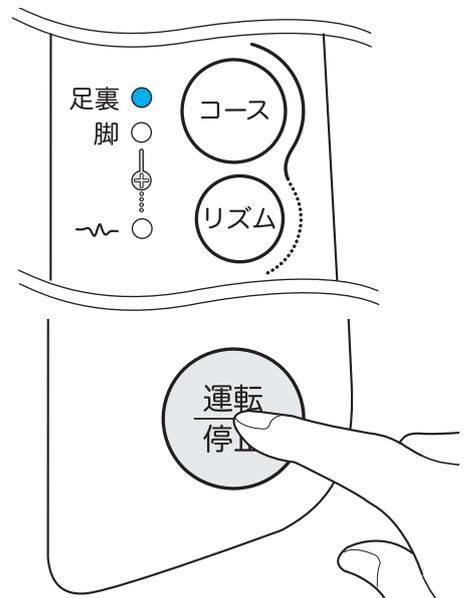


3 コーススイッチを1回押して、脚ランプを点灯させる

コーススイッチを押すごとに、「足裏」プログラムと「脚」プログラムを切り換えることができます。

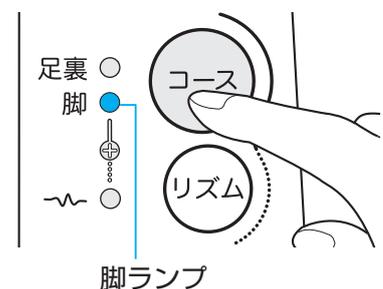


■脚・自動マッサージ

心臓に向かう回転方向（正転）で、ゆったりとした刺激を周期的に変化させます。

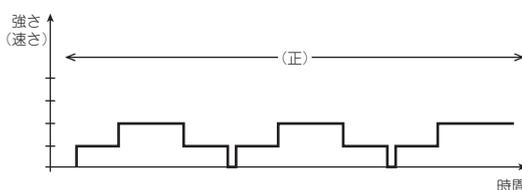

■脚・自動マッサージ+リズム

強さ（速さ）の異なる2種類の回転で間隔の短い単発の刺激を組み合わせます。

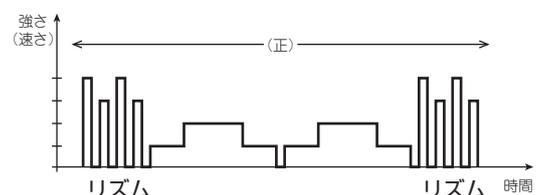

4


脚（足首・ふくらはぎ）を、指圧&もみ
または指圧ローラーの上に乗せ、マッサージする
( 8ページ)

5

お好みに合わせて、
リズムスイッチを押す

リズムスイッチを押すと、「脚」プログラムに
間隔の短い単発の刺激が加わります。

リズムスイッチをもう一度押すと、「脚」プログ
ラムのみに戻ります。

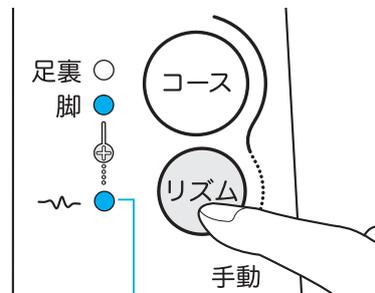


リズムマッサージが加わると、
リズムランプが点灯します。

6

マッサージを終了する

運転/停止スイッチを押して、マッサージを終了
します。

※タイマーにより、約15分で自動停止します。

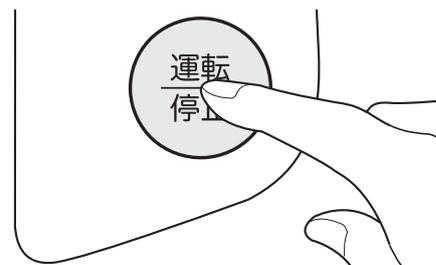


7

使い終わったら、必ず電源を切る

1 電源スイッチを「切」にする

2 電源プラグをコンセントから抜く

※電源コードは束ねて保管してください。

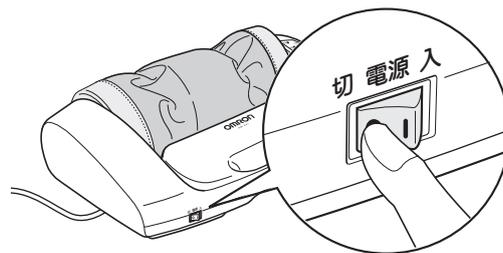

■自動マッサージから手動マッサージに切り換えるには…

自動マッサージ中に、強さスイッチまたは反転スイッチを押してください。

- ・強さスイッチを押したときは、最も弱い強さで手動マッサージを開始します。
- ・反転スイッチを押したときは、現在の回転を反転し、最も弱い強さで手動マッサージします。


( 13~14ページ)

お好みの部位を 手動マッサージする

お好みの部位（足裏、足首、ふくらはぎ）を、お好みの強さと回転方向でマッサージします。筋肉のこりや疲れに応じて、自由にマッサージしてください。

1 電源を入れる

1 電源プラグをコンセントに差し込む

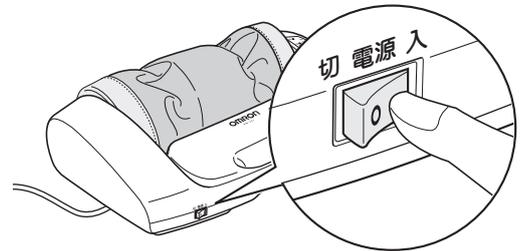


2 電源スイッチを「入」にする

電源が入り、操作パネルのランプが全点灯した後、電源ランプのみが点灯します。



2 運転／停止スイッチを押す

足裏ランプが点灯し、「足裏」プログラムが始まりますが、続けて手順3へ進んでください。

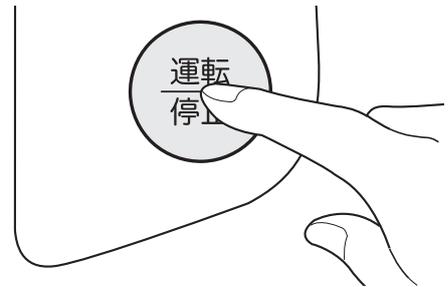

3 強さスイッチを押して、お好みの強さに調節する


強さスイッチを押すと、最も弱い強さ（遅い回転）の手動マッサージに切り換わります。強さスイッチを押すごとに、1段階ずつマッサージを強くできます。マッサージの強さ（速さ）は、強さランプの個数で4段階表示します。

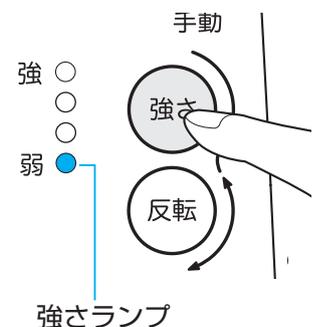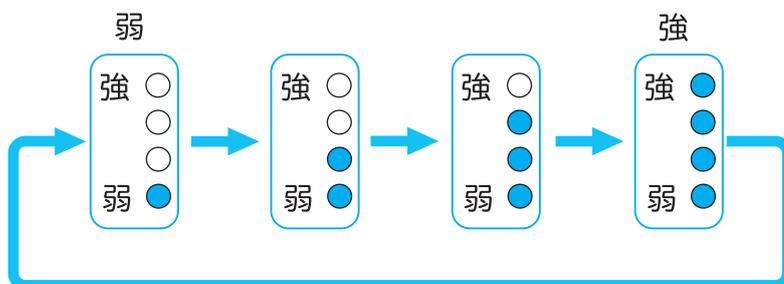

※強さはローラーの回転速度を変えることにより調整しています。

4 反転スイッチを押して、お好みの回転方向にする


反転スイッチを押すと、今まで回転していた方向と逆方向に回転します。

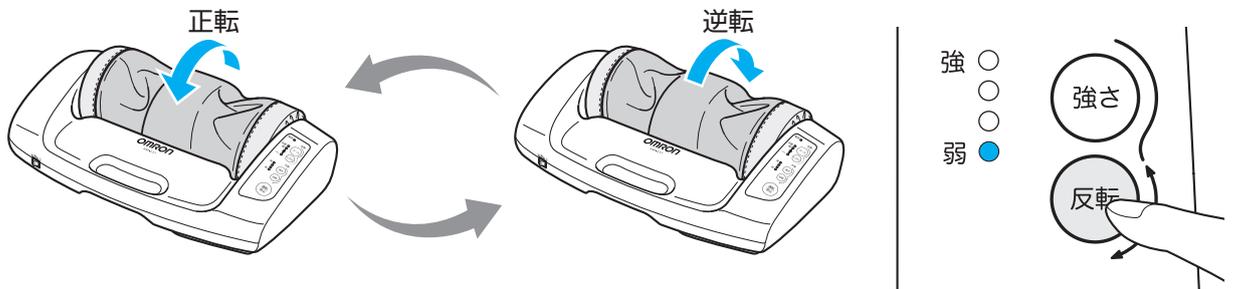

5 マッサージを終了する

運転/停止スイッチを押して、マッサージを終了します。

※タイマーにより、約15分で自動停止します。

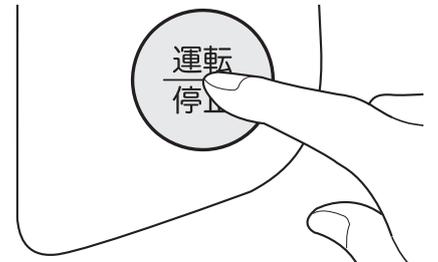


6 使い終わったら、必ず電源を切る

1 電源スイッチを「切」にする

2 電源プラグをコンセントから抜く

※電源コードは束ねて保管してください。

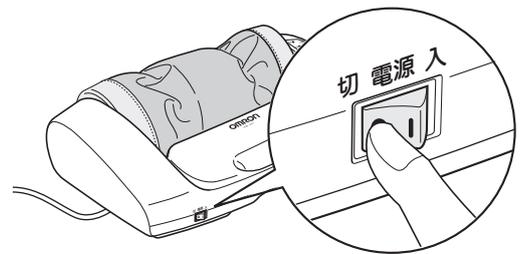

■手動マッサージから自動マッサージに切り換えるには…

手動マッサージ中に、コーススイッチまたはリズムスイッチを押してください。

- ・コーススイッチを押したときは、「足裏」プログラムに切り換わります。
- ・リズムスイッチを押したときは、「足裏」プログラム+リズムに切り換わります。

( 9~10ページ)

おかしいな?と思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、まず次の点をお調べください。

こんなとき	原因	対処のしかた
動かない	電源プラグが抜けている	正しく接続してください
	電源スイッチが「入」になっていない	電源スイッチを「入」にしてください
	長時間使用して、本体が熱くなっている	本体内部の温度が上昇したため、安全装置が働いて、止まっています。電源スイッチを切り、1時間程度の時間をおいて本体内部の温度を下げてください
	無理な力をかけている	すぐに使用を中止して、修理を依頼してください (裏表紙)
	電源コードが断線している	すぐに使用を中止して、修理を依頼してください (裏表紙)
突然止まった	使用を開始してから約15分が経過している	タイマーによって自動停止しています。再度運転/停止スイッチを押すと、「足裏」プログラムが始まります
強さを最大にしても力をかけると止まる		力を少しかけただけでも止まるときは、修理を依頼してください (裏表紙)
布カバーや交換カバーが外れたり破れたりした		カバーが外れたり破れたりした状態では絶対に使用しないでください 布カバーについて ・すぐに使用を中止して、修理を依頼してください (裏表紙) 交換カバーについて ・外れたときは、必ず取り付けてご使用ください (17ページ) ・交換カバーは消耗部品です。破れたりしたときは、必ず新しいものと交換してください (18ページ)
破損してしまった		すぐに使用を中止して、修理を依頼してください (裏表紙)

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(裏表紙)

■ 運転時の音について

次の音は、構造上やむを得ず発生するもので、機械の故障ではありません。
商品寿命にも影響ありません。


- ・ マッサージ中に、マッサージ部から足を離す際の音
- ・ 布カバーのこすれる音
- ・ 交換カバーのマジックテープの音
- ・ マッサージ部の回転音
- ・ 正転、反転の動作音の違い
- ・ 負荷をかけたときの音

お手入れと保管

お手入れについて

- ・フットマッサージャはいつも清潔にしてお使いください。
- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

※本体内部に水などが入らないようにしてください。

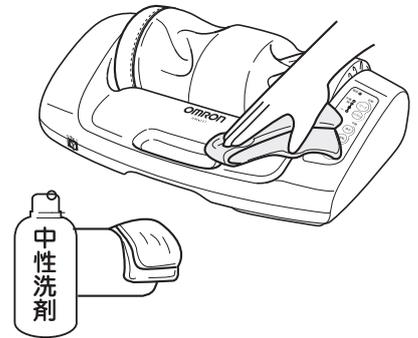

■お手入れと保管の注意

次の条件を満たしている環境下で保管してください。

温度：-20～+60℃

湿度：10～95%RH（結露無きこと）

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかるところ。
- ・高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。



交換カバーが汚れたら

※布カバーは絶対取り外さないでください。

交換カバーが汚れたら、取り外して洗濯してください。

「交換カバーを取り外す」「交換カバーを取り付ける」を参照してください。（ 17ページ）

※付属の交換カバー以外は使用しないでください。

※交換カバーは別売品としてもご用意しています。（ 18ページ）

※必ず交換カバーを取り付けてお使いください。

■交換カバーを洗濯するときの注意


- ・弱水流にて40℃以下のぬるま湯で洗ってください。
- ・マジックテープ部が衣類を傷めることがあるので、洗濯ネットなどに入れて洗濯してください。
- ・塩素系漂白剤につけると、脱色するので、ご注意ください。
- ・アイロンはかけないでください。



※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。


交換カバーを取り外す

1 本体後方のマジックテープ部をはがす

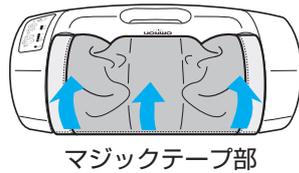

2 本体を裏返す

3 マジックテープ部をはがして、交換カバーを上引き抜く

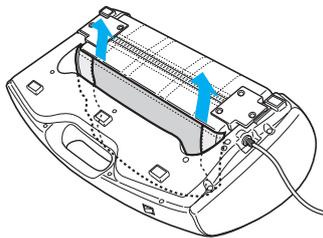


交換カバーを取り付ける


1 本体を裏返す

取り付けるときには、交換カバーが十分乾いていることを確認してください。

図のように、布カバー固定板から約2cm離れたところにマジックテープを合わせて取り付けます。

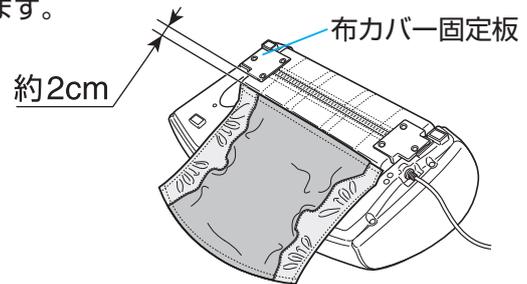

2 交換カバーを布カバーとケースの間に通す

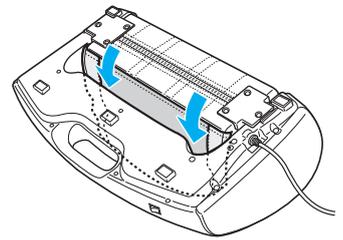


3 本体を元に戻す

交換カバーの逆側を持って、下図のように指圧ローラー部の側面を覆います。



4 マジックテープを本体後方の布カバーに合わせて取り付ける

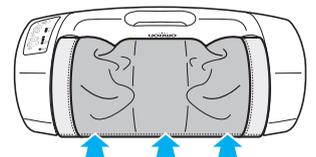

仕様

医療機器認証番号	221AGBZX00012000
類別	機械器具77バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器分類	管理医療機器
使用目的／効能効果	あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。

販売名	オムロン フットマッサージャ HM-231
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	11 W
定格時間	30分
タイマー	約15分
ローラー強さ（速さ）調節	約31、約38、約46、約54回転／分の4段階で調節
使用環境温湿度	+5～+35℃ 30～85%RH
保管環境温湿度	-20～+60℃ 10～95%RH
外形寸法	幅568×高さ194×奥行き344 mm
質量	約7.4 kg
動作原理	本装置は電源を入れ、ローラーを回転させることにより、足裏・脚（足首・ふくらはぎ）のマッサージをおこなう。
付属品	取扱説明書（品質保証書付き）、交換カバー ※本体に装着済みです。
電源コードの長さ	約200 cm
布カバー材質	ナイロン100%
交換カバー材質	ポリエステル100%
製造販売元	オムロンヘルスケア株式会社 住所：〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 電話：0120-30-6606 オムロンお客様サービスセンター
製造元	SANFAT ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.


※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品について

別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター
（☎電話 0120-30-6606）までお問い合わせください。

次の別売品をご用意しています。

- 別売交換カバー
型式 HM-231-COVER
材質：ポリエステル100%

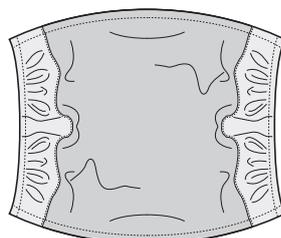

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
 - 2.無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
 - 3.無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (二) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 4.品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - 5.品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 6.補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございます。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただください。

販売名 オムロン フットマッサージャ HM-231

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名

印

住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地



オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。
修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

むろんオムロン

電話 **0120-30-6606**

通話料無料

FAX **0120-10-1625**

通信料無料

受付時間

9:00～19:00 月～金（祝日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通信料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。）