


取扱説明書

オムロン フットマッサージャ

HM-240

HM-241

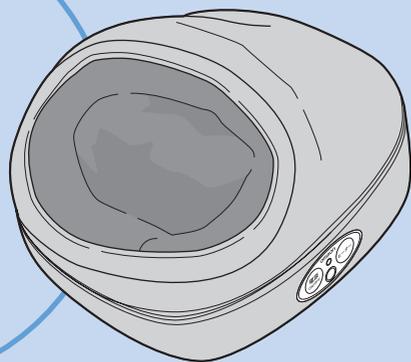

このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

All for Healthcare

目次

ご使用前に

安全上のご注意	1
次のものが入っていますか?	5
各部の名前	5

使い方

準備する	6
マッサージする	7

困ったときに・保証など

お手入れと保管	8
おかしいな?と思ったら	9
仕様	10
保証規定/品質保証書	裏表紙

安全上のご注意

お使いになる前に
必ずお読みください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制(必ず守ることを)を示します。(上図は“必ず守る”)



禁止

⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。(上図は“禁止”)

警告

使用前に布破れがないか確認し、どんな小さな破れでも見つかった場合は使用を中止し、オムロンお客様サービスセンターへ修理を依頼してください。

- 髪の毛や衣類、アクセサリなどが巻き込まれ、事故やけがの原因になります。



必ず守る

次のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- (1) ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
- (2) 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- (3) 心電計などの装着型医用電気機器

- これら医用電気機器の誤作動をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。



禁止

医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

- 事故や体調不良の原因になります。


警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- 脚部に重度の血行障害のある人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温 38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人
- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- かつて治療を受けたところや、または疾患部へ使用する人
- 体力の衰えた人
- 腱鞘炎の人
 - 事故や体調不良の原因になります。

しばらく使用しても効果が表れない場合は、医師または専門家に相談してください。

- 専用 AC アダプタのコードの取り扱いには以下の項目に注意してください。
- 傷つけない ■ 破損させない ■ 加工しない ■ 無理に曲げたり、引っ張らない ■ ねじらない ■ 重い物を載せない ■ 挟み込ませない
 - 感電や火災、故障の原因になります。

本製品は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用してください。また、長時間触れないでください。

- 低温やけどの原因になります。

治療部位の周辺にアクセサリなどを着けたまま使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。

子供に使用させないでください。また、本体の上に乗せたり遊ばせたりしないでください。

- 事故やけが、体調不良の原因になります。

自分で意思表示のできない人や身体の不自由な人には、1人で使用させないでください。

- 事故やけが、体調不良の原因になります。

使用中、故意に強くあてるなど無理な力をかけないでください。

- けがや体調不良の原因になります。

足裏以外には使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。

運転や機械の操作など、危険をともなう作業中に使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。



必ず守る



禁止

安全上のご注意

ご使用の前に

⚠警告

マッサージ以外の目的に使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">• けがや体調不良の原因になります。• 事故や故障の原因になります。	 禁止
ストーブなど熱い物の近くや、電気毛布、こたつ、ふとんの中などで使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">• やけどや火災の原因になります。	
専用 AC アダプタのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、本製品を使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">• 感電やショート、発火の原因になります。	
コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外では使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">• タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。	
専用品以外の AC アダプタは使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">• 火災や故障の原因になります。	
マッサージ部を強く押ししたり、もみ玉の間に物を挟んだりして、もみ玉の動きを止めないでください。 <ul style="list-style-type: none">• 火災や故障の原因になります。	
ぬれた手で専用 AC アダプタのプラグを抜き差ししないでください。 <ul style="list-style-type: none">• 感電の原因になります。	
分解や修理、改造をしないでください。 <ul style="list-style-type: none">• 発火したり、故障や事故の原因になります。	 分解禁止

⚠注意

使用前にフードやメッシュ布カバーの内側に異物が入っていないことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 事故やけがの原因になります。	 必ず守る
フードやメッシュ布カバーのファスナーをしっかりと閉めてから使用してください。 <ul style="list-style-type: none">• 事故やけがの原因になります。	
食後すぐの使用は控えてください。 <ul style="list-style-type: none">• 体調不良の原因になります。	
本製品が動かなくなったり異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、オムロンお客様サービスセンターへ修理を依頼してください。 <ul style="list-style-type: none">• 加熱やショートなどによる事故、トラブル、故障の原因になります。	
身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。 <ul style="list-style-type: none">• 医師に相談して指示に従ってください。	
専用 AC アダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、専用 AC アダプタ本体を持って抜いてください。 <ul style="list-style-type: none">• 専用 AC アダプタのコード断線やショートにより、火災や感電の原因になります。	

⚠ 注意

停電したときは、ただちに専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。

- 事故やトラブルの原因になります。

使用後は電源を切り、専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。

- 事故やトラブルの原因になります。
- やけどや、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

お手入れの前には、専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。

- 感電やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

- 気分が悪くなったり、けがや体調不良の原因になります。

マッサージは1日15分以上しないでください。

- 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。

使用中に眠らないでください。

- 事故やけがの原因になります。

酒に酔った状態で使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。

もみ玉側を下にして動作させないでください。

- 故障の原因になります。

本体の上に立ったり、乗ったり、座ったりしないでください。

- けがや、本製品が破損する原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

- 感電や火災、故障の原因になります。

収納時に専用ACアダプタのコードを本体や専用ACアダプタに巻きつけしないでください。

- 専用ACアダプタのコード断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

ぬれた状態のフード、メッシュ布カバーを取り付けしないでください。

- 感電や火災の原因になります。

本体に水をかけたり、浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。

- 火災や感電、けがの原因になります。



禁止



水場禁止

お願い

初めてご使用いただくときや、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおり操作をおこない、正常に動作することを確認してください。

テレビの近くで使用しないでください。

- 画面が変色したり、電波状態により若干テレビ画面がちらつくことがあります。

本製品の近くで携帯電話を使用しないでください。

- 誤動作の原因になります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの各都道府県や市区町村の指導に従ってください。

- 環境汚染の原因になります。

本製品を廃棄するときは、分解しないでください。


次のものが入っていますか？

- 本体
- 付属品
 - ・フード（本体装着済み）・メッシュ布カバー（本体装着済み）
 - ・専用 AC アダプタ・取扱説明書（品質保証書付き）

※必ず指定の付属品をご使用ください。


各部の名前

フードとメッシュ布カバーは洗濯できます。
(P.8 ページ)

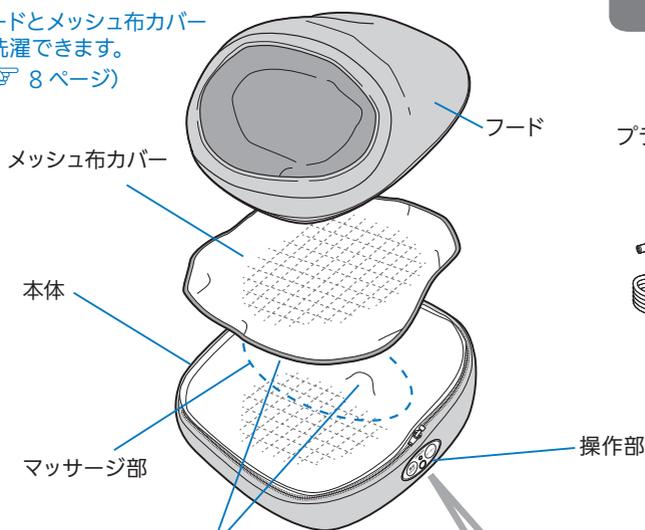


もみ玉（ヒーター内蔵）
※ヒーター使用時に点灯します。

専用 AC アダプタ

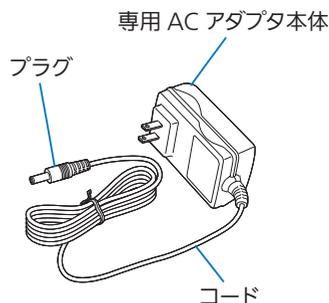

操作部


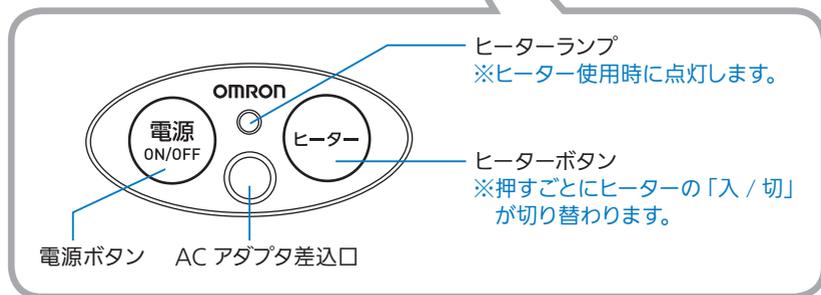


※ヒーター使用時に点灯します。

※押すごとにヒーターの「入 / 切」が切り替わります。

フード・メッシュ布カバーの着脱について

- ・フードはお好みに合わせて着脱してください。
- ・メッシュ布カバーはお手入れ時のみ取り外し、マッサージの際は必ず取り付けてご使用ください。

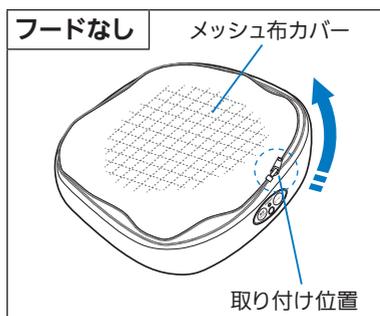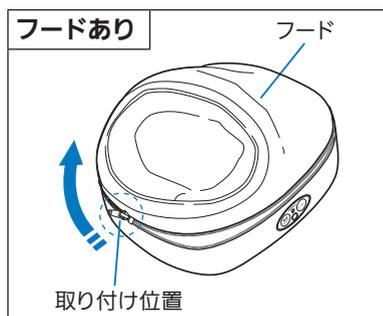

ご使用される前に


- ・メッシュが破れていないか確認してください。どんな小さな破れでも見つかった場合は、絶対に使用しないでください。
- ・メッシュ布カバーが取り付けられているか確認してください。
- ・フードやメッシュ布カバーのファスナーが最後までしっかり閉じているか確認してください。
- ・ボタンやタイマーが正常に動作するか確認してください。正しく動作しない状態で使用すると、事故やけがの原因になります。
- ・フードやメッシュ布カバーの内側に異物が入っていないか確認してください。

※異常が発見されたときは、そのまま使用せずにオムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼してください。(裏表紙)

準備する


1 操作部の AC アダプタ差込口に専用 AC アダプタのプラグを差し込む

※奥までしっかり差し込んでください。

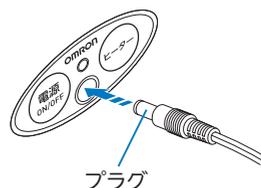

2 専用 AC アダプタ本体をコンセントに差し込む

※専用 AC アダプタ本体を持って、奥までしっかり差し込んでください。

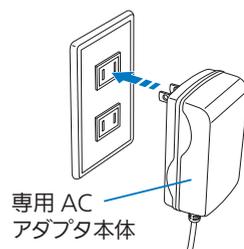

マッサージする

1 電源ボタン を押して電源を入れる

もみ玉が動いてマッサージが始まります。

ヒーターについて

マッサージ動作中にヒーターボタン  を押すと、ヒーターを使用することができます。

ヒーターボタン  を押してしばらくすると、もみ玉が温まります。

※ヒーター使用時はもみ玉とヒーターランプが点灯します。

※ボタンを押すごとにヒーターの「入 / 切」が切り替わります。

※ヒーターのみの使用はできません。

※ヒーターによる温熱治療効果はありません。

2 両足をもみ玉の上に乗せる



※足裏以外には使用しないでください。

3 マッサージが終わったら、電源ボタン を押して電源を切る

オートパワーオフについて

必要以上の刺激や電源の切り忘れを防ぐため、動作開始から約 15 分後に自動停止します。

4 専用 AC アダプタ本体をコンセントから抜く

お手入れと保管

フード・メッシュ布カバーのお手入れ

- 1 ファスナーを開けて、フードとメッシュ布カバーを本体から取り外す
- 2 丁寧に手洗いです
※洗濯機は使用しないでください。
- 3 しわを軽くのばし、形を整えて日陰に干す
- 4 本体にメッシュ布カバーを取り付け、ファスナーを閉じる
- 5 本体にフードを取り付け、ファスナーを閉じる

お手入れ時のお願い

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 変色などを防ぐため、汚れを落とすときにシンナーやベンジンなどを使用しないでください。



保管について

- 乳幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、湿度の低いところに保管してください。
- 本体の上に物を置かないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないようにカバーなどをかけて保管してください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
動かない	専用 AC アダプタが抜けている	正しく接続してください ( 6 ページ)
突然止まった	大きな負荷がかかっている	安全装置が作動して止まっています 負荷を除いて電源ボタンを押すと、再び運転が始まります
	安全装置が作動した	本体内部が過剰な温度になるのを防ぐため、繰り返し使用した場合や高温環境下で使用した場合、安全装置により動作が止まる場合があります 時間を置いてから再度お試しください
	必要以上の刺激や電源の切り忘れを防ぐため、動作開始から約 15 分後に自動停止します (故障ではありません)	
もみ玉のヒーターが温かにならない	お使いになる環境や使用時間によっては、ヒーターが最高温度に達しないことがあります	
動作音が大きい	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します (異常ではありません)	

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。( 裏表紙)

仕 様


販 売 名	オムロン フットマッサージャ HM-240
商 品 型 式 名	HM-240-BW / HM-240-PK / HM-241-DB / HM-241-WR
医療機器認証番号	224AABZX00150000
類 別	機械器具 77 バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
使用目的/効能効果	あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。
定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 入 力	30W (ヒーター部 4.5W 含む)
回 転 数	約 36 回/分
オートパワーオフ	約 15 分
使用環境温湿度	+ 10 ~ + 40℃ 30 ~ 85%RH
保管環境温湿度	- 20 ~ + 60℃ 10 ~ 95%RH
外 形 寸 法	幅 約 310 × 高さ 約 180 × 奥行 約 320 mm (フードあり)
本 体 質 量	約 1.3kg
対 応 足 サ イ ズ	27 cm 以下
素 材	本体：ウレタンフォーム 本体表地、フード、メッシュ部：ポリエステル
ヒーターの最高温度	50℃以下
付 属 品	専用 AC アダプタ、フード、メッシュ布カバー、 取扱説明書 (品質保証書付き)
製 造 販 売 元	オムロン ヘルスケア株式会社 住所：〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地 電話：0120-30-6606 (オムロンお客様サービスセンター)
製 造 元	漳州蒙発利実業有限公司 ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION 中華人民共和国

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品 専用 AC アダプタ
型式
HM-AC-141

※本製品に付属しているものと同じです。

お求めは、オムロンお客様サービスセンター
( 裏表紙) までお問い合わせください。

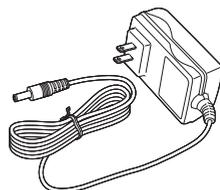

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございますございました。製品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、1 年間は無償修理または交換いたします。

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただくください。

商品型式 オムロン フットマッサージャ
HM-240-BW / HM-240-PK / HM-241-DB / HM-241-WR

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名



住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



製品のお問い合わせ、別売品や消耗部品のお求め、修理のご依頼

オムロン お客様サービスセンター

TEL 通話料無料 0120-30-6606

FAX 通話料無料 0120-10-1625

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

通信料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

受付時間
(祝日を除く月～金)
9:00～19:00

都合により、お休みをいただいたり、受付時間を変更させていただいたりすることがあります。あらかじめご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通信料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)