



1 操作パネル下の差込口にエアプラグおよび、専用ACアダプタのプラグを差し込む

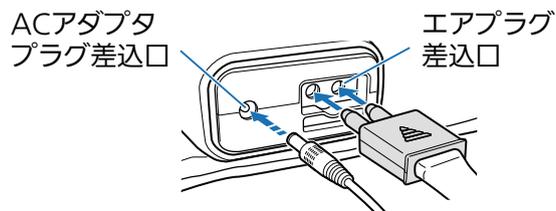


2 専用ACアダプタ本体をコンセントに差し込む

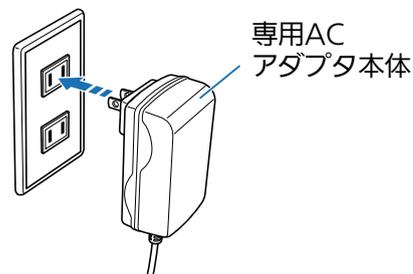


3 エアマッサージャ本体をふくらはぎに装着する

- ・▽（マッサージ中心目安）が下側、外側になるように装着してください。
- ・内外を逆に装着しないように気をつけてください。

右足への装着

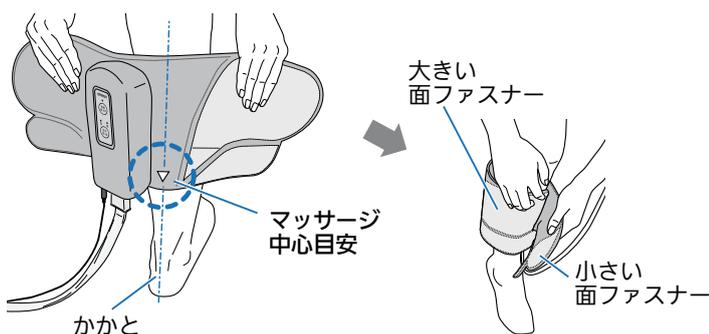


左足への装着

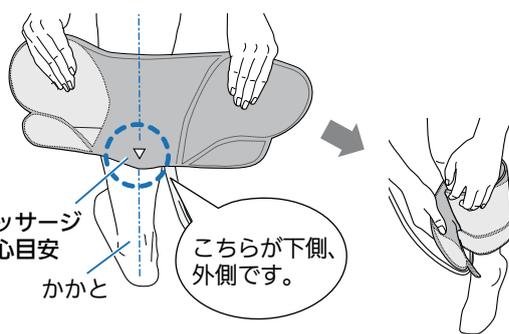


- ・装着する高さや位置、巻きつけの強さ加減はお好みで調整してください。

4 装着完了

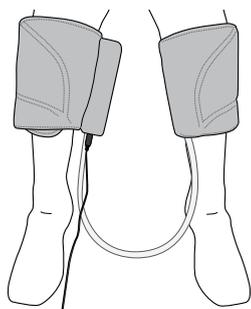

- ・本体を装着したまま歩いたりしないでください。
- ・必ず両足に装着してご使用ください。

5 電源スイッチを押して、マッサージを開始する

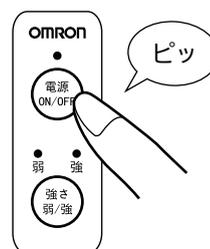

オートパワーオフ機能

必要以上の刺激や電源の切り忘れを防ぐため、動作開始から約15分後に自動停止します。

- ・マッサージは1日15分以上おこなわないでください。