


取扱説明書

オムロン エアマッサージャ

HM-260 HM-261

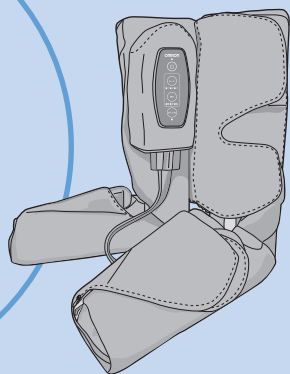

このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
また、

- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

ご使用前に

安全上のご注意	1
次のものが入っていますか？	5
各部の名前	5

使い方

準備する	7
マッサージをする	9

お手入れ

お手入れについて	11
保管について	15

困ったときに・保証など

おかしいな？と思ったら	15
仕様	16
別売品について	17
保証規定／品質保証書	裏表紙

 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

安全上のご注意

お使いになる前に
必ずお読みください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制（必ず守ること）を示します。
（上図は“必ず守る”）



禁止

⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
（上図は“禁止”）

⚠ 警告

使用前に、布破れがないか確認してください。どんな小さな破れでも見つかった場合は使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。



必ず守る

医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

- 事故や体調不良の原因になります。

下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- （1）ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- （2）人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- （3）心電計などの装着型医用電気機器

- これら医用電気機器の誤作動をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。



禁止

⚠ 警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 温度感覚喪失が認められる人
 - 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温 38℃以上（有熱期）の人
例）急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき
 - 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人
 - 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
 - かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
 - 体力の衰えた人
 - 重度の血行障害や血液疾患のある人
 - 腱鞘炎の人
- ・ 事故や体調不良の原因になります。
 - ・ 圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。

しばらく使用しても効果が表れない場合は、医師または専門家に相談してください。

身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

- ・ 医師に相談して指示に従ってください。

本製品は足先のヒーターが熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用してください。

あたため機能を繰り返し使用しないでください。

- ・ 低温やけどの原因になります。

足にアクセサリーや衣服の装飾など、硬い物を着けたまま使用しないでください。

- ・ 事故やけがの原因になります。

子供に使用させないでください。また、本体の上に乗らせたり遊ばせたりしないでください。

- ・ 事故やけが、体調不良の原因になります。

自分で意思表示できない人や身体の不自由な人には、1人で使用させないでください。

- ・ けがや体調不良の原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

- ・ 気分が悪くなったり、体調不良の原因になります。
- ・ けがの原因になります。

足以外に使用しないでください。

- ・ 事故や体調不良の原因になります。

使用中に立ち上がったたり、歩いたりしないでください。

- ・ 事故やけがの原因になります。

車の運転や機械の操作など、危険をとまなう作業中に使用しないでください。

- ・ 事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の目的に使用しないでください。

- ・ 事故や故障の原因になります。
- ・ けがや体調不良の原因になります。



必ず守る



禁止

安全上のご注意

ご使用の前に

⚠ 警告

ストーブなど熱い物の近くや、電気毛布、コタツ、ふとんの中などで使用しないでください。

- やけどや火災の原因になります。

専用 AC アダプタのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、本製品を使用しないでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

専用 AC アダプタのコードの取扱いは以下の項目に注意してください。

- 傷つけない ■ 破損させない ■ 加工しない ■ 無理に曲げたり、引っ張らない
- ねじらない ■ 使用時は束ねない ■ 重い物を載せない ■ 挟み込ませない

- 感電や火災、故障の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外では使用しないでください。

- タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

専用品以外の AC アダプタは使用しないでください。

- 火災や故障の原因になります。

ぬれた手で専用 AC アダプタを抜き差ししないでください。

- 感電の原因になります。

本体に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

- 火災や感電、けがの原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。

- 発火したり、故障や事故の原因になります。



禁止



ぬれ手禁止



水場禁止



分解禁止

⚠ 注意

使用前に本体カバーの内側に異物が入っていないことを確認してください。

- 事故やけがの原因になります。

本製品が動かなくなったり異常を感じた場合は、すぐに本体を外して電源を切り、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。

- 加熱やショートなどによる事故、トラブル、故障につながる原因になります。

専用 AC アダプタのほこりはふき取ってください。

- ほこりに湿気が加わると、感電、ショート、発火の原因になります。

専用 AC アダプタはしっかり根元まで差し込んでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

専用 AC アダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、専用 AC アダプタ本体を持って抜いてください。

- コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

専用 AC アダプタのプラグをエアマッサージャ本体から抜くときは、コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。

- コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

緊急時または異常を感じた時は、すぐに本体を外して電源を切ってください。電源を切るとエアバッグの空気が自動的に抜けます。

- 事故やけがの原因になります。



必ず守る

⚠ 注意

停電したときは、ただちに専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。
 ・ 事故やトラブルの原因になります。

使用後は電源を切り、専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。
 ・ 事故やトラブルの原因になります。
 ・ やけどや、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

お手入れの前には、専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。
 ・ 感電やけがの原因になります。

マッサージは 1 日 15 分以上おこなわないでください。
 ・ 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。

食後すぐの使用は控えてください。
 ・ 体調不良の原因になります。

使用中、眠らないでください。
 ・ 事故やけがの原因になります。

酒に酔った状態で使用しないでください。
 ・ 事故やけがの原因になります。

本体の上に立ったり、乗ったり、座ったりしないでください。
 ・ けがや、本製品が破損する原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 ・ 感電や火災、故障の原因になります。

収納時に専用 AC アダプタのコードを本体や専用 AC アダプタに巻きつけないでください。
 ・ コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

ぬれた状態の本体カバーを取り付けしないでください。
 ・ 感電や火災の原因になります。

本体カバーを装着せずに運転しないでください。
 ・ やけどや、本製品が破損する原因になります。

次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
 ■ 直射日光が当たる場所 ■ 高温多湿の場所 ■ 水のかかる場所 ■ ほこりの多い場所 ■ 火気の近く ■ 振動衝撃の加わりやすい場所 ■ 強電磁界下



ご使用の前に

お願い

初めてご使用いただくときや、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおり操作をおこない、正常に動作することをご確認ください。

テレビの近くで使用しないでください。
 ・ 画面が変色したり、電波状態により若干テレビ画面がちらつくことがあります。

本製品の近くで携帯電話を使用しないでください。
 ・ 誤作動の原因になります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの各都道府県や市区町村の指導に従ってください。
 ・ 環境汚染の原因になります。
 本製品を廃棄するときは、分解しないでください。


次のものが 入っていますか？

不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンターまでご連絡ください。
(裏表紙)


1. 本体（本体カバー装着済み）
2. 専用 AC アダプタ
3. 足裏用アタッチメント
4. 収納バッグ
5. 取扱説明書（品質保証書付き）

各部の名前

右足用
【エアマッサージ本体 操作パネル付き】

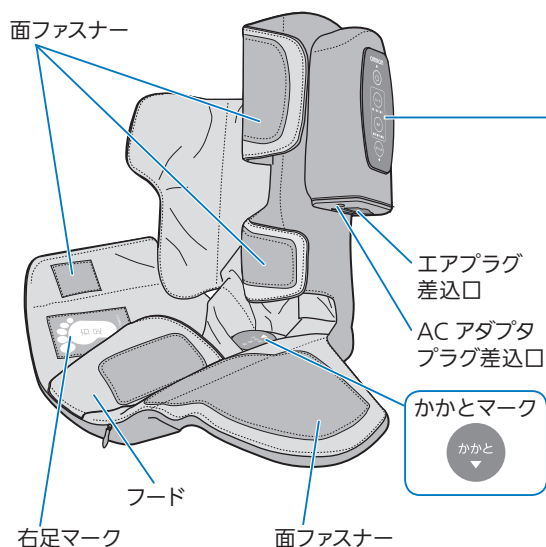


操作パネル

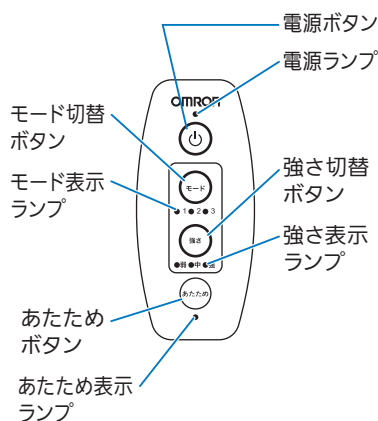

左足用


【エアマッサージャ本体 接続チューブ付き】

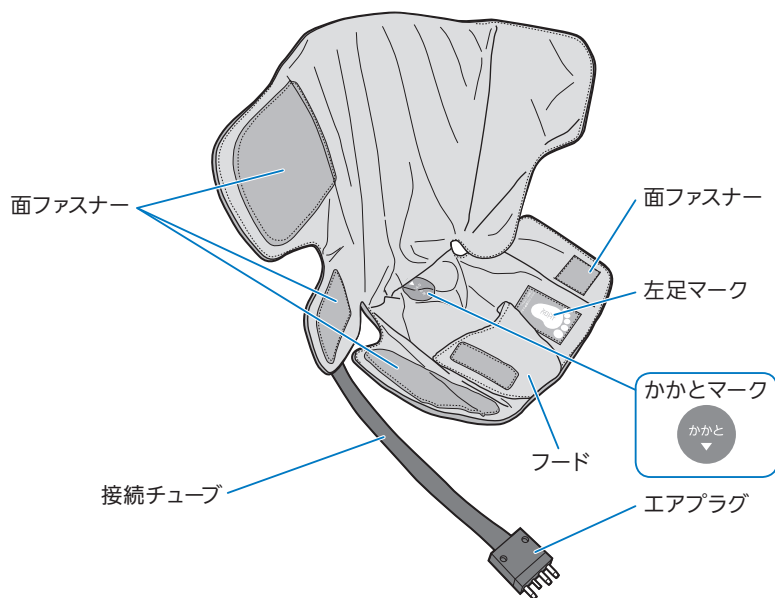

本体カバー（本体装着済み）
（お手入れについて 11 ページ）

※本体カバーは消耗品です。破れるなど破損したときは、
別売品をお求めください。（17 ページ）


専用 AC アダプタ

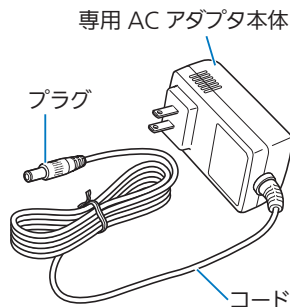


付属品

足裏用アタッチメント
(2 個)

(取り付けかた 7 ページ)

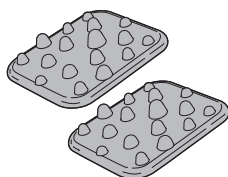

収納バッグ

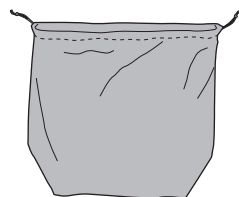

準備する

ご使用の前に確認してください


- ・ 本体カバーが破れたり、ファスナーが開いたままになっていませんか？
- ・ 本体カバーは正しく取り付けられていますか？
- ・ 本体の機能は正常に動作していますか？

※異常を見つけたときはそのまま使用せずに、オムロンお客様サービスセンターまでご連絡ください。(☎ 裏表紙)

より強い刺激をお好みの場合は

足裏用アタッチメントの取り付けかた

※イラストは右足用です。

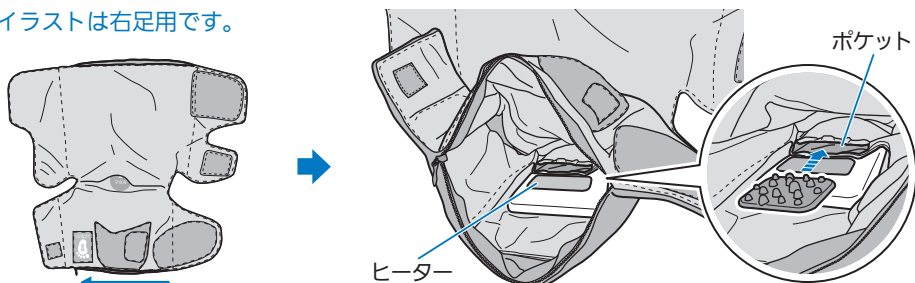


①つま先側のファスナーを開ける。

②ヒーター上部にあるポケットにお好みの向きで入れる。


1 操作パネル下のエアプラグ差込口に接続チューブのエアプラグを差し込む

※線までしっかり差し込んでください。

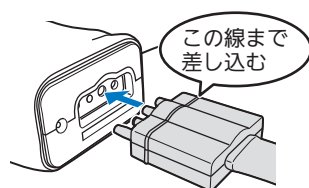


2 AC アダプタプラグ差込口に専用 AC アダプタのプラグを差し込む

※奥までしっかり差し込んでください。

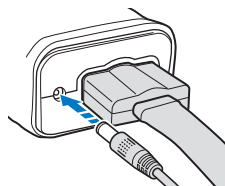

3 専用 AC アダプタ本体をコンセントに差し込む

※専用 AC アダプタ本体を持って、奥までしっかり差し込んでください。

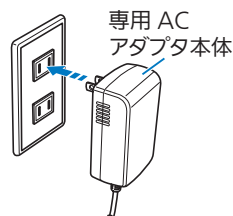

4 エアマッサージャ本体を足に装着する

※足に力を入れず、リラックスした状態で装着してください。

※必ず両足に装着してご使用ください。


※足に使用跡がつくことがあります。靴下や衣服の上からご使用いただくと使用跡がつきにくくなります。

右足への装着

- ① 右足マークがついている本体の かかと（かかとマーク）の上にかかとを置きます。

※ふくらはぎが本体後部に沿うようにしてください。


※足先をフードに入れてください。

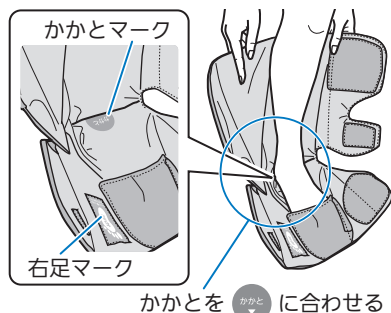

- ② 足先、足首、ふくらはぎの順に包み込むように巻きつけて、面ファスナーで4箇所を固定します。

※巻きつけの強さ加減はお好みで調整してください。


※面ファスナーが衣服やストッキングに付かないように気をつけてください。

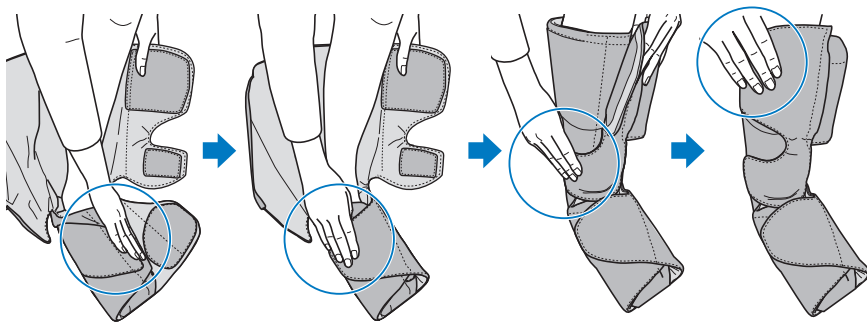

左足への装着

右足と同様の手順で装着します。

装着完了

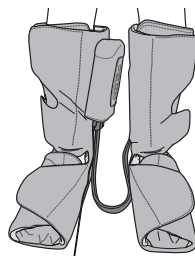

※本体を装着したまま立ち上がった
り、歩いたりしないでください。

マッサージをする



マッサージ中の姿勢について

- ・ 足に力を入れず、リラックスした状態で使用してください。

1 電源ボタンを押して、マッサージを開始する

「ピッ」と音がして電源ランプが点灯し、マッサージが始まります。

オートパワーオフ機能

必要以上の刺激や電源の切り忘れを防ぐため、動作開始から約 15 分後に「ピー」と音がして、自動停止します。

※マッサージを 1 日 15 分以上おこなわないでください。

2 お好みの動作を選ぶ

「ピッ」と音がして選択されている動作のランプが点灯します。

※途中でエアマッサージャ本体を巻きなおしたいときは、いったん電源を切り、エアプラグを差込口から抜いてください。空気がはやく抜け、すみやかに巻きなおすことができます。

電源ボタン

モード切替ボタン

1 もみほぐし

足首→ふくらはぎ→足先の順に加圧し、一気に空気を抜くことで、足全体をもみほぐします。

2 しぼりあげ

足先・足首・ふくらはぎを順番に加圧し、足全体をしぼりあげます。

3 もみほぐし（ふくらはぎ）

足首→ふくらはぎの順に加圧し、一気に空気を抜くことで、ふくらはぎを中心にもみほぐします。

強さ切替ボタン

マッサージの強さを弱 / 中 / 強から選べます。

あたためボタン

あたため機能

足先に温かさを感じる程度に温めます。


※ヒーターが温まるまで約 5 分かかります。

（温まるまでの時間は使用環境などによって異なります。）

※低温やけどを防ぐため、あたため機能を繰り返し使用しないでください。

※あたため機能による温熱治療効果はありません。

※あたため機能のみの使用はできません。

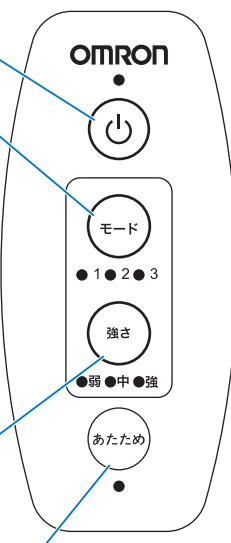


3 マッサージを終了するときは、電源ボタンを押して電源を切る
「ピー」と音がして、電源が切れ、エアバッグの空気が自動的に抜けます。

4 エアマッサージャ本体を足から取り外す
※面ファスナーが衣服やストッキングに付かないように気をつけてください。


5 専用 AC アダプタ本体をコンセントから抜く

※コードを引っ張らず、専用 AC アダプタ本体を持って抜いてください。

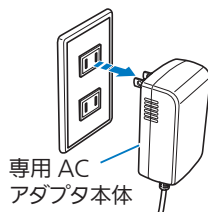


6 専用 AC アダプタのプラグを操作パネル下の差込口から抜く

※コードを引っ張らず、しっかりプラグを持って抜いてください。

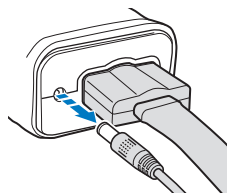


7 エアプラグを操作パネル下の差込口から抜く

※接続チューブを引っ張らず、しっかりエアプラグを持って抜いてください。

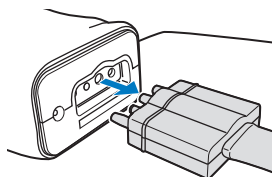

8 エアマッサージャ本体を軽くたたんで収納バッグに入れる

※接続チューブを無理に曲げないでください。

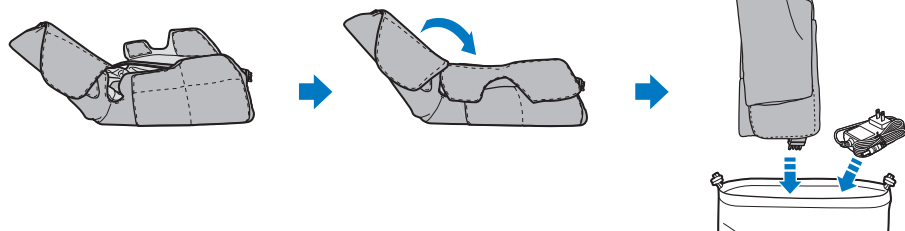

お手入れについて

本体カバーは消耗品です。破れるなど破損したときは、別売品をお求めください。
( 17 ページ)

日常のお手入れ

- 操作パネル、接続チューブ
乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。



※変色などを防ぐため、汚れを落とすときにシンナーやベンジンなどを使用しないでください。


- 本体カバー、インナーカバー
やわらかい布にぬるま湯で薄めた中性洗剤をしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。

汚れがひどいときは

- 本体カバー
本体から取り外し、本体カバーの洗濯表示に従って手洗いし、しわを軽くのばして形を整え、日陰に干してください。



※本体カバーは洗濯機で洗わないでください。必ず洗濯表示に従って手洗いしてください。

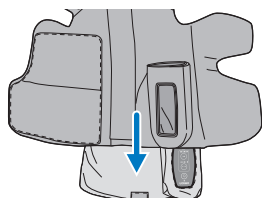

お手入れ


本体カバーの取り外しかた

※手洗いするときは、必ず本体カバーから本体を取り出してください。

※本体に装着されているインナーカバーは取り外さないでください。


インナーカバー
操作パネル

※インナーカバーのファスナーは開きません。

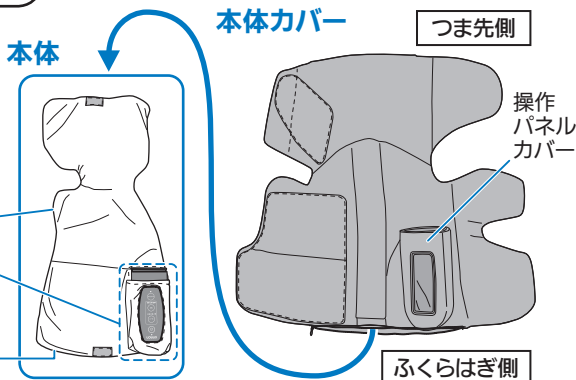

1 本体カバーの上下のファスナーを開ける

※イラストは右足用です。

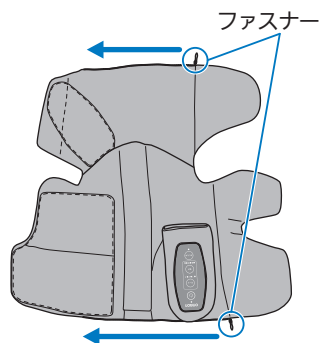

2 本体を取り出す

右足用

【エアマッサーチャ本体 操作パネル付き】

- ① 操作パネル周りのゴムリングを確認し、本体カバーをめくる。

操作パネル下
ゴムリング

操作パネル周り
ゴムリング

手前に引っ張る

めくり上げる

※本体カバーやゴムリングを強く引っ張りすぎないでください。
破損することがあります。

- ② 内側から操作パネル周りのゴムリングをはずす。

- ③ 操作パネル下のゴムリングをはずす。

- ④ 本体を取り出す。

お手入れ

左足用

【エアマッサーチャ本体 接続チューブ付き】

接続チューブごと本体カバーから取り出してください。

本体カバーの取り付けかた

1 本体をふくらはぎ側から本体カバーに入れる

※ヒーターがつま先側にくるように本体を入れてください。

※イラストは右足用です。




2

右足用

【エアマッサージャ本体 操作パネル付き】

操作パネルを本体カバーの中に入れる

- ①操作パネル下の溝にゴムリングをはめる。
- ②操作パネルに本体カバーをかぶせる。

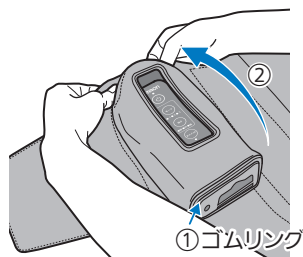


- ③操作パネル周りにゴムリングをはめる。



左足用


【エアマッサージャ本体 接続チューブ付き】

接続チューブを本体カバーの接続
チューブ用穴に差し込んで、本体
カバーの外に出す

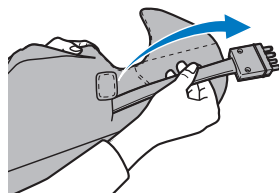


3 本体と本体カバーを固定する面ファスナー（2箇所）をとめる

※本体のエアバッグが折れ曲がっていないかご確認ください。

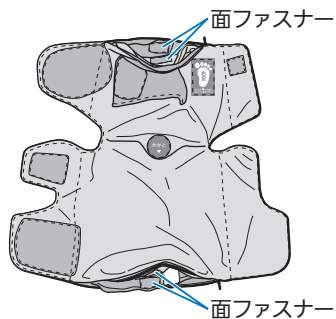

4 本体カバーの上下のファスナーを閉める

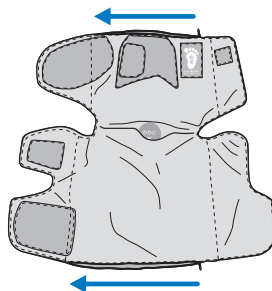

お手入れ

保管について

- 乳幼児やこどもの手の届く場所には保管しないでください。
- 汚れやほこりをよく拭き取り、湿度の低いところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、収納バッグに入れて保管してください。
- ご不要となった本体や付属品、別売品の廃棄方法は、お住まいの各都道府県や市区町村の指示に従ってください。

※お手入れと保管の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

おかしいな？と思ったら

困ったときに・保証など

こんなとき	原因	対処のしかた
動かない	専用 AC アダプタが抜けている	正しく接続してください。 ( 7 ページ)
	接続チューブが折れ曲がっている	接続チューブが折れ曲がっていないか確認してください。
突然止まった	オートパワーオフ機能が作動した	必要以上の刺激や電源の切り忘れを防ぐため、動作開始から約 15 分後に自動停止します。 (故障ではありません) 電源ボタンを押すと再び運転が始まります。 ( 9 ページ)
ピピピピピの音とともに、ランプが点滅して突然止まった	空気がもれている	接続チューブのエアプラグが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。 ( 7 ページ)
足裏のヒーターが温かくならない	・ヒーターは低温やけどを防ぐため、足先に温かさを感じる程度に温まります。 ・ヒーターが温まるまで約 5 分かかります。 ・温まるまでの時間は使用環境などによって異なります。	
動作音が大きい	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。 (異常ではありません)	

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
( 裏表紙)

仕 様

販 売 名	オムロン エアマッサージャ HM-260シリーズ
商 品 型 式 名	HM-260-DB / HM-260-WR / HM-261-BW / HM-261-R
医療機器認証番号	227AABZX00073000
類 別	機械器具 77 バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用エアマッサージ器
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。 ● 疲労回復 ● 血行を良くする ● 筋肉の疲れを取る ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解(かんかい)
定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 入 力	30W（ヒーター部 8W 含む）
エ ア 圧 力	弱：約 16kPa 中：約 29kPa 強：約 42kPa
オートパワーオフ	約 15 分
耐 用 期 間*	5 年 自己認証（当社データ）による
使用環境条件	+ 10 ～ + 40℃ / 30 ～ 85% RH ただし、あたため機能使用時は + 10 ～ + 30℃
保管環境条件	－ 20 ～ + 60℃ / 10 ～ 95% RH
外 形 寸 法	幅 約 610 × 高さ 約 550 × 奥行き 約 60 mm（本体カバーあり）
本 体 質 量	約 1.7kg（AC アダプタ含まず）
対 象 足 サ イ ズ	20 ～ 27cm
対象ふくらはぎ周	30 ～ 43cm
ヒーターの最高温度	50℃以下
原 材 料	本体カバー：ポリエステル 本体：ポリエステル、ポリウレタン、ABS
付 属 品	専用 AC アダプタ、本体カバー（本体装着済み）、足裏用アタッチメント、収納バッグ、取扱説明書（品質保証書付き）
製 造 販 売 元	オムロン ヘルスケア株式会社 住所：〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地 電話：0120-30-6606（オムロンお客様サービスセンター）
製 造 元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION 中華人民共和国

* 標準的な使用期間の目安（1 日 1 回 15 分使用時）

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

困
っ
た
と
き
に
・
保
証
な
ど





別売品について

別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター（☎ 裏表紙）までお問い合わせください。

次の別売品をご用意しています。

※これらの別売品は本製品に付属しているものと同じです。

※現在ご使用の本体の色をご確認の上、お求めください。

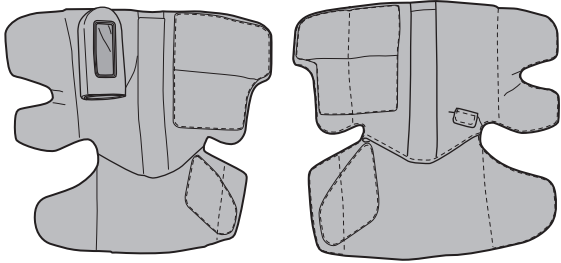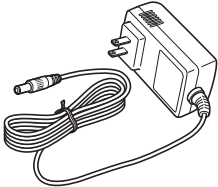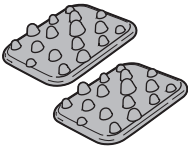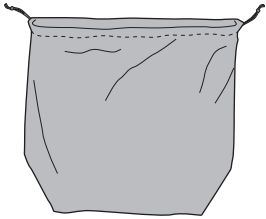品名	型式（色）
本体カバーセット 	HM-260-COVDB （ディープブラウン） HM-260-COVWR （ワインレッド） HM-261-COVBW （ブラウン） HM-261-COVR （レッド）
専用 AC アダプタ 	HM-141-AC2
足裏用アタッチメント 	HM-260-ATTFO
収納バッグ 	HM-260-CADB （ディープブラウン） HM-260-CAWR （ワインレッド） HM-261-CABW （ブラウン） HM-261-CAR （レッド）

メモ

Lined area for notes.

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。製品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、1 年間は無償修理または交換いたします。

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただきます。

商品型名 **HM-260-DB / HM-260-WR**
HM-261-BW / HM-261-R

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名



住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元

オムロン ヘルスケア株式会社

〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルスケア お客様サポート

<http://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

消耗品・別売品のご注文は

<http://store.healthcare.omron.co.jp/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通信料無料)

受付時間 9:00~19:00 (祝日を除く月~金)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。