


オムロン クッションマッサージャ

HM-341

HM-342

HM-343

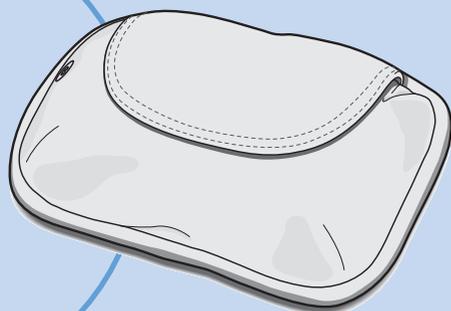

このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。

- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

ご使用前に

安全上のご注意	1
次のものが入っていますか？	5
各部の名前	5

使い方

マッサージをする	6
----------	---

困ったときに・保証など

お手入れと保管	7
おかしいな？と思ったら	8
仕様	9
別売品について	10
保証規定／品質保証書	裏表紙

 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

安全上のご注意

お使いになる前に
必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制(必ず守ること)を示します。(上図は“必ず守る”)



禁止

⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。(上図は“禁止”)

警告

使用前に、布破れがないか確認してください。けがや感電のおそれがあるため、どんな小さな破れでも見つかった場合は使用しないでください。

- 髪の毛などが巻き込まれ、事故やけがの原因になります。



必ず守る

医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例) 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など

- 事故や体調不良の原因になります。

下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- (1) ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- (2) 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- (3) 心電計などの装着型医用電気機器

- これら医用電気機器の誤作動をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。



禁止

 警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温 38℃以上（有熱期）の人
- 例）急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人
- 背骨に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- 体力の衰えた人

- 事故や体調不良の原因になります。



必ず守る

身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

- 医師に相談して指示に従ってください。

本製品は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分に注意して使用してください。

- 低温やけどの原因になります。

顔や首、腰の周辺にアクセサリなどの硬い物を着けたまま使用しないでください。

- 事故やけがの原因になります。

子供に使用させないでください。また、本体の上に乗らせたり遊ばせたりしないでください。

- 事故やけが、体調不良の原因になります。

自分で意思表示できない人や身体の不自由な人には、1人で使用させないでください。

- けがや体調不良の原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

- 気分が悪くなったり、体調不良の原因になります。
- けがの原因になります。



禁止

のどや、頭部・腹部・胸部・ひじ・ひざなど骨部には使用しないでください。

- 事故や体調不良の原因になります。

首の周辺をマッサージするときは、もみ玉が強く当たらないように注意してください。

- 事故や体調不良の原因になります。

マッサージ以外の目的に使用しないでください。

- 事故や故障の原因になります。
- けがや体調不良の原因になります。

もみ玉面に勢いよく腰を下ろしたり、乗ったりしないでください。

- 事故やけがの原因になります。

ストーブなど熱い物の近くや、電気毛布、コタツ、ふとんの中などで使用しないでください。

- やけどや火災の原因になります。

安全上のご注意

ご使用の前に

⚠警告

専用 AC アダプタのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、本製品を使用しないでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

専用 AC アダプタのコードの取り扱いには以下の項目に注意してください。

- 傷つけない ■破損させない ■加工しない ■無理に曲げたり、引っ張らない
- ねじらない ■使用時は束ねない ■重い物を載せない ■挟み込ませない

- 感電や火災、故障の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外では使用しないでください。

- タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

専用品以外の AC アダプタは使用しないでください。

- 火災や故障の原因になります。

マッサージ部を強く押ししたり、もみ玉の間に物を挟んだりして、もみ玉の動きを止めないでください。

- 火災、故障の原因になります。

ぬれた手で専用 AC アダプタを抜き差ししないでください。

- 感電の原因になります。

本体に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

- 火災や感電、けがの原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。

- 発火したり、故障や事故の原因になります。



禁止



ぬれ手禁止



水場禁止



分解禁止

⚠注意

本製品が動かなくなったり異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。

- 加熱やショートなどによる事故、トラブル、故障につながる原因になります。

専用 AC アダプタのほこりはふき取ってください。

- ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。

専用 AC アダプタはしっかり根元まで差し込んでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

専用 AC アダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、専用 AC アダプタ本体を持って抜いてください。

- 専用 AC アダプタのコード断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

しばらく使用しても効果が表れない場合は、医師または専門家にご相談ください。



必ず守る

▲ 注意

停電したときは、ただちに専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。
 ・ 事故やトラブルの原因になります。



使用後は電源を切り、専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。
 ・ 事故やトラブルの原因になります。
 ・ やけどや、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

皮膚に直接マッサージをしないでください。
 ・ 事故やけがの原因になります。

マッサージは 1 日 15 分以上しないでください。
 ・ 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。

食後すぐの使用は控えてください。
 ・ 体調不良の原因になります。

使用中、眠らないでください。
 ・ 事故やけがの原因になります。

本体の上に寝て使用しないでください。
 ・ けがや体調不良の原因になります。

故意に強くあてるなど無理な力をかけないでください。
 ・ けがや体調不良の原因になります。



もみ玉側を下にして動作させないでください。
 ・ 故障の原因になります。

本体に強いショックを与えたり、落としたり、踏んだり、上に立ったり、乗ったりしないでください。
 ・ けがや、本商品が破損する原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 ・ 感電や火災、故障の原因になります。

次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
 ■ 直射日光が当たる場所 ■ 高温多湿の場所 ■ 水のかかる場所 ■ ほこりの多い場所 ■ 火気の近く ■ 振動衝撃の加わりやすい場所 ■ 強電磁界下

お願い

初めてご使用いただくときや、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおり操作をおこない、正常に作動することをご確認ください。

テレビの近くで使用しないでください。
 ・ 画面が変色したり、電波状態により若干テレビ画面がちらつくことがあります。

本製品の近くで携帯電話を使用しないでください。
 ・ 誤作動の原因になります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。
 ・ 環境汚染の原因になります。

本製品を廃棄するときは、分解しないでください。

本体カバーを付けた状態でお使いください。

次のものが入っていますか？

- 本体
- 専用 AC アダプタ
- 本体カバー
- 取扱説明書（品質保証書付き）

各部の名前

ご使用前に確認してください

- ご使用前に、布破れがないか確認してください。布が破れた状態では絶対に使用しないでください。
- ご使用前にスイッチやタイマーが正常に動作することを確認してください。正しく動作しない状態で使用すると、事故やけがの原因になります。
- 長期間ご使用にならなかったときは、取扱説明書のとおりに操作をおこない、正常に動作することをご確認ください。
- 本体カバーを付けた状態でお使いください。

※異常が発見されたときは、そのまま使用せずにオムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼してください。（ 裏表紙）


クッションマッサージャ本体

もみ玉カバー

※マッサージが強いと感じるときに閉じてください。


本体カバー（本体装着済み）
（洗濯できます  7 ページ）

※本体カバーは消耗品です。
破れたりしたときは、別売品をお求めください。（ 10 ページ）

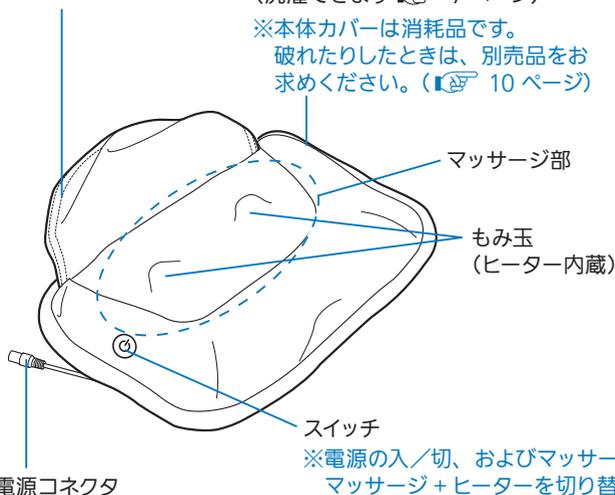

※電源の入／切、およびマッサージ、
マッサージ＋ヒーターを切り替えます。

専用 AC アダプタ

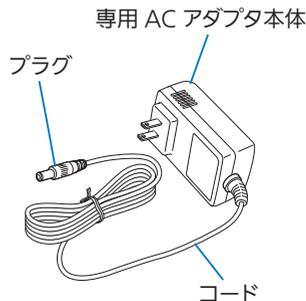

マッサージをする


1 本体の電源コネクタに専用 AC アダプタのプラグを差し込む

※奥までしっかり差し込んでください。



2 専用 AC アダプタ本体をコンセントに差し込む

※専用 AC アダプタ本体を持って奥までしっかり差し込んでください。

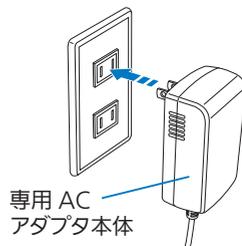

3 スイッチ を押して好みの動作を選ぶ

もみ玉が動いてマッサージが始まります。

スイッチを押すたびに、 のように動作が変わります。

※マッサージ開始後約 15 分経過すると自動的に停止します。



4 マッサージしたいところにマッサージ部をあてる

首や肩に



腰や背中に

ふくらはぎ
や太ももに



5 電源が切れるまでスイッチ を押して、マッサージを終了する (手順 3)

6 専用 AC アダプタ本体をコンセントから抜く



お手入れと保管

本体カバーの洗いかた

- 1 本体カバーのファスナーを最後まで開ける
- 2 スイッチ部分裏側の面ファスナーをはがし、本体カバーから本体を取り出す
- 3 本体カバーの洗濯表示に従って手洗いです


※本体カバーの面ファスナーや他の洗濯物を傷めるおそれがありますので、必ずファスナーを閉めてから洗ってください。

- 4 しわを軽くのばし、形を整えて日陰に干す

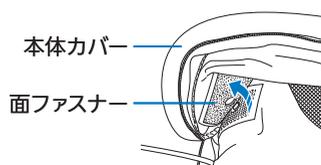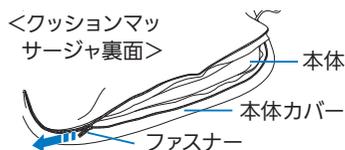

本体カバーの取り付け方

- 1 本体に本体カバーをかぶせ、スイッチ部分裏側の面ファスナーを貼り付ける
- 2 本体カバーのファスナーを閉じる

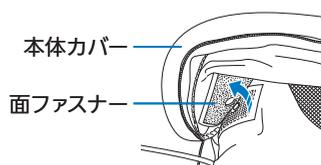

お手入れ時のお願い

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布をよく絞ってからふき取ってください。
- 変色などを防ぐため、汚れを落とすときにシンナーやベンジンなどを使用しないでください。



保管について

- 乳幼児やこどもの手の届く場所には保管しないでください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、湿度の低いところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないようにカバーなどをかけて保管してください。
- ご不要となった本体や付属品、別売品の廃棄方法は、お住まいの各都道府県や市区町村の指示に従ってください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
動かない	専用 AC アダプタが抜けている	正しく接続してください ( 6 ページ)
	スイッチが正しく動作していない	本体カバーの面ファスナーを正しい位置に貼り直し、再度動作を確認してください ( 7 ページ)
突然止まった	大きな負荷がかかっている	安全装置が作動して止まっています スイッチを押すと再び運転が始まります ( 5 ページ)
	タイマー機能が作動した	本製品は必要以上の刺激を防ぐため、スイッチを押してから約 15 分経過すると自動的に運転が止まります (故障ではありません) スイッチを押すと再び運転が始まります ( 5 ページ)
もみ玉のヒーターが温かにならない	お使いになる環境や使用時間によっては、ヒーターが最高温度に達しないことがあります	
動作音が大きい	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します (異常ではありません)	

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。( 裏表紙)

仕 様

困ったときに・保証など

販 売 名	オムロン クッションマッサージャ HM-341
商 品 型 式 名	HM-341-BW / HM-341-BG / HM-341-PK HM-342-DB / HM-342-NV / HM-342-WR HM-343-Y / HM-343-R / HM-343-BW
医療機器認証番号	224AABZX00036000
類 別	機械器具 77 バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。
定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 入 力	30W (ヒーター部 2.5W 含む)
回 転 数	約 30 回/分
オートパワーオフ	約 15 分
耐 用 期 間 *	5 年 自己認証 (当社データ) による
使用環境条件	+ 10 ~ + 40℃ 30 ~ 85% RH
保管環境条件	- 20 ~ + 60℃ 10 ~ 95% RH
外 形 寸 法	幅 約 390 × 高さ 約 105 × 奥行き 約 265 mm (本体カバーあり)
本 体 質 量	約 1.6kg
原 材 料	本体：ウレタンフォーム、ポリエステル 本体カバー：ポリエステル、ナイロン
ヒーターの最高温度	50℃以下
付 属 品	専用 AC アダプタ、本体カバー、取扱説明書 (品質保証書付き)
製 造 販 売 元	オムロン ヘルスケア株式会社 住所：〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地 電話：0120-30-6606 (オムロンお客様サービスセンター)
製 造 元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION 中華人民共和国



* 標準的な使用期間の目安 (1 日 1 回 15 分使用時、基準体重)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品について

別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター（☎裏表紙）までお問い合わせください。

次の別売品をご用意しています。

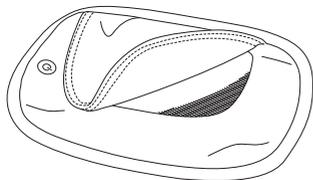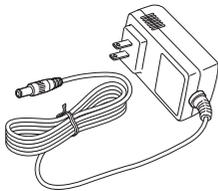品名	型式（色）
本体カバー（1個） 	さらさら生地 HM-343-COVY（イエロー） HM-343-COVR（レッド） HM-343-COVBW（ブラウン） ふわふわ生地 HM-342-COVDB（ディープブラウン） HM-342-COVNV（ネイビー） HM-342-COVWR（ワインレッド） HM-COV-341BW（ブラウン） HM-COV-341PK（ピンク） HM-COV-341BG（ベージュ）
専用 AC アダプタ 	HM-141-AC2

困ったときに・保証など

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございます。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただくしてください。

商品型式名 HM-341-BW / HM-341-BG / HM-341-PK
HM-342-DB / HM-342-NV / HM-342-VWR
HM-343-Y / HM-343-R / HM-343-BW

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名



住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

製造販売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロンヘルスケア お客様サポート

<http://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

消耗品・別売品のご注文は

<http://store.healthcare.omron.co.jp/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通信料無料)

受付時間 9:00~19:00(祝日を除く月~金)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。