

オムロン マッサージチェア HM-520 VILLA


取扱説明書

- このたびはオムロン マッサージチェアHM-520 VILLAをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は紛失しないように保管してください。
- ご使用前に、この商品が正常に動作することを確認してください。

要 保 存

保証書別添

もくじ	ページ
安全上のご注意	1
1. 商品の特長／効能・効果	4
2. 各部のなまえと機能	5
1. 本体	5
2. リモコン	6
3. ご使用になる前に	7
1. 設置のしかた	7
2. マッサージチェアの使用例	8
3. リクライニング	9
4. フットレスト	9
5. 脚パイプ	10
6. 電子タイマー	10
4. オートで使う	11
1. 電源の入れ方	11
2. オートでマッサージ	11
3. 停止／電源の切り方	12
5. マニュアルで使う	13
1. 電源の入れ方	13
2. マニュアルでマッサージ	13
3. 停止／電源の切り方	14
6. お手入れと保管	15
7. おかしいな? と思ったとき	16
8. オートの動作一覧	17
9. 主な仕様	18
10. 商品の使い方に関するお問い合わせは	18
11. 修理サービスのネットワーク	18

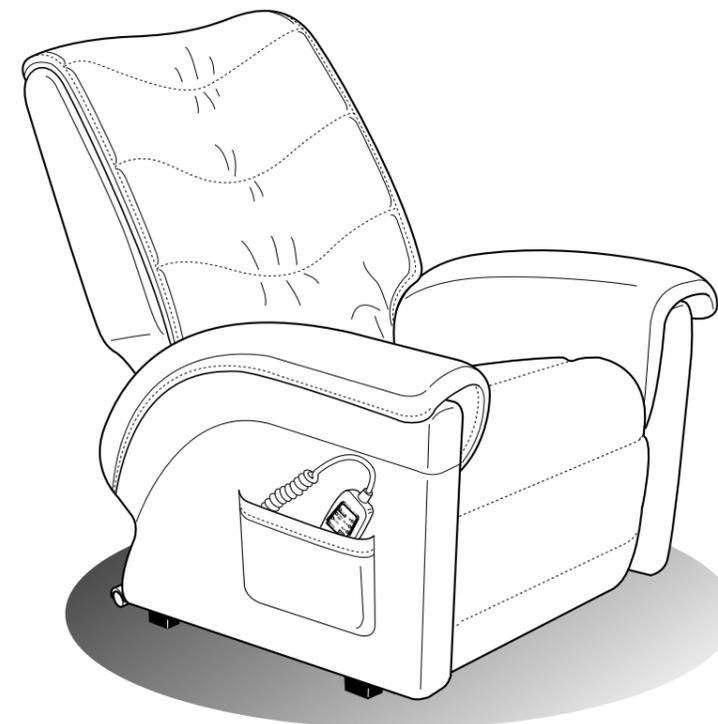

発売元

オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL03(3436)7092

- 札幌011(271)7826 ●仙台022(265)2734 ●大宮048(645)8111 ●東京03(3436)7092 ●横浜045(411)7216
- 名古屋052(561)0621 ●大阪06(6282)2572 ●広島082(247)0260 ●高松087(822)8521 ●福岡092(414)3206

商品に関するお問い合わせは

オムロン健康相談室がお答えします。

フリーダイヤル **0120-30-6606** ダイヤルは正確に おろん オムロン

受付時間 (祝日を除く月～金) 10:00～12:00 / 13:00～16:00
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 説明内容を守らず、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、「警告」「注意」で区分しています。その表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内容
	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

	△記号は注意(警告・危険を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制(必ず守ること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“一般的な強制”を示します。

マッサージチェアに関する安全上のご注意

警告

- 次の方は、必ず医師と相談の上で使用ください。
 - 1) 医師の治療を受けている人や特に体に異常を感じているとき
 - 2) 背骨に異常のある人、背骨が曲がっている人
 - 3) 悪性腫瘍のある人
 - 4) 急性症状のある人
 - 5) 骨粗しょう症の人
 - 6) 妊娠中や生理中の人
 - 7) 安静を必要とする人
 - 8) 心臓に障害のある人(狭心症、心筋梗塞等の疾患のある方、ペースメーカー使用の方)
 - 9) かつて治療を受けたところまたは患部へ使用する人
 - 10) 熱の高い人
- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- 自分で意志表示できない方には使わせないでください。また、身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。
- けがをする恐れがあります。
- はじめは、中パットや背パットを使って、弱い刺激でおこなってください。
- 気分が悪くなったり、けがをする恐れがあります。
- 使用時のスイッチ操作は動作を確認しておこなってください。
- 動作が急に変わることによって苦痛を感じる場合があります。
- アースは確実に取り付けてください。また、ガス管や水道管には絶対にアース線を接続しないでください。アース線を接続するときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 故障や漏電のときの感電防止のために、アースは必ず取り付けてください。アースの取り付けは、お買い上げの販売店、電気工事店へご相談ください。(取付工事は有料です。)



警告

- 本機が動作しない場合や、おかしいなと感じたときは、使用を直ちに中止し、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)まで修理を依頼してください。
- 感電、ショート、発火の原因になります。
- 革や布地が破れた状態(内部機構が露出等)では使用しないでください。
- けがをする恐れがありますので、お買い上げの販売店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)まで修理を依頼してください。
- 頭、おなか、ひじ、ひざ、手などへの使用はしないでください。
- けがをする恐れがあります。
- 幼児や子供に使用させたり、本機の上で遊ばせたりしないでください。
- けがをする恐れがあります。
- 電気マッサージ器以外の治療器との併用はおこなわないでください。
- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しや、電源スイッチまたはリモコンを操作しないでください。
- 感電やけがをする恐れがあります。
- 本機を分解したり、改造したりしないでください。
- 発火したり、異常動作をして、けがをする恐れがあります。




注意

- 使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は、すぐに電源を切り、使用を中止してください。
- 体調不良を起こす恐れがあります。
- 背の低い方が使用するときは、座布団を敷いてもみ玉の最高位置が、頭に当たらないように高さを調節してください。
- 頭をマッサージすると、気分が悪くなることがあります。
- リクライニングやフットレストを使用する際は、本体の後ろやフットレストの下に人やペットがいないこと、および障害物がないことを確認してください。
- けがをさせる恐れがあります。
- もみ玉の位置を確認の上、静かに座ってください。
- けがをする恐れがあります。
- 入浴剤(特にイオウ成分を含んだもの)やシャンプー、整髪料などが革に付着したときは、速やかに固形石けん(人肌に使えるもの)を擦りつけた濡れた布で汚れを拭きとった後、乾いた布で水分を拭きとってください。
- 変色やシミの原因になります。
- 本機を持ち上げるときは、必ず2人で左右の肘掛けの底面を持って持ち上げてください。
- 肘掛け以外のところを持ち上げると、バランスを崩し本機を落とす恐れがあります。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ショートや発火の恐れがあります。
- 使用時以外は電源スイッチを必ず「切」、施錠スイッチを「閉」にし、電源プラグをコンセントから抜き、リモコンはリモコンポケットに収納しておいてください。このとき電源コード類は束ねておいてください。
- 絶縁劣化により感電や漏電火災の原因になります。また幼児や子供がコードで遊んでけがをしたり、子供のいたずらによる事故やけがの恐れがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源コードが断線やショートして火災や感電の原因になります。
- 停電時は直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 事故やトラブルにつながる恐れがあります。




⚠️ 注意

- 素肌や衣服が濡れたままで使用しないでください。
 - ・ けがや感電の恐れがあります。
- 交流 100V 以外では使用しないでください。またコンセントは単独で使用してください。
 - ・ 火災、感電、漏電の原因になります。
- 浴室など湿気の多い場所で使わないでください。また、屋外では使わないでください。
 - ・ 火災、感電、故障の原因になります。
- もみ玉の間に手などを入れないでください。
 - ・ けがをする恐れがあります。
- 本機の上ののって、飛び跳ねたりしないでください。
 - ・ けがをする恐れがあります。
- 背もたれ、肘掛けやフットレストの上ののったり、座ったり、立ち上がったり、飛び跳ねたりしないでください。
 - ・ けがをする恐れがあります。また、床面や本機を傷める恐れがあります。
- 長時間の使用および眠りながらの使用はしないでください。
 - ・ 1 回の使用時間は、同一箇所には 5 分位、背全体へは 15 分位としてください。
 - ・ 長時間の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。
 - ・ 続けて使用される場合は、15 分使用した後、10 分程度休んでください。
 - ・ なお 1 日当たりの使用時間は通算して 1 時間程度を目安にしてください。
- 頭部に髪飾りなどの固いものをつけて使用しないでください。また長い髪の方は束ねるなどして使用してください。
 - ・ もみ玉移動部のカバーが押され、内部機構に接触して破れ、けがをする恐れがあります。
- 座面下部の金具、背もたれと座部や肘掛け部のすき間に、手や足を入れないでください。
 - ・ けがをする恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
 - ・ 感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
 - ・ 絶縁劣化により感電や漏電火災の原因になります。
- 電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。
 - ・ 感電やショート、発火の原因になります。
- ストープなどの熱器具の近くに置かないでください。
 - ・ 火災や故障の原因になります。
- 本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。
 - ・ 本機が誤動作する恐れがあります。
- 本機を移動させる場合、人や物をのせたまま移動しないでください。
 - ・ けがをする恐れがあります。

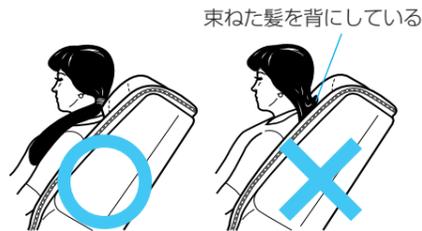

束ねた髪を背にしている

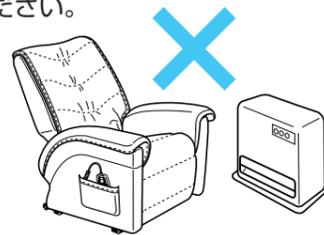

商品の特長

- イタリア製、総革張り*デザイン
 - イタリア製総革張りチェアならではの快適で風格のある座り心地と高級家具としてのデザイン。すべて贅沢なセミ・アリニン仕上げの本革を使用しています。
 - ※背パットを跳ね上げてマッサージをする場合は、背もたれの一部分が布地仕様となっております。
- 新方式八つ玉ユニットを採用
 - 上下各二つのもみ玉を左右に四つ配置した新型八つ玉ユニットを搭載。従来のものに比べ全身にわたる広範囲なマッサージが得られます。また、この新型ユニットはもみながらたたくという二つの動作を同時にできるようになりました。
- 7種類のマッサージと三つの自動コース付き
- 背部とフットレストがそれぞれ電動でリクライニング
- フットレストには強弱2段切り換えのバイブレーションマッサージ
- 「たたく」、「背筋のぼし」ではお好みの幅に無段階調整
- 椅子としての座り心地のために厚めの背パットを採用
- ワンタッチで使いやすい簡単リモコン

効能・効果

- あんま、マッサージの代用
 - ・ 疲労回復
 - ・ 血行をよくする
 - ・ 筋肉の疲れをとる
 - ・ 筋肉のコリをほぐす
 - ・ 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

2.各部のなまえと機能

1. 本体

背もたれ

・マッサージ機構を内蔵しています。

背パット

・イスとして使用するときは、背パットをお使いください。
・マッサージのときは、背パットを後ろに跳ね上げてお使いください。(ファスナーで取り外すこともできます。) マッサージが強すぎると感じる際には、背パットを当てて調整してください。

中パット

・マッサージのときにお使いください。
・マッサージが弱すぎると感じる際には、図のように後ろに跳ね上げて強さを調整することができます。

肘掛け

座部

キャスター

リモコン

フットレスト

・パイプレータ機構(脚パイプ)を内蔵しています。

リモコンポケット

電源スイッチ

・本体肘掛け部の後ろ右側にあります。「入」のとき赤いマークが見えます。

施錠スイッチ

・子供のいたずらなどを防ぐための錠です。

アース端子

電源コード

△注意

- ・使用時以外は電源スイッチを必ず「切」、施錠スイッチを「閉」にし、電源プラグをコンセントから抜きリモコンはリモコンポケットに収納しておいてください。このとき電源コード類は束ねておいてください。
- ・幼児や子供がコードで遊んでけがをしたり、子供のいたずらによる事故やけがの恐れがあります。



👉お願い

本商品は総革張りですので、革の上にビニール製品やゴム製品を置くと、ビニールやゴムの成分が移行して革が変色する恐れがあります。

2. リモコン

リモコンのスイッチ操作で、お好みのマッサージが選べます。

オート選択スイッチ

⇒11～12ページ参照

上半身スイッチ

首から肩スイッチ

腰スイッチ

・押すとオート各部位のマッサージを開始し、もう一度押すと停止します。

マニュアル選択スイッチ

⇒13～14ページ参照

もむスイッチ

たたくスイッチ

背筋のぼしスイッチ

・押すと各マニュアル動作のマッサージを開始し、もう一度押すと停止します。

もみ玉位置調節スイッチ

・もみ玉の位置を「上」「下」に調節できます。

⇒14ページ参照

脚パイプスイッチ

・ふくらはぎをマッサージします。
・1回押すごとに「弱→強→切」と切り換わります。

⇒10ページ参照

電源ランプ

・本体の電源スイッチを「入」にすると点灯します。

オート選択ランプ

・オート動作のときに点灯します。



もみ玉幅調節スイッチ

・もみ玉の間隔を調節できます。
⇒14ページ参照

停止スイッチ

・押すとマッサージの動作を終了し、もみ玉が一番下のスタート位置まで移動し、停止します。
※停止スイッチを押した後、最大約12秒間は他のスイッチの操作はできません。

⇒12、14ページ参照

フットレスト角度調節スイッチ

・上げ下げの動作をします。
⇒9ページ参照

背もたれ角度調節スイッチ

・おこす、たおす動作をします。
⇒9ページ参照

マニュアル選択ランプ

・マニュアル動作のときに点灯します。

脚パイプ表示ランプ

・脚パイプのときに点灯します。

3.ご使用になる前に

1. 設置のしかた

(1) 使用場所の注意

- ・床面が水平で本機の重さに耐える場所を選んでください。
- ・じゅうたんや畳の部屋で使うときは、本機の重さで、へこみが生じますので、マットを敷いてから本機を設置することをおすすめします。
- ・直射日光が当たるところに設置しますと、革が変色しますので、部屋にカーテンなどを張って直射日光が当たらないようにしてください。
- ・ストーブなどの熱源のすぐ近くに設置しますと、革が変質しますので、熱源から離して設置してください。


△注意

- ・浴室などの湿気の多い場所や水がかかる恐れのある場所で使用しないでください。
- ・感電および故障の原因になります。



(2) リクライニングできるスペースの確保

- ・後ろに障害物や乳幼児がいないか確認してください。
- ・壁とのスキ間を65cm以上確保してください。
- ・電源コードやリモコンコードを踏んだり、挟んだりしないでください。

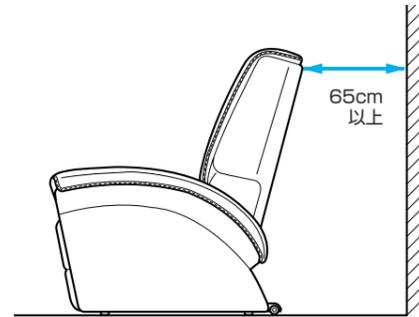

△注意

- ・リクライニングやフットレストを使用する際は、本体の後ろやフットレストの下に人やペットがいないこと、および障害物がないことを確認してください。
- ・けがをさせる恐れがあります。





(3) アースの接続

電源コンセントにアース端子がある場合

- ① 付属のアース線の丸形端子を本体裏面のアース端子に確実に取り付けます。
- ② アース線のもう一方の端を丸くして、電源コンセントのアース端子に確実に取り付けます。

電源コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(第3種接地工事・有料)

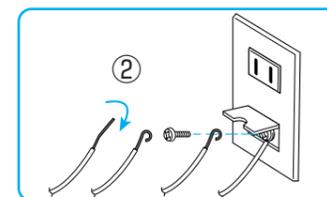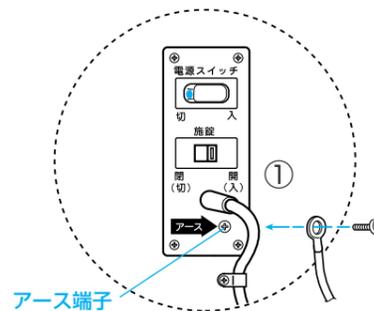

△警告

- ・アースは確実に取り付けてください。また、ガス管や水道管には絶対にアース線を接続しないでください。アース線を接続するときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・故障や漏電のときの感電防止のために、アースは必ず取り付けてください。アースの取り付けは、お買い上げの販売店、電気工事店へご相談ください。(取付工事は有料です。)



(4) 移動の方法と注意

お願い

本機を移動する場合には、コード類を束ね、踏みつけないようにしてください。また、強いショックを与えたり、落としたりしないでください。

- ・故障の原因になります。

本機を移動する場合に、キャスターでじかに傷つきやすい床面や畳の上を移動しないでください。

- ・床面や畳が傷みます。

本機を移動するときには、人または物を本機の上に乗せたまま移動しないでください。

- ・転倒したり、けがをする恐れがあります。また、重さにより床面を傷める恐れがあります。

本機を設置する場合には、床面が水平で本機の重さに十分耐えられる場所に置いて使用してください。

- ・不安定な場所では転倒したり、けがをする恐れがあります。また、本機の重さにより床面を傷める恐れがあります。

- ① フットレストを最大角度まで上げてください。
- ② 電源スイッチを「切」にして施錠スイッチを「閉」にしてください。
- ③ 電源コードやアース線をコンセント部から抜き、束ねて座部の上に置いてください。
- ④ フットレストの先端をキャスターが床面に接するまで持ち上げてください。
- ⑤ 本体を押して移動してください。



2. マッサージチェアの使用例

マッサージするときは、リラックスした姿勢で頭部を背もたれにつけてご使用ください。
※必ず衣服を着用してご使用ください。

背もたれを起こして・・・
・最も一般的な姿勢です。



リクライニングでは・・・
・心身ともにリラックスします。



マッサージが弱すぎると感じたときは・・・
・背パット・中パットを下図のように跳ね上げて強さを調整することができます。

マッサージをするときは、背パットを跳ね上げてご使用ください。
※背パットは、ファスナーで取り外すこともできます。

背パット



マッサージが弱いと感じるときは、中パットを跳ね上げてご使用ください。

中パット




3.ご使用になる前に

3. リクライニング

背もたれを倒すとき

1. たおす  スイッチを押し続けてください。
2. 背もたれが倒れ始めます。
3. 希望の角度になったら放してください。

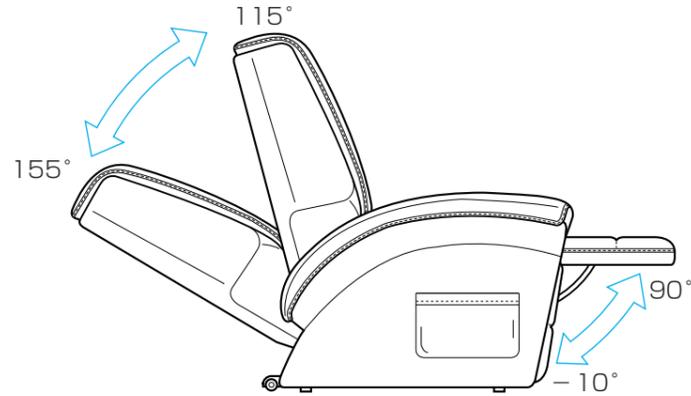

背もたれを起こすとき

1. おこす  スイッチを押し続けてください。
2. 背もたれが起き始めます。
3. 希望の角度になったら放してください。

4. フットレスト

フットレストを上げるとき

1. 上げる  スイッチを押し続けてください。
2. フットレストが上がり始めます。
3. 希望の角度になったら放してください。

フットレストを下げるとき

1. 下げる  スイッチを押し続けてください。
2. フットレストが下がり始めます。
3. 希望の角度になったら放してください。

⚠️ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> • もみ玉の位置を確認の上、静かに座ってください。 • リクライニングやフットレストを使用する際は、本体の後ろやフットレストの下に人やペットがいないこと、および障害物がないことを確認してください。 ・けがをさせる恐れがあります。 	❗
<ul style="list-style-type: none"> • 座面下部の金具、背もたれと座部や肘掛け部のすき間に、手や足を入れないでください。 • 同時に2人以上で使用しないでください。 • 背もたれ、肘掛けやフットレストの上ののったり、座ったり、立ち上がったたり、飛び跳ねたりしないでください。 ・けがをする恐れがあります。また、床面や本機を傷める恐れがあります。 	⊘

👉 お願い

雷の発生時には使用を中止し、電源スイッチを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。

・落雷があると故障の原因になります。

本機のもみ玉移動部を強く押ししたり、硬いものをのせて使用しないでください。

・故障の原因になります。


リモコンを落下させたり、踏んだりしないでください。

・故障の原因になります。

5. 脚バンプ


フットレストには、ふくらはぎをマッサージする脚バンプ機能があります。

- ・脚バンプだけの使用も、オートやマニュアルのマッサージとの併用もできます。
- ・「停止スイッチ」でも停止できます。
- ・約15分で自動的に停止します。
- ・オートやマニュアルのマッサージと併用したときは、そのタイマーと同時に停止します。

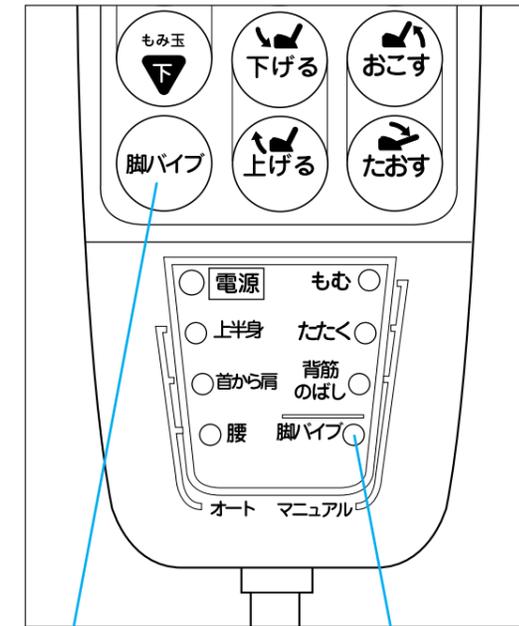

脚バンプスイッチを
1回押す：弱い振動
2回押す：強い振動
3回押す：停止する

脚バンプ表示ランプ
(動作中に点灯)

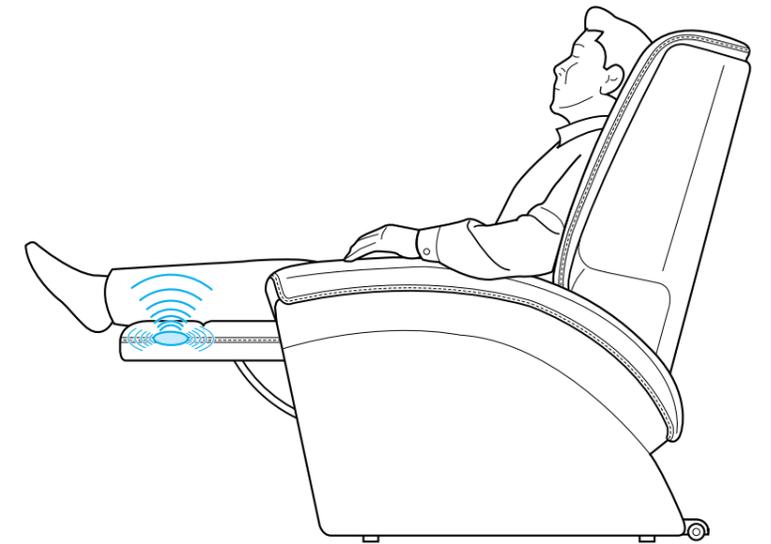

6. 電子タイマー

- ・切り忘れ防止や過度のマッサージを防ぐため、タイマーを内蔵しています。
動作を始めてから、約15分後に自動的にもみ玉が一番下のスタート位置まで降りた後、停止します。


4. オートで使う

1. 電源の入れ方

- (1) 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (2) 背もたれ裏面下部の施錠スイッチ (図①) を「開」にし、電源スイッチ (図②) を「入」にします。
- (3) リモコンの電源ランプ (図③) が点灯します。

※このとき、もみ玉が背中や肩の位置にあると、自動的に一番下のスタート位置まで下降します。

⚠ 注意	
・電源が交流 100Vであることを確認してください。	⊘
・電源コードが本機の下敷きにならないように注意してください。	

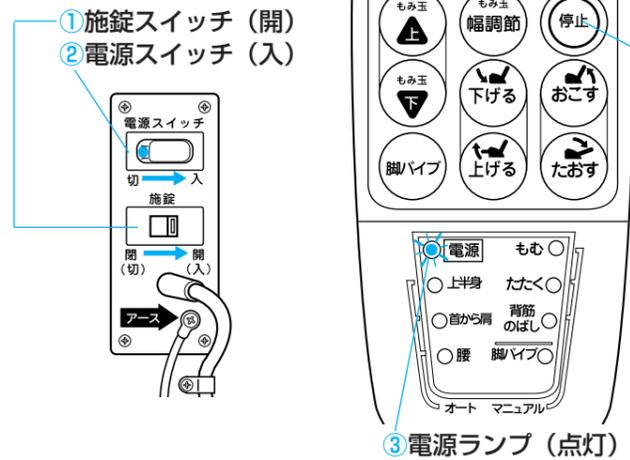

3. 停止／電源の切り方

- (1) 一時停止させたいとき
動作中のスイッチをもう一度押すと、いったん停止します。もう一度押せば、再始動します。
- (2) 停止させたいとき
リモコンの「停止」スイッチを押すと、もみ玉が一番下のスタート位置まで移動し、停止します。
- (3) マッサージ終了後は必ず、本体肘掛け部後ろ右側の電源スイッチを「切」にして施錠スイッチを「閉」にしてください。電源スイッチを「切」にすると、リモコンの電源ランプは約4秒後に消灯します。
- (4) 電源プラグをコンセントから抜きます。

2. オートでマッサージ

※強弱の設定はできません。



- (1) 好みに合わせてオート選択スイッチの「上半身」「首から肩」「腰」から選びスイッチを押します。
- (2) リモコンの該当するオート選択ランプが点灯し、マッサージを開始します。

※もみ玉の高さともみ玉幅は調節できません。

- (3) 詳しい動作一覧表は17ページをご覧ください。



オート各コースのマッサージ範囲

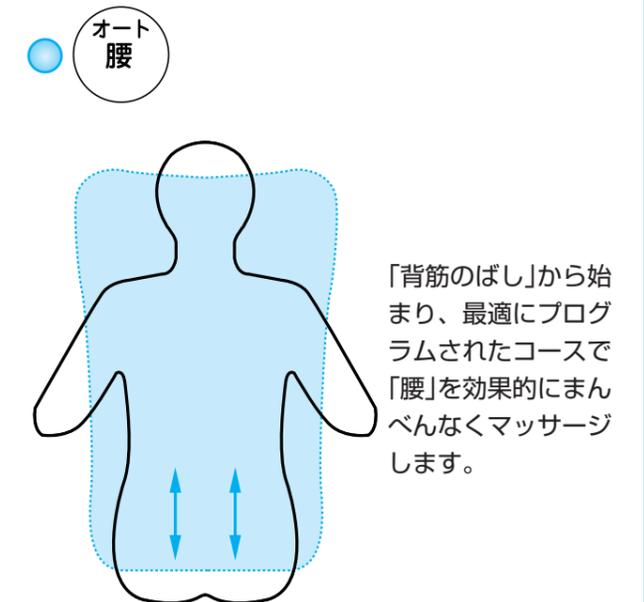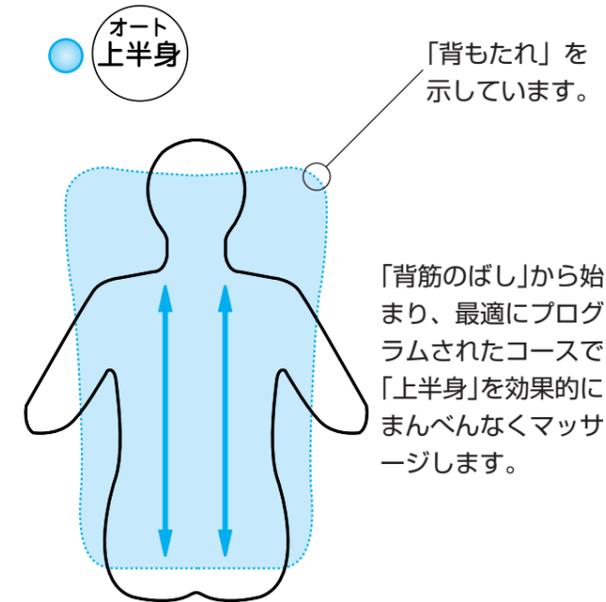


⚠ 警告	
<ul style="list-style-type: none"> ・次の方は、必ず医師と相談の上で使用ください。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 医師の治療を受けている人や特に体に異常を感じているとき 2) 背骨に異常のある人、背骨が曲がっている人 3) 悪性腫瘍のある人 4) 急性症状のある人 5) 骨粗しょう症の人 6) 妊娠中や生理中の人 7) 安静を必要とする人 8) 心臓に障害のある人 (狭心症、心筋梗塞等の疾患のある方、ペースメーカー使用の方) 9) かつて治療を受けたところまたは患部へ使用する人 10) 熱の高い人 ・事故や体調不良を起こす恐れがあります。 ・自分で意志表示できない方には使わせないでください。また、身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。 ・けがをする恐れがあります。 ・革や布地が破れた状態 (内部機構が露出等) では使用しないでください。 ・けがをする恐れがありますので、お買い上げの販売店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)まで修理を依頼してください。 	⚠

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。 ・体調不良を起こす恐れがあります。 ・長時間の使用および眠りながらの使用はしないでください。 ・1回の使用時間は、同一個所には5分位、背全体へは15分位としてください。 ・長時間の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。 ・続けて使用される場合は、15分使用した後、10分程度休んでください。 ・なお1日当たりの使用時間は通算して1時間程度を目安にしてください。 ・素肌や衣服が濡れたままで使用しないでください。 ・けがをする恐れがあります。 	⚠

5.マニュアルで使う

1. 電源の入れ方

- (1) 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (2) 背もたれ裏面下部の施錠スイッチ (図①) を「開」にし、電源スイッチ (図②) を「入」にします。
- (3) リモコンの電源ランプ (図③) が点灯します。

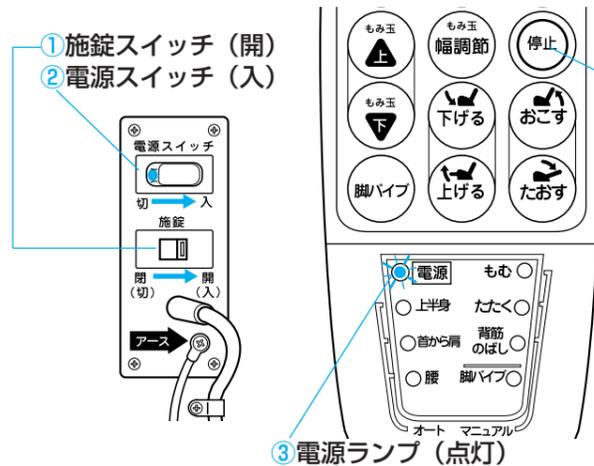

⚠ 注意

- ・電源が交流100Vであることを確認してください。
- ・電源コードが本機の下敷きにならないように注意してください。

2. マニュアルでマッサージ



● マッサージ開始

※強弱の設定はできません。

- (1) まず「背筋のぼし」スイッチを押します。
※はじめは「背筋のぼし」から使用して、身体をなじませてください。
- (2) 「背筋のぼし」ランプが点灯します。
- (3) 「背筋のぼし」動作をはじめます。
- (4) 体がなじんできたなら、もう一度「背筋のぼし」スイッチを押して一時停止します。
- (5) 「もむ」「たたく」「背筋のぼし」の中から好きな動作を選びます。

● マッサージを組み合わせる

「もむ」「たたく」「背筋のぼし」は以下のように組み合わせ、同時にマッサージすることができます。

- ・「もむ」+「たたく」
- ・「もむ」+「背筋のぼし」
- ・「たたく」+「背筋のぼし」
- ・「もむ」+「たたく」+「背筋のぼし」

- (1) 組み合わせたいスイッチを順に押します。
- (2) それぞれのランプが点灯して、動作をはじめます。
- (3) 動作中のスイッチをもう一度押せば、その動作は止まります。

⚠ 警告

- ・次の方は、必ず医師と相談の上で使用ください。
 - 1) 医師の治療を受けている人や特に体に異常を感じているとき
 - 2) 背骨に異常のある人、背骨が曲がっている人
 - 3) 悪性腫瘍のある人
 - 4) 急性症状のある人
 - 5) 骨粗しょう症の人
 - 6) 妊娠中や生理中の人
 - 7) 安静を必要とする人
 - 8) 心臓に障害のある人 (狭心症、心筋梗塞等の疾患のある方、ペースメーカー使用の方)
 - 9) かつて治療を受けたところまたは患部へ使用する人
 - 10) 熱の高い人
- ・事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- ・自分で意志表示できない方には使わせないでください。また、身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。
- ・けがをする恐れがあります。
- ・革や布地が破れた状態 (内部機構が露出等) では使用しないでください。
- ・けがをする恐れがありますので、お買い上げの販売店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)まで修理を依頼してください。

3. 停止／電源の切り方

- (1) 一時停止させたいとき
動作中のスイッチをもう一度押すと、いったん停止します。もう一度押せば、再始動します。
- (2) 停止させたいとき
リモコンの「停止」スイッチを押すと、もみ玉が一番下のスタート位置まで移動し、停止します。
- (3) マッサージ終了後は必ず、本体肘掛け部後ろ右側の電源スイッチを「切」にして施錠スイッチを「閉」にしてください。電源スイッチを「切」にすると、リモコンの電源ランプは約4秒後に消灯します。
- (4) 電源プラグをコンセントから抜きます。

● もみ玉の高さを変える


※「背筋のぼし」やオートのマッサージでは使えません。

- (1) もみ玉「上」あるいは「下」のスイッチを希望の高さになるまで押します。
- (2) 希望の高さになったら放してください。
- (3) マッサージ中も変えることができます。

● もみ玉の幅を変える

※「もむ」には使えません。

- (1) もみ玉幅調節のスイッチを、すばやく1回押して放します。
- (2) 希望の幅になるまで何回かくり返してください。
- (3) マッサージ中も変えることができます。

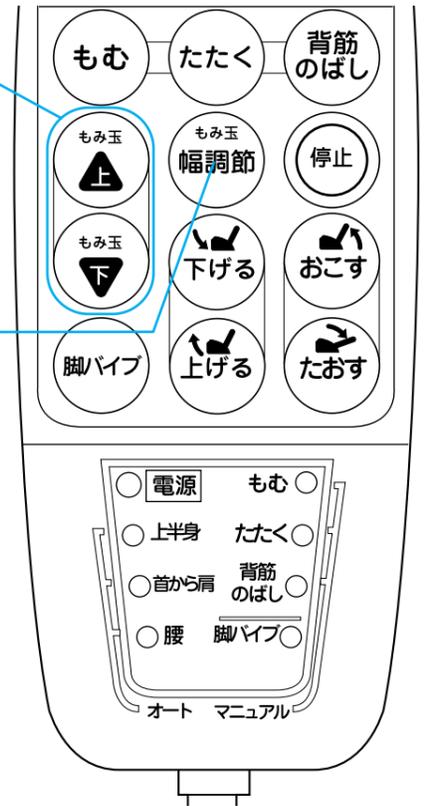

⚠ 注意

- ・使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・体調不良を起こす恐れがあります。
- ・長時間の使用および眠りながらの使用はしないでください。
- ・1回の使用時間は、同一個所には5分位、背全体へは15分位としてください。
- ・長時間の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。
- ・続けて使用される場合は、15分使用した後、10分程度休んでください。
- ・なお1日当たりの使用時間は通算して1時間程度を目安にしてください。
- ・素肌や衣服が濡れたままで使用しないでください。
- ・けがをする恐れがあります。

6.お手入れと保管

1. 手入れのしかた

■革のお手入れ方法

- (1) 革に汚れが付いたときは、固形石けん（人肌に使えるもの）を擦りつけた濡れた布で汚れを拭きとった後、乾いた布で水分を拭きとってください。
- (2) 革に入浴剤（特にイオウ成分を含んだもの）やシャンプー、整髪料が付いたときは、速やかに濡れた布で汚れを拭きとった後、乾いた布で水分を拭きとってください。
- (3) 背パットの汚れがひどく、普段のお手入れで汚れが落ちないときは、革専門のクリーニングに出してください。

■リモコンのお手入れ方法

水または中性洗剤をしみこませた布で、汚れを拭きとり、乾いた布でから拭きしてください。
ベンジン、ガソリン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

⚠警告

お手入れの際は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないでください。
・感電やけがの恐れがあります。
本機に水をかけないでください。
・感電の恐れがあります。また、故障の原因になります。



お願い

革のお手入れのとき、中性洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
・革の保護膜が溶けて、色落ちします。
市販の保護つや出しスプレーは使用しないでください。
・革の保護膜にひびが入る恐れがあります。
革にハンドクリームなどの油分を塗布しないでください。
・本商品に使用している革には効果がありません。

2. 保管のしかた

長期間使用されないときは、革のカビ発生や内部機構のサビを防ぐために、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。

⚠注意

本機を持ち上げて運ぶときは、コード類を束ね、必ず2人で左右の肘掛けの底面を持って、持ち上げてください。
・肘掛け以外のところを持ち上げると、バランスを崩し本機を落とす恐れがあります。



お願い

直射日光が当たる場所やストーブなどの近くで高温になる場所に保管しないでください。
・革の変色、変質の恐れがあります。
屋外に保管しないでください。
・故障の原因になります。
本機を破棄するときは、分解しないで大型ゴミとして、自治体に回収してもらってください。

7.おかしいな? と思ったとき

現象	ここを点検してください。	処理方法
作動中「シュー」、「キュッキュッ」、「コトコト」という音がする。	構造上やむをえず発生するものです。機械の故障ではありません。	製品寿命にも影響ありません。
マッサージ動作音が多少大きくなる。	連続して長時間使用していませんか？	電源を切って1時間以上休ませてください。
表面が温かく感じられる。	連続で30分以上使用していませんか？	機械には影響ありません。
左右のもみ玉の高さが異なる。	構造上のものです。	異常ではありません。
動作しない、または途中から動かなくなった。	タイマーが働き、電源が切れていませんか？	スイッチを再度入れてください。
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	本体肘掛け部後ろ右側の電源スイッチが「切」になっていませんか？	電源スイッチを「入」にしてください。
	本体肘掛け部後ろ右側の施錠スイッチが「閉」になっていませんか？	施錠スイッチを「開」にしてください。


※上記の他にセットした動作と異なる動作をした場合は、一度電源プラグをコンセントから抜き、少しおいてから再度プラグをコンセントに差し込んで、電源スイッチを入れてください。

※購入当初、臭いがしますが、これは革特有の臭いなので異常ではありません。

※これらの処理をされても異常があるときは、お買い上げの販売店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)までご相談ください。なお、その際はご購入商品名・型名、お買い上げ時期、故障状況等をくわしくお知らせください。

8. オートの動作一覧

凡例： もむ たたく もむ + たたく 同時 移動 + 停止 マッサージ

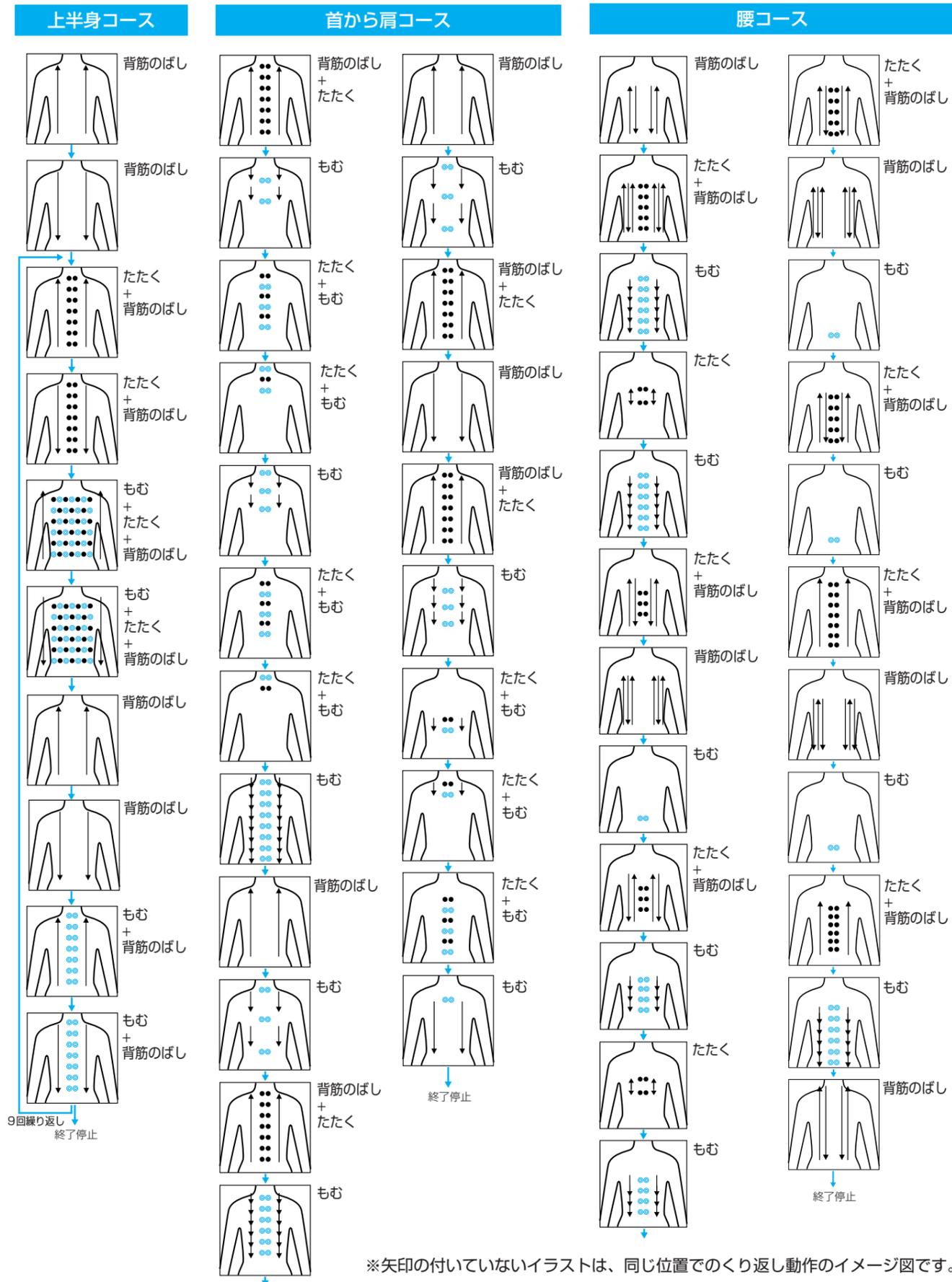

9. 主な仕様

定格電圧	: AC100V
定格周波数	: 50/60Hz
消費電力	: 101W
定格時間	: 30分定格
質量	: 約61kg
外装	: 総牛革張り
寸法	: ・リクライニングしていないとき (フットレスト収納) 高さ1080×幅730×奥行1130 (mm) ・リクライニングしたとき (フットレスト水平) 高さ670×幅730×奥行1700 (mm)
安全装置	: 過電流保護装置、電子タイマー (約15分)
リクライニング角度	: 背もたれ 約115°~155° フットレスト部 約-10°~90°
ローラー移動時間 (背筋のばし)	: 約12秒 (下方向から上方向)
ローラー揺動回転数 (もむ)	: 約35rpm
ローラー揺動回転数 (たたく)	: 約320rpm
ローラー最大移動範囲	: 約640mm
脚パイプ	: 振動式 (強弱2段階)
医療用具輸入許可番号	: 24BY0001
電気用品型式認可番号	: 91-57260
付属品	: 取扱説明書、保証書、アース線

※改良のため一部仕様を予告なしに変更することがあります。

10. 商品の使い方に関するお問い合わせは

商品に関するお問い合わせは

商品の使い方や疑問点などお気軽にお問い合わせください。

オムロン健康相談室

フリーダイヤル **0120-30-6606** ダイヤルは正確に

受付時間 (祝日を除く月~金) 10:00~12:00 / 13:00~16:00
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

※商品の故障および修理の依頼につきましては、下記に記載のオムロンフィールドエンジニアリング(株)にお問い合わせください。

11. 修理サービスのネットワーク

お買い上げの販売店または最寄りのオムロンフィールドエンジニアリング(株)までお問い合わせください。品質保証書の記載内容により専門工場にて修理をさせていただきます。 '99.9月

北海道地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株) 札幌支店 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6階	TEL011(281)5125
関東、東北、甲信越地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 第2サービス部 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2階	TEL03(3448)8104
東海、北陸地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-22-21 安田火災名古屋ビル7階	TEL052(962)3268
関西、中国、四国地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 第2サービス部 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-1-9 古河大阪ビル西館1階	TEL06(6348)1814
九州地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング九州(株) 福岡第一支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多借成ビル3階	TEL092(451)6837

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お手入れなど

お手入れなど