

## 保証規定

- 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理いたします。
  - 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてオムロンお客様サービスセンターに依頼してください。
  - 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
    - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損傷。
  - (二) 本書の提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - (ヘ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
  - (ト) 車両や船舶等に設置された場合に起因する故障および損傷。
  - (チ) 営業、業務用に使用した場合による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
  - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

品質保証書	
このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきありがとうございました。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。	
※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。	
This warranty is valid only in Japan.	
品名	オムロンマッサージチェア pisu (ピ・イス)
形式	HM-601
ご芳名	
ご住所	
Tel.	( )
お買い上げ店名	
住所	
Tel.	( )
お買い上げ年月日	年 月 日
発売元 オムロン株式会社ヘルスケアビジネスカンパニー 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL03(3436)7092	

## 取扱説明書

### 要保存



ピース

- このたびは、オムロンマッサージチェアをお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

### 商品に関するお問い合わせは

オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

フリーダイヤル **0120-30-6606**  
フリーファックス **0120-10-1625**  
〈通信料無料〉

受付時間 9:00~19:00 (祝日を除く月~金)  
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

## オムロン マッサージチェア pisu (ピ・イス) HM-601

### もくじ

#### ご使用前に

安全上のご注意	1
商品の特長	5
商品の構成	6
各部の名前とはたらき	7
設置する	9
パッドを取り付ける	11

#### 使い方

マッサージの手順	14
ご使用前の確認	15
椅子の調節	16
電源を入れる	17
肩位置設定をする	18
おまかせモードを使う	19
おこのみモードを使う	21
マッサージが終わったら	24

#### こまだったときに・保証など

お手入れと保管	25
おかしいな?と思ったら	26
お問い合わせ先	27
仕様	28
おまかせモード動作一覧	29
保証規定/品質保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

お使いになる前によくお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内容
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

## 図記号の例

	△記号は注意（警告・危険を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“一般的な強制”を示します。

## 警告

次の方は、必ず医師と相談の上で使用ください。

- 医師の治療を受けている人や特に体に異常を感じている人
- 背骨に異常のある人、背骨が曲がっている人
- 悪性腫瘍のある人 ■ 急性症状のある人
- 骨粗しょう症の人 ■ 妊娠中や生理中の人
- 安静を必要とする人
- 心臓に障害のある人（狭心症、心筋梗塞等の疾患のある人、ペースメーカー使用の人）
- かつて治療を受けたところまたは患部へ使用する人 ■ 熱の高い人 ■ 体力の衰えた人
- 知覚障害のある人

・ 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

リクライニングを使用するときや、椅子部を回転させるときは、十分なスペースがあることを確認してください。また本機の後ろや周囲に人（特に幼児や子供）やペット、家具など障害物がないことを確認してください。

・ ケガをさせたり、家具や本機を傷つける恐れがあります。

幼児や子供に使用させたり、本機の上で遊ばせたりしないでください。  
特に幼児や子供を座部に寝かせないでください。

・ ケガをする恐れがあります。

自分で意思表示できない方への使用はおやめください。また、体の不自由な方は必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。

・ 体調不良になったり、ケガをする恐れがあります。

頭、おなか、肘、ひざ、手などへの使用や、うつぶせでの使用はしないでください。

・ 体調不良になったり、ケガをする恐れがあります。（首筋には、柔らかいタオル等をあててのご使用をお勧めします。）

マッサージ機能は治療目的以外には使用しないでください。

・ 体調不良になったり、ケガをする恐れがあります。

浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。また、屋外では使用しないでください。

・ 火災、感電、故障の原因になります。

ご使用前には必ず、背パッドをはね上げて、本体やパッドの布地が破れていないか確認し、わずかも破れた状態では使用しないでください。

・ ケガをする恐れがありますので、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。（P.27ページ）

## 警告

布地が破れた状態（内部機構が露出）では使用しないでください。

・ ケガをする恐れがありますので、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。（P.27ページ）

もみだまの間に手などを入れないでください。また、椅子部を回転させるときは、座部と回転台座の間に手や足を入れないでください。

・ ケガをする恐れがあります。

同時に2人以上で使用しないでください。

・ ケガをする恐れがあります。また、床面や本機を傷める恐れがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しや、電源スイッチまたはリモコンの操作をしないでください。

・ 感電やケガの恐れがあります。

本機を分解したり、改造したりしないでください。

・ 感電する恐れがあります。また、発火したり、異常動作をして、ケガをする恐れがあります。

本機に水をかけないでください。

・ 感電の恐れがあります。また、故障の原因になります。

お手入れの際は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・ 感電やケガの恐れがあります。

## 注意

本機を設置する場合には、床面が水平な場所に置いて使用してください。

・ 不安定な場所では転倒したり、ケガをする恐れがあります。

1回の使用時間は、同一箇所には5分以内、背全体へは15分以内としてください。

・ 長時間の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。

使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

・ 体調不良になったり、ケガをする恐れがあります。

本機を移動するときは、コード類は束ねてください。持ち上げるときは、必ず2人以上で両側から肘かけ部の下を持ってください。またリクライニングレバーを持って移動しないでください。

・ バランスを崩し、本機を落とす恐れがあります。

本機を持ち上げて運ぶときは、回転台座にあたらぬように気をつけてください。

・ ケガをする恐れがあります。

設置するときは、マットなどを敷いてください。

・ 床や畳などを傷つける恐れがあります。

本機を設置するときは、ゆっくりと置いてください。

・ 床や畳などを傷つける恐れがあります。

座るときはもみだまの位置を確認の上、肘かけ部を持って椅子部が回転しないようにして静かに座ってください。

・ 床や畳などを傷つける恐れがあります。  
・ ケガをする恐れがあります。

電源コードやリモコンコードが本機の下敷きにならないように注意してください。

・ 故障の原因になります。

回転するときには電源コードにも充分余裕があることを確認してください。

・ ケガをする恐れがあります。

椅子部を回転させるときは電源コードを巻き込まないようにしてください。

・ コードの破損による感電の恐れがあります。

背パッドは必ず付けて使用してください。

・ 体調不良になったり、ケガをする恐れがあります。

電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。

・ 感電の恐れがあります。  
・ ショートや発火の恐れがあります。

使用時以外は、リモコンコードや電源コードを束ねておいてください。リモコンコードはリモコンポケットに収納してください。

・ 幼児や子供がコードで遊んでケガをしたり、子供のいたずらによる事故やケガの恐れがあります。

# 安全上のご注意

## ⚠️ 注意

使用時以外は必ず電源スイッチを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 ・感電や漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。  
 ・電源コードが断線やショートして火災や感電の原因になります。

本機が動作しない場合や、リクライニング動作、回転動作の異常など、おかしいと感じたときは、使用をただちに中止し、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。(P.27ページ)  
 ・ケガをする恐れがあります。  
 ・感電、ショート、発火の原因になります。

停電時はただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 ・事故やトラブルにつながる恐れがあります。

長時間の使用および眠りながらの使用はしないでください。  
 ・長時間の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。  
 ・眠りながらの使用でケガをする恐れがあります。

頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しないでください。また長い髪の方は束ねるなどして使用してください。  
 ・ケガをする恐れがあります。

素肌や衣服が濡れたままで使用しないでください。  
 ・ケガや感電の恐れがあります。

背もたれ、肘かけの上ののったり、座ったり、立ち上がったたり、飛び跳ねたりしないでください。  
 ・ケガをする恐れがあります。また、床面や本機を傷める恐れがあります。

リクライニングした状態で背もたれによりかかったり、押さえつけないでください。  
 ・転倒する恐れがあります。

リモコンを落下させたり、踏んだりしないでください。  
 ・故障の原因になります。



本機のもみだま移動部を強く押ししたり、もみだまの間に物を挟んでもみだまの動きを止めないでください。  
 ・やけどをする恐れがあります。  
 ・故障の原因になります。

背もたれと座部や肘かけ部のすき間に、手や足を入れないでください。  
 ・ケガをする恐れがあります。

本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。  
 ・本機が誤動作する恐れがあります。

椅子部を頻繁に回転させて使用しないでください。  
 ・特にリクライニング状態で頻繁に回転させると、気分が悪くなる恐れがあります。  
 ・マッサージ中に回転させると、気分が悪くなる恐れがあります。

回転台座が床から浮くような状態で使用しないでください。  
 ・回転台座と床の間に手や足を挟んだり、転倒したりして、ケガをする恐れがあります。

椅子部を勢いよく回転させないでください。  
 ・マッサージ中は、もみだまの位置により痛みを感じたり、ケガをする恐れがあります。  
 ・本機が床や畳の上をすべり、床や畳を傷つける恐れがあります。

ストーブなどの熱器具の近くに置かないでください。  
 ・火災や故障の原因になります。

腰痛など腰の悪い方は本機を持ち上げないでください。  
 ・症状を悪化させる恐れがあります。

回転台座を持って運ばないでください。  
 ・椅子部が回転すると、ケガをする恐れがあります。

本機を移動する場合、人または物をのせたままの移動や、引きずるような移動はしないでください。  
 ・腰を痛めたり、ケガをする恐れがあります。  
 ・本機の底面や床面を傷める恐れがあります。

本機を移動する場合には、コード類を束ね、踏みつけないようにしてください。また、強いショックを与えたり、落としたりしないでください。  
 ・故障の原因になります。またケガをする恐れがあります。



## ⚠️ 注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
 ・感電、ショート、発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、使用時は束ねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。  
 ・感電や漏電火災の原因になります。

電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。  
 ・感電やショート、発火の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。また、タコ足配線はしないでください。  
 ・火災、感電、漏電の原因になります。



## お願い

必ず衣服を着用してご使用ください。

使用時のスイッチ操作は動作を確認しておこなってください。  
 ・動作が急に変わることによって苦痛を感じる場合があります。

体重135kg以上の方は本機をご使用にならないでください。  
 ・故障の原因になります。

続けて使用する場合は、しばらく休んでからお使いください。

座部の上で飛び跳ねたり、強く踏みつけたりしないでください。  
 ・縫い目部分や生地が破れたりする恐れがあります。

背パッド、枕、肘パッド(左/右)、座面パッドなどに入浴剤(とくにイオウ分を含んだもの)やシャンプー、整髪料などが付着したときは、速やかに乾いた布で拭き取ってください。

本機はソフトレザー(合成皮革)を使用していますので、ソフトレザー(合成皮革)の上にビニール製品やゴム製品を置くと、ビニールやゴムの成分が移行してソフトレザー(合成皮革)が変色する恐れがあります。

雷の発生時には使用を中止し、電源スイッチを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 ・落雷があると故障の原因になります。

直射日光が当たるところに保管しないでください。  
 ・生地の変色の恐れがあります。

本機を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従って処分してください。  
 ・環境汚染の恐れがあります。

# 商品の特長

## ■手もみ感覚のマッサージを体験できます

手もみ感覚のマッサージの基本メニューは6種類(背筋のばし、指圧、もみ、たたき、もみたたき、とんとん)をご用意。さらに、これらを組み合わせることにより豊富なメニューでマッサージができます。(P.23ページ)

## ■3つの自動コースでおまかせマッサージができます

手軽に使える、おまかせモードをご用意。プロの手もみ感覚を再現した3つの自動コース(上半身、首・肩、腰)をご使用いただけます。(P.19ページ)  
コースを選択したら、あとはおまかせで、マッサージできます。

## ■もみだま設定と肩位置設定でより効果的なマッサージができます

もみだま設定は、マッサージの速さ、もみだまの左右の間隔、もみだまの高さを変えられる機能です。コリ具合やコッている部位に合わせて調節してください。「おこのみモードを使う」(P.21ページ)  
肩位置設定は、お客様の肩の位置に合わせてマッサージ範囲を調節する機能です。肩位置調節でより効果的なマッサージを実現します。(P.18ページ)

## ■ゆったりとした座りごこちで快適さを実感できます

人間工学に基づく、座りごこちの追求、家具調デザインの採用、素材へのこだわり、また、リクライニング機能や、座部の回転などにより椅子としての快適さを実感いただけます。


# 商品の構成

梱包箱の中には次のものが入っています。商品内容を確認してください。  
万一、不足のものがありましたら、  
オムロンお客様サービスセンター (TEL 0120-30-6606) までご連絡ください。


本体




肘パッド (左)

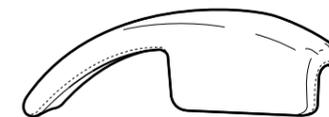


肘パッド (右)

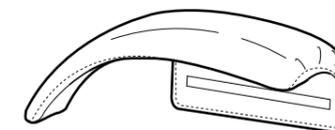


座面パッド

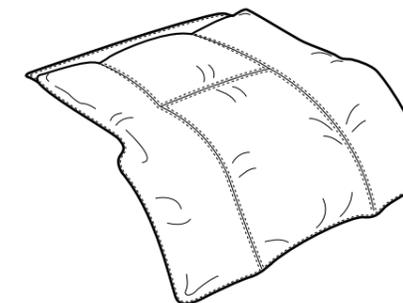

背パッド

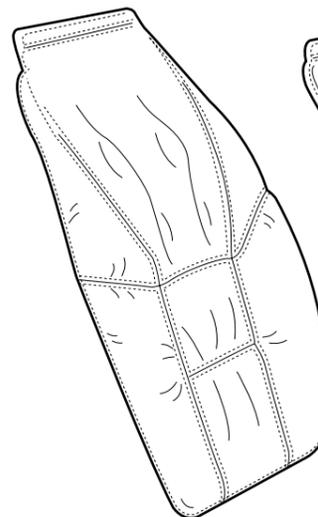

枕

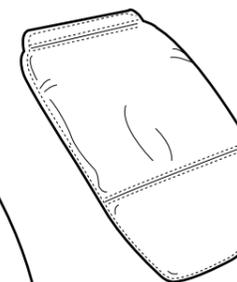

取扱説明書

(本書：品質保証書付き)


本機は付属品のパッドのほか、下記の色違いのパッドを別売品としてご用意しております。

パッドの別売品について		
品名	色	型式
肘パッド(左右セット)	ベージュ	HM-601C-HIJI
	オレンジ	HM-601D-HIJI
	ブラウン	HM-601T-HIJI
枕	ベージュ	HM-601C-MAKUR
	オレンジ	HM-601D-MAKUR
	ブラウン	HM-601T-MAKUR
背パッド	ベージュ	HM-601C-SEPAD
	オレンジ	HM-601D-SEPAD
	ブラウン	HM-601T-SEPAD
座面パッド	ベージュ	HM-601C-ZAPAD
	オレンジ	HM-601D-ZAPAD
	ブラウン	HM-601T-ZAPAD
パッドセット	ベージュ	HM-601C-PADSE
	オレンジ	HM-601D-PADSE
	ブラウン	HM-601T-PADSE

別売品のお問い合わせ・お求めはオムロンお客様サービスセンター (P.27ページ)


# 各部の名前とはたらき

## 本体

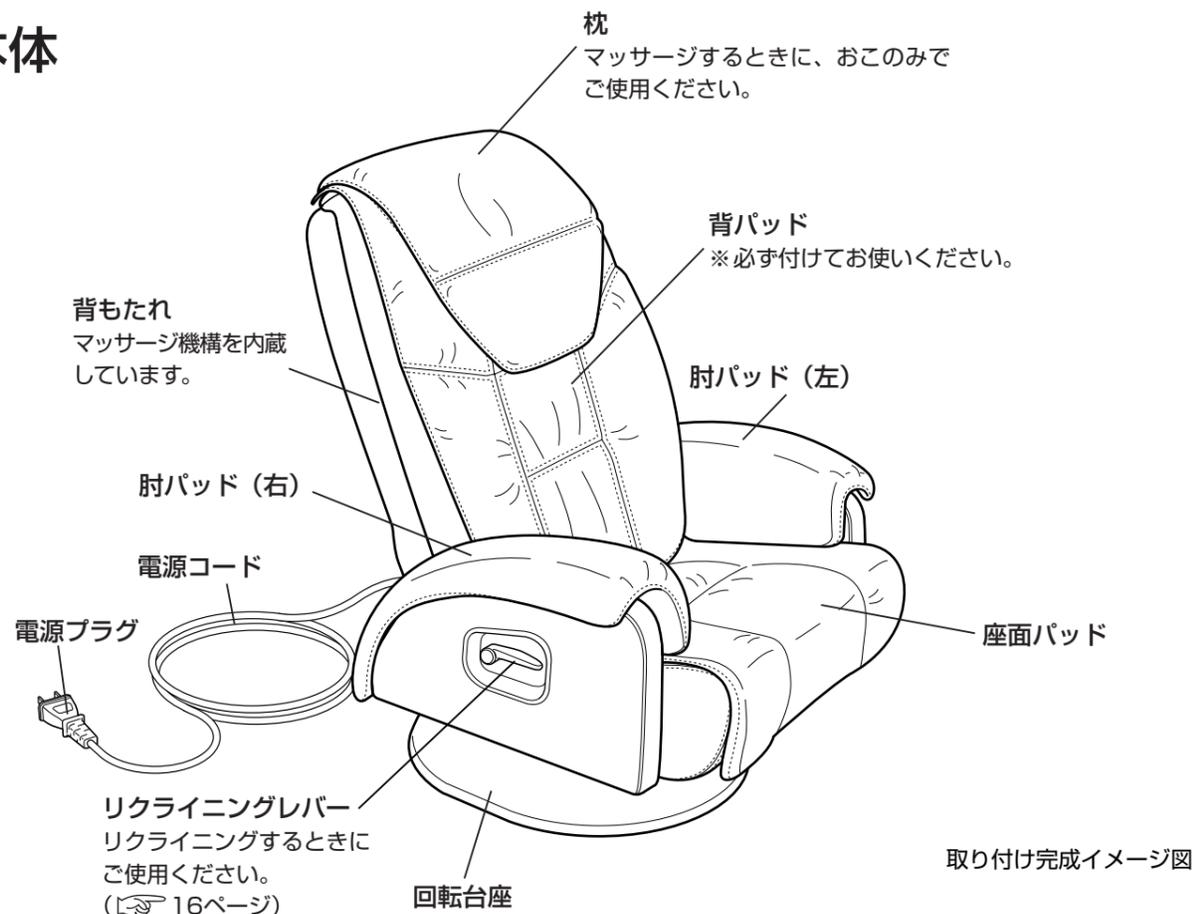


取り付け完成イメージ図

※お買い求めのときは、パッドは取り付けられていません。  
詳しくは、「パッドを取り付ける」をご覧ください。(☞ 11ページ)

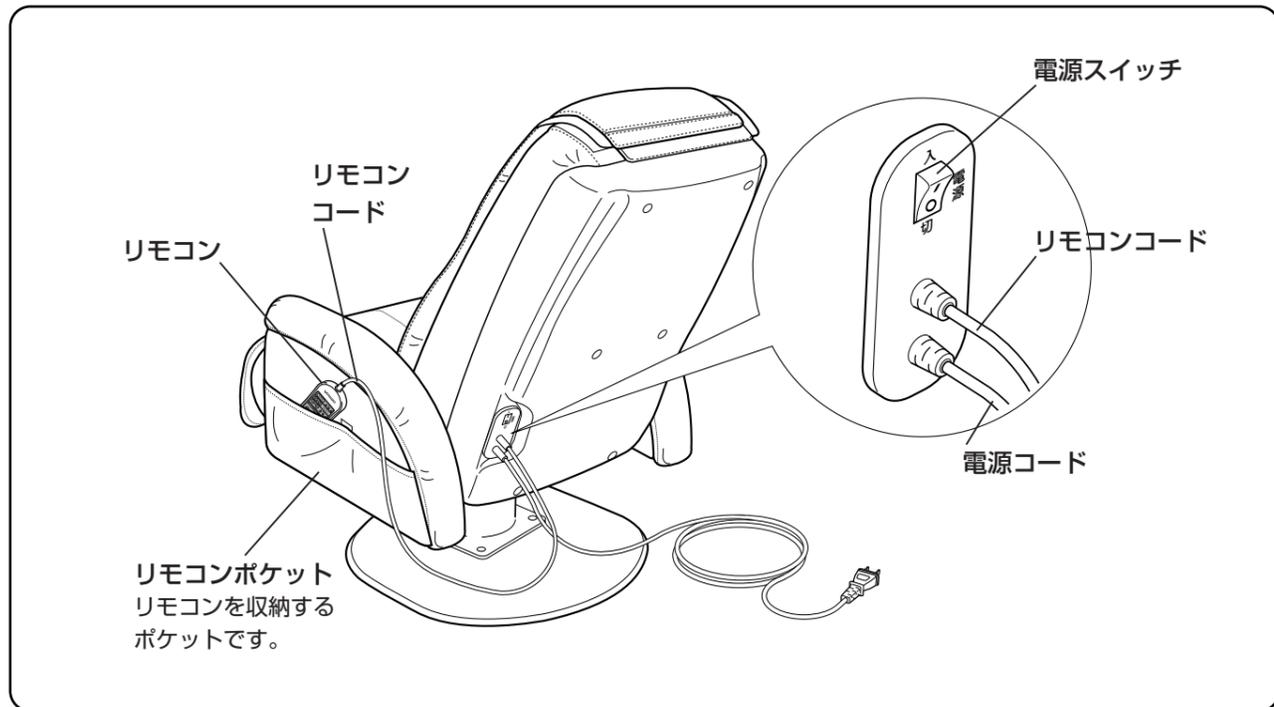

## リモコン

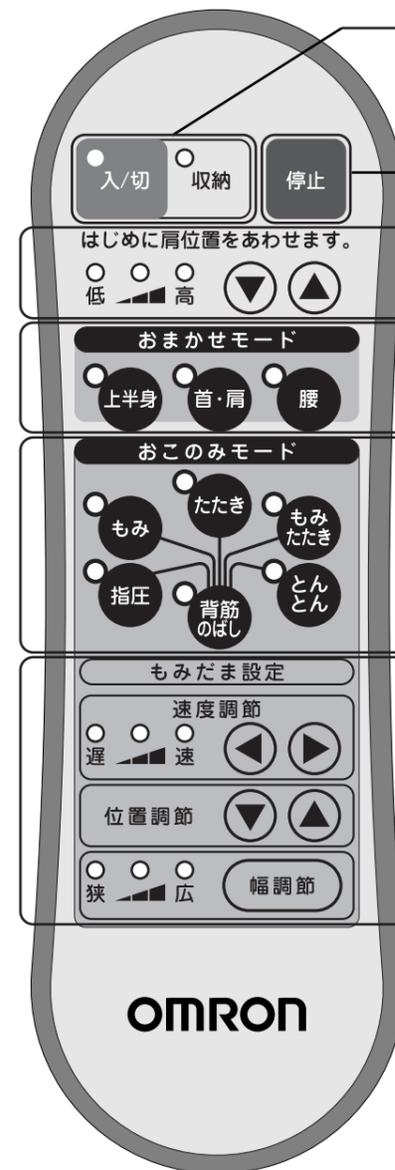

「入/切」スイッチ  
リモコンの電源を入/切します。マッサージ中に押すと、マッサージ  
を終了します。(もみだまが収納位置に移動して停止します。)

「停止」スイッチ  
マッサージを停止します。

肩位置設定  
もみだまの最高位置を肩の位置に調節します。  
(☞ 18ページ)

おまかせモード  
あらかじめ設定されたプログラムに従ってマッサージします。  
(☞ 19ページ)

おこのみモード  
マッサージしたい部位をおこのみに合わせてマッサージします。  
(☞ 21ページ)

もみだま設定  
おこのみモードを使っているとき、マッサージの動作を調節できま  
す。(☞ 21ページ)

速度調節「◀/▶」スイッチ：  
マッサージの速さを5段階に調節します。  
位置調節「▼/▲」スイッチ：  
もみだまの高さを調節します。押しつづけると、  
もみだまが上・下に移動します。  
「幅調節」スイッチ：  
もみだまの左右の間隔を3段階に調節します。


## 「入/切」ランプの見方

入/切 収納	ランプは消灯	電源スイッチは「切」の状態です。
入/切 収納	オレンジ色点灯	電源スイッチは「入」、リモコンは「切」でもみだまが収納 位置にある状態です。
緑色点灯	入/切 収納	リモコンは「入」でマッサージ待機中またはマッサージ中の 状態です。
緑色点滅	入/切 収納	リモコンを「入」にした直後か、もみだまが収納位置に移動 している状態です。


# 設置する

床面が水平な場所を選び、壁や人にあたらないように十分なスペースを確保してください。  
また床などを傷めないよう、必ずマットなどを敷いてください。

## 十分なスペースをとりましょう

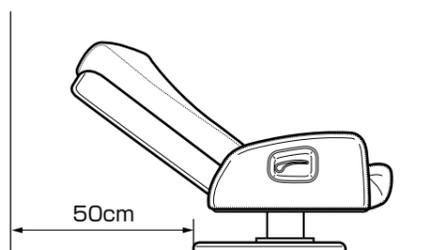


リクライニングしますので、後方に50cm以上のスペースをとってください。

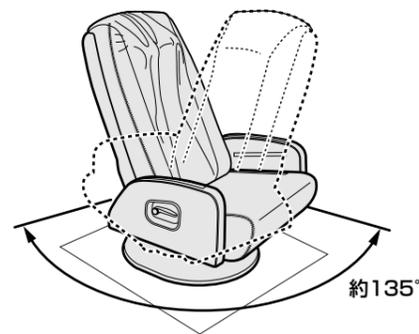

回転しますので、両幅70cm以上のスペースをとってください。


## 1 マットなどを敷き、本機を置く

本機を移動するときは、必ず2人でおこなってください。（「設置後移動するときは」10ページ）

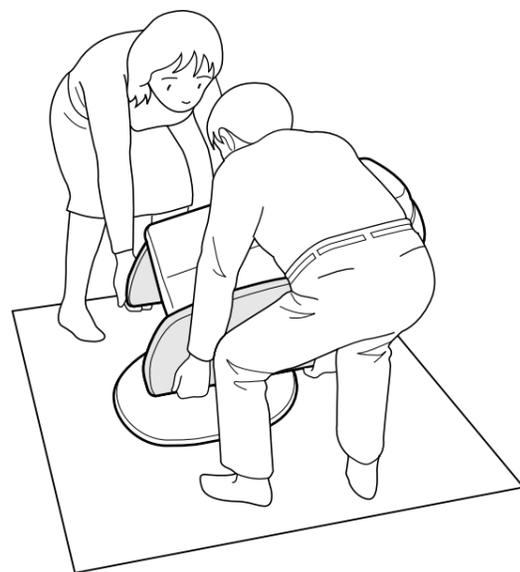

## 2 必ず手をそえて背もたれが固定されるまで起こす


約100°まで起こすとカチッと音が鳴り、固定されます。（起こした背もたれは固定され、以後は折りたためせん）

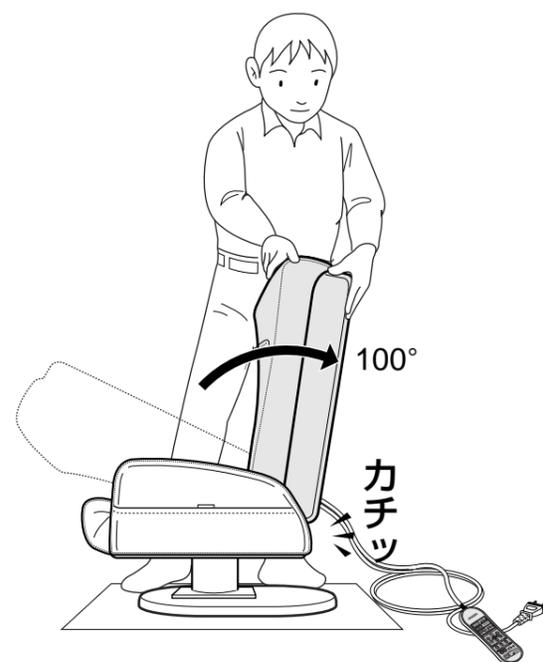

背もたれを前後に動かして固定されていることを確認してください。

## 設置後、電源コードとリモコンコードを確認してください！

コードが背もたれと肘かけの間に挟まれたり、回転台座の下になっていませんか？

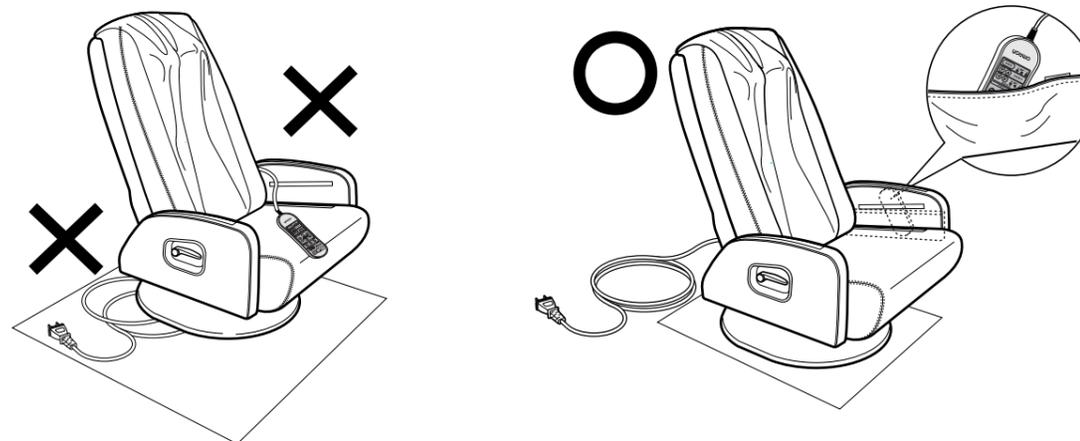

## 設置後移動するときは

本機を移動するときは、肘かけ下部をそれぞれ2カ所（左右で4カ所）持っておこなってください。

- 1 背もたれを起こす  
リクライニングレバーを引き上げて、約100°まで起こします。
- 2 電源コードを束ねる
- 3 図のように2人で持って移動する



※ 重心が高い位置にあるので注意してください。

# パッドを取り付ける

お買い求めのときは、背パッド、枕、肘パッド、座面パッドは装着されていません。  
本機を使用するときは、必ずすべてのパッドを取り付けてください。

## 1 座面パッドを取り付ける

図のように取り付け、本機側とパッド側のマジックテープをしっかりと貼り付けます。



※ 座面パッドの両側を持って、座部にはめ込むようにして取り付けてください。



※ 取り付けてから座面パッドを上からしっかり押ししてください。




※ 座面パッドの下側もしっかり押ししてください。

## 2 肘パッドを取り付ける

本機側とパッド側のマジックテープをしっかりと貼り付けます。



※ 肘パッドを上からしっかり押ししてください。

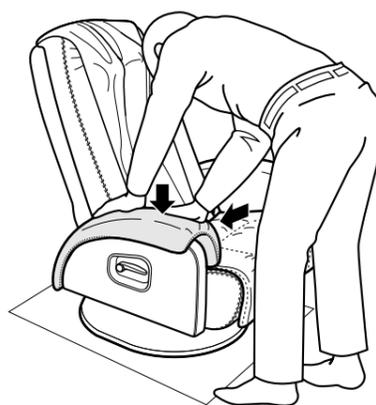


※ 反対側の肘パッドも同様にして取り付けてください。

# パッドを取り付ける

## 3 背パッドを取り付ける

本機上面のファスナーと背パッドのファスナーで取り付けます。

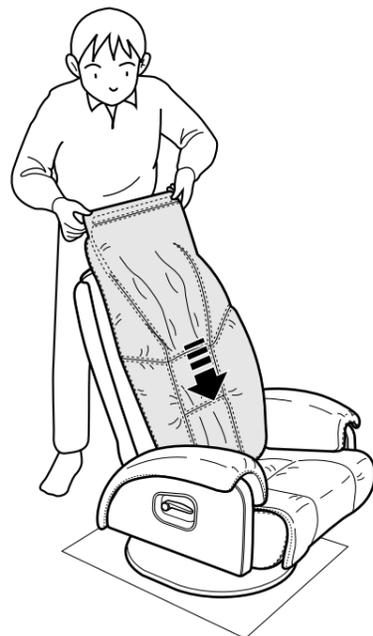


※背パッドを背もたれに静かにのせてください。



※ファスナーを本体のファスナーに合わせて取り付けてください。

## 4 枕を取り付ける

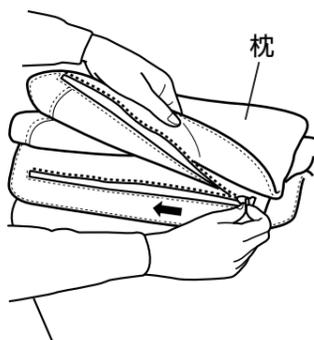

※枕のファスナーを背パッド上のファスナーに合わせて取り付けてください。

取り付けが終わったら、完成イメージ図と見くらべて、正確に取り付けられているか確認してください。(P.7ページ)

# マッサージの手順

ここでは、マッサージの手順を簡単に説明します。  
詳しくは、参照ページをよくお読みください。  
はじめは、背パッドの上にバスタオルなどをのせて、弱い刺激でご使用ください。

1 ご使用前の確認 .....15ページ



2 椅子の調節 .....16ページ



3 電源を入れる .....17ページ



4 肩位置設定をする .....18ページ



5 マッサージモードを選ぶ  
おまかせモードを使う .....19ページ  
おこのみモードを使う .....21ページ



6 マッサージが終わったら、電源を切る .....24ページ

安全装置について  
もみだまに無理な力が加わると、もみ過ぎ防止のため安全装置が働き、もみだまの動作が止まる場合があります。

# ご使用前の確認

本機を安全にお使いいただくために必ず使用前に点検してください。

## ✓ チェック1

背パッドをはね上げて、背もたれの布地や背パッドなどが破れていないか確認する




## ✓ チェック2

電源コード、リモコンコードを確認する

コードの被膜に破損や破れがないか確認する

リモコン

- ひび・破損がないか確認する
- 操作面に破損やはがれがないか確認する

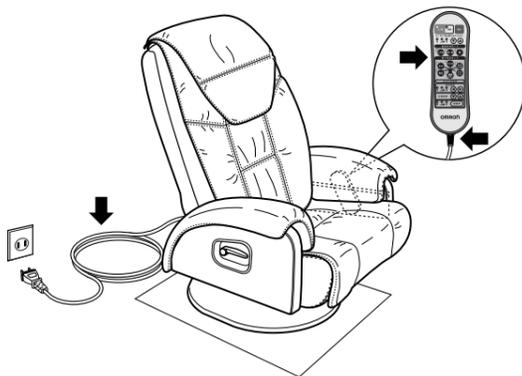

## ✓ チェック3


電源コードとリモコンコードが本機に挟まれたり巻き込まれていないか確認する

- 背もたれと肘パッドの間に挟まれていないか確認する
- 回転台座に巻き込まれていないか確認する



## ✓ チェック4

本機の周辺や下に人、ペット、物などがないか確認する

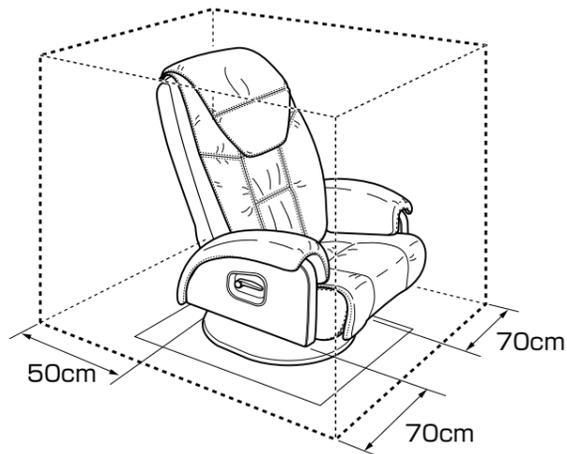

ご使用前の確認の結果、異常が発見されたときは…

- そのまま使用せずに、オムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼してください。(P.27ページ)

# 椅子の調節

マッサージするときは、必ず背パッドを使用してください。

背もたれをリクライニングさせて、おこのみの角度に合わせて調節してください。

## ● マッサージが弱いと感じたら…

背もたれを少しずつ倒してみてください。後ろへ倒すほど背もたれに体重がかかりますので、マッサージの感じ方は強くなります。


※ もみだまの位置を確認してからゆっくりと座ってください。

※ 必ず衣服を着用して座ってください。直接素肌にマッサージするとケガをする恐れがあります。

## リラックスして座りましょう



もみだまの位置を確認してからゆっくりと座ってください。

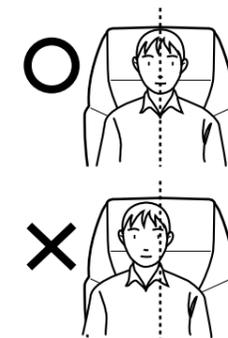

椅子の中央に座ります。

## リクライニングする

背もたれを倒すとき：

リクライニングレバーを引き上げながら、背もたれにもたれながらゆっくり倒します。

背もたれを起こすとき：

リクライニングレバーを引き上げながら、上体をゆっくり起こします。

おこのみの角度になったらレバーをはなします。



※ リクライニングレバーを引き上げて、背もたれを倒すときは、ゆっくりおこなってください。

# 電源を入れる

ここでは、電源の入れ方を説明します。

## 1 使用前点検をおこない、電源を入れる

①ご使用前の確認をする (👉 15ページ)

②電源プラグをコンセントに差し込む



※電源コードは椅子が回転しても引っ張られないようにゆとりをもたせてください。

③背もたれ裏面の電源スイッチを「入」にする

本体の電源が入り、リモコンの「入/切」ランプのオレンジ色が点灯します。

※前回のマッサージ終了時、もみだまが収納位置(最上位)に戻る前に本体裏面の電源スイッチを切ってしまうと電源スイッチを入れると、自動的にもみだまが収納位置(最上位)まで移動します。

※本機はアースの接続は不要です。

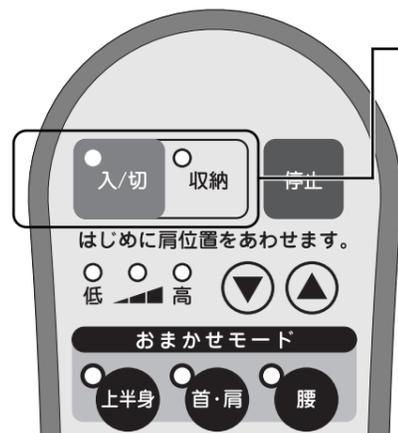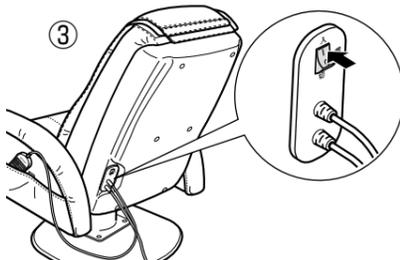

## 2 リモコンの「入/切」スイッチを押す

リモコンの電源が入り、「入/切」ランプの緑色が点灯します。(マッサージ待機状態)

# 肩位置設定をする

「肩位置設定」とは…

もみだまの最高位置をお客様の肩の位置に合わせる機能です。お使いになるお客様の体に合わせて、より効果的なマッサージを実現します。肩位置設定は5段階に切り替えることができます。

## 1 肩位置設定をする

マッサージをはじめる前に肩位置設定をします。

「▼/▲」スイッチを押すと、もみだまが移動します。お客様の肩位置で、もみだまが(とんとん)とたたくように調節してください。

※もみだまの位置をランプの点灯と(とんとん)とたたく動作でお知らせします。



### おまかせモードのとき…

マッサージ中でも肩位置を調節することができます。肩位置設定ランプはすぐ切り替わりますが、肩位置はもみだま位置が上下するタイミングで変わります。また、肩位置をお知らせする動作(とんとん)はおこないません。

### おこのみモードのとき…

「背筋のばし」を選択している場合のみマッサージ中の肩位置の調節ができます。ただしランプの点灯位置は変わりますが、肩位置をお知らせする動作(とんとん)はおこないません。

### 「肩位置設定」ランプの見方

低い	やや低い	中	やや高い	高い
☀️ ◯ ◯	☀️ ☀️ ◯	◯ ☀️ ◯	◯ ☀️ ☀️	◯ ◯ ☀️
低	低	低	低	低
高	高	高	高	高

※電源を入れると最初の肩位置は「高い」にセットされます。

# おまかせモードを使う

部位に最適なコースを選んでマッサージしたいときに使います。  
 あらかじめ用意された3つの自動コース（「上半身」「首・肩」「腰」）から選択します。  
 マッサージは最大15分以内とし、お客様の体の状態に合わせてお使いください。  
 おまかせモードは、約12分連続して使用すると、電子タイマーにより自動的に終了します。  
 ※ 15分を超えるマッサージは、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になりますのでご注意ください。  
 ※ 眠りながらの使用はしないでください。

使い方  
おまかせモードを使う



## 1 おまかせモードのいずれかのスイッチを押す


押したスイッチのランプが点灯し、マッサージがスタートします。  
 ※ おまかせモードをご利用のときは、「もみだま設定」でマッサージの調節をすることはできません。  
 ※ マッサージ中に本機のもみだま移動部を強く押したり、もみだまの間に物を挟んでもみだまの動きを止めないでください。  
 ※ マッサージ中にもみだまに無理な力が加わると、もみ過ぎ防止のため安全装置が働き、もみだまの動作が止まることがあります。

### マッサージの内容

おまかせモードの動作一覧を参照してください。(P.29ページ)

スイッチ	マッサージの内容
上半身	首・肩から腰まで上半身全体をマッサージします。
首・肩	首・肩のあたりを効果的にマッサージします。
腰	腰のあたりを効果的にマッサージします。

## 2 マッサージを終了する

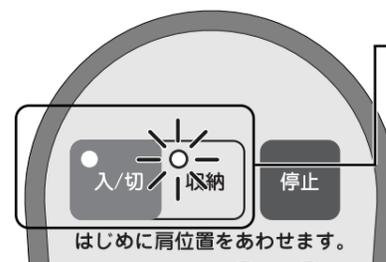

約12分でマッサージは自動的に終了します。  
 マッサージを終了するとリモコンの「入/切」ランプの緑色が点滅に変わり、もみだまが収納位置まで移動して、リモコンが「切」の状態になります。  
 (リモコンの「入/切」ランプのオレンジ色が点灯)

### マッサージを途中で終了したいときは…

「入/切」スイッチを押します。もみだまが収納位置に移動して停止します。  
 再びマッサージを始めるときは、17ページ「2」からおこなってください。

### マッサージを停止したいときは…

「停止」スイッチ、または動作中のマッサージのスイッチを押します。もみだまは、押したときの位置で停止します。  
 停止後3分以内に再びマッサージを始めるときは、19ページ「1」からおこなってください。ただし、「停止」状態で約3分が経過すると、もみだまが収納位置に戻り、リモコンが「切」の状態になります。  
 (リモコンの「入/切」ランプのオレンジ色が点灯) このときは、17ページ「2」からおこなってください。

### 他のマッサージに切り替えるには…

切り替えたいマッサージのスイッチを押してください。  
 おこのみモードに切り替えることもできます。(P.21ページ)

使い方  
おまかせモードを使う

# おこのみモードを使う

おこのみのマッサージモードを選んでマッサージしたいときに使います。  
 「背筋のばし」「指圧」「もみ」「たたき」「もみたたき」「とんとん」から選択します。  
 まず「背筋のばし」で上半身全体をリラックスさせてから、コリのある部位をマッサージしていくと効果的です。  
 「もみだま設定」でマッサージの速さ、もみだまの高さ、もみだまの左右の間隔を調節することもできます。  
 本機はおこのみモードの中で「背筋のばし」と他のマッサージを組み合わせることもできます。(P.23ページ)  
 マッサージ時間は、特定の部位1ヵ所あたり最大5分以内としてください。  
 「背筋のばし」などで上半身全体をマッサージするときは最大15分以内としてください。  
 おこのみモードは、約15分連続して使用すると、電子タイマーにより自動的に終了します。  
 ※特定の部位を5分以上マッサージしたり、連続して15分を超えるマッサージは、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になりますのでご注意ください。  
 ※眠りながらの使用はしないでください。

## 「速度調節」ランプの見方

遅い	やや遅い	中	やや速い	速い
☀️ 遅				

※電源を入れると最初の速さは、「中」にセットされます。

## 「幅調節」ランプの見方

狭い	中	広い
☀️ 狭	☀️ 狭	☀️ 狭

※電源を入れると最初の間隔は、「広い」にセットされます。



## 1 おこのみモードのいずれかのスイッチを押す

押したスイッチのランプが点灯し、マッサージがスタートします。  
 詳しいマッサージの内容は (P.23ページ)  
 ※マッサージ中に本機のもみだま移動部を強く押したり、もみだまの間に物を挟んでもみだまの動きを止めないでください。  
 ※マッサージ中にもみだまに無理な力が加わると、もみ過ぎ防止のため安全装置が働き、もみだまの動作が止まることがあります。

## 2 もみだま設定をする

おこのみでマッサージの速さ、もみだまの高さ、もみだまの左右の間隔を調節できます。

### ■ マッサージの速さを調節する

速度調節「◀/▶」スイッチを押すごとに、マッサージの速さが1段階ずつ速く・遅くなります。  
 ※「背筋のばし」の速さは調節できません。

### ■ もみだまの高さを調節する

位置調節「▼/▲」スイッチを押しつづけると、もみだまが上・下に移動します。腰から首・肩までのマッサージしたい部位のところでスイッチをはなしてください。  
 ※「背筋のばし」を使いマッサージしているときは、もみだま位置は調節できません。  
 ※「背筋のばし」で、もみだまの高さの上限を調節したいときは、肩位置設定でおこないます。

### ■ もみだまの間隔を調節する

「幅調節」スイッチを押すごとに「広い→中→狭い→広い…」というように、もみだまの間隔を1段階ずつ調節できます。  
 ※「もみ」、「もみたたき」でマッサージしているときは、もみだまの間隔は調節できません。

## 3 「入/切」スイッチを押してマッサージを終了する

「入/切」スイッチを押すと、リモコンの「入/切」ランプの緑色が点滅に変わり、もみだまが収納位置まで移動して、リモコンが「切」の状態になります。(リモコンの「入/切」ランプのオレンジ色が点灯)  
 ※「入/切」スイッチを押さなくても約15分でマッサージは自動的に終了します。



### マッサージを停止したいときは…

「停止」スイッチ、または動作中のマッサージのスイッチを押します。もみだまは、押したときの位置で停止します。  
 停止後3分以内に再びマッサージを始めるときは、21ページ「1」からおこなってください。ただし、「停止」状態で約3分が経過すると、もみだまが収納位置に戻り、リモコンが「切」の状態になります。(リモコンの「入/切」ランプのオレンジ色が点灯) このときは、17ページ「2」からおこなってください。

### 他のマッサージに切り替えるには…

マッサージ中に他のマッサージのスイッチを押してください。  
 おまかせモードに切り替えることもできます。(P.19ページ)  
 ただし、「背筋のばし」をおこなっているときに、他のおこのみモードのスイッチを押したり、「背筋のばし」以外のおこのみモードのマッサージ中に「背筋のばし」スイッチを押して切り替えようとすると、組み合わせマッサージになります。(P.23ページ)

# おこのみモードを使う

## マッサージの内容

スイッチ	マッサージの内容
背筋のばし	背筋をのばすようにマッサージし、上半身の緊張をほぐします。
指圧	指圧するように、ぐっと押しあげてマッサージします。
もみ	もみ動作でコリをソフトにほぐします。
たたき	たたき動作で頑固なコリをやわらげます。
もみたたき	「もみ」と「たたき」を同時におこないます。
とんとん	袋打ち（両手を交差して合わせ、手の甲でたたく打ち方）感覚でマッサージします。

### おこのみモードのマッサージを組み合わせるには…

「背筋のばし」は、他のマッサージと組み合わせることができます。特定の部位だけでなく上半身全体をおこのみモードでマッサージしたいときに便利です。

背筋のばし + 指圧	背筋のばしをしながら上半身全体に「指圧」動作をおこないます。
背筋のばし + もみ	背筋のばしをしながら上半身全体に「もみ」動作をおこないます。
背筋のばし + たたき	背筋のばしをしながら上半身全体に「たたき」動作をおこないます。
背筋のばし + もみたたき	背筋のばしをしながら上半身全体に「もみたたき」動作をおこないます。
背筋のばし + とんとん	背筋のばしをしながら上半身全体に「とんとん」動作をおこないます。

# マッサージが終わったら

マッサージが終わったら、電源スイッチを「切」にし、リモコンはリモコンポケットに収納しておいてください。また、使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 1 もみだまが収納位置に戻ったことを確認する


## 2 背もたれを元の位置に戻す

※リクライニングレバーを引き上げながら、上体をゆっくり起こします。




## 3 背もたれ裏面の電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを「切」にすると、リモコンの「入/切」ランプのオレンジ色が消灯します。

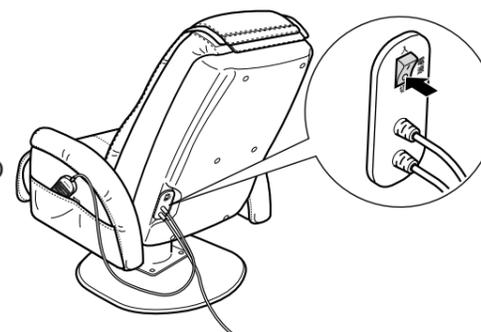

## 4 リモコンをリモコンポケットに収納する

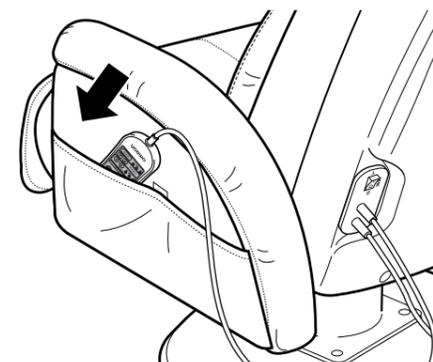

## 5 電源プラグをコンセントから抜く



# お手入れと保管

お手入れするときは、もみだまが収納位置に戻っていることを確認してから電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ベンジン、ガソリン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

## ふだんのお手入れ

### 本体

- 汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かした水に布を浸し、かたくしぼり拭き取ってください。洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- 背パッド、枕、肘パッド（左／右）、座面パッドなどに入浴剤（特にイオウ分を含んだもの）やシャンプー、整髪料などが付着したときは、速やかに乾いた布で拭き取ってください。



### リモコン

- リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

## 保管のしかた

次の条件を満たしている環境下で保管してください。

温度：0℃～40℃

湿度：30%RH～85%RH（結露無きこと）

高温・多湿、直射日光のあたるところ、また、ホコリ、腐食性ガスの多いところに保管しないでください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

# おかしいな？と思ったら

こんなとき	考えられる原因	直しかた
リモコンのオレンジ色ランプが点灯している	電子タイマーが働き、マッサージが終了している	再度使用するときは、リモコンの「入／切」スイッチを押して電源を入れてからマッサージをはじめてください (☞17ページ)
動作しない、または途中で動かなくなった	リモコンの「入／切」ランプが消灯している	電源プラグがコンセントから抜けている 電源プラグをコンセントに差し込んでください (☞17ページ)
	リモコンのランプが3つ以上点滅している	背もたれ裏面の電源スイッチが「切」になっている 電源スイッチを「入」にしてください (☞17ページ)
	もみだまに無理な力がかかったため、安全装置が働いて停止した	一度、電源スイッチを「切り」、再度電源を入れ直して、無理な力がかからないように使用してください また、電源を入れ直しても動作しない場合は安全装置が働いています。電源スイッチを「切り」、30分以上おいてから使用してください

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。(☞27ページ)  
なお、その際はご購入商品名、型名、お買い上げ時期、故障状況などを詳しくお知らせください。

## ■音について

本機をお使いになるときは、モーターの回転音、歯車の回転音、生地のかすれる音、椅子のきしみ音などの音が発生します。

これらは、構造上やむを得ず発生するもので故障ではありません。また、製品寿命にも影響ありません。

# お問い合わせ先

## おかしいな?と思ったら

「おかしいな?と思ったら」26ページをもう一度ご確認ください。

それでもお分かりいただけなかった場合は、下記のお客様サービスセンターにお問い合わせください。



修理・商品に関するお問い合わせ  
別売品・消耗部品のお求めは

## オムロンお客様サービスセンター

フリーダイヤル **0120-30-6606** 通話料無料

フリーファックス **0120-10-1625** 通信料無料

受付時間 9:00~19:00 (祝日を除く月~金)  
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。

オムロンインターネットパーツセンター

<http://shop.healthcare.omron.co.jp>

24時間受け付けています。(通信料、送料はお客様ご負担となります)



オムロン健康機器ホームページ「健康プラザ」のご案内

ホームページでは新製品情報や健康に関するさまざまな情報をお届けしています。

あなたの健康づくりに役立つアドバイスやヒントが満載です。

別売品や消耗部品もご注文いただける便利なホームページです。


ぜひ、一度ご覧ください。

<http://www.healthcare.omron.co.jp>

※通信料はお客様ご負担となります。

# 仕様


医療用具許可番号	34BZ5010
類別	器具器械77 バイブレーターのうち、家庭用電気マッサージ器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
使用目的/効果効果	あんま、マッサージの代用 疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、 神経痛・筋肉痛の緩解
商品名称 型式	オムロンマッサージチェア pisu (ピ・イス) <b>HM-601</b>
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	75W (50Hz) 85W (60Hz) (無負荷、背筋のばし+もみたたき モード時)
定格時間	30分 (1日2回、15分使用として)
質量 (重量)	約46kg (背パッド、枕、肘パッド、座面パッドなし)
外形寸法	リクライニングしていないとき : 幅 約69.5×高さ約105×奥行き約76cm 最大リクライニングしたとき : 幅 約69.5×高さ約75×奥行き約118.5cm
リクライニング角度	約100°~145°
回転台座回転角度	約135°
タイマー	約15分
もみだま移動時間	【背筋のばし】1往復 約23秒/50Hz、19秒/60Hz
背筋のばし動作	背筋のばし動作範囲 (上下) 約52.5cm (もみだま移動距離 約39cm)
指圧動作	速度調節 5段階 (約145~185回/分)
もみ動作	速度調節 5段階 (約16~31回/分) もみ幅調節範囲 (3段階) 上だま 約5.8cm~約17.8cm 下だま 約10.7cm~約14.5cm (左右もみだま中央間の距離*) *もみだまが最も出た状態
たたき動作	速度調節 5段階 (約300~550回/分 ストローク 約1.29cm)
もみたたき動作	速度調節 5段階 (約15~31回/分+たたき速さ約150~550回/分) (もみ幅は「もみ」と同一。たたきストロークは「たたき」と同一)
とんとん動作	速度調節 5段階 (遅い~速い)
マッサージメニュー	【おまかせモード】上半身コース、首・肩コース、腰コース 【おこのみモード】背筋のばし、指圧、もみ、たたき、もみたたき、とんとん 【組み合わせメニュー (おこのみモード)】5種類
動作原理	もみ機構、たたき機構、昇降機構それぞれにモータを内蔵。リモコンからの動作モード指示情報にもとづき、制御回路が各機構の駆動回路を動作させ、各モータを駆動することにより指定されたマッサージ動作をさせる
電气的安全性	電気用品安全法適合性検査証明済
付属品	背パッド、枕、肘パッド (左/右)、座面パッド、取扱説明書 (品質保証書付き)
製造元	デルタ工業株式会社 広島県安芸郡府中町新地1番14号
お問い合わせ先	オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー 住所: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 電話: 0120-30-6606 (オムロンお客様サービスセンター)

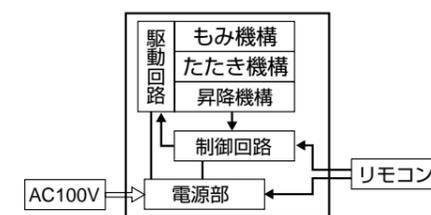


※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

# おまかせモード動作一覧

## 上半身コース

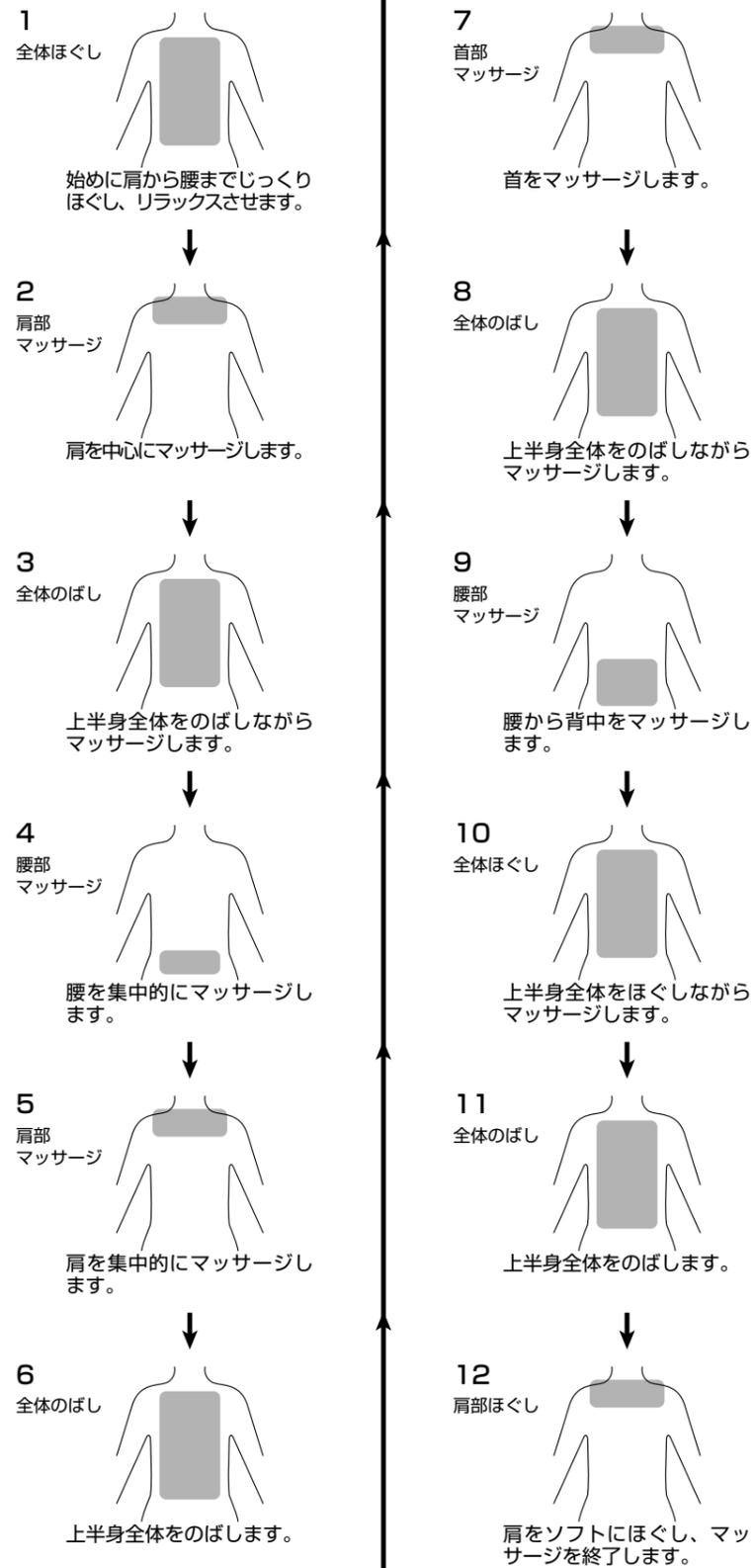

## 首・肩コース

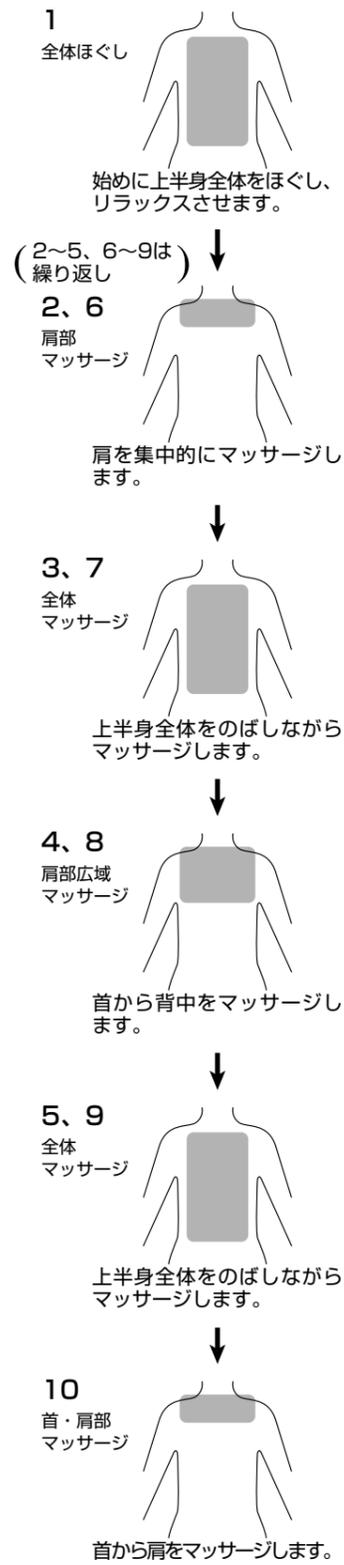

## 腰コース

