


OMRON

A Good Sense of Health

オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C16

取扱説明書

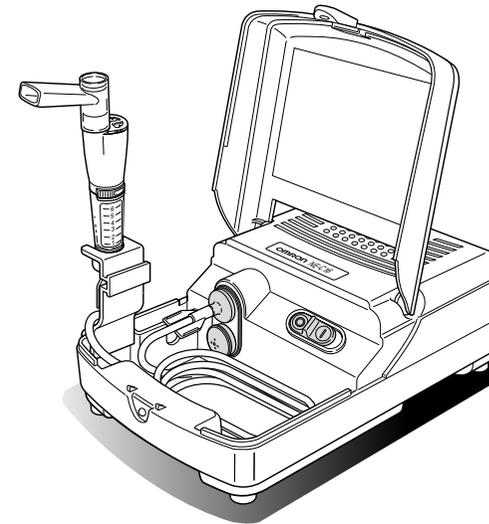

もくじ	
安全上のご注意	1
NE-C16のしくみ	4
各部のなまえ	5
ご使用前の準備	7
正しい使いかた	9
お手入れ、保管のしかた	11
消毒のしかた	13
故障かな?と思ったら	15
仕様/おもな別売品	16
お問い合わせ	17
保証規定/品質保証書	18

OMRON
A Good Sense of Health

- 本器は医療用機器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。また、薬剤の種類、用量、用法についても必ず医師の指示に従ってください。
- 一般家庭での、のど、鼻の粘膜の加湿を目的とした家庭用吸入器の用途には適しません。

商品に関するお問い合わせは
オムロン健康相談室がお答えします。

ダイヤルは正確に
おろん オムロン

020 全国どこからでも
フリーダイヤル 0120-30-6606

受付時間/10:00~12:00/13:00~16:00(月~金)
都合によりお休みさせていただくことがあります。

オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー 医用機器営業部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL 03 (3436)7055
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-6-6 御堂筋センタービル TEL 06 (6282)2576
●仙台022(265)0560 ●名古屋052(561)0197 ●福岡092(414)3209

輸入元：オムロン松阪株式会社

9034687-8C

- このたびはオムロンコンプレッサー式ネブライザNE-C16をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
- お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、「安全上のご注意」を十分にご理解の上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつも手元においてご使用ください。
- 保証書を兼ねていますので、紛失しないようにしてください。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。


警告サイン	内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

	△記号は注意（警告・危険を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“一般的な禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“一般的な強制”を示します。


警告

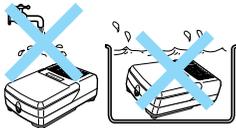薬液の種類、用量、用法については、必ず専門の医師の指導に従ってください。 ・症状が悪化する恐れがあります。		
水を用いての吸入はしないでください。 ・症状が悪化する恐れがあります。		
本体を水洗いしたり、通気孔に水や薬液をかけないでください。 ・漏電、感電をする恐れがあります。		

安全上のご注意

警告

ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。
・感電やケガをする恐れがあります。

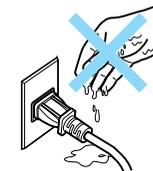


煮沸消毒するときは、お湯が冷めてからパーツを取り出してください。
・やけどをする恐れがあります。




注意


必ず交流100Vで使用してください。
・火災や感電の原因になります。

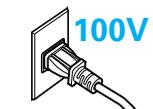

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
・絶縁劣化により感電や漏電火災の原因になります。

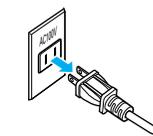

部品の取り付け、取り外し、お手入れのときには、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
・感電やケガをすることがあります。

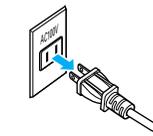


分解や修理、改造をおこなわないでください。
・発火したり、故障や事故の原因となります。



煮沸消毒するときは、空焚きに注意してください。
・火災を起こす恐れがあります。



タコ足配線はしないでください。
・火災や漏電の原因になります。

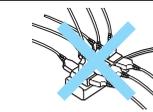

お願い

機器および部品は、必ず定期点検をおこない、しばらくご使用にならなかった場合は、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認してください。

※点検項目

- ・送気ホース、吸水管／バッフル、ノズル部などに損傷がないこと。
- ・ノズル部に目詰まりがないこと。
- ・コンプレッサーに異音がないこと。



本体やネブライザキットに強いショックを与えたり、落としたりしないようにしてください。

- ・故障する恐れがあります。



本体を吸入治療以外の目的で使用しないでください。

- ・事故やトラブルの原因になります。




有毒ガスや揮発性物質の危険区域内では使用、保管しないでください。

- ・事故やトラブルの原因になります。



噴霧のしくみ



- ① 本体内部のコンプレッサーにより発生した圧縮空気が、ノズルから吐出されるとき、ノズル部と吸水管の間に生じる負圧作用によって、薬液が上部へ吸い上げられます。
- ② 吸い上げられた薬液は、上部のバッフルに衝突し、細かい霧となって外部に噴出します。

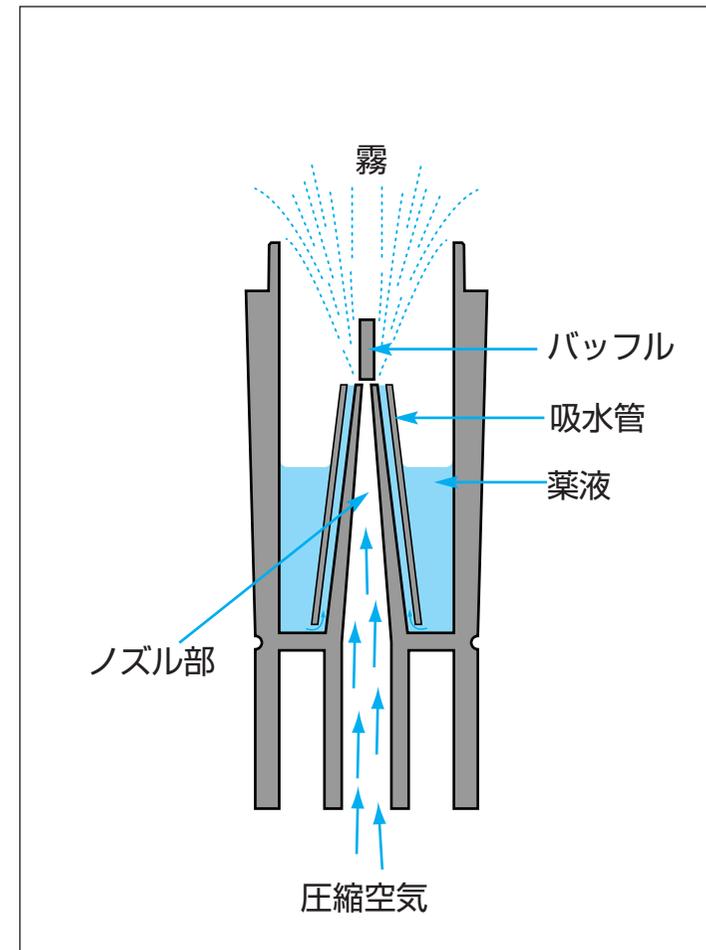

ネブライザキット部イメージ図

霧化部

本体部

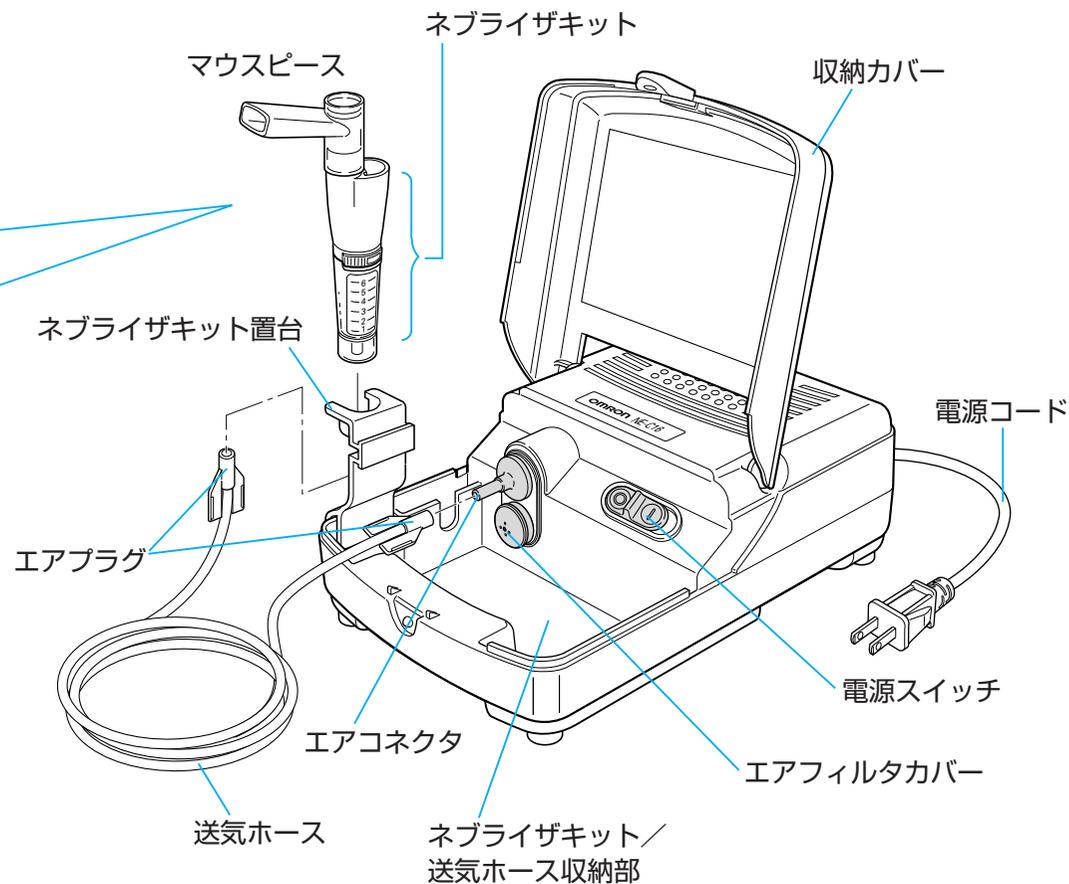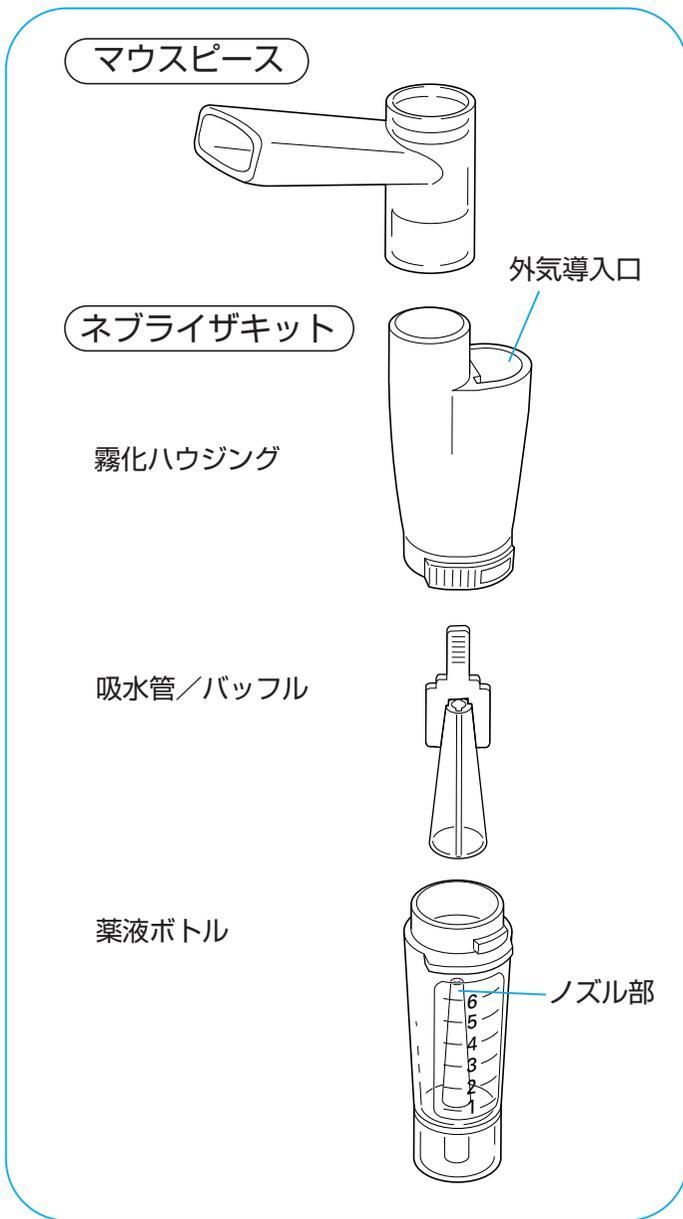


付属品 エアフィルタ (5個入り) 霧化ハウジングキャップ




ご使用前の準備

収納カバーを開けネブライザキット、マウスピースを収納部から取り出してください。

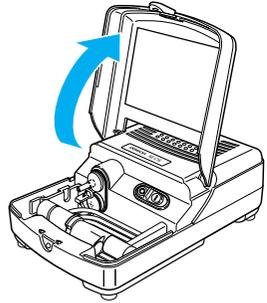

ご使用前の準備


1 電源スイッチが「切」であることを確認したのち、電源プラグをコンセントに差し込みます。
(電源コードは、本体後部に収納されています。)

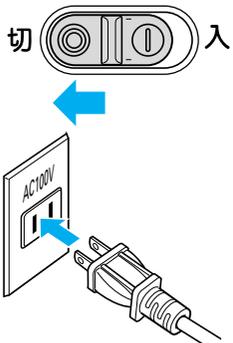

2 マウスピースを取り外します。
霧化ハウジングを反時計回りに回転①させながら持ち上げ②、薬液ボトルを取り外します。



4 決められた用量、用途に従い、薬液ボトルに薬液を注入してください。
※ネブライザキットの最大薬液量は、約6mLです。それ以上入れないでください。

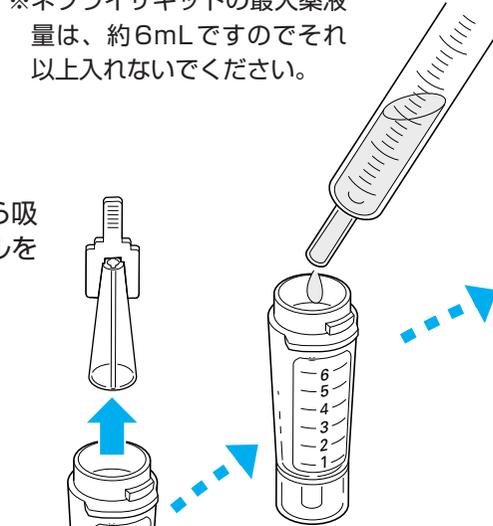


5 薬液ボトルに吸水管/バフプルを取り付けます。



ご使用前の準備

6 マウスピースを取り付けます。


口にくわえて吸入する場合、霧化ハウジングキャップを取り付けてください。

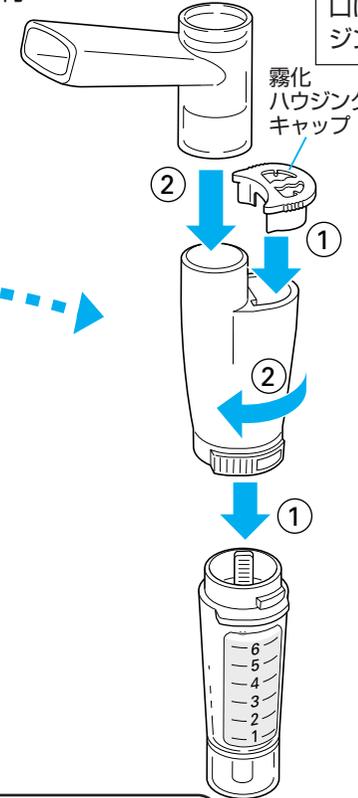

取り付け方法

霧化ハウジングキャップ①を外気導入口に取り付けてから、マウスピース②を取り付けます。
※マウスピースを先に取り付けると霧化ハウジングキャップの取り付けができませんので、ご注意ください。

7 霧化ハウジングと薬液ボトルを合わせ①、時計回りに回転させ②、薬液ボトルを取り付けます。

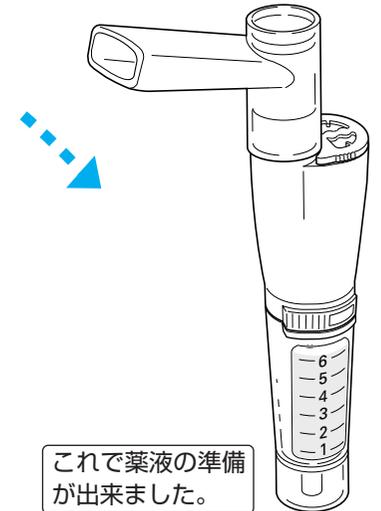


これで薬液の準備が出来ました。

ご使用前の準備

次のようなときは、煮沸をしてください

- ・初めてご使用になるとき
- ・長期間保管後、使用するとき
- ・汚れが目立つとき

煮沸後は清潔な乾いた布などで水分を軽くふき取ってください。(詳しくは13ページ参照)

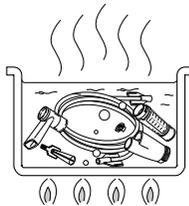

煮沸消毒ができる部品

- ・ネブライザキット
- ・マウスピース
- ・送気ホース
- ・霧化ハウジングキャップ

煮沸消毒ができない部品

- ・エアフィルタカバー
- ・エアフィルタ
- ・ネブライザキット置台
- ・収納カバー
- ・本体


正しい使いかた

1

送気ホースを本体のエアコネクタと、ネブライザキットの差し込み口に
取り付けます。奥まで、しっかり取り付けてください。

※差し込みかたがゆるいと、抜けることがありますのでご注意ください。


※差し込むとき、薬液が漏れないように、ネブライザキットを横にしないでください。

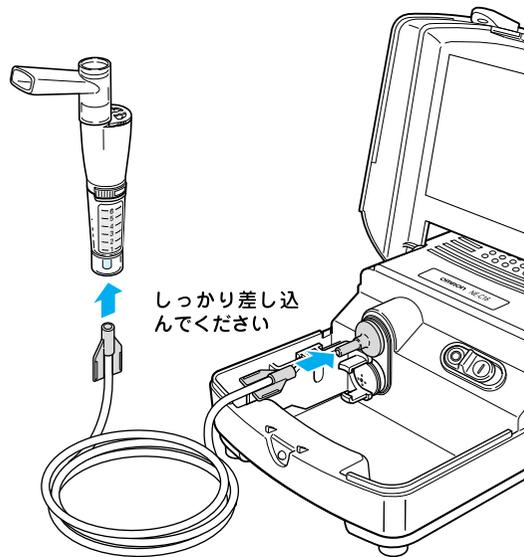

正しい使いかた

2

ネブライザキットを吸入しやすい位置に持ちます。
電源スイッチを「入」にして吸入を開始します。

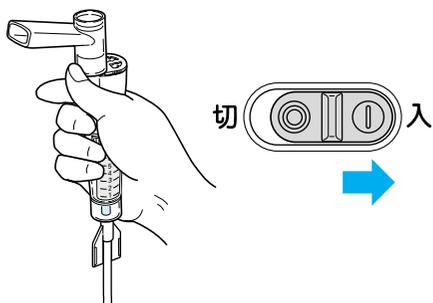

お願い

ネブライザキットを横にしないでください。中の薬液が漏れて事故やトラブルの原因になります。


正しい使いかた

3

噴霧された薬液を吸入します。

マウスピースを口にくわえて吸入する場合、霧化ハウジングキャップを取り付けてからご使用ください。

(取り付け方法は8ページ「ご使用前の準備」を参照してください)

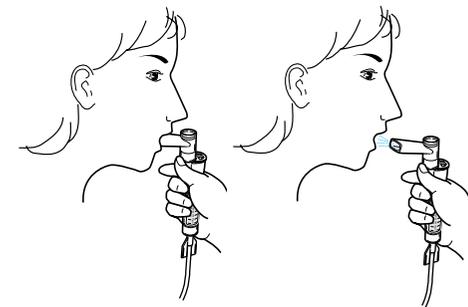


お願い

- ・高温多湿、直射日光のあたる場所では使用しないでください。
- ・送気ホースを曲げないでください。

正しい使いかた

[ネブライザキット置台]

ネブライザキットを一時的に置いたり、置いたまま吸入するときは、ネブライザキット置台を下図のように取り付けてください。

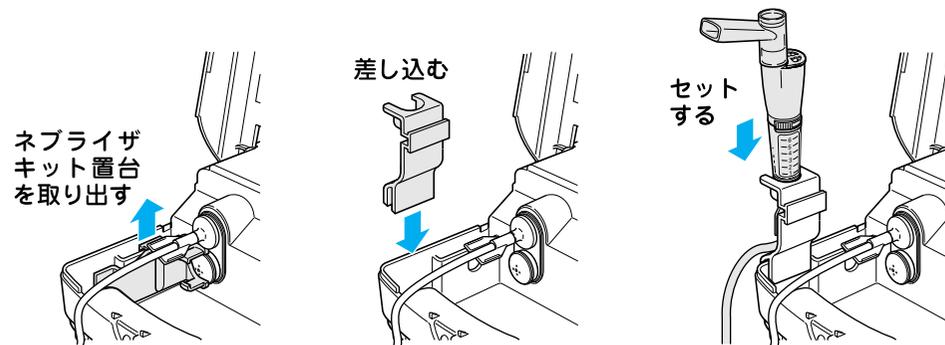

以上の手順に従い、吸入をおこなってください。
なお、霧が出なかったり正常に噴霧しないときは、15ページ「故障かな?と思ったら」を参照してください。

吸入後のお手入れ

吸入を終えたら、電源スイッチを「切」にしてください。電源プラグをコンセントから外して本体後部の電源コード収納部に収納してください。

お願い コードは無理に収納しないでください。




マウスピース、ネブライザキット、霧化ハウジングキャップ*、送気ホースをそれぞれ取り外してください。

薬液ボトルに残った薬液はすべて捨てます。マウスピース、ネブライザキット、霧化ハウジングキャップ*、送気ホースは水道水もしくは容器の中で水洗いしてください。

※霧化ハウジングキャップご使用のとき。

※汚れの落ちにくい場合は「消毒のしかた」(13、14ページ)を参照してください。

清潔な布で水分をふき取り、よく乾かしてください。マウスピース、ネブライザキットを組み立て、本体の収納部に霧化ハウジングキャップ、送気ホース、ネブライザキット置台とともに収納し、収納カバーを閉じて保管してください。

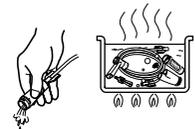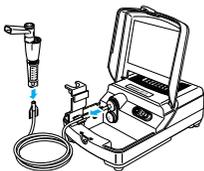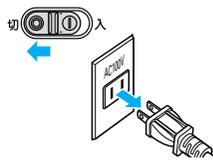

エアフィルタの交換

エアフィルタは定期的に付属の交換用のエアフィルタと交換してください。
(交換のめやす：約30日ごと、またはエアフィルタの色が灰色になってきたとき)

エアフィルタ交換のしかた


・エアフィルタカバーを手前に引き出して、中のエアフィルタをつまようじのようなもので取り出し、交換してください。

※エアフィルタは必ず専用のエアフィルタをご使用ください。

また、エアフィルタなしでは使用しないでください。

※エアフィルタの紛失や消耗したときは専用のエアフィルタをご購入ください。(16ページ参照)

※エアフィルタカバーは目詰まりを防ぐため水洗いなどにより定期的に清掃してください。(煮沸消毒はできません) また、水洗いのときはエアフィルタは必ず取り出してから清掃してください。

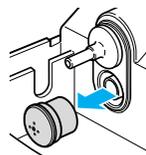

保管のしかた


マウスピース、ネブライザキットを組み立て、本体収納部に霧化ハウジングキャップ、送気ホースとともに収納します。収納カバーを閉じて保管します。

長期間使用しないときは、梱包箱に収納してください。


マウスピース、霧化ハウジングキャップ、ネブライザキット、送気ホースなどにちり、ほこりが入らないように清潔に保管してください。

お願い


・送気ホースを曲げないでください。

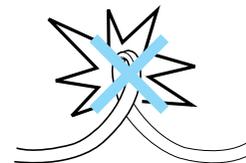


・お子様の手の届かない所に保管してください。

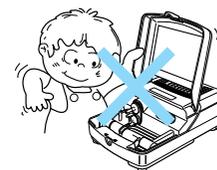

・機器は、常に清潔に保管するようこころがけてください。

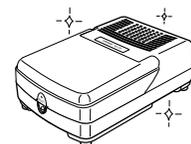

・高温多湿、直射日光のあたる場所には置かないでください。

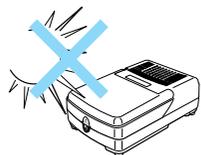

本体の汚れ

水で湿らせた布に中性洗剤を少量加えて落とし、乾いた布などできれいにふき取ります。

※ベンジン、シンナー、ガソリン、アルコールなど揮発性製品の使用は絶対におやめください。



警告


本体を水洗いしたり、通気孔に水や薬液をかけないでください。
・漏電、感電をする恐れがあります。



煮沸消毒について

毎日続けて使用する場合は、1回30分程度の割合で煮沸してください。
また、初めてご使用のときや長時間使用しなかった場合も煮沸してください。
煮沸は、沸騰してから30分程度おこなってください。

※煮沸後は清潔な乾いた布などで水分を軽くふき取ってください。水分が残っていると経年により多少黄変する場合があります。

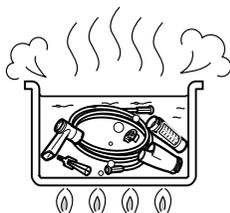

煮沸消毒できる部品

- ・ネブライザキット
- ・マウスピース
- ・送気ホース
- ・霧化ハウジングキャップ

煮沸消毒のできない部品

- ・エアフィルタカバー
- ・エアフィルタ
- ・ネブライザキット置台
- ・収納カバー
- ・本体

薬液消毒について

- オムロンネブライザのパーツを薬液消毒する際は、各種消毒剤の取扱説明書の注意事項に従っておこなってください。
- 消毒剤の浸漬時間は、消毒剤の取扱説明書に従ってください。消毒剤浸漬後は充分水洗いし乾燥をおこない、再汚染がないよう保管してください。
- 着色された消毒剤（ヒビテン等）の使用は、パーツにより経年にて多少変色することがありますが、物性上は問題ありません。

E.O.G滅菌について

オムロンネブライザはE.O.G滅菌することができます。
滅菌方法／効果については滅菌器の取扱説明書、取扱注意事項を充分厳守してください。

※マウスピース、霧化ハウジングキャップ、ネブライザキットの汚れが落ちにくくなったり破損したときは別売品をご購入ください。

※消毒に関するくわしいことは「ネブライザ別売パーツカタログ」の「消毒について」をご参照ください。

・「ネブライザ別売パーツカタログ」は、お買い上げの販売店、またはお客様サービスセンターにお問い合わせください（16ページ参照）。

故障かな？と思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、必ず次の点をお調べください。

こんなとき	点検するところ	直しかた
噴霧しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか	正しく差し込んでください (7ページ参照)
	送気ホースは、本体およびネブライザキットに接続されていますか	正しく接続してください (9ページ参照)
	送気ホースが折れ曲がっていませんか	ホースをのぼし、折れをなくしてください
	薬液が入っていますか	薬液を注入してください (7ページ参照)
	ネブライザキットが正しく組み立てられていますか	正しく組み立ててください (7・8ページ参照)
	ネブライザキットの中のノズルが詰まっていますか	水洗いなどにより目詰まりをとってください (11ページ参照)
噴霧量が少ない	送気ホースが折れ曲がっていませんか	ホースをのぼし、折れをなくしてください
	送気ホースが詰まっていますか	ホースを交換するか詰まりをとってください
	エアフィルタが汚れていますか	付属または別売品のエアフィルタと交換してください (11ページ参照)
	エアフィルタカバーの穴が目詰まりしていませんか	水洗いなどにより、目詰まりをとってください (11ページ参照)

※上記の方法でも正常に動作しない場合は、内部機構にさわらずにお買い上げの販売店またはオムロン健康機器修理部門（17ページ参照）にご相談ください。

仕様／おもな別売品

仕様


形式	NE-C16
電源	AC 100V、50Hz/60Hz
消費電力	80W
吐出圧力	250kPa（最大）
吐出流量	5L／分（70kPa時）
噴霧能力	0.25mL／分以上*
噴霧粒子径	1～10 μm（全噴霧粒子の約80%）*
薬液ボトル容量	6mL
質量	約2.3kg（ネブライザキット含む）
外形寸法	幅180×高さ110×奥行290（mm）
医療用具許可番号	24BY0001
付属品	ネブライザキット、エアフィルタ（5個入り）、送気ホース、マウスピース、霧化ハウジングキャップ、ネブライザキット置台、取扱説明書（本書）、消毒マニュアル「ネブライザ別売パーツの消毒について」

*生理食塩水噴霧時、薬液の種類などにより変化します。
(お断りなく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください)


おもな別売品



C16-1
ネブライザキット
材質：PP

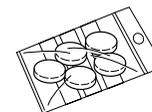


C16-2
エアフィルタ
（5個入り）
材質：PP

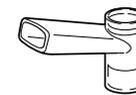

C16-3
マウスピース
材質：PP



C16-8
霧化ハウジン
グキャップ
材質：PP

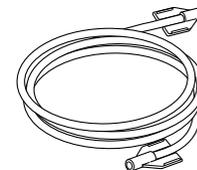

C13-4
送気ホース
材質：ホース/PP
プラグ/PSF

※その他の別売品についてはお買い上げの販売店、または下記のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

別売品のお求めはお買い上げの販売店、または全国どこからでも電話一本でご注文いただけます下記フリーダイヤルをご利用ください。

別売品のお求めは

オムロン お客様サービスセンター  全国どこからでも ダイヤルは正確に
0120-35-5066
受付時間／月～金9:00～19:00（休日を除く）

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせは
オムロン健康相談室がお答えします。



0120-30-6606
フリーダイヤル

全国どこからでも
ダイヤルは正確に

受付時間/10:00~12:00/13:00~16:00 (月~金)
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

※商品の故障および修理の依頼につきましては、下記に記載のオムロン健康機器修理部門にお問い合わせください。

修理のお問い合わせは

下記のオムロン健康機器修理部門までお問い合わせください。
品質保証書の記載内容により修理させていただきます。

〈通話料無料〉 **0120-89-5066**

送付先一覧

北海道地区	オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株) 札幌支店 ☎060-0003 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6階
東北地区	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 仙台支店 ☎980-0802 仙台市青葉区二日町18-26 二日町OAビル3階
関東地区	オムロンフィールドエンジニアリング(株)第2サービス部 ☎150-0013 渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2階
	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 北関東支店 ☎336-0007 浦和市仲町1-14-8 三井生命浦和ビル2階
	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 横浜テクノセンタ ☎221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル2階
東海地区	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 名古屋支店 ☎460-0002 名古屋市中区丸の内3-22-21 安田火災名古屋ビル7階
	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 静岡テクノセンタ ☎420-0859 静岡市栄町4-10 静岡栄町ビル2階
北陸地区	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 金沢支店 ☎920-0025 金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル1階
関西地区	オムロン健康機器修理センタ ☎515-0053 松阪市広陽町30
中四国地区	オムロンフィールドエンジニアリング(株) 広島支店 ☎730-0016 広島市中区鞆町13-14 新広島ビル5階
九州地区	オムロンフィールドエンジニアリング九州(株) 福岡第1支店 ☎812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル3階
	オムロンフィールドエンジニアリング九州(株) 鹿児島支店 ☎890-0064 鹿児島市鴨池新町5-6 鹿児島県プロパンガス会館4階

※所在地を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

保証規定 / 品質保証書

保証規定

- 取扱説明書にしたがった正常な使用状態でお買い上げ後1年以内に故障した場合には、無償修理いたします。
- 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店、またはオムロン健康機器修理部門に依頼または送付してください。
なお、送付の場合はオムロン健康機器修理部門までの送料の負担をお願いします。
- 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 本書の提示がない場合。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ) 消耗部品。
(ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、オムロン医用機器を、お買い求めいただきありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印していただく。 This warranty is valid only in Japan.

品名	オムロンコンプレッサー式ネブライザ	お買い上げ店名	
形式	NE-C16	住所	
ご芳名		Tel.	()
ご住所		お買い上げ年月日	年 月 日

発売元
オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL03 (3436)7055

保証規定 / 品質保証書