


.NET Framework 3.5 を有効化する手順

Windows 10 で『オムロン心電図印刷ソフト(HCG-SOFT-2)』をご利用いただくには、事前に.NET Framework 3.5 の有効化を行っていただく必要があります。以下の手順により有効化を行ってください。

【お使いの PC がインターネットに接続されている場合】

- ① 『スタート』ボタンを右クリックし、『プログラムと機能』をクリックします。

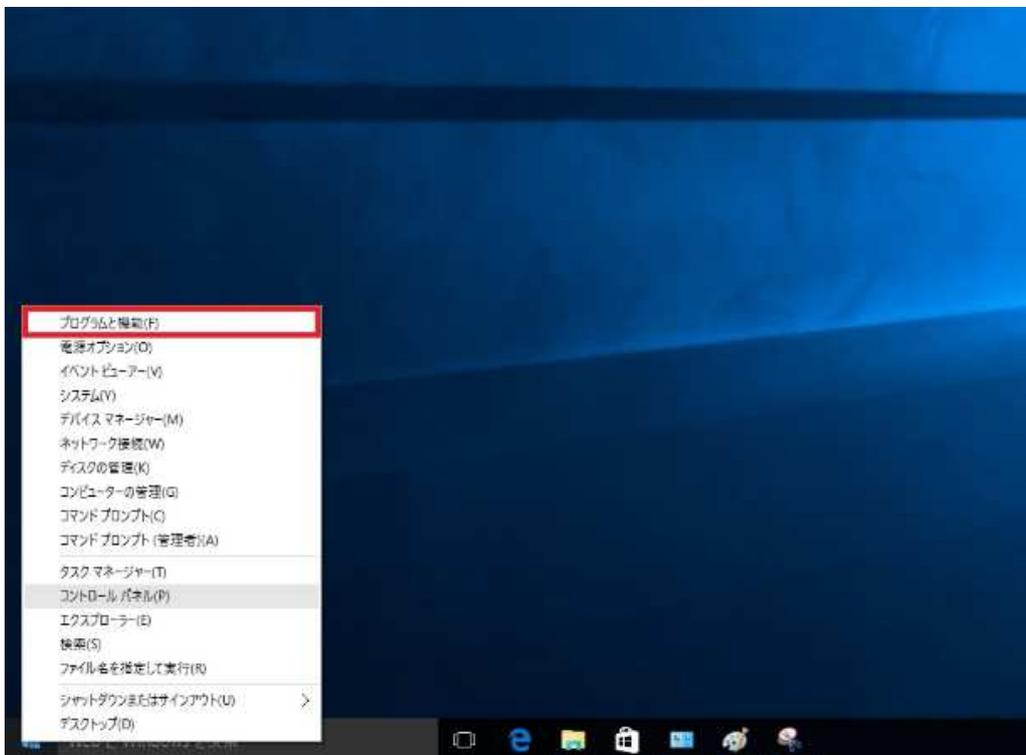


- ② 『プログラムと機能』が表示されますので、『Windows の機能の有効化または無効化』をクリックします。



- ③ 『.NET Framework 3.5(.NET2.0 および 3.0 を含む) 』のチェックを入れて『OK』ボタンをクリックします。



- ④ 『Windows Update からファイルをダウンロードする』をクリックします。

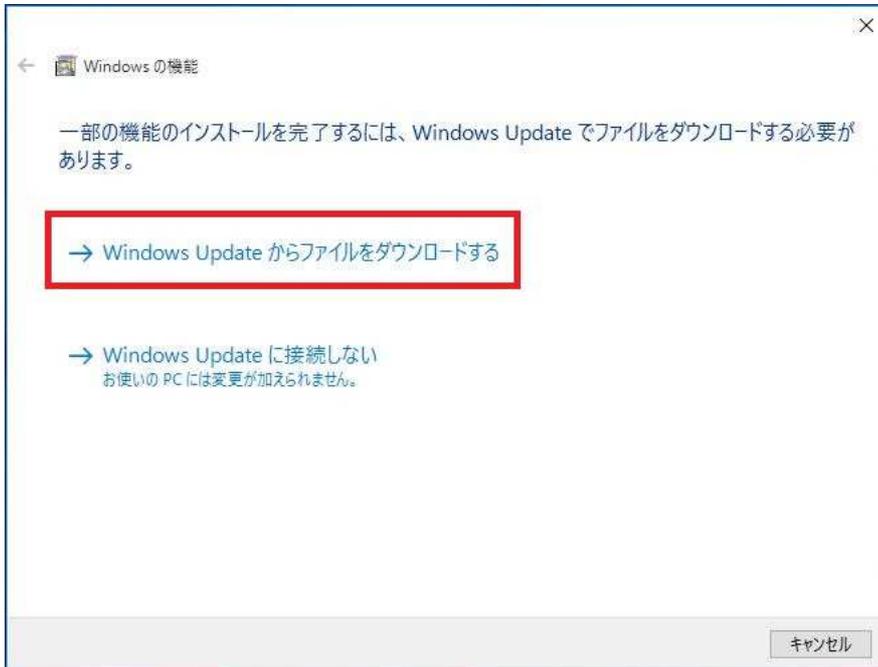

※ インストールには、数分程度かかる場合があります。

- ⑤ 『必要な変更が完了しました。』と表示されましたら、『閉じる』をクリックして終了してください。



⑥ コンピュータを再起動してください。


⑦ コンピュータが再起動されましたら、引き続きオムロン心電図印刷ソフトのインストールを行ってください。

インストール方法は、『オムロン心電図印刷ソフト(HCG-SOFT-2)』のインストールマニュアルをご参照ください。

【お使いの PC がインターネットに接続されていない場合】

※この手順には、『Windows 10 のインストールメディア』が必要になります。

- ① 『Windows 10 のインストールメディア』を DVD/CD ドライブに挿入します。
- ② 『スタート』ボタンを右クリックし、『コマンドプロンプト(管理者)』をクリックします。

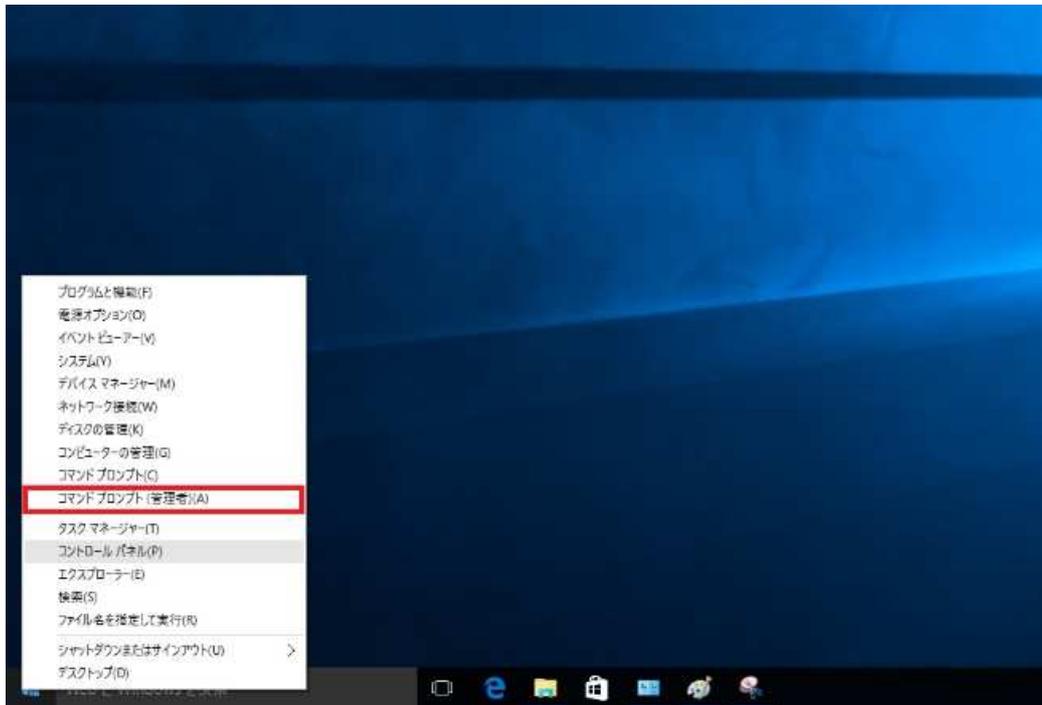


- ③ 下図画面が表示されましたら、『はい』ボタンをクリックします。



- ④ 下図赤枠のコマンドを入力して、『Enter』キーを押下します。

※赤矢印には、お使いの PC に接続されている DVD/CD ドライブのドライブレターを入力してください。


(下図の例では DVD/CD ドライブのドライブレターが D ドライブとなります。)

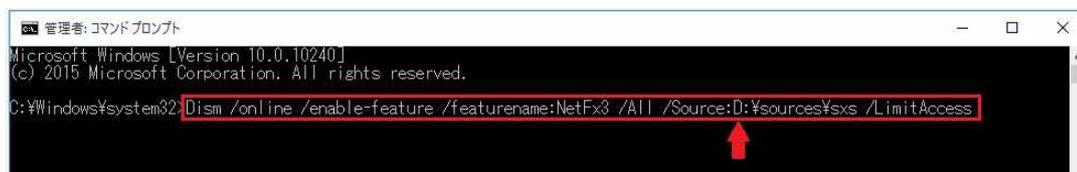

```
管理: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Windows¥system32>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:¥sources¥sxs /LimitAccess
```

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:¥sources¥sxs /LimitAccess
↑
ドライブ(上記は D ドライブの場合)

- ⑤ 『操作は正常に完了しました。』と表示されましたら、『×』をクリックして終了してください。

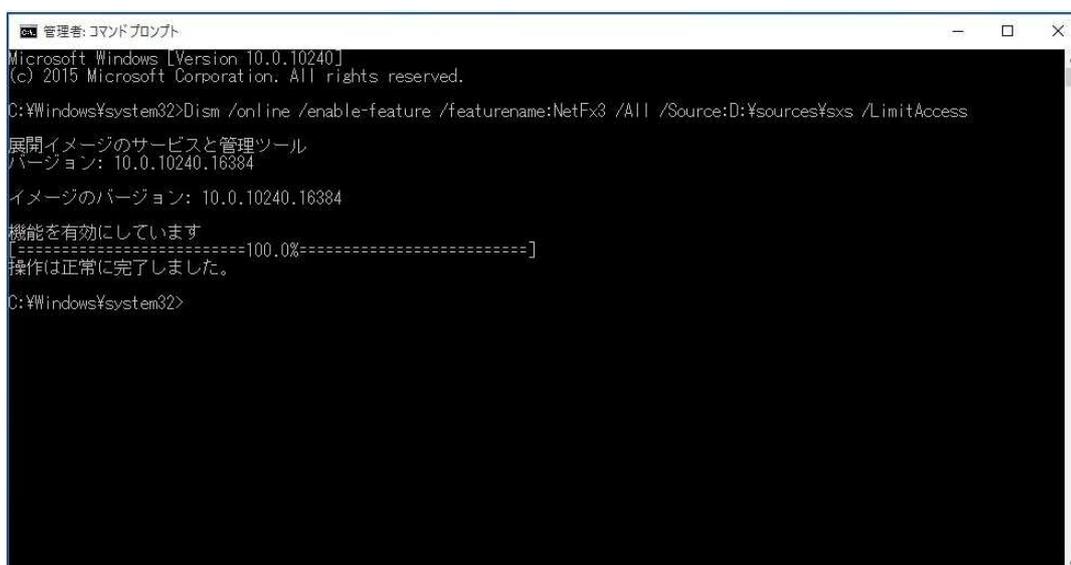

```
管理: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Windows¥system32>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:¥sources¥sxs /LimitAccess
展開イメージのサービスと管理ツール
バージョン: 10.0.10240.16384
イメージのバージョン: 10.0.10240.16384
機能を有効にしています
[=====100.0%=====]
操作は正常に完了しました。
C:¥Windows¥system32>
```

※ インストールには、数分程度かかる場合があります。

- ⑥ コンピュータを再起動してください。

- ⑦ コンピュータが再起動されましたら、引き続きオムロン心電図印刷ソフトのインストールを行ってください。

インストール方法は、『オムロン心電図印刷ソフト(HCG-SOFT-2)』のインストールマニュアルをご参照ください。