


.NET Framework 4.8 を有効化する手順のご案内

Windows 10 で『オムロン心電図印刷ソフト（HCG-SOFT-2）』をご利用いただくには、事前に.NET Framework 4.8 の有効化を行っていただく必要があります。


以下の手順により有効化を行ってください。

お使いの PC がインターネットに接続されている場合


- ① デスクトップ画面下の検索の入力欄に「Windows の機能」と入力してください。自動で検索されます。

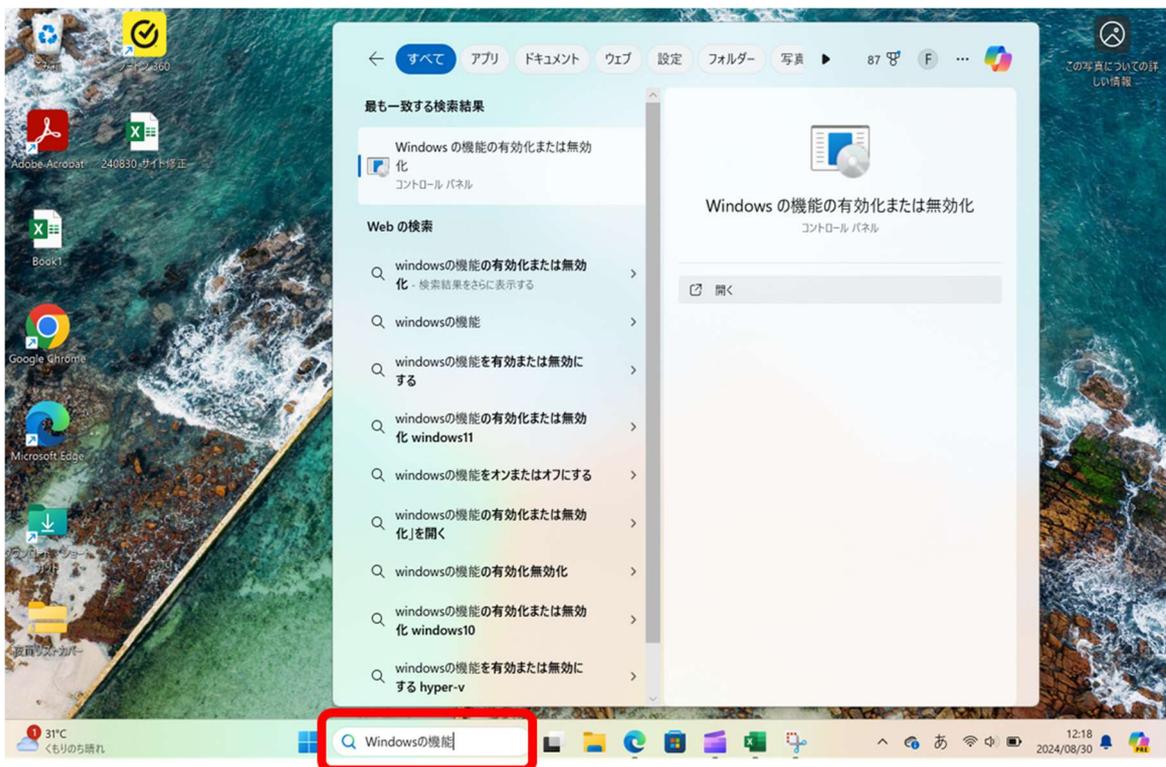


- ② 検索結果で表示された「Windows の機能の有効化または無効化」の「開く」をクリックしてください。「Windows の機能」画面を表示されます。

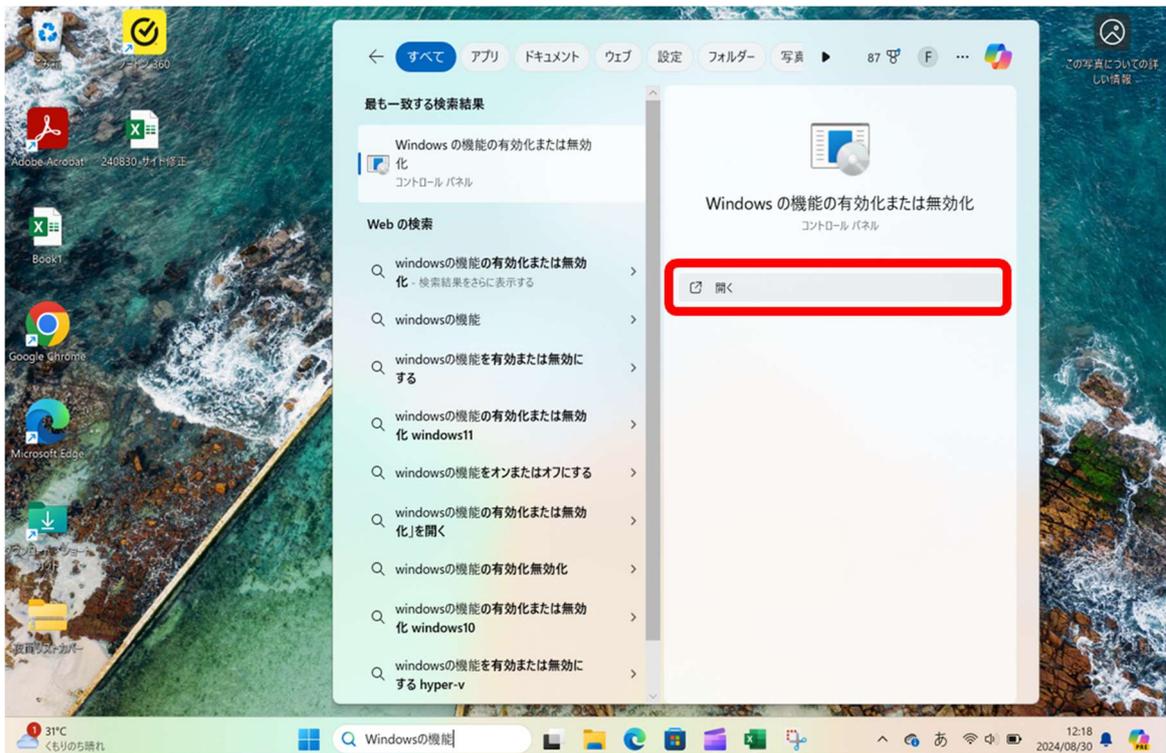

- ③ 「Windows の機能」画面が表示されます。「.NET Framework 4.8 Advanced Services」のチェックボックスをクリックして、下図のようにチェックボックスが青色の状態にしてから「OK」ボタンをクリックします。

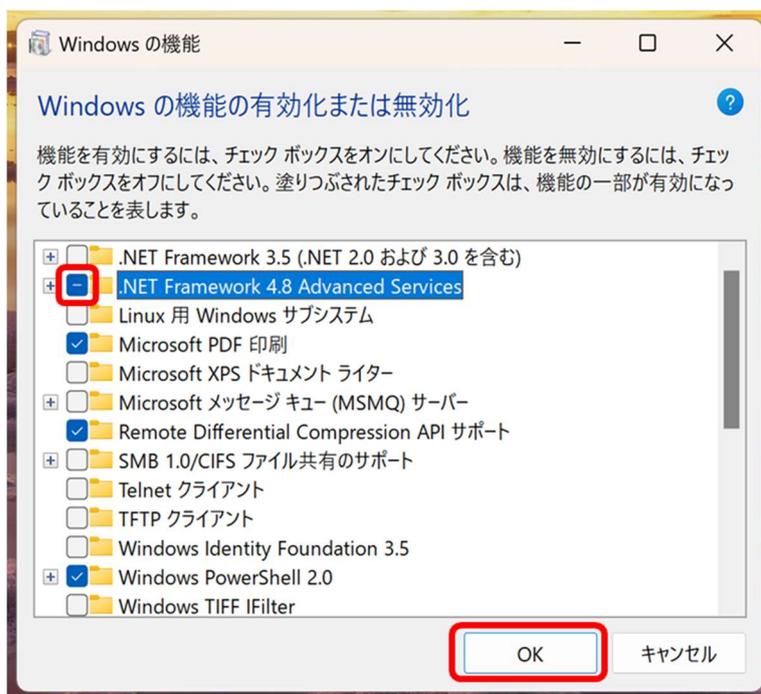

- ④ 『Windows Update からファイルをダウンロードする』をクリックします。
- ※ インストールには、数分程度かかる場合があります。
- ※ 下図は表示されずに、手順⑤の画面が表示される場合があります。

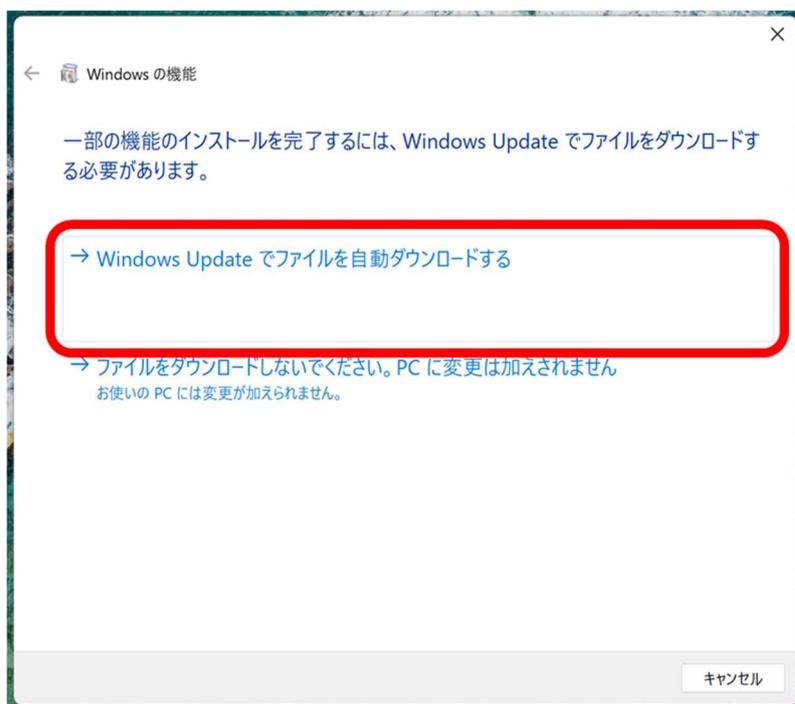

- ⑤ 『必要な変更が完了しました。』と表示されましたら、『閉じる』をクリックして終了してください。



- ⑥ コンピュータを再起動してください。
- ⑦ コンピュータが再起動されましたら、引き続きオムロン心電図印刷ソフトのインストールを行ってください。インストール方法は、『オムロン心電図印刷ソフト（HCG-SOFT-2）』のインストールマニュアルをご参照ください。